

Omnipod DASH®-
Insulin-Managementsystem



Nadia

PODDER™ SEIT 2018

Mit dem Pod Freiheit erleben

SO LEICHT KANN INSULINABGABE SEIN.
LEICHTER LEBEN.

omnipod[®]
DASH[®]

Einfach und diskret

Fragen?

SIE ERREICHEN UNS JEDERZEIT
UNTER **0800 1821629**[†]
(AUS DEM AUSLAND
+49 8995 467389)
ODER BESUCHEN SIE

WWW.OMNIPOD.COM >



Lea R.

PODDER™ SEIT 2014



1

Schlauchloser, wasserdichter* Pod

Befreien Sie sich von täglichen Injektionen, lästigen Schläuchen und Einschränkungen bei der Kleidungswahl.



2

Personal Diabetes Manager (PDM) mit Touchscreen

Unauffällige Insulinabgabe einfach mit wenigen Handbewegungen.

*Der Pod ist mit der Schutzart IP28 bis zu einer Tiefe von 7,6 Metern bis zu 60 Minuten lang wasserdicht. Der PDM ist nicht wasserdicht. Der gezeigte Bildschirminhalt ist ein Beispiel und dient lediglich zur Veranschaulichung.

Aller Anfang ist leicht

Fragen?

**SIE ERREICHEN UNS JEDERZEIT
UNTER 0800 1821629[†]
(AUS DEM AUSLAND
+49 8995 467389)
ODER BESUCHEN SIE**

WWW.OMNIPOD.COM >

1. Befüllen des Pods

Den Pod mit 200 Einheiten Insulin befüllen.


2. Pod anlegen

Der schlauchlose Pod kann fast an jeder Stelle getragen werden, an der man auch eine Injektion vornehmen würde.

3. Auf dem PDM auf „Start“ tippen

Die kleine, flexible Kanüle wird automatisch eingeführt; Sie werden sie niemals sehen und auch kaum spüren.



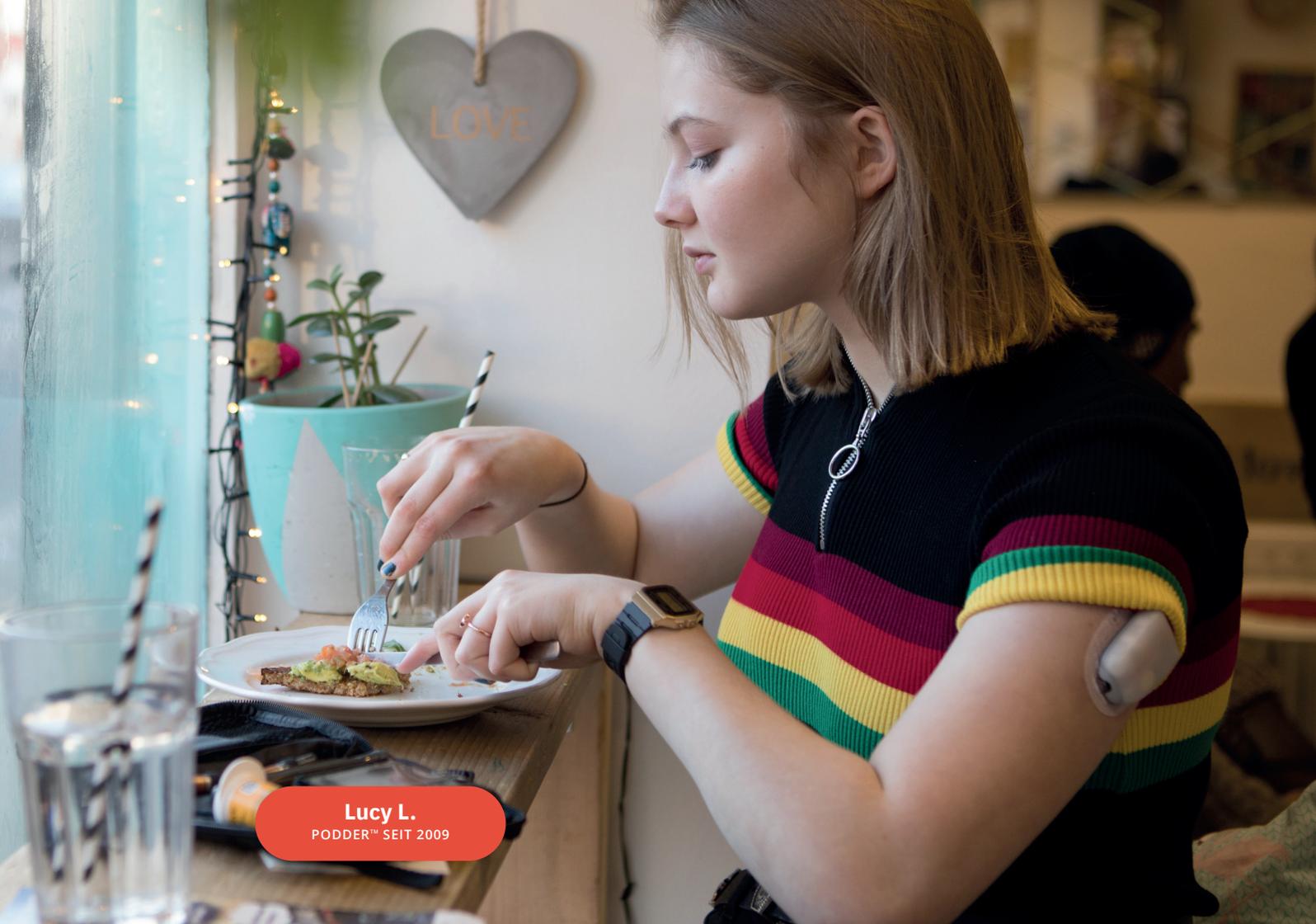

Lucy L.
PODDER™ SEIT 2009

Präzise eingestellte Insulinabgabe einfach mit wenigen Handbe- wegungen

Fragen?

SIE ERREICHEN UNS JEDERZEIT
UNTER 0800 1821629[†]
(AUS DEM AUSLAND
+49 8995 467389)
ODER BESUCHEN SIE

WWW.OMNIPOD.COM >

Marcus B.
PODDER™ SEIT 2017





Von Podders™ inspiriertes Design

Weniger Rechnereien, mehr Zeit zum Genießen

- > Schnelle und einfache Bolusdosierung dank integriertem Bolusrechner.


Einfacher, intuitiver Farb-Touchscreen

- > Leicht zu bedienen.
- > Unauffällig.
- > Vertraute Smartphone-ähnliche Technologie.

Personalisierte Insulinabgabe

- > Einrichten von Vorgabewerten.
- > Einrichten von Null-Basalraten.
- > Einrichten von Kohlenhydrate-zu-Insulinverhältnissen in Stufen von 0,1 Gramm KH/I.E.
- > Pod-Platzierungsstellen-Tracker zur Unterstützung von Hautgesundheit und Insulinabsorption.

Bis zu 3 Tage kontinuierliche Insulinabgabe, wodurch 14 Injektionen entfallen*

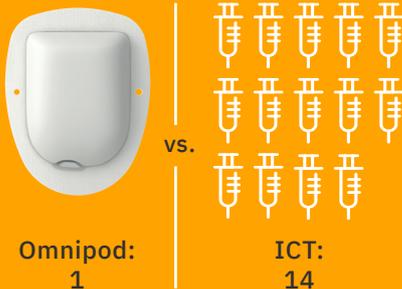

Gleichmäßige, automatische Einführung

- > Sie müssen die Einfuhrnadel weder sehen noch berühren.
- > Die automatische Einfuhrfunktion des Pods ermöglicht einen praktischeren Zugang zu verschiedenen Körperstellen.

Diskrete Insulinabgabe

- > Der Omnipod DASH® Pod ist klein, leicht und unauffällig.
- > Schlauchlos – Sie können sich ungehindert bewegen und anziehen, was Sie möchten, weil kein Schlauch im Weg sein kann.
- > Alltagsaktivitäten müssen nicht mehr für manuelle Injektionen unterbrochen werden.

Einfache Änderungen der Behandlung

- > Schnelle und einfache Einstellung der Basalrate.
- > Insulinabgabe in Schritten von je 0,05 Einheiten.
- > Speichert Insulindaten für bis zu 90 Tage.

Bitte beachten Sie, dass Sie mit Ihrem medizinischen Betreuer besprechen müssen, ob das Omnipod DASH®-Insulin-Managementsystem für Sie infrage kommt.

*Durchschnittliche Anzahl der über 3 Tage erforderlichen Injektionen (ICT: ~4,5 pro Tag)



Kishon K.

PODDER™ SEIT 2014

Die Vorteile einer Pumpe mit dem Komfort und der praktischen Bedienung des Pods

Fragen?

SIE ERREICHEN UNS JEDERZEIT
UNTER **0800 1821629[†]**
(AUS DEM AUSLAND
+49 8995 467389)
ODER BESUCHEN SIE

WWW.OMNIPOD.COM >



Joy S.

PODDER™ SEIT 2014



Der Pod ist wasserdicht* Er muss zum Duschen oder Schwimmen nicht abgenommen werden

- > Bleiben Sie dran an Ihrer Basal-Insulinabgabe – und an allem, was Sie gerne machen, ohne Einschränkungen.

Keine Sorge um Schläuche oder begrenzte Injektionsstellenauswahl

- > Das Leben mit Diabetes ist schon schwer genug. Wieso dann mit Schläuchen hantieren, die Ihre Bewegungsfreiheit einschränken, und Pumpen, die schwierig zu tragen sind?

Keine Kompromisse bei der Kleidung

- > Mit dem Pod müssen Sie Ihre Kleidung nicht mehr danach aussuchen, ob eine herkömmliche, klobige Insulinpumpe oder Schläuche darunter passen.

*Der Pod ist mit der Schutzart IP28 bis zu einer Tiefe von 7,6 Metern bis zu 60 Minuten lang wasserdicht. Der Personal Diabetes Manager ist nicht wasserdicht.

Warum benutzen Podder™ das Omnipod®- System?

Fragen?

SIE ERREICHEN UNS JEDERZEIT
UNTER 0800 1821629[†]
(AUS DEM AUSLAND
+49 8995 467389)
ODER BESUCHEN SIE

WWW.OMNIPOD.COM >

Leicht zu bedienen

- > Sita findet Spritzen unangenehm..
„Mit dem Pod spüre ich nur einmal alle drei Tage einen kleinen Pieks, anstatt fünf schmerzende Einstiche jeden Tag. Es ist so viel einfacher, mich an meinen Behandlungsplan zu halten.“

„Mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren ist jetzt so viel leichter. Ich kann leben, lachen und das Leben mehr genießen.“

Sita S.

PODDER™ SEIT 2016

Diese Benutzerbewertung des Omnipod®-Systems spiegelt die Erfahrung einer einzelnen Person und ihrer Behandlung mit dem Omnipod®-System wider. Die Person ist echt, typisch und dokumentiert. Allerdings gibt die Erfahrung eines Einzelnen keinerlei Hinweise, Richtwerte, Zusicherungen bzw. Garantien bezüglich der Erfahrungswerte anderer Benutzer des Omnipod®-Systems. Die Erfahrungswerte der einzelnen Benutzer können unterschiedlich sein. Bitte sprechen Sie zuerst mit Ihrem medizinischen Diabetes-Betreuer, um zu klären, ob das Omnipod®-System für Sie geeignet wäre.



Mühe- loser Daten- austausch

Fragen?

SIE ERREICHEN UNS JEDERZEIT
UNTER **0800 1821629[†]**
(AUS DEM AUSLAND
+49 8995 467389)
ODER BESUCHEN SIE

WWW.OMNIPOD.COM >





Insulet Provided diasend®

- > Mit dem Insulet Provided diasend®-Datenmanagementsystem können Sie und Ihre medizinischen Betreuer Ihre Daten mühelos einsehen.
- > Daten müssen nicht mehr bei Praxisbesuchen hochgeladen werden.
- > Ermöglicht Ihnen und Ihren medizinischen Betreuern die Zusammenarbeit bei der Behandlung sowie bessere Entscheidungen zum Diabetesmanagement.



Aussergewöhnlicher Kundendienst und Support

Fragen?

SIE ERREICHEN UNS JEDERZEIT
UNTER **0800 1821629[†]**
(AUS DEM AUSLAND
+49 8995 467389)
ODER BESUCHEN SIE

WWW.OMNIPOD.COM >



omnipod[®]
Support
Programme

Produktsupport

> Steht Ihnen jeden Tag und rund um die Uhr zur Verfügung, auch bei Auslandsreisen.

PROBIEREN SIE AUS, WIE ES IST,
EINEN POD ZU TRAGEN. BESUCHEN SIE
WWW.OMNIPOD.COM UND FORDERN
SIE IHR POD-ERLEBNIS-KIT* AN

Der gezeigte Bildschirminhalt ist ein Beispiel und dient lediglich zur Veranschaulichung.

Programmangebote

Demo-Pod**(Pod-Erlebnis-Kit)

- > Testen Sie zu Hause einen kostenlosen, nicht funktionsfähigen Demo-Pod. So können Sie ein Gefühl für das Omnipod DASH®-System bekommen, bevor Sie mit der Pod-Therapie beginnen.

Omnipod DASH®-Systemschulung

- > Wenden Sie sich an Ihren medizinischen Diabetes-Betreuer, um mehr über die Schulungen zu erfahren, die wir allen neuen Poddern™ anbieten.

Lehr- und Schulungsressourcen

- > Anleitungsvideos, Leitfäden, hilfreiche Tipps und Tricks sowie zusätzliche Unterstützung für Schulung und Übung können Sie rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche hier abrufen.

Urlaubs-PDM-Programm***

- > Wir unterstützen Sie, wo auch immer Sie sich gerade befinden. Urlaubs-PDM-Programme werden je nach Verfügbarkeit angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie vom Omnipod®-Kundendienst.

*Der Pod-Erlebnis-Kit kann in Frankreich und Österreich nicht vom Patienten selbst bestellt werden. In diesen Ländern sind Pod-Erlebnis-Kits nur über medizinische Fachkräfte erhältlich.

**Der Demo-Pod ist ein kanülenloser, nicht funktionsfähiger Pod, der bis zu 3 Tage lang getragen werden kann.

***Nachbestellungen von Verbrauchsartikeln sind nicht in allen Ländern möglich. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an das zuständige Kundendienst-Team von Insulet.

Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien***

- > Pods können jetzt online direkt über unsere Website bestellt werden. Für Informationen zur Nachbestellung von Pods und anderen Verbrauchsmaterialien wenden Sie sich bitte an den Omnipod®-Kundendienst.

Programm zur Pod-Entsorgung

- > Das Programm zur Pod-Entsorgung von Insulet bietet Poddern™ eine alternative Methode zur Entsorgung gebrauchter Pods. Um mehr darüber zu erfahren, wie das Programm zur Pod-Entsorgung von Insulet funktioniert, und zur Anforderung Ihres ersten Entsorgungs-Kits, wenden Sie sich bitte an den Omnipod®-Kundendienst.

Insulet-Partnerschaft mit Glooko® + diasend®

- > Mit Glooko + diasend® können Benutzer über eine einfach zu bedienende Plattform auf alle ihre Diabetesdaten zugreifen. Insulet Provided diasend® ermöglicht es Ihnen, Ihre Diabetesdaten auf Ihrem Smartphone oder PC einzusehen, und zu verstehen, wie sich Ihre Aktivitäten auf Ihren Blutzucker auswirken. Sie können Ihre Diabetesdaten auch mühelos an Ihren medizinischen Diabetes-Betreuer weiterleiten.

Technische Daten

Pod Design

Größe

3,9 cm (B) x 5,2 cm (L) x 1,45 cm (H)

Insulin

Fasst bis zu 200 Einheiten schnell wirksames U-100-Insulin

Durchschnittsgewicht

26 Gramm ohne Insulin

Funktionen des Personal Diabetes Managers

Alarme

Einstellbare Lautstärke und Vibrationsalarme

Warn-/Erinnerungshinweise

BZ-Erinnerungshinweis

Pod-Ende

Reservoir niedrig

Bolus-Erinnerungshinweise

Programm-Erinnerungshinweise

Sonstige Funktionen

4,0 Zoll (10,2 cm) LCD-Touchscreen

Bolusrechner

Bluetooth®-Verbindung

Speichert Daten für bis zu 90 Tage

Bolusinsulinabgabe

Bolusschritte

0.05 Einheiten

Korrekturfaktor

1:1 bis 1:400 mg/dL in Schritten von jeweils 1 mg/dL

0,1 bis 16,7 mmol/L in Schritten von jeweils 0,1 mmol/L

Kohlenhydrate-zu-Insulin-Verhältnis

1:1 bis 1:150 Gramm in Schritten von jeweils

0,1 Gramm KH/I.E.

Maximale Bolusdosis

30 Einheiten

Basalinsulinabgabe

Mindest-Basalrate

0,00 Einheiten/Stunde

Maximale Basalrate

30 Einheiten/Stunde

Basalratenschritte

0,05 Einheiten/Stunde

Temporäre Basalratendauer

30 Minuten bis 12 Stunden

30-Minuten-Schritte



Kelly R.
PODDER™ SEIT 2019

Wichtige Sicherheitsinformationen:

Das Omnipod DASH®-Insulin-Managementsystem ist für die subkutane Abgabe von Insulin mit festen und variablen Raten zur Therapie von Diabetes mellitus bei auf Insulin angewiesenen Personen bestimmt.

Das Omnipod DASH®-System wurde mit den folgenden U-100-Insulinen geprüft und für gebrauchssicher befunden: Novolog®/NovoRapid®, Humalog®, Fiasp®, Admelog® oder Apidra®. Vollständige Sicherheitsinformationen, einschließlich Indikationen, Kontraindikationen, Warn- und Vorsichtshinweisen sowie Anweisungen, entnehmen Sie bitte dem Handbuch des Omnipod DASH®-Insulin-Managementsystems.




WWW.OMNIPOD.COM >

 [INSULET_DE](#)  [MYOMNIPOD GERMANY](#)  [MYOMNIPOD_DE](#)

† Anrufe können zu Qualitätssicherungszwecken mitgehört und aufgezeichnet werden. Anrufe zu 0800-Nummern sind aus dem Festnetz kostenlos. Aus anderen Netzen können Kosten entstehen.

©2020 Insulet Corporation. Omnipod, das Omnipod-Logo, DASH, das DASH-Logo und Podder sind Marken oder eingetragene Marken der Insulet Corporation in den USA und verschiedenen anderen Rechtsgebieten. Alle Rechte vorbehalten. Glooko und diasend sind Marken von Glooko, Inc. und werden mit Genehmigung verwendet. Die Bluetooth®-Wortmarken und -Logos sind eingetragene Marken im Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Insulet Corporation erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Markeninhaber. Die Nutzung der Marken Dritter stellt keinerlei Empfehlung dieser Marken dar und bedeutet nicht, dass eine Beziehung oder andere Zugehörigkeit dazu besteht. Landsberger Strasse 302, Büro 431, 80687 München. INS-ODS-10-2019-00043 V3-DE

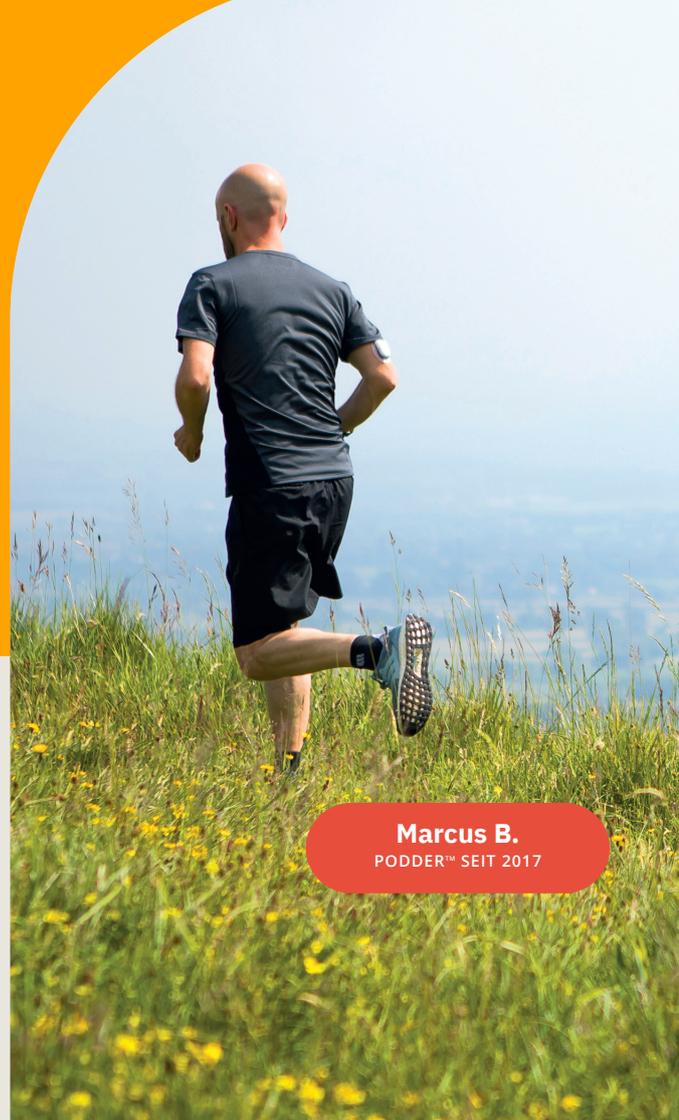

Marcus B.
PODDER™ SEIT 2017