

Diventa un Podder™

in tre semplici passaggi.

I nuovi utenti del sistema OmniPod® sono pregati di completare il processo di configurazione con il proprio medico o un trainer Pod certificato.



COME USARE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA

- + Usare i pulsanti Su/Giù presenti sul Personal Diabetes Manager (PDM) per aumentare o diminuire un numero o per scorrere un elenco.
- + Premere il tasto funzione Avanti, Selezione, Conferma, Salva o Fatto per passare alla schermata successiva.
- + Premere il tasto funzione Indietro o Annulla per tornare alla schermata precedente.

La funzione di ogni tasto è riportata sullo schermo al di sopra di ciascun pulsante.




Le schermate qui sopra rappresentano un piccolo esempio di queste funzioni. Le schermate reali possono variare a seconda delle impostazioni dell'utente.

INSERIMENTO ACCURATO DELLE IMPOSTAZIONI PERSONALI

È molto importante inserire con precisione le impostazioni personali nel nuovo PDM*. Seguire con attenzione la presente Guida rapida. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Manuale d'uso del sistema OmniPod®.

Per domande sulla configurazione del nuovo PDM, contattare il servizio di Assistenza clienti. Siamo disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, al numero 0800 89 76 18. Per domande sulle impostazioni personalizzate per la terapia con microinfusore, contattare il proprio medico.

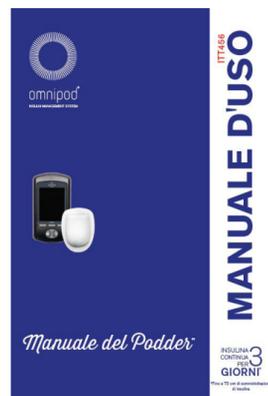

* Il PDM non è impermeabile.

1 CONFIGURAZIONE DEL PDM

Imposta il tuo Personal Diabetes Manager (PDM) con la configurazione guidata del sistema OmniPod®.

Per questa operazione, è necessario munirsi di un orologio preciso, come un orologio da polso, una sveglia o un telefono cellulare. Per accedere al nuovo PDM, occorre inoltre disporre di impostazioni personali.

- + Se sei già un utente del sistema OmniPod®, recupera queste impostazioni dal PDM corrente.
- + Se sei un nuovo utente del sistema OmniPod®, completa il processo di configurazione con il referente medico o un trainer Pod certificato.

1 Inserire le batterie AAA in dotazione nel vano batterie sul retro del PDM.



2 La configurazione guidata viene visualizzata alla prima accensione del PDM e guida l'utente lungo il processo di configurazione. Le istruzioni presenti in ogni schermata consentono di impostare:

- + Il nome identificativo: il nome da usare per l'identificazione del PDM
- + Il colore della schermata identificativa: scegliere tra bianco, verde, blu, arancione o viola
- + L'orario e la data correnti
- + Il tasso basale massimo
- + Il tasso e/o il programma basale iniziale
- + Il metodo basale temporaneo
- + L'impostazione dell'avviso sonoro della glicemia e l'obiettivo glicemico
- + I calcoli del bolo consigliato e i target, i rapporti e i fattori associati (se applicabili)
- + L'incremento di bolo
- + Il bolo massimo
- + Il bolo prolungato
- + L'avviso di serbatoio quasi vuoto
- + La notifica di scadenza del Pod



2

ATTIVAZIONE DI UN NUOVO POD

Dopo essere stato configurato, il PDM ti chiederà se desideri attivare un Pod. Segui le istruzioni sul PDM per attivare un nuovo Pod.

- 1 Preparare i seguenti componenti:
+ PDM + Pod nuovo + Tamponi disinfettanti imbevuti di alcool
+ Flacone di insulina U-100 ad azione rapida a temperatura ambiente



- 2 Lavarsi le mani con acqua e sapone.
Pulire la sommità del flacone di insulina con un tampone disinfettante imbevuto di alcool.

- 3 Estrarre l'ago e la siringa di riempimento dalla confezione del Pod. Ruotare l'ago di riempimento in senso orario sulla sommità della siringa. Non usare altri tipi di aghi o dispositivi di riempimento oltre alla siringa in dotazione con ogni Pod.



- 4 Rimuovere il cappuccio protettivo della siringa dall'ago. Aspirare un volume di aria nella siringa uguale a quello di insulina da usare. È necessario riempire la siringa con almeno 85 unità di insulina. Inserire l'ago nel flacone e iniettare l'aria.



- 5 Capovolgere il flacone e prelevare l'insulina dall'interno lentamente. Picchiettare sulla siringa riempita per rimuovere eventuali bolle d'aria.



- 6 Rimuovere l'ago dal flacone e inserirlo nel foro di riempimento insulina del Pod. Una freccia sulla pellicola di carta bianca indica il foro di riempimento. Non iniettare insulina in altri punti sul Pod. Lasciare il Pod nel vassoio mentre lo si riempie di insulina.

! Per garantire un riempimento corretto, inserire la siringa nel foro di riempimento senza inclinarla.

- 7 Iniettare l'insulina nel foro di riempimento. Il Pod emetterà due beep. Rimuovere l'ago dal foro di riempimento insulina. Riposizionare il cappuccio protettivo sull'ago e rimuovere l'ago dalla siringa.



! NON iniettare MAI aria nel foro di riempimento. Tale operazione potrebbe comportare un'erogazione accidentale o non completa dell'insulina.

! NON usare MAI un Pod se si avverte resistenza quando si spinge il pistone della siringa di riempimento. Questa condizione può comportare l'interruzione dell'erogazione di insulina.

- 8 Collocare il Pod nel vassoio alla destra del PDM e toccare quest'ultimo per verificare la corretta comunicazione. Premere Avanti sul PDM. Il sistema OmniPod® esegue una serie di controlli di sicurezza ed effettua il priming automatico del Pod.



3

AVVIO DELL'EROGAZIONE DI INSULINA

Segui le istruzioni sul PDM per avviare l'erogazione di insulina.

- 1 Leggere l'inserito sul posizionamento del Pod o il Manuale d'uso del sistema OmniPod® per decidere in quale punto posizionare il Pod. Lavarsi le mani con acqua e sapone.
Usare un tampone disinfettante imbevuto di alcool per pulire il sito. Lasciare asciugare completamente il sito all'aria. Non soffiare sul sito per asciugarlo.



- 2 Rimuovere il cappuccio trasparente dell'ago sulla parte inferiore del Pod quando richiesto dal PDM. Per far questo, tirare il bordo più esterno verso l'alto in modo deciso.



- 3 Rimuovere la pellicola di carta bianca dal nastro adesivo. Se il Pod è bagnato o sporco o se la pellicola adesiva è piegata, premere Getta sul PDM e iniziare daccapo con un nuovo Pod.



- 4 Applicare il Pod al sito selezionato dopo avere verificato l'integrità del Pod. Usare le dita per sigillare il bordo adesivo.
Premere Avanti sul PDM.



- 5 Premere "Avvia" sul PDM. L'ago viene inserito per posizionare una cannula sotto la pelle. Sentirai un clic e avvertirai un lieve pizzico.



- 6 Guardare attraverso la finestrella di visualizzazione del Pod per controllare la cannula. Controllare il sito di infusione per verificare che la cannula sia stata inserita correttamente.

- 7 Controllare la superficie del Pod; ora dovresti essere in grado di vedere l'inserito scorrevole rosa nella finestrella sulla superficie superiore.
Se la cannula non è inserita correttamente, premere No sul PDM. Premere Getta per disattivare il Pod e iniziare il processo con un nuovo Pod.
Se la cannula è inserita correttamente, premere Sì sul PDM.



- 8 Controllare la glicemia 1,5 ore dopo l'attivazione del Pod. Il PDM visualizzerà un promemoria per tale operazione. Inoltre, ti ricorderà di controllare il sito di infusione per verificare il corretto inserimento della cannula. Dopo aver completato questi controlli, premere OK sul PDM.

! Prima di continuare con il Sistema per la gestione insulinica del sistema OmniPod®, consultare il Manuale d'uso per istruzioni dettagliate sul funzionamento.




19141-6L-AW Rev A 12/17

© 2017 Insulet Corporation. OmniPod, Podder e il logo OmniPod sono marchi commerciali o registrati di Insulet Corporation negli Stati Uniti e in altre varie giurisdizioni. Tutti i diritti riservati.

Informazioni sul brevetto USA disponibili sul sito www.insulet.com/patents.

FreeStyle e i marchi correlati sono marchi commerciali di Abbott Diabetes Care Inc. in varie giurisdizioni e sono utilizzati dietro autorizzazione.

Le fotografie sono di utenti reali del sistema OmniPod®.

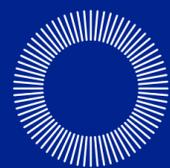

omnipod®
INSULIN MANAGEMENT SYSTEM



GUIDA RAPIDA

Sistema per la gestione insulinica