


Sistema de administración de insulina Omnipod DASH[®]

Guía de referencia rápida del proveedor de atención médica



Cómo ver el historial de insulina y GS

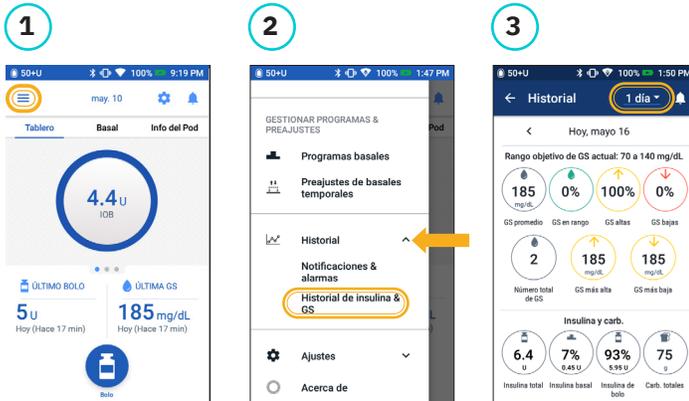

1 Toca el icono Menú (Menu) en la pantalla de Inicio (Home).

2 Toca **"Historial"** (History) para abrir la lista. Toca **"Historial de insulina y GS"** (Insulin & BG History).

3 Toca la flecha desplegable del día para ver "1 día" (1 day) o "Varios días" (Multiple days). Desliza hacia arriba para ver la sección de detalles.

¿LO SABÍAS?


El icono que se muestra con una entrada de bolo indica si se usó la Calculadora de bolo.

- La Calculadora de bolo se activó.
- La Calculadora de bolo se desactivó/apagó.

Toca una fila con una entrada de bolo para ver más detalles sobre el bolo.

- Ve si se usó la Calculadora de bolo o si fue un Bolo manual.
- Toca **"Ver Cálculos de bolo"** (View Bolus Calculations) para que muestre si se hizo un ajuste manual.

Suspender y reanudar la administración de insulina

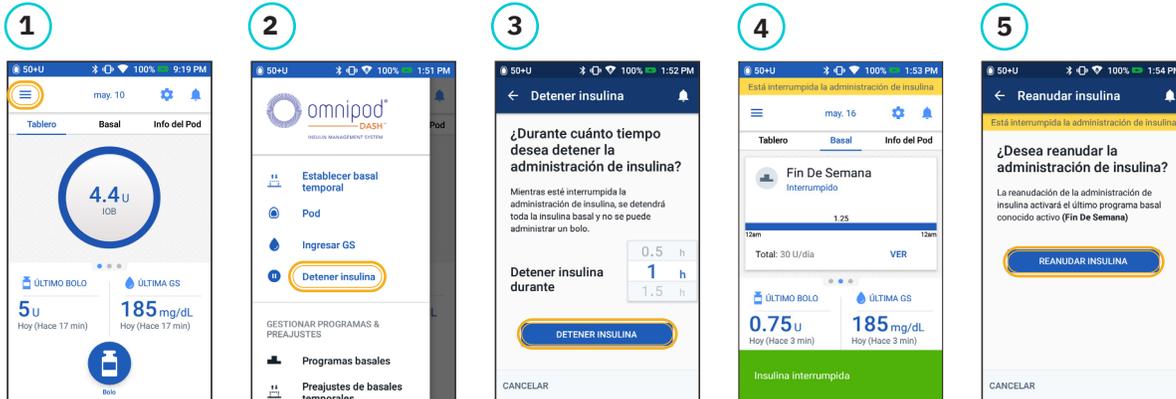

1 Toca el icono Menú (Menu) en la pantalla de Inicio (Home).

2 Toca **"Detener insulina"** (Suspend Insulin).

3 Desplázate a la duración deseada de suspensión de insulina. Toca **"DETENER INSULINA"** (SUSPEND INSULIN). Toca "Sí" (Yes) para confirmar que quieres interrumpir la administración de insulina.


4 La pantalla de Inicio muestra un mensaje en amarillo que indica que se ha suspendido la administración de insulina.

5 Toca **"REANUDAR INSULINA"** (RESUME INSULIN) para comenzar la administración de insulina.

¿LO SABÍAS?

- La insulina no se reanuda automáticamente al final del período de suspensión. Debe reanudarse manualmente.
- La suspensión se puede programar desde 0.5 horas hasta 2 horas.
- El Pod emite un pitido cada 15 minutos durante el período de suspensión.
- Cuando se suspende la administración de insulina, se cancelan las tasas basales temporales o los bolos extendidos.

Cómo editar un Sistema basal

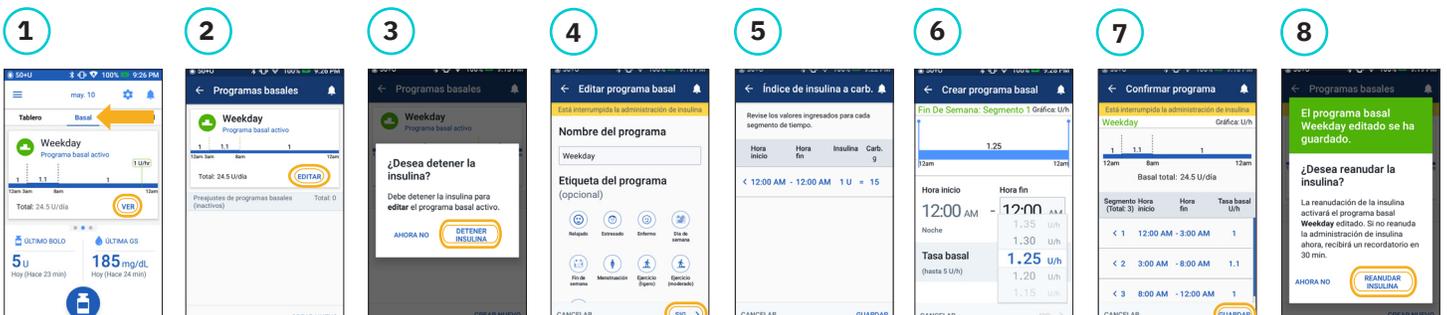

1 Toca **"Basal"** en la pantalla de inicio. Toca **"VER"** (VIEW).

2 Toca **"EDITAR"** (EDIT) en el programa basal para modificarlo.

3 Toca **"DETENER INSULINA"** (SUSPEND INSULIN) si vas a cambiar el programa basal activo.

4 Toca para editar el nombre y la etiqueta del programa, o toca **"SIGUIENTE"** (NEXT) para editar las tasas y los segmentos de tiempo basales.

5 Toca en el segmento que editarás.

6 Edita el tiempo y las tasas basales para el período de 24 horas.

7 Toca **"GUARDAR"** (SAVE) al finalizar.

8 Toca **"REANUDAR INSULINA"** (RESUME INSULIN).

Guía de referencia rápida del proveedor de atención médica



Cómo editar el Índice de IC y el Factor de corrección

- 1
- 2
- 3
- 4

Toca el icono Menú (Menu) en la pantalla de Inicio (Home).

Toca “Ajustes” (Settings) para abrir la lista. Toca “Bolo” (Bolus).

Toca en “Índice de insulina a carb.” (Insulin to Carb Ratio) o “Factor de corrección” (Correction Factor).

¿LO SABÍAS?

- Sigue los pasos anteriores para ajustar los valores de “GS objetivo” y “Corregir arriba”.
- Para ajustar “GS mínima para cálc.”, “Corrección inversa” y “Duración de la acción de la insulina”, navega hasta Ajustes (Setting) > Bolo (Bolus).
- Los “índices de IC” se pueden programar en incrementos de 0.1 g carb/U.

Toca en el segmento que quieres editar.

Edita el segmento de tiempo y/o cantidad.

Toca “SIGUIENTE” (NEXT) para añadir más segmentos según sea necesario.

Toca “GUARDAR” (SAVE).

Cómo crear programas basales adicionales

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Toca “Basal” en la pantalla de inicio. Toca “VER” (VIEW).

Toca “CREAR NUEVO” (CREATE NEW).

Cambia el nombre del programa o conserva el nombre predeterminado. Ejemplo: “Fin de semana”. Toca para elegir una etiqueta de programa. Toca “SIGUIENTE” (NEXT).

Edita el tiempo de finalización y la tasa basal. Toca Toca “SIGUIENTE” (NEXT) Continúa agregando segmentos para las 24 horas. Toca “SIGUIENTE” (NEXT) para continuar.

Toca “CONTINUAR” (CONTINUE) para revisar los segmentos de tiempo y las tasas basales.

Revisa el nuevo programa basal. Toca “GUARDAR” (SAVE) si es correcto.

Elige activar el nuevo programa basal ahora o más tarde.

Toca el icono Opciones (Options) en Programas basales (Basal Programs) para activar, editar o eliminar los diferentes programas.

Las imágenes de pantalla del PDM sirven exclusivamente como ilustración y no deben considerarse como sugerencias de ajustes para el usuario. Consulta con tu proveedor de atención médica para determinar tus ajustes personalizados.

Consulta la guía del usuario del sistema de administración de insulina Omnipod DASH® para obtener información completa sobre cómo usar el sistema Omnipod DASH®, y para conocer todas las advertencias y precauciones relacionadas. La guía del usuario del sistema de administración de insulina Omnipod DASH® está disponible en línea en www.mymnipod.com o llamando a Atención al cliente (24 horas del día/7 días de la semana), al 800-591-3455. Esta guía de referencia rápida del proveedor de atención médica es para el gestor personal de diabetes modelo PDM-USA1-D001-MG-USA1. El número de modelo del gestor personal de diabetes aparece en la cubierta posterior de cada gestor personal de diabetes.

© 2020 Insulet Corporation. Omnipod, el logo de Omnipod, DASH y el logo de DASH son marcas comerciales o registradas de Insulet Corporation en los Estados Unidos de América y otras jurisdicciones. Todos los derechos reservados. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Insulet Corporation se efectúa con licencia. INS-ODS-05-2021-00030 V1.0

Insulet Corporation
100 Nagog Park, Acton, MA 01720
800-591-3455 • omnipod.com