



Omnipod® 5 & Glooko® Wichtige Informationen


OMNIPOD 5-BROSCHÜRE FÜR
MENSCHEN MIT DIABETES

omnipod®
automated insulin
delivery system
5



VERKNÜPFEN

Sie die Daten Ihres Omnipod 5 Automatisierten Insulin-Dosierungssystems mit Glooko

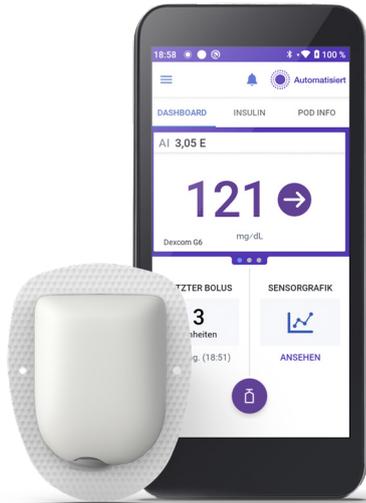

Wenn Sie Ihren Omnipod 5 noch nicht mit Glooko verbunden haben, gehen Sie einfach wie folgt vor:

1. Melden Sie sich mit Ihrer Omnipod-ID unter **www.omnipod.com** in Ihr Omnipod Online-Konto an
2. Klicken Sie auf **Mein Konto** und wählen Sie anschließend im Dropdown-Menü Kontoverknüpfung aus. Klicken Sie auf **'Verknüpfen'**
3. Wählen Sie **'Registrieren'** oder **'Anmelden'** bei Glooko
4. Schließen Sie den Vorgang bei Glooko ab, um Ihr Konto zu verknüpfen

Sobald dies erfolgte, aktualisiert sich Ihr Status auf verknüpft und Ihre Daten werden automatisch in Ihrem persönlichen Glooko-Konto* hochgeladen. Sie können die Verknüpfung zwischen Ihrem Omnipod- und Glooko-Konto jederzeit rückgängig machen, um den Datenaustausch zu beenden.

*Sie müssen mit WLAN oder mobilen Daten verbunden sein und Nutzer des Omnipod 5 sein, um Updates in Glooko zu erhalten.

Wählen Sie aus, ob Sie die Daten Ihres Omnipod 5 Automatisierten Insulin-Dosierungssystem mit Ihrem medizinischen Diabetes-Betreuer **TEILEN** möchten



Nur wenn Sie Ihren ProConnect-Code in Glooko eingeben, hat Ihr medizinischer Diabetes-Betreuer am Computer Zugriff auf Ihre Omnipod 5-Daten.


Wenn Sie Ihr Glooko-Konto noch nicht mit Ihrem medizinischen Diabetes-Betreuer geteilt haben, gehen Sie einfach wie folgt vor:

1. Melden Sie sich in Ihrem Glooko-Konto unter **www.my.glooko.com** an
2. Klicken Sie im Dropdown-Menü (rechts oben auf der Startseite) auf **'Einstellungen'**
3. Scrollen Sie nach unten zu Konto und klicken Sie auf **'+neuen Code hinzufügen'**
4. Klicken Sie auf **'Weiter'**
5. Geben Sie Ihren ProConnect-Code (siehe unten) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **'Absenden'**

ProConnect-Code:
Erhalten Sie von
Ihrem medizinischen
Diabetes-Betreuer

GLOOKO MOBILE APP

Sie können zwischen der
Glooko Mobile App und der
Glooko-Plattform wählen

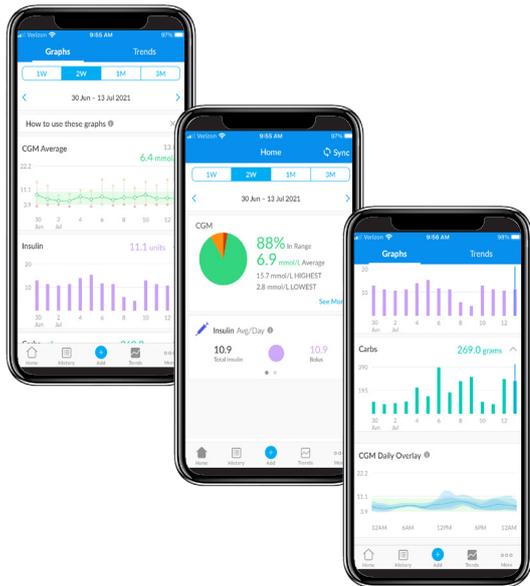

iPhone 

Laden Sie die App herunter und melden Sie sich an

- Suchen Sie im App Store nach der **'Glooko Mobile App'** und installieren Sie sie
- Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto und füllen Sie die erforderlichen Informationen aus

Daten einsehen

Sobald Ihre Daten in Glooko hochgeladen wurden, können Sie sich Ihre Trends und Werte auf Ihrem iPhone ansehen.

Wählen Sie aus, ob Sie Ihre Daten mit Ihrem medizinischen Diabetes-Betreuer teilen möchten

- Klicken Sie auf **'Mehr'**
- Klicken Sie auf **'Berichte teilen'**

Android



Laden Sie die App herunter und melden Sie sich an


- Suchen Sie im Google Play™ Store nach der '**Glooko Mobile App**' und installieren Sie sie
- Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto und füllen Sie die erforderlichen Informationen aus

Daten synchronisieren und einsehen

- Klicken Sie auf der Startseite auf '**Synchronisieren**' und wählen Sie Omnipod 5 Automatisiertes Insulin-Dosierungssystem
- Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Daten zu synchronisieren

Legen Sie fest, ob Sie Ihre Daten mit Ihrem medizinischen Diabetes-Betreuer teilen möchten

Klicken Sie auf '**Berichte teilen**', um die Berichte per E-Mail oder Fax zu versenden

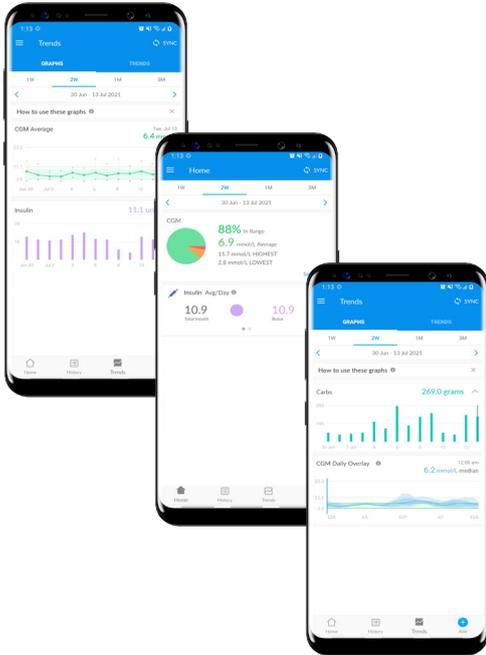

PDF-BERICHT

erstellen, speichern
oder drucken

Create PDF

Liv Waddle
DOB: 17/08/09
Diabetes: Type 1

Time: 2 weeks 10/11/2021 - 23/11/2021

Preferred PDF Setting: No Profile Available

Summary 2 pages
Logbook 2 pages
Overview 1 page
Daily Overview 14 pages
Week View
Overlay 1 page
Calendar 2 pages
Insights
Devices 14 pages

Estimated report length: 20

Print mode: Black and White Colour

Type comment here! Comments will appear in the Summary report section.

Save selection as Favourite Profile

Berichte können Sie über die **Glooko Mobile App** oder unter **www.my.glooko.com** erstellen und anzeigen:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an

2. Bericht erstellen:

- Klicken Sie auf Ihr **Profil**
- Klicken Sie auf '**PDF-Bericht erstellen**' (rechts oben)
- Wählen Sie die gewünschten Berichte und den Zeitraum aus und klicken Sie auf '**PDF erstellen**'.

3. Bericht speichern/drucken:

Sobald der Bericht erstellt ist, können Sie ihn entweder auf Ihrem Desktop oder einem gewünschten Speicherort abspeichern oder direkt ausdrucken.

TIPP! Speichern Sie individuell angepasste Berichte

- Klicken Sie auf **Einstellungen**
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Neuer Favorit**
- Wählen Sie die gewünschten Berichte aus und geben Sie einen Profilnamen für den Favoriten ein
z.B. *Omnipod+Dexcom-Berichte* oder *Dr. Smiths Bericht*)






Gute Berichte zum Einstieg:

Zusammenfassende, Täglich und Wöchentliche Berichte

Übersicht über wichtige Statistiken und zusammengefasste Informationen, um positive Entwicklungen und Herausforderungen zu erkennen und so die Patientenversorgung zu unterstützen.

Bericht/Statistik über Geräteeinstellungen

Wenn Sie Ihre Daten in **Insulet Provided Glooko** hochladen, werden Ihre Pumpeneinstellungen gespeichert. Diese Funktion bietet Ihnen und Ihrem medizinischen Betreuer hilfreiche Informationen, auf die sie zurückgreifen können.

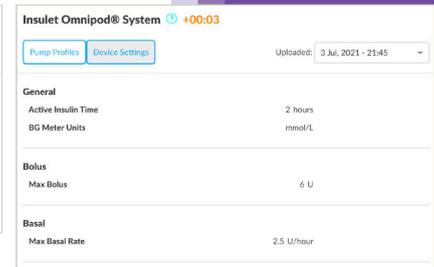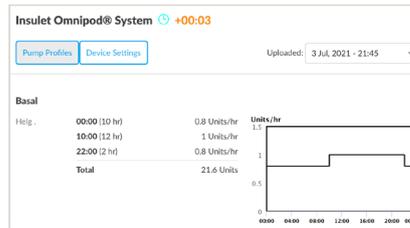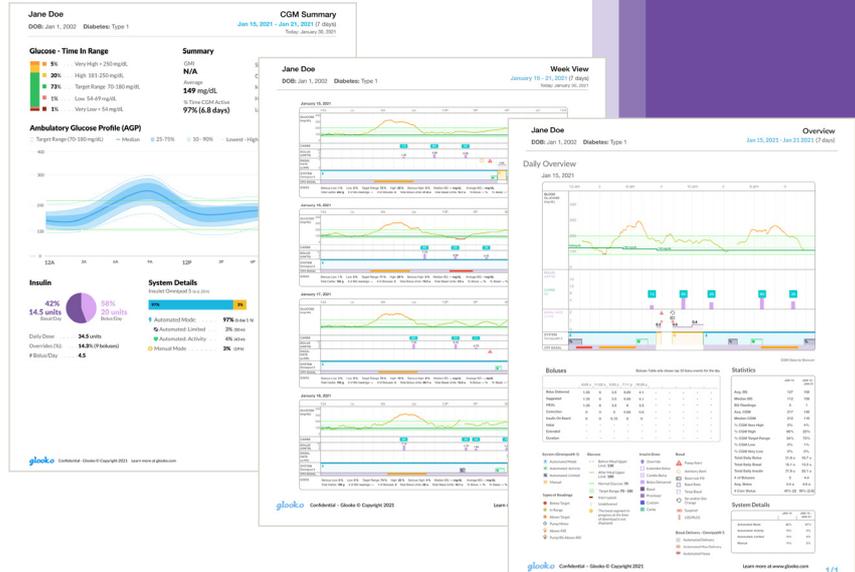



Wenn Sie Fragen oder Bedenken zum Omnipod5 haben, die in den Online-Ressourcen nicht beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an das Omnipod-Team unter:

0800 1821629*

oder +49 8995 467389 bei Anrufen aus dem Ausland.

Bei Problemen mit Glooko, wenden Sie sich bitte an das Glooko-Support-Team.

0800 0800 033*

www.glooko.com
help@glooko.com



*Anrufe können zu Qualitätssicherungszwecken mitgehört und aufgezeichnet werden. Anrufe zu 0800-Nummern sind aus dem Festnetz kostenlos. Aus anderen Netzen können Kosten entstehen.

©2023 Insulet Corporation. Omnipod und das Omnipod Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Insulet Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Glooko ist eine Marke von Glooko, Inc. und wird mit Genehmigung verwendet. Dexcom ist eine eingetragene Marke von Dexcom, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. Die Nutzung der Marken Dritter stellt keinerlei Empfehlung dieser Marken dar und bedeutet nicht, dass eine Beziehung oder andere Zugehörigkeit dazu besteht. Insulet Netherlands B,V Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht, Niederlande. INS-OHS-03-2023-00048 V1.