



¡Bienvenido a Omnipod® 5!

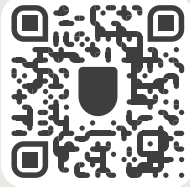

Para empezar a **configurar tu dispositivo y programar la capacitación:**


Escanea este código en tu smartphone o visita omnipod.com/setup

1

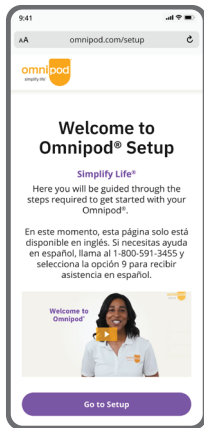


Selecciona **"Go to Setup"** (Ir a configuración).

2

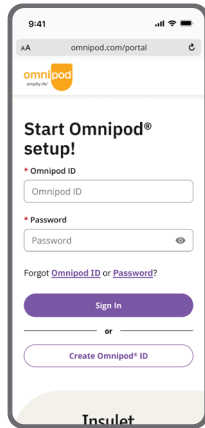


Inicia sesión (Sign in) o **crea** tu cuenta de Omnipod ID (Create Omnipod ID).

3

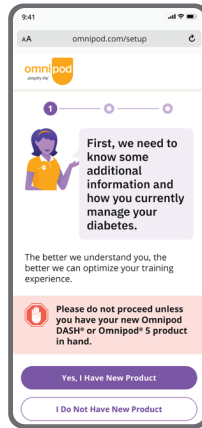


Una vez que inicies sesión, selecciona: **"Yes, I Have New Product"** (Sí, tengo un nuevo producto).

4

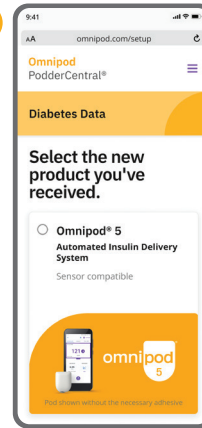


Selecciona **"Omnipod 5"**.

5

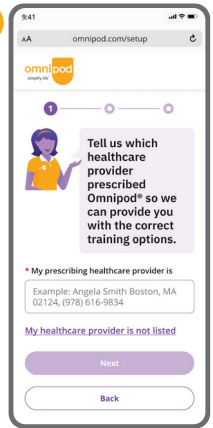


Busca a tu **proveedor de atención médica**. Es posible que esta información esté previamente completada.

6

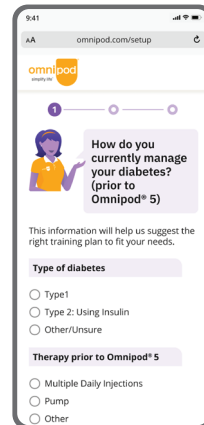


Responde las preguntas **sobre el manejo actual de tu diabetes**.

7

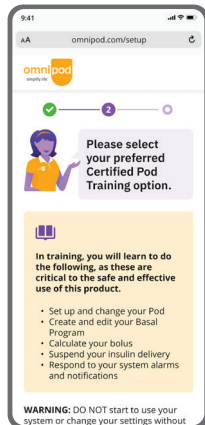


Selecciona tu **"preferred training method"** (método preferido de capacitación).

8

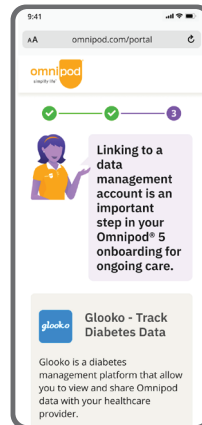

Completa los pasos para **inscribirte en Glooko**.

9

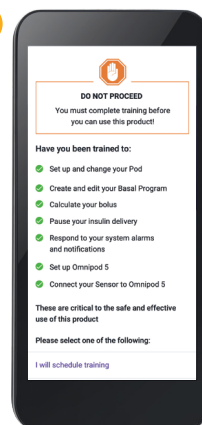

Prende tu Controlador e inicia sesión con tu Omnipod ID.



No uses tu dispositivo hasta que hayas completado la capacitación.

¿Tienes preguntas? Inicia sesión en PodderCentral® y chatea en línea con un agente en vivo o ponte en contacto con la línea de atención 24/7 del equipo de Soporte de Productos llamando al **1 (800) 591-3455**.

Cómo prepararte para la capacitación de Omnipod 5:



Si no has programado la capacitación ni registrado tu dispositivo, consulta la parte del frente de este documento y **completa todos los pasos requeridos**.

Medidas que debes tomar antes de la capacitación:



Confirma la compatibilidad del Pod, el Sensor, el Controlador y/o el smartphone en omnipod.com/compatibilidad.



Sensor Dexcom G6 o Dexcom G7

Configura la aplicación Dexcom para teléfono móvil, inserta tu Sensor y empieza la sesión del sensor.*

visita dexcom.com/guides para obtener soporte



Sensor FreeStyle Libre 2 Plus

Trae dos paquetes de sensores nuevos a la capacitación. Durante la capacitación empezarás un nuevo Sensor.

Nota: Si tienes un receptor Dexcom, apágalo.

Esto es lo que debes tener listo para la capacitación:

- 1 Pods de Omnipod 5 (compatibles con tu sensor)
- 2 Sensor** compatible (*consulta las instrucciones sobre el sensor indicadas anteriormente*)
- 3 Vial de insulina de acción rápida U-100 compatible con el sistema Omnipod 5
- 4 Controlador del Omnipod 5 totalmente cargado o smartphone compatible, si corresponde**
- 5 Cargador del Controlador y/o cargador del smartphone
- 6 Información de inicio de sesión en PodderCentral
- 7 Guía del usuario de Omnipod 5
- 8 Toallitas de alcohol

Ten en cuenta:

- Tu sesión podría durar hasta 2 horas.
- Ponte ropa cómoda que permita fácil acceso al área de colocación del Pod.

Para obtener ayuda sobre tu sensor, ponte en contacto con el equipo de soporte del producto de tu Sensor llamando al número de teléfono provisto.

Insulet Corporation, 100 Nagog Park, Acton, MA 01720, EE. UU. • 1 (800) 591-3455 • omnipod.com/espanol

*Para obtener una lista de los dispositivos compatibles, visita dexcom.com/compatibilidad.

**Para obtener una lista de los smartphones compatibles, visita omnipod.com/compatibilidad.

©2025 Insulet Corporation. Omnipod, el logotipo de Omnipod y Simplify Life son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Insulet Corporation. Todos los derechos reservados. Dexcom y todos los logotipos y marcas de diseño relacionados son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Dexcom, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países y se utilizan con autorización. The Sensor housing, FreeStyle, Libre y las marcas relacionadas son marcas de Abbott y se utilizan con permiso. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de marcas de terceros no constituye una recomendación ni implica una relación u otra afiliación. INS-OHS-04-2023-00024 v3.0