

Omnipod DASH®

Akkua koskevat turvallisuusohjeet



Tietyt käyttöoppaassa olevat, akkua koskevat turvallisuusohjeet on päivitettävä. Tarkastakaa tästä lehtisestä Omnipod DASH® PDM -laitteen akkua koskevat päivitetyt ohjeet.

Lataaminen:

- Luku 2: PDM-laitteen asetusten määrittäminen: akun lataaminen
- Luku 11: Pumpun ja PDM-laitteen hoito: lataaminen
- Liite: PDM-laitteen tekniset tiedot: latauslämpötila

Päivitetyt tiedot: Käyttäkää vain Insuletin toimittamaa micro-USB-laturia PDM-laitteenne lataamiseen. Ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun, jos havaitsette, että lataaminen kestää liian kauan tai akku tyhjenee liian nopeasti. Älkää ladatko PDM-laitetta, jos ympäröivä lämpötila on yli 40 °C (104 °F). Älkää ladatko PDM-laitetta suorassa auringonvalossa.

Akun irrottaminen PDM-laitteesta:

- Luku 9: Asetusten säätäminen: akun irrottaminen
- Luku 10: Hälytykset, ilmoitukset ja yhteysvirheet: hälytykset, joita ei voi hiljentää
- Luku 11: Pumpun ja PDM-laitteen hoito:
PDM-laitteen pitkäaikaista varastointia varten vedelle altistumisen johdosta akun hävittämistä varten jos akku menettää muotonsa tai värinsä tai ylikuumentuu jos akku vaihdetaan toiseen, kun laitteen asetukset on jo määritetty ensimmäistä kertaa.
- Liite: Jos PDM-laite lakkaa vastaamasta pikakäynnistystilassa

Päivitetyt tiedot: ÄLKÄÄ irrottako akkua Omnipod DASH PDM -laitteesta mistään syystä, vaikka käyttöopas tai PDM-laitteen näyttö suosittelisi sitä vianmäärittystä varten. Jos joudutte tilanteeseen, jossa käyttöopas suosittelee akun irrottamista, älkää irrottako akkua, vaan ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Akun altistuminen kosteudelle, kuumuudelle tai vauriolle:

- Luku 11: Pumpun ja PDM-laitteen hoito:
PDM-laitteen puhdistaminen nesteellä jos akku menettää muotonsa tai värinsä tai ylikuumentuu akun putoaminen.

Päivitetyt tiedot: Jos PDM-laite kastuu, putoaa, vaurioituu, turpoaa, pullistuu tai ylikuumentuu lataamisen, käytön tai säilytyksen aikana, älkää käyttäkö PDM-laitetta älkääkään ladatko sitä. Jos PDM-laite on lämmin tai kuuma, jättäkää se metallitasolle kaapelista irrotettuna älkääkään käyttäkö sitä ennen kuin se on jäähtynyt. Ottakaa välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun.

Ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun, jos havaitsette seuraavia: lataus kestää liian pitkään, akku tyhjenee liian nopeasti, PDM-laite tuntuu kuumalta, PDM-laite ja/tai akku turpoaa, PDM-laite ja/tai akku haisee kaasulta tai laturi tuntuu liian kuumalta.

