

Omnipod DASH®

Veiligheidsinstructies voor de batterij



Sommige veiligheidsinstructies voor de batterij in uw gebruikershandleiding moeten worden bijgewerkt. Raadpleeg dit deel voor actuele instructies over de Omnipod DASH® PDM-batterij.

Over opladen:

Hoofdstuk 2: Initiële PDM-instelling: de batterij opladen
Hoofdstuk 11: Zorg dragen voor uw pod en PDM: opladen
Bijlage: PDM-specificaties: laadtemperatuur

Bijgewerkte informatie: Gebruik alleen de door Insulet geleverde micro-usb-oplader om uw PDM op te laden. Neem contact op met het Klantenserviceteam als u merkt dat het opladen te lang duurt of de batterij te snel leeg raakt. Laad de PDM niet op als de omgevingstemperatuur hoger is dan 40 °C (104 °F). Laad de PDM niet op in direct zonlicht.

Bij het verwijderen van de batterij uit de PDM:

Hoofdstuk 9: Instellingen aanpassen: batterij verwijderen
Hoofdstuk 10: Alarmen, meldingen, communicatiefouten: alarmen die niet kunnen worden gedempt
Hoofdstuk 11: Zorg dragen voor uw pod en PDM:
voor langdurig bewaren van de PDM
voor blootstelling aan water
voor het weggooien van de batterij
als de batterij misvorming vertoont, van kleur verandert of oververhit raakt
als u een batterij vervangt na de eerste installatie
Bijlage: als de PDM niet meer reageert tijdens de Fastboot-modus

Bijgewerkte informatie: Verwijder de batterij NIET uit de Omnipod DASH PDM om welke reden dan ook, zelfs als de gebruikershandleiding of het PDM-scherm dit aanbeveelt voor het oplossen van problemen. Als u een situatie aantreft waarin het verwijderen van de batterij wordt aanbevolen door de gebruikershandleiding, verwijder de batterij dan niet en neem contact op met het Klantenserviceteam.

Over vocht, warmte of schade aan de batterij:

Hoofdstuk 11: Zorg dragen voor uw pod en PDM:
reinigen van de PDM met vloeistof
als de batterij misvorming vertoont, van kleur verandert of oververhit raakt
de batterij laten vallen

Bijgewerkte informatie: Als de PDM nat wordt of als de PDM valt, beschadigd raakt, opzwellt, uitpuilt of oververhit raakt tijdens het opladen, tijdens gebruik of in opslag, gebruik of laad de PDM dan niet op. Laat een warme of hete PDM losgekoppeld en inactief bij kamertemperatuur op een metalen oppervlak totdat deze afkoelt. Neem onmiddellijk contact op met het Klantenserviceteam.

Neem contact op met het Klantenserviceteam als u het volgende opmerkt: het opladen duurt te lang, de batterij ontladte te snel, de PDM is te heet om aan te raken, zwelling van de PDM en/of batterij, een gaslucht die uit de PDM en/of batterij komt, of de wandoplader wordt te heet.

