

Omnipod DASH®

Sikkerhedsinstruktioner for batterier



Nogle af sikkerhedsinstruktionerne for batterier i din brugervejledning skal opdateres. Se denne indlægsseddel for at få opdaterede instruktioner om Omnipod DASH® PDM-batteriet.

Ved opladning:

Kapitel 2: Indledende PDM-opsætning: opladning af batteriet

Kapitel 11: Vedligeholdelse af din Pod og PDM: opladning

Appendiks: PDM-specifikationer: opladningstemperatur

Opdaterede oplysninger: Brug kun den medfølgende mikro-USB-oplader fra Insulet til at oplade din PDM. Kontakt kundeservice, hvis du opdager, at opladningen tager for lang tid, eller hvis batteriet løber tør for hurtigt. Du må ikke oplade PDM'en, hvis den omgivende temperatur er over 40 °C (104 °F). Oplad ikke PDM'en i direkte sollys.

Når batteriet fjernes fra PDM'en:

Kapitel 9: Justering af indstillinger: Fjernelse af batteri

Kapitel 10: Alarmer, meddelelser og kommunikationsfejl: Alarmer, der ikke kan slås fra

Kapitel 11: Vedligeholdelse af din Pod og PDM:

til langtidsopbevaring af PDM'en

til udsættelse for vand

til bortskaffelse af batteriet

hvis batteriet viser deformitet, farveændring eller overophedning

hvis du udskifter et batteri efter første opsætning

Appendiks: hvis PDM'en holder op med at reagere under Hurtigstarttilstand

Opdaterede oplysninger: Fjern IKKE batteriet fra Omnipod DASH PDM under nogen omstændigheder, selv om det anbefales i brugervejledningen eller på PDM-skærmen til fejlfinding. Hvis det i brugervejledningen anbefales at fjerne batteriet, må du ikke fjerne batteriet, men du skal kontakte kundeservice.

Ved fugt, varme eller beskadigelse af batteriet:

Kapitel 11: Vedligeholdelse af din Pod og PDM:

rengøring af PDM'en med væske

hvis batteriet viser deformitet, farveændring eller overophedning
tab af batteriet

Opdaterede oplysninger: Hvis PDM'en bliver våd, eller hvis PDM'en tabes, beskadiges, svulmer op, buler ud eller overophedes under opladning, under brug eller opbevaring, må du ikke bruge eller oplade PDM'en. Frakobl en varm PDM, deaktiver den og læg den ved stuetemperatur på en metaloverflade, indtil den er kølet ned. Kontakt omgående kundeservice.

Kontakt kundeservice, hvis du bemærker følgende: Opladningen tager for lang tid, batteriet aflades for hurtigt, PDM'en er for varm at røre ved, PDM'en og/eller batteriet er svulmet op, der lugter af gas fra PDM'en og/eller batteriet, eller vægopladeren bliver for varm.

