

Omnipod DASH®

Instruksjoner om batterisikkerhet



Noen batterisikkerhetsinstruksjoner i brukerhåndboken din må oppdateres. Se dette tillegget for oppdaterte instruksjoner om PDM-batteriet til Omnipod DASH®.

Om lading:

Kapittel 2: Innledende PDM-oppsett: lade batteriet

Kapittel 11: Ta vare på Pod og PDM: lading

Vedlegg: PDM-spesifikasjoner: ladetemperatur

Oppdatert informasjon: bruk kun den Insulet-leverte micro-USB-laderen til å lade din PDM. Kontakt kundeservice hvis du merker at ladingen tar for lang tid eller at batteriet går tomt for raskt. Ikke lad PDM hvis omgivelsestemperaturen er over 40 °C (104 °F). Ikke lad PDM i direkte sollys.

Om uttak av batteriet fra PDM:

Kapittel 9: Justeringsinnstillinger: fjerne batteri

Kapittel 10: Alarmer, varsler, kommunikasjonsfeil: alarmer som ikke kan stilles

Kapittel 11: Ta vare på Pod og PDM:

for langvarig lagring av PDM

for eksponering for vann

for avhending av batteriet

hvis batteriet er deformert, fargen endrer seg eller overopphetes

hvis du bytter ut et batteri etter førstegangs-oppsett

Vedlegg: Hvis PDM slutter å svare i Fastboot-modus

Oppdatert informasjon: IKKE ta ut batteriet fra Omnipod DASH PDM for noen grunn, selv om brukerhåndboken eller PDM-skjermen anbefaler det for feilsøking. Hvis du finner en situasjon der uttak av batteriet anbefales av brukerhåndboken, ikke ta ut batteriet, og ta kontakt med kundeservice.

Hvis batteriet blir fuktig, varmt eller skadet:

Kapittel 11: Ta vare på Pod og PDM:

rengjøring av PDM med væske

hvis batteriet er deformert, fargen endrer seg eller overopphetes

hvis batteriet faller på bakken

Oppdatert informasjon: hvis PDM blir våt, eller hvis PDM faller ned, skades, svulmer, buler ut eller overopphetes under lading, under bruk eller ved lagring, må PDM ikke brukes eller lades. Hold en varm PDM frakoblet og inaktiv på en metalloverflate ved romtemperatur til den er avkjølt. Kontakt kundeservice umiddelbart.

Kontakt kundeservice hvis du merker følgende: ladingen tar for lang tid, batteriet lades ut for raskt, PDM er for varm til å ta på, hevelser i PDM og/eller batteriet, lukt av gass fra PDM og/eller batteri, eller at vegg-laderen blir for varm.

