

Sigurnosne upute za bateriju uređaja Omnipod DASH®



Neke sigurnosne upute za bateriju u vašem korisničkom vodiču treba ažurirati. Najnovije upute za bateriju uređaja PDM sustava Omnipod DASH® potražite u ovim uputama.

Punjenje:

- 2. poglavlje: Početno postavljanje uređaja PDM; punjenje baterije
- 11. poglavlje: Održavanje uređaja Pod i uređaja PDM; punjenje
- Prilog: Specifikacije uređaja PDM; temperatura punjenja

Ažurirane informacije: Za punjenje uređaja PDM upotrebljavajte samo punjač micro-USB koji vam je isporučio Insulet. Obratite se Službi za korisnike ako primijetite da punjenje traje predugo ili da se baterija prebrzo prazni. Ne punitite uređaj PDM ako je okolna temperatura viša od 40 °C (104 °F). Ne punitite uređaj PDM na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Vađenje baterije iz uređaja PDM:

- 9. poglavlje: Namještanje postavki; uklanjanje baterije
- 10. poglavlje: Upozorenja, obavijesti i pogreške u komunikaciji; upozorenja koja se ne mogu isključiti
- 11. poglavlje: Održavanje uređaja Pod i uređaja PDM:
za dugotrajnu pohranu uređaja PDM
za izlaganje vodi
za odlaganje baterije
ako se baterija deformira, promijeni boju ili se pregrijava
ako mijenjate bateriju nakon prvog postavljanja
- Prilog: ako uređaj PDM prestane reagirati tijekom načina za brzo pokretanje

Ažurirane informacije: NE vadite bateriju iz uređaja PDM sustava Omnipod DASH iz bilo kojeg razloga, čak i ako se to preporučuje u korisničkom vodiču ili na zaslonu uređaja PDM za otklanjanje poteškoća. Ako naiđete na situaciju u kojoj se vađenje baterije preporučuje u korisničkom vodiču, nemojte vaditi bateriju i obratite se Službi za korisnike.

Vlaga, toplina ili oštećenje baterije:

- 11. poglavlje: Održavanje uređaja Pod i uređaja PDM:
čišćenje uređaja PDM tekućinom
ako se baterija deformira, promijeni boju ili se pregrijava
padanje baterije

Ažurirane informacije: ako se uređaj PDM namoči ili ako uređaj PDM padne, ako se ošteti, nabubri, ispupči ili pregrije tijekom punjenja, upotrebe ili pohrane, ne upotrebljavajte ili punitite uređaj PDM. Ostavite topli ili vrući uređaj PDM isključen i na sobnoj temperaturi na metalnoj površini dok se ne ohladi. Odmah se obratite Službi za korisnike.

Obratite se Službi za korisnike ako primijetite sljedeće: punjenje traje predugo, baterija se prebrzo prazni, uređaj PDM je prevruć pri dodirivanju, bubrenje uređaja PDM i/ili baterije, miris plina dopire iz uređaja PDM i/ili baterije ili je zidni punjač postao prevruć.

