

Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας OmniPod DASH®



Ορισμένες οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας στον οδηγό χρήσης χρειάζεται να επικαιροποιηθούν. Ανατρέξτε σε αυτό το ένθετο για τις επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την μπαταρία του PDM OmniPod DASH®.

Κατά τη φόρτιση:

Κεφάλαιο 2: Αρχική ρύθμιση του PDM: φόρτιση της μπαταρίας

Κεφάλαιο 11: Φροντίδα του Pod και το PDM σας: φόρτιση

Παράρτημα: Προδιαγραφές PDM: θερμοκρασία φόρτισης

Επικαιροποιημένες πληροφορίες: Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή micro-USB που παρέχει η Insulet για να φορτίσετε το PDM σας. Επικοινωνήστε με τη Φροντίδα Πελατών, εάν παρατηρήσετε ότι η φόρτιση διαρκεί πολύ ή ότι η μπαταρία εξαντλείται εξαιρετικά γρήγορα. Μην φορτίζετε το PDM εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 40°C (104°F). Μην φορτίζετε το PDM υπό άμεσο ηλιακό φως.

Αφαίρεση της μπαταρίας από το PDM:

Κεφάλαιο 9: Προσαρμογή ρυθμίσεων: αφαίρεση της μπαταρίας

Κεφάλαιο 10: Συναγερμοί, ειδοποιήσεις, σφάλματα επικοινωνίας: συναγερμοί που δεν μπορούν να σιγήσουν

Κεφάλαιο 11: Φροντίδα του Pod και του PDM:

για μακροχρόνια αποθήκευση του PDM

για έκθεση στο νερό

για απόρριψη της μπαταρίας

εάν η μπαταρία παρουσιάζει παραμόρφωση, χρωματική μεταβολή ή υπερθέρμανση

εάν αντικαθιστάτε μια μπαταρία μετά την πρώτη εγκατάσταση

Παράρτημα: εάν το PDM σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά τη λειτουργία Fastboot

Επικαιροποιημένες πληροφορίες: ΜΗΝ αφαιρείτε την μπαταρία από το PDM OmniPod DASH για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και αν ο οδηγός χρήσης ή η οθόνη του PDM το συνιστά για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Εάν βρεθείτε σε μια κατάσταση, όπου η αφαίρεση της μπαταρίας συνιστάται από τον οδηγό χρήσης, μην αφαιρέσετε την μπαταρία και επικοινωνήστε με τη Φροντίδα Πελατών.

Σχετικά με την υγρασία, τη θερμότητα ή τη ζημιά στην μπαταρία:

Κεφάλαιο 11: Φροντίδα του Pod και του PDM:

καθαρισμός του PDM με υγρό

εάν η μπαταρία παρουσιάζει παραμόρφωση, χρωματική μεταβολή ή υπερθέρμανση

εάν η μπαταρία πέσει κάτω

Επικαιροποιημένες πληροφορίες: Εάν το PDM βραχεί, πέσει, υποστεί ζημιά, διογκωθεί, αποκτήσει εξογκώματα ή υπερθερμανθεί κατά τη φόρτιση, κατά τη χρήση ή κατά την αποθήκευση, μην χρησιμοποιήσετε ή φορτίσετε το PDM. Ένα PDM που είναι ζεστό ή καίει θα πρέπει να μείνει αποσυνδεδεμένο και σε κατάσταση αδράνειας σε θερμοκρασία δωματίου πάνω σε μια μεταλλική επιφάνεια, έως ότου κρυώσει. Επικοινωνήστε άμεσα με τη Φροντίδα Πελατών.

Επικοινωνήστε με τη Φροντίδα Πελατών, εάν παρατηρήσετε τα εξής: η φόρτιση διαρκεί πολύ, η μπαταρία αποφορτίζεται πολύ γρήγορα, το PDM είναι πολύ ζεστό στο άγγιγμα, το PDM και/ή η μπαταρία διογκώνονται, αναδύεται οσμή αερίου από το PDM και/ή την μπαταρία ή ο φορτιστής τοίχου θερμαίνεται υπερβολικά.



PT-001274

PT-001274-AW Rev 001 11/22