

הוראות בטיחות הסוללה של Omnipod DASH®

יש לעדכן חלק מהוראות בטיחות הסוללה במדריך למשתמש שלך. עיין בעלון מצורף זה לקבלת הנחיות עדכניות לגבי סוללת Omnipod DASH® PDM.

בנושא טעינה:

- פרק 2: הגדרה ראשונית של ה-PDM: טעינת הסוללה
- פרק 11: טיפול ב-POD וב-PDM שלך: טעינה
- נספח: מפרט PDM: טמפרטורת טעינה

מידע מעודכן: השתמש רק במטען המיקרו USB המסופק על ידי Insulet כדי לטעון את ה-PDM שלך. צור קשר עם שירות הלקוחות אם אתה מבחין שהטעינה נמשכת זמן רב מדי או שהסוללה נגמרת מהר מדי. אין לטעון את ה-PDM אם טמפרטורת הסביבה היא 40°C (104°F) או יותר. אין לטעון את ה-PDM באור שמש ישיר.

בנושא הסרת הסוללה מה-PDM:

- פרק 9: התאמת הגדרות: הסרת סוללה
 - פרק 10: התרעות, הודעות, שגיאות תקשורת: התרעות שלא ניתן להשתיק
 - פרק 11: טיפול ב-POD וב-PDM שלך: לאחסון ה-PDM לטווח ארוך לחשיפה למים להשלכת הסוללה כפסולת
- אם הסוללה נראית מעוותת, משנה צבע או מתחממת יתר על המידה אם אתה מחליף סוללה לאחר הגדרה ראשונית אם ה-PDM מפסיק להגיב במהלך Fastboot Mode
- נספח:

מידע מעודכן: אין להסיר את הסוללה מה-Omnipod DASH PDM מכל סיבה שהיא, גם אם המדריך למשתמש או מסך ה-PDM ממליצים על כך לפתרון בעיות. במקרה שהומלץ להסיר את הסוללה במדריך למשתמש, אל תסיר את הסוללה, ופנה לשירות הלקוחות.

בנושא לחות, חום או נזק לסוללה:

- פרק 11: טיפול ב-POD וב-PDM שלך: ניקוי ה-PDM עם נוזל
- אם הסוללה נראית מעוותת, משנה צבע או מתחממת יתר על המידה הפלת הסוללה

מידע מעודכן: אם ה-PDM נרטב, או אם ה-PDM נפל, ניזוק, התנפח, בולט או מתחמם יתר על המידה בזמן הטעינה, במהלך השימוש או באחסון, אין להשתמש ב-PDM או להטעין אותו. השאר PDM חם או לוהט מנותק מהחשמל ולא פעיל בטמפרטורת החדר על משטח מתכת עד שהוא מתקרר. פנה מיד לשירות הלקוחות

צור קשר עם שירות הלקוחות אם אתה מבחין בדברים הבאים: הטעינה נמשכת זמן רב מדי, פריקה [התרוקנות] מהירה מדי של הסוללה, ה-PDM חם מדי למגע, התנפחות של ה-PDM ו/או הסוללה, ריח של גז המגיע מה-PDM ו/או הסוללה, או שמטען הקיר מתחמם יותר מדי.

