

Alcune istruzioni per l'utilizzo sicuro della batteria contenute nel Manuale d'uso devono essere aggiornate. Si prega di fare riferimento a questo foglietto per le istruzioni aggiornate sulla batteria del PDM Omnipod DASH®.

Per quanto riguarda la ricarica:

Capitolo 2: Configurazione iniziale del PDM: ricarica della batteria

Capitolo 11: Cura e manutenzione del PDM e del Pod: ricarica

Appendice: Specifiche del PDM: temperatura di ricarica

Informazioni aggiornate: per caricare il PDM utilizzare esclusivamente il caricabatterie micro-USB fornito da Insulet. Contattare l'Assistenza clienti se si nota che la ricarica dura troppo a lungo o che la batteria si esaurisce troppo rapidamente. Non caricare il PDM se la temperatura circostante è superiore a 40 °C (104 °F). Non caricare il PDM esponendolo alla luce solare diretta.

Per quanto riguarda la rimozione della batteria dal PDM:

Capitolo 9: Regolazione delle impostazioni: rimozione della batteria

Capitolo 10: Allarmi, notifiche ed errori di comunicazione: allarmi che non possono essere silenziati

Capitolo 11: Cura e manutenzione del PDM e del Pod:

per la conservazione a lungo termine del PDM

per l'esposizione all'acqua

per lo smaltimento della batteria

se la batteria presenta deformazioni, cambia colore o si surriscalda

se si sostituisce la batteria dopo la configurazione iniziale

Appendice: se il PDM smette di rispondere durante la Modalità di avvio rapido

Informazioni aggiornate: NON rimuovere la batteria dal PDM Omnipod DASH per nessuna ragione, neanche se il Manuale d'uso o la schermata del PDM lo raccomandano per la risoluzione dei problemi. Se si verifica una situazione in cui il Manuale d'uso raccomanda la rimozione della batteria, non rimuovere la batteria e contattare l'Assistenza clienti.

Per quanto riguarda umidità, calore o danni alla batteria:

Capitolo 11: Cura e manutenzione del PDM e del Pod:

pulizia del PDM con liquido

se la batteria presenta deformazioni, cambia colore o si surriscalda
caduta della batteria

Informazioni aggiornate: se il PDM si bagna o se cade, si danneggia, presenta un rigonfiamento, appare bombato o si surriscalda durante la ricarica, l'uso o la conservazione, non utilizzare né ricaricare il PDM. Lasciare il PDM caldo o bollente scollegato e inattivo a temperatura ambiente su una superficie metallica finché non si raffredda. Contattare immediatamente l'Assistenza clienti.

Contattare l'Assistenza clienti se si nota quanto segue: ricarica troppo lunga, esaurimento eccessivamente rapido della batteria, PDM troppo caldo al tatto, rigonfiamento del PDM e/o della batteria, odore di gas proveniente dal PDM e/o dalla batteria o surriscaldamento eccessivo del caricabatterie da parete.

