

Säkerhetsinstruktioner för Omnipod DASH® batteri



Vissa säkerhetsinstruktioner för batteri i användarhandboken behöver uppdateras. Se denna bilaga med uppdaterade instruktioner om Omnipod DASH® PDM batteriet.

Om laddningen:

Kapitel 2: Första inställningen av PDM: ladda batteriet

Kapitel 11: Skötsel av Pod och PDM: laddning

Bilaga: PDM-specifikationer: temperatur vid laddning

Uppdaterad information: Använd endast mikro-USB-laddaren som tillhandahålls av Insulet för laddning av PDM. Kontakta kundtjänst om du upptäcker att laddningen tar för lång tid eller att batteriet laddas ur för snabbt. Ladda inte PDM om den omgivande temperaturen är över 40 °C (104 °F). Ladda inte PDM i direkt solljus.

Om att ta bort batteriet från PDM:

Kapitel 9: Ändra inställningar: borttagning av batteriet

Kapitel 10: Larm, meddelanden, kommunikationsfel: larm som inte kan tystas

Kapitel 11: Skötsel av Pod och PDM:

för långtidsförvaring av PDM

för exponering för vatten

för kassering av batteriet

om batteriet är deformerat, färgen har ändrats eller batteriet överhettas

om du byter ut batteriet efter första installationen

Bilaga: om PDM slutar att svara under fastboot-läget

Uppdaterad information: Ta INTE av någon orsak bort batteriet från Omnipod DASH PDM, även om användarhandboken eller PDM-skärmen rekommenderar det för felsökning. Ta inte bort batteriet om du är i en situation där användarhandboken rekommenderar borttagning av batteriet och kontakta kundtjänst.

Om batteriet är fuktigt, varmt eller skadat:

Kapitel 11: Skötsel av Pod och PDM:

rengöring av PDM med vätska

om batteriet är deformerat, färgen har ändrats eller batteriet överhettas

om du tappar batteriet

Uppdaterad information: Använd inte eller ladda inte PDM om PDM blir våt eller om PDM tappas, skadas, sväller upp, buktar ut eller överhettas under laddning, vid användning eller vid förvaring. Lämna en varm eller het PDM urkopplad och inaktiv vid rumstemperatur på en yta av metall tills den har svalnat. Kontakta kundtjänst omedelbart.

Kontakta kundtjänst om du märker något av följande: laddningen tar för lång tid, batteriet laddas ur för snabbt, PDM är för varm att ta i, PDM och/eller batteriet deformerar, det luktar gas från PDM och/eller batteriet eller den nätanslutna laddaren blir för varm.



PT-001271

PT-001271-AW Rev 001 11/22