

يلزم تحديث بعض التعليمات حول سلامة البطارية الواردة في دليل المستخدم الخاص بك. راجع هذه النشرة للحصول على معلومات محدثة حول بطارية جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري (PDM) من Omnipod DASH®.

بخصوص الشحن:

- الفصل 2: الإعداد الأولي لجهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري: شحن البطارية
الفصل 11: الاعتناء باللاصقة وجهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري: الشحن الملحق: مواصفات جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري: درجة حرارة الشحن

المعلومات المحدثة: لا تستخدم إلا شاحن (micro-USB) من شركة إنسوليت (Insulet) لشحن جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري الخاص بك. تواصل مع خدمة العناية بالزبائن إذا لاحظت أن عملية الشحن تستغرق وقتًا طويلاً أو أن البطارية تنفذ بسرعة كبيرة. لا تشحن جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري إذا كانت درجة حرارة البيئة المحيطة أعلى من 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية). لا تشحن جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري تحت أشعة الشمس المباشرة.

بخصوص نزع البطارية من جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري:

- الفصل 9: ضبط الإعدادات: إزالة البطارية
الفصل 10: التنبيهات، والإشعارات، وأخطاء الاتصال: التنبيهات التي لا يمكن ضبطها على الوضع الصامت
الفصل 11: الاعتناء باللاصقة وجهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري: لتخزين جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري أجلاً طويلاً

بالنسبة للتعرض للماء
للتخلص من البطارية

في حالة ظهور أي تشوه على البطارية أو تغيير في لونها أو ارتفاع في درجة حرارتها بشكل مفرط إذا كنت ستستبدل بطارية ما بعد ضبط الإعدادات لأول مرة

ملحق: إذا توقف جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري أثناء وضع التمهيد السريع (Fastboot)

المعلومات المحدثة: لا تنزع البطارية من جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري من Omnipod DASH لأي سبب كان، حتى وإن كان دليل المستخدم أو شاشة الجهاز يوصيان بذلك في حالات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. في حالة مواجهة موقف يوصي فيه دليل المستخدم بنزع البطارية، فلا تفعل بذلك وتواصل مع خدمة العناية بالزبائن.

بخصوص تعرض البطارية للرطوبة أو الحرارة أو التلف:

- الفصل 11: الاعتناء باللاصقة وجهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري: تنظيف جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري باستخدام السوائل
في حالة ظهور أي تشوه على البطارية أو تغيير في لونها أو ارتفاع في درجة حرارتها ارتفاعاً مفرطاً
سقوط البطارية

المعلومات المحدثة: في حالة تعرض جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري للبلل، أو في حالة سقوطه أو تعرضه للتلف أو للتضخم أو للانتفاخ أو ارتفاعت درجة حرارته ارتفاعاً مفرطاً أثناء الشحن أو عند الاستخدام أو عند تخزينه، فلا تستخدم جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري ولا تشحنه. اترك جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري الدافئ أو الساخن غير موصول بالطاقة وفي وضع إيقاف تشغيل، في درجة حرارة الغرفة، على سطح معدني حتى يبرد. تواصل على الفور مع خدمة العناية بالزبائن.

اتصل بخدمة العملاء إذا لاحظت ما يلي: يستغرق الشحن وقتاً طويلاً، أو أن تفريغ البطارية يحدث بسرعة كبيرة، أو أن يكون جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري ساخناً جداً إلى الحد الذي يتعدى لمسه، أو في حالة أي تضخم في جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري أو البطارية، أو انبعاث رائحة غاز قادمة من جهاز الإدارة الذاتية لمرضى السكري أو البطارية أو كليهما، أو إذا كان شاحن الحائط ساخناً جداً.

