

Omnipod DASH®

Instructions relatives à la sécurité de la batterie



Certaines instructions relatives à la sécurité de la batterie dans votre guide de l'utilisateur ont besoin d'être actualisées. Référez-vous à ce guide pour des instructions à jour concernant la batterie du PDM Omnipod DASH®.

Concernant la recharge :

Chapitre 2 : configuration initiale du PDM : recharge de la batterie
Chapitre 11 : prendre soin de votre Pod et de votre PDM : recharge
Annexe : spécifications du PDM : température de recharge

Informations actualisées : utilisez uniquement le chargeur micro-USB fourni par Insulet pour charger votre PDM. Contactez le Service clients si vous remarquez que la recharge prend trop de temps ou que la batterie se vide trop rapidement. Ne rechargez pas le PDM si la température environnante est supérieure à 40 °C (104 °F). Ne rechargez pas le PDM en l'exposant directement à la lumière du soleil.

Concernant le retrait de la batterie du PDM :

Chapitre 9 : ajustement des réglages : retrait de la batterie
Chapitre 10 : alarmes, notifications, erreurs de communication : les alarmes ne peuvent pas être mises en mode silencieux
Chapitre 11 : prendre soin de votre Pod et de votre PDM :
pour le stockage prolongé du PDM
pour l'exposition à l'eau
pour l'élimination de la batterie
si la batterie présente une déformation, un changement de couleur, ou une surchauffe
si vous remplacez une batterie après les premiers réglages
Annexe : si le PDM ne répond plus en mode de démarrage rapide

Informations actualisées : NE retirez PAS la batterie du PDM Omnipod DASH pour quelque raison que ce soit, même si le guide de l'utilisateur ou l'écran du PDM le recommande pour le dépannage. Si vous rencontrez une situation dans laquelle le retrait de la batterie est recommandé dans le guide de l'utilisateur, ne retirez pas la batterie et contactez le Service clients.

Concernant l'exposition à l'humidité, à la chaleur ou l'endommagement de la batterie :

Chapitre 11 : prendre soin de votre Pod et de votre PDM :
nettoyage du PDM avec des liquides
si la batterie présente une déformation, un changement de couleur, ou une surchauffe
chute de la batterie

Informations actualisées : si le PDM est mouillé, ou s'il tombe au sol, est endommagé, gonflé, bombé ou présente une surchauffe pendant la recharge, l'utilisation ou le stockage, n'utilisez ou ne rechargez pas le PDM. Débranchez un PDM chaud ou brûlant et laissez-le refroidir à température ambiante sur une surface métallique. Contactez immédiatement le Service clients.

Contactez le Service clients si vous remarquez l'une des occurrences suivantes : temps de recharge trop long, déchargement de la batterie trop rapide, le PDM est trop chaud au toucher, gonflement du PDM et/ou de la batterie, odeur de gaz émanant du PDM et/ou de la batterie, ou chargeur mural trop chaud.

