



Manuale d'uso tecnico

Omnipod DASH® Manuale



Modello del PDM: INT1-D001-MG

Numero di serie _____

Data di avvio del Sistema per la gestione
insulinica Omnipod DASH® _____

Referente medico

Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

Indirizzo e-mail _____

Infermiere/Assistente

Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

Indirizzo e-mail _____

Assicurazione medica

Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

Numero polizza _____

Farmacia

Nome _____




Indirizzo _____

Telefono _____




Indirizzo e-mail _____




Australia

 omnipodAUS@insulet.com
 1800954074
 +61-272084352




België / Belgique / Belgien

 omnipod-BE@insulet.com
 0800 17682
 +32 289 62 983




Canada

 omnipodcanada@insulet.ca
 1-855-POD-INFO
(1-855-763-4636)
 +1 513-562-6446




Danmark

 omnipod-DK@insulet.com
 80 25 36 09
 +45 70 28 10 24




Deutschland

 omnipod-DE@insulet.com
 0800 182 1629
 +49 8995 467389




Ellada / Ελλάδα

 omnipod-GR@insulet.com
 00800 128 542
 +30-217-000-9999




France

 omnipod-FR@insulet.com
 0800 918442
 +33 1 85 65 37 47




Hrvatska

 omnipod-HR@insulet.com
 0800 806 259
 +385 91 2358040




Ísland

 sykursyki@fastus.is
 +354 580 3900
 (+354) 580 3900



Israel / إسرائيل / ישראל

 omnipod-IL@insulet.com
 1 809 216 160
 +972 369 00300


Italia


 omnipod-IT@insulet.com
 800 587 270
 +39 0524 587 334


Kingdom of Saudi Arabia / المملكة العربية السعودية

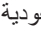 omnipod-SA@insulet.com
 00966558491266

Kuwait / الكويت

 omnipod@sultan.com.kw


 +965 97297678

 +965 66134426

Lëtzebuerg / Luxemburg / Luxembourg

 omnipod-LU@insulet.com

 800 24368

 +352 27871306

Nederland


 omnipod-NL@insulet.com

 0800 022 9512

 +31 20 798 9337

Norge / Noreg

 omnipod-NO@insulet.com


 800 22 612

 +47 22 20 60 00

Österreich

 omnipod-AT@insulet.com

 0800 281 248


 +43 72 088 3504

Qaṭar / قطر


 Customer@aldanahmedical.com

 + 974 5039 5048

Schweiz / Suisse / Svizzera


 omnipod-CH@insulet.com

 0800 89 76 18

 +41 44 585 9019

Suomi / Finland

 omnipod-FIN@insulet.com

 0800 91 2942

 +358 985 653 300

Sverige


 omnipod-SE@insulet.com

 020 033 6809

 +46 8 601 24 40

Türkiye

 omnipod-TR@insulet.com

 00800 142 030 007

 +90 850 480 53 00

United Arab of Emirates /


دولة الامارات العربية المتحدة

 omnipod-AE@insulet.com

 800 018 7092

United Kingdom

 omnipod-GB@insulet.com

 0800 011 6132

 +44 20 3887 1709

© 2019-2024 Insulet Corporation. Insulet, Omnipod, il logo Omnipod, DASH, il logo DASH e Podder sono marchi commerciali o marchi registrati di Insulet Corporation negli Stati Uniti d'America e in diverse altre giurisdizioni. Tutti i diritti riservati. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Pertanto, eventuali impieghi di tali marchi da parte di Insulet Corporation sono effettuati in base a licenza. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. L'utilizzo di marchi di terze parti non costituisce un'approvazione né implica una relazione o altra affiliazione. Informazioni sul brevetto disponibili sul sito www.insulet.com/patents.

Sommario

Introduzione	xi
Informazioni su questo <i>Manuale d'uso tecnico</i>	xi
Indicazioni e controindicazioni	xii
Avvertenze generali	xii
Lavorare con il referente medico	xiv
Funzioni di sicurezza	xv
1 Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®	1
Benvenuto	1
Il Pod e il PDM	2
Navigazione dei display e immissione delle informazioni	4
Nozioni fondamentali relative al touchscreen	4
Immissione di numeri e testo	5
Icone di navigazione e notazione abbreviata per la navigazione	7
La barra di stato	9
Blocco schermo e schermata PIN del PDM	10
La schermata Home del PDM	11
Scheda Dashboard	12
Scheda Basale / Scheda Basale temporanea	13
Scheda Info Pod	14
Sezione Ultima glicemia	15
Sezione Ultimo bolo	16
Pulsante Bolo	16
Menu della Home Page	17
Messaggi del PDM per l'utente	19
Allarmi	19
Notifiche	19
Messaggi di conferma	19
2 Configurazione iniziale del PDM	21
Preparazione per le sezioni di training	21
Impostazioni generali del PDM	22
Attivazione e personalizzazione del PDM	23
Immissione di un PIN	24
Impostazione dell'ora e del fuso orario	25
Impostazione della data	26
Impostazioni dell'insulina basale	26
Velocità basale massima	26

Creazione di un programma basale.....	27
Configurazione delle basali temporanee	29
Impostazioni della glicemia.....	30
Limiti superiore e inferiore dell'obiettivo glicemico	30
Impostazioni del suggeritore di bolo	30
Attivazione o disattivazione del suggeritore di bolo.....	30
Target glicemico e valori "Correggere verso l'alto"	31
Glicemia minima per suggeritore	32
Rapporto insulina/carbo	33
Fattore di correzione	33
Correzione inversa.....	34
Durata dell'azione dell'insulina.....	34
Altre impostazioni dei boli	35
Bolo massimo	35
Impostazione Bolo prolungato	35
Configurazione PDM completa.....	35

Manuale d'uso tecnico

3 Sostituzione del Pod	37
Avvio del processo di sostituzione del Pod	37
Prima volta che si attiva un Pod.....	38
Disattivazione di un Pod attivo	38
Nessun Pod attivo.....	39
Passaggi preliminari per la sostituzione del Pod.....	40
Riempimento della siringa con insulina	41
Riempimento, abbinamento e applicazione del Pod	42
Riempimento del Pod con l'insulina	42
Abbinamento del PDM e del Pod	43
Preparazione del sito del Pod	44
Rimozione del cappuccio dell'ago del Pod	46
Applicazione del Pod.....	47
Avvio dell'erogazione di insulina.....	48
Controllo del sito di infusione.....	49
Evitare infezioni nel sito di infusione.....	50
Ulteriori informazioni sull'utilizzo del Pod	51
4 Immissione dei valori della glicemia.....	53
Informazioni relative al controllo della glicemia.....	53
Immissione del valore della glicemia	53
Aggiunta di tag ai valori della glicemia	55
Modalità di visualizzazione dei valori della glicemia	56

5 Erogazione di un bolo di insulina.....	59
Erogazione di un bolo con il suggeritore di bolo	59
Immissione dei dati del pasto	60
Immettere il valore della glicemia.....	61
Erogazione di un bolo prolungato o immediato	62
Bolo calcolato manualmente	65
Monitoraggio del progresso di un bolo	67
Alterazione di un'erogazione bolo.....	68
6 Modifica dell'erogazione di insulina basale	71
Utilizzo di basali temporanee	71
Attivazione di una basale temporanea	71
Attivare una basale temporanea preimpostata.....	73
Annullamento di una basale temporanea	74
Passaggio a un programma basale diverso	74
Sospensione e ripresa dell'erogazione di insulina basale	75
7 Gestione di programmi e preimpostazioni	79
Programmi basali	79
Creazione di un nuovo programma basale	79
Revisione di tutti i programmi basali.....	80
Modifica o rinomina di un programma basale	81
Eliminazione di un programma basale	82
Basali temporanee preimpostate.....	83
Creazione di una nuova basale temporanea preimpostata	83
Modifica o rinomina di una basale temporanea preimpostata	84
Eliminazione di una basale temporanea preimpostata	84
Boli preimpostati	85
Creazione di un nuovo bolo preimpostato	85
Modifica o rinomina di un bolo preimpostato.....	86
Eliminazione di un bolo preimpostato.....	86
8 Visualizzazione dei registri del PDM.....	87
Schermate Notifiche e allarmi	87
Panoramica della schermate Cronologia insulina e glicemia	88
Selezione della data.....	89
Sezione di riepilogo.....	90
Sezione dei dettagli	92
Dettagli relativi alla glicemia	93
Dettagli relativi al bolo	93
Dettagli relativi ai carboidrati.....	95
Dettagli relativi alla velocità basale.....	95
Dettagli relativi al Pod	96
Dettagli relativi alla sospensione e alla ripresa dell'insulina	96

Dettagli relativi alla modifica dell'ora	96
Dettagli relativi alla modifica della data	96
9 Regolazione delle impostazioni	97
Impostazioni del dispositivo PDM	97
Connettività di rete	97
Sul display appare	98
Blocco schermo	98
Data e ora e lingua	99
Diagnostica	101
Impostazioni dei siti del Pod	102
Impostazioni dei promemoria	102
Scadenza del Pod	103
Livello del serbatoio quasi vuoto	103
Spegnimento automatico del Pod	103
Promemoria Controlla glicemia dopo bolo	104
Promemoria bolo mancato	104
Promemoria di assicurazione	106
Promemoria programma	106
Promemoria personalizzati	107
Impostazioni della glicemia - Intervallo obiettivo glicemico	108
Impostazioni della basale e delle basali temporanee	109
Velocità basale massima	109
Basale temporanea	109
Impostazioni di erogazione dei boli	110
Bolo massimo	110
Bolo prolungato	111
Impostazioni del suggeritore di bolo	111

Riferimento

10 Allarmi, notifiche ed errori di comunicazione	115
Panoramica	115
Risposta agli allarmi	116
Risposta alle notifiche	116
Priorità e prevedibilità di allarmi e notifiche	118
Segnali acustici e vibrazioni	118
Elenco degli allarmi di pericolo	120
Elenco dei segnali di notifica	122
Elenco delle notifiche	124
Elenco dei segnali informativi	125
Errori di comunicazione	127
Errore durante l'annullamento di un bolo	127

Errore durante l'invio di istruzioni per l'insulina al Pod.....	128
Errore durante l'attivazione di un Pod.....	129
Errore durante la disattivazione di un Pod.....	129
Silenziamiento di un allarme non risolto.....	130
Allarme del Pod.....	130
Allarme del PDM.....	130
11 Cura e manutenzione del PDM e del Pod	131
Cura e manutenzione del Pod e dell'insulina.....	131
Conservazione del Pod e dell'insulina.....	131
Pod e ambiente esterno.....	132
Pulizia del Pod.....	132
Cura e manutenzione del PDM.....	133
Conservazione del PDM.....	133
Il PDM e l'ambiente esterno.....	133
Pulizia del PDM.....	134
Se il PDM cade.....	135
Cura e manutenzione della batteria del PDM.....	135
Utilizzo sicuro della batteria del PDM.....	136
Messaggi del PDM relativi alla batteria che potrebbero essere visualizzati.....	138
Carica della batteria del PDM.....	138
Inserimento della batteria del PDM durante la configurazione iniziale.....	139
12 Funzionamento del PDM e del Pod	141
Interazioni tra PDM e Pod.....	141
Azioni del Pod controllate dal PDM.....	141
Azioni che il Pod può eseguire senza input dal PDM.....	144
Spegnimento automatico.....	144
Erogazione di insulina basale.....	145
Programmi basali.....	145
Velocità basali temporanee.....	146
Metodi per interrompere temporaneamente l'erogazione di insulina.....	150
Bolo immediato e bolo prolungato.....	151
Informazioni sui boli calcolati manualmente.....	152
Il Suggeritore di bolo.....	152
Boli del Suggeritore di bolo.....	152
Quando il Suggeritore di bolo non funziona.....	153
Fattori utilizzati nei calcoli del Suggeritore di bolo.....	154
Insulina attiva (IOB).....	157
Equazioni del Suggeritore di bolo.....	159
Regole del Suggeritore di bolo.....	160
Panoramica della schermata CALCOLI del Suggeritore di bolo.....	161

Esempi del Suggeritore di bolo	163
Calcoli per i riepiloghi della cronologia	168
Riepiloghi della glicemia	168
Riepiloghi dell'erogazione di insulina	169
13 Vivere con il diabete	171
Attività quotidiane	171
Controlli del sito di infusione	171
Eseguire controlli frequenti della glicemia	172
Pronti per le emergenze	173
Viaggi e vacanze	173
Pronta accessibilità dei materiali di consumo	174
Piano per il cambio di fuso orario	174
Aeroporti e voli	175
Come evitare valori bassi, alti e DKA	176
Precauzioni generali	176
Ipoglicemia (livello basso di glicemia)	176
Iperglicemia (glicemia alta)	180
Chetoacidosi diabetica (DKA)	183
Gestione delle situazioni speciali	184
Giorni di malattia	184
Esercizio fisico, attività sportiva o lavoro intenso	185
Raggi X, RM e scansioni TC	186
Intervento chirurgico o ricovero ospedaliero	186
Appendice	187
Risoluzione dei problemi - Avvio del PDM	187
Riepilogo delle impostazioni e delle opzioni	188
Specifiche del Pod	190
Specifiche del PDM	191
Protezione da sovrainfusione o sottoinfusione	193
Simboli delle etichette del sistema Omnipod DASH®	194
Direttiva sui dispositivi medici	196
Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR)	196
Reclami sui dispositivi	196
Dettagli del Rappresentante autorizzato nell'UE	196
Avviso riguardante le interferenze relative al sistema Omnipod DASH®	197
Compatibilità elettromagnetica	197
Garanzia per il Personal Diabetes Manager del Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH® e i Pod (valida per tutti i Paesi ad eccezione di Canada e Stati Uniti)	199
Glossario	203
Indice	209

Introduzione

Informazioni su questo *Manuale d'uso tecnico*

Attenzione: questo *Manuale d'uso tecnico* è destinato unicamente al Personal Diabetes Manager (PDM) modello PDM-INT1-D001-MG. Per individuare la versione del proprio PDM, girarlo. Se è presente la dicitura "PDM-INT1-D001-MG" sul retro del PDM, questo è il *Manuale d'uso tecnico* corretto. Se la dicitura non è presente, contattare il servizio di Assistenza clienti.

Nota: le immagini delle schermate riportate nel presente *Manuale d'uso tecnico* hanno uno scopo puramente illustrativo e non devono essere considerate come indicazioni per le impostazioni dell'utente. Consultare sempre il proprio referente medico per determinare le impostazioni più adatte alla propria condizione.

Le cure e i trattamenti sanitari sono un ambito complesso che richiede i servizi di referenti medici qualificati. Il presente *Manuale d'uso tecnico* ha uno scopo puramente informativo e non deve essere considerato fonte di raccomandazioni o consigli medici o sanitari destinati alla diagnosi, al trattamento o a qualsiasi altra esigenza individuale. Il *Manuale d'uso tecnico* non sostituisce in alcun modo le raccomandazioni, i consigli e/o i servizi medici o sanitari forniti da un referente medico qualificato. Non fare in alcun modo affidamento sul presente *Manuale d'uso tecnico* per questioni relative alla propria salute personale e alle decisioni e alle cure associate. Tutte le decisioni e le cure relative alla propria salute personale devono essere discusse con un referente medico qualificato che sia a conoscenza delle esigenze individuali dell'utente.

Il presente *Manuale d'uso tecnico* viene aggiornato periodicamente. Visitare omnipod.com per esaminare la versione più recente e per altre informazioni utili. Per accedere a questo *Manuale d'uso tecnico* in altre lingue, consultare il sito omnipod.com.

Termine	Significato
Avvertenza	Segnala condizioni che potrebbero causare la morte o lesioni gravi o altre reazioni avverse gravi associate all'utilizzo anche improprio del dispositivo.
Attenzione	Segnala un eventuale problema con il dispositivo associato all'utilizzo anche improprio dello stesso. I problemi possono riguardare malfunzionamenti o guasti del dispositivo, danni al dispositivo o ad altri oggetti.
Nota	Fornisce informazioni utili.
Consiglio	Offre consigli per un uso ottimale del dispositivo.

Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni per l'uso

Il sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH® è destinato alla somministrazione sottocutanea di insulina a velocità impostate e variabili per la gestione del diabete mellito in pazienti insulino-dipendenti.

Il beneficio clinico previsto del sistema Omnipod DASH è il miglioramento del controllo glicemico in soggetti affetti da diabete che necessitano di trattamento con insulina.

Controindicazioni

La terapia insulinica mediante microinfusione NON è consigliata nei soggetti che:

- Non riescono a monitorare i livelli glicemici come raccomandato dal proprio referente medico
- Non riescono a mantenersi in contatto con il proprio referente medico
- Non riescono a usare il sistema Omnipod DASH® secondo le istruzioni

Avvertenze generali

Avvertenze:

insulina U-100 ad azione rapida: il sistema Omnipod DASH® è progettato per l'uso di insulina U-100 ad azione rapida. I seguenti analoghi dell'insulina ad azione rapida U-100 sono stati testati e giudicati idonei per l'uso sicuro nel Pod: NovoLog®/NovoRapid® (insulina aspart), Fiasp® (insulina aspart), Trurapi®/Insulin aspart Sanofi® (insulina aspart), Kirsty® (insulina aspart), Humalog® (insulina lispro), Lyumjev® (insulina lispro-aabc), Admelog®/Insulin lispro Sanofi® (insulina lispro) e Apidra® (insulina glulisina). NovoLog/NovoRapid, Fiasp, Trurapi/Insulin aspart Sanofi, Kirsty, Humalog, Lyumjev e Admelog/Insulin lispro Sanofi sono compatibili con il sistema Omnipod DASH® per un impiego fino a 72 ore (3 giorni). Apidra è compatibile con il sistema Omnipod DASH® per un massimo di 48 ore (2 giorni). Prima di utilizzare un diverso tipo di insulina con il sistema Omnipod DASH®, controllare l'etichetta sul flacone di insulina e consultare il proprio referente medico. Fare riferimento all'etichetta che accompagna l'insulina e ai consigli del referente medico per indicazioni sui tempi di sostituzione del Pod. Fiasp e Lyumjev offrono un assorbimento iniziale più veloce rispetto alle altre insuline U-100 ad azione rapida; consultare sempre il proprio operatore sanitario e l'etichetta dell'insulina prima di utilizzarla.

Avvertenze:

Leggere tutte le istruzioni fornite in questo *Manuale d'uso tecnico* prima di utilizzare il sistema Omnipod DASH®. Monitorare la glicemia sotto la guida del referente medico. Senza un monitoraggio adeguato, le condizioni di iperglicemia o ipoglicemia potrebbero passare inosservate.

Non consigliato per le persone con difetti dell'udito. Assicurarsi sempre di poter udire gli allarmi e le notifiche del Pod e del PDM.

L'uso del sistema Omnipod DASH® in modo diverso da quanto specificato nelle istruzioni può mettere a rischio la salute e la sicurezza dell'utente. In caso di domande o dubbi sull'utilizzo corretto del sistema Omnipod DASH®, contattare il referente medico.

Dopo l'utilizzo, alcune parti del dispositivo sono considerate biopericolose e possono potenzialmente trasmettere malattie infettive.

Non tentare di alterare, modificare o disassemblare nessuna parte del sistema Omnipod DASH®; Tali operazioni possono mettere a rischio la salute e la sicurezza dell'utente.

Se si avvertono sintomi che non sono congruenti con i risultati della misurazione della glicemia e ci si è attenuti alle istruzioni descritte nel presente *Manuale d'uso tecnico*, contattare immediatamente il referente medico.

Il sistema Omnipod DASH® NON va utilizzato in condizioni di pressione atmosferica bassa (inferiore a 700 hPA). Ad esempio durante le arrampicate in montagna o in luoghi in cui si vive o si soggiorna ad altitudini superiori a 3.000 metri (10.000 piedi).

Il sistema Omnipod DASH® NON va utilizzato in ambienti ricchi di ossigeno (più del 25% di ossigeno) o con pressione atmosferica elevata (superiore a 1.060 hPA), due condizioni che possono verificarsi all'interno di una camera iperbarica. Le camere iperbariche, o camere ad alta pressione, sono talvolta utilizzate per favorire il processo di guarigione delle ulcere diabetiche o per curare le intossicazioni da monossido di carbonio, certi tipi di infezioni delle ossa e dei tessuti e la malattia da decompressione.

Lavorare con il referente medico

La terapia con microinfusore di insulina richiede il coinvolgimento sostanziale di un assistente, in particolare nei bambini. Collaborare con il proprio referente medico al fine di definire le linee guida e le impostazioni per la gestione del diabete che meglio si adattano alle proprie esigenze. I parametri da includere sono i seguenti:

rapporto insulina/carboidrati (IC): numero di grammi di carboidrati coperti da un'unità di insulina. Se, ad esempio, il rapporto insulina/carboidrati è di 1:15, occorrerà erogare un'unità di insulina per coprire 15 grammi di carboidrati ingeriti.

fattore di correzione (o fattore di sensibilità): di quanto un'unità di insulina abbassa la glicemia. Se, ad esempio, il fattore di correzione è 50, un'unità di insulina abbasserà la glicemia di 50 mg/dL.

target glicemico (valore target della glicemia): il livello glicemico che si desidera raggiungere. È possibile, ad esempio, voler mantenere la glicemia a un livello vicino a 100 mg/dL.

durata dell'azione dell'insulina: periodo durante il quale l'insulina rimane attiva e disponibile nel corpo dopo l'erogazione di un bolo pasto o di un bolo di correzione.

Il referente medico è una preziosa risorsa per l'utente. Nelle prime settimane o nei primi mesi di utilizzo, fare riferimento al proprio referente medico per ottenere informazioni importanti sul sistema Omnipod DASH®. In caso di dubbi sulla gestione del diabete successivamente all'avvio del sistema Omnipod DASH®, non esitare a contattare il referente medico.

Per domande di natura tecnica sull'impostazione o sul funzionamento del sistema Omnipod DASH® o per ordinare i prodotti e i materiali di consumo del sistema Omnipod DASH®, è possibile contattare il servizio di Assistenza clienti, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I recapiti del servizio di Assistenza clienti sono riportati sulla prima pagina del presente *Manuale d'uso tecnico*.

Il referente medico provvederà a fornire tutti gli strumenti e le istruzioni necessari per il corretto utilizzo del sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®. Man mano che si diventa attivamente coinvolti nella gestione del proprio diabete, è possibile godere dello straordinario grado di controllo, libertà e flessibilità reso possibile dal sistema Omnipod DASH®.

Essere coinvolti attivamente significa monitorare frequentemente i livelli glicemici, apprendere come utilizzare il sistema Omnipod DASH®, praticare tecniche adeguate e visitare regolarmente il proprio referente medico.

Funzioni di sicurezza

Le funzioni di sicurezza del sistema Omnipod DASH® includono:

Priming automatico, controlli di sicurezza e inserimento

Quando si attiva un nuovo Pod, il sistema Omnipod DASH® esegue il priming automatico e i controlli di sicurezza sul Pod, quindi inserisce la cannula (un tubicino sottile) e ne esegue il priming. Questi controlli di sicurezza richiedono solo alcuni secondi.

Il sistema Omnipod DASH® effettua anche controlli di sicurezza sul Personal Diabetes Manager (PDM) ogni volta che il PDM è attivato. Se viene rilevato un qualsiasi problema nel PDM, nel Pod o nella comunicazione tra i due, l'utente viene informato tramite vibrazioni o segnali acustici e appositi messaggi sul display.

Allarmi e notifiche

Per la sicurezza dell'utente, il sistema Omnipod DASH® emette una serie di allarmi e notifiche per attirare l'attenzione dell'utente o per avvisare di una situazione pericolosa. Per una descrizione degli allarmi e delle notifiche del PDM, vedere "Allarmi, notifiche ed errori di comunicazione" a pagina 117.

Nota: brevi messaggi di allarme e di notifica compaiono sulla schermata di blocco. È necessario sbloccare lo schermo e inserire il proprio numero di identificazione personale (PIN) per visualizzare tutti i messaggi di allarme.

Nota: attivare il PDM periodicamente per verificare che non siano presenti messaggi di notifica o allarme che richiedono l'intervento dell'utente.

Avvertenza: NON provare a utilizzare il sistema Omnipod DASH® senza avere prima ricevuto un'adeguata formazione. Una formazione insufficiente potrebbe mettere a rischio la salute e la sicurezza dell'utente.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 1

Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®

Benvenuto

Il Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH® è un sistema per l'erogazione continua di insulina in grado di offrire tutti i comprovati vantaggi della terapia di infusione sottocutanea continua di insulina (continuous subcutaneous insulin infusion, CSII).

Le funzioni del sistema Omnipod DASH® includono:

Assenza di tubi: non ci sono tubi che collegano il Pod e il Personal Diabetes Manager (PDM). È possibile indossare il Pod sotto gli abiti e portare il PDM con sé a parte. È possibile nuotare indossando il Pod e lasciare il PDM all'asciutto. Il Pod è impermeabile fino a 7,6 metri (25 piedi) e per un massimo di 60 minuti (IP28).

Suggeritore di bolo: se la glicemia è alta oppure se si ha intenzione di mangiare, il suggeritore di bolo del PDM è in grado di suggerire una dose del bolo in base alle impostazioni personalizzate dell'utente.

Valori del glucosio: è possibile immettere i valori della glicemia manualmente da un glucometro all'interno del PDM. In alternativa, è possibile immettere valori del glucosio da un CGM idoneo per il dosaggio dell'insulina.

Registrazione dei dati: il PDM registra fino a 90 giorni di informazioni, tra cui velocità basali, dosi bolo, carboidrati, allarmi e glicemie.

La sezione *Operazioni preliminari* di questo manuale fornisce una panoramica delle operazioni di base e di configurazione del sistema Omnipod DASH®, mentre nella sezione *Manuale d'uso tecnico* vengono fornite le istruzioni dettagliate per utilizzare il sistema Omnipod DASH®. Infine, nella sezione *Riferimenti* è disponibile una descrizione del funzionamento del sistema Omnipod DASH®.

Termini e convenzioni utilizzati nel presente *Manuale d'uso tecnico*

Display	Area del PDM in cui vengono visualizzati i menu, le istruzioni e i messaggi.
Menu	Elenco di opzioni sul display.
Icona	Immagine visualizzata sul display che indica un'opzione di menu o fornisce un'informazione.
Pulsante	Pulsante fisico del PDM, come ad esempio il pulsante di accensione. Inoltre, aree del display che possono essere toccate per eseguire un'azione.
Campo	Area di un display dove vengono immesse informazioni.

1 Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®

Il Pod e il PDM


Il sistema Omnipod DASH® è costituito da due componenti principali: il Pod, che eroga insulina all'interno del corpo, e il Personal Diabetes Manager (PDM), tramite cui l'utente controlla il Pod.

Il Pod

Il Pod è un dispositivo leggero che viene caricato di insulina e indossato a diretto contatto con il corpo. Il Pod riceve le istruzioni per l'erogazione di insulina dal PDM. Il Pod eroga l'insulina nel corpo attraverso un tubicino flessibile, detto cannula.

Il Pod aderisce alla pelle grazie a una pellicola adesiva, in modo simile a un cerotto.

Il Pod utilizzato con il sistema Omnipod DASH® è dotato di un cappuccio per l'ago.

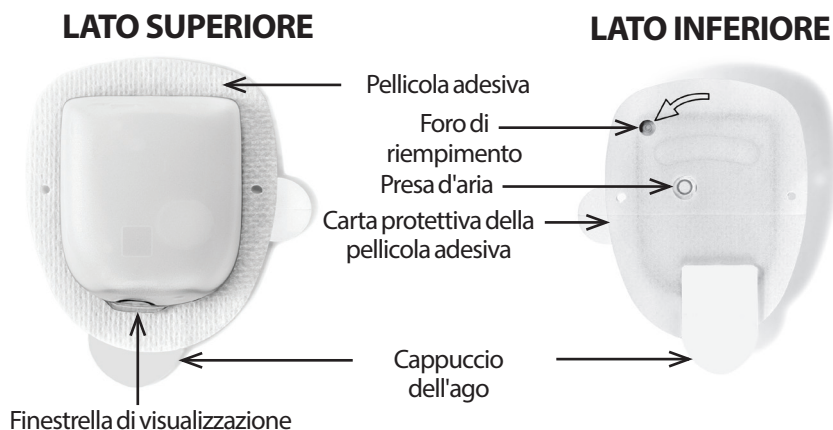

Il Personal Diabetes Manager (PDM)

Il PDM è un dispositivo portatile che controlla e monitora le operazioni del Pod utilizzando la tecnologia wireless.



Navigazione dei display e immissione delle informazioni

Questa sezione spiega come utilizzare il touchscreen e come immettere numeri o testo nel PDM, e come il presente *Manuale d'uso tecnico* descrive gli spostamenti tra le schermate del PDM.

Nozioni fondamentali relative al touchscreen

Il PDM visualizza messaggi e opzioni per l'utente sul touchscreen. Per interagire con il PDM, toccare il touchscreen o far scorrere il dito su di esso.

Toccare e scorrere

Le istruzioni di base per l'interazione con il touchscreen sono disponibili qui.



Toccare

Toccare il display, quindi sollevare il dito.



Scorrere

Toccare un punto di partenza e spostare il dito verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

Nota: si parla di "scorrimento" sia per l'azione compiuta dall'utente che per il risultato di tale azione. Quando si scorre verso l'alto, il display scorre verso l'alto per visualizzare gli elementi che attualmente non appaiono sul display.

Nota: un proteggi-schermo può causare una diminuzione della sensibilità del touchscreen.

Luminosità e timeout del display


Il display del PDM si disattiva (timeout) dopo un periodo di inattività. Per controllare le impostazioni relative alla luminosità e al timeout del display, vedere "Sul display appare" a pagina 100. La luminosità del display del PDM si attenua 6-10 secondi prima del timeout. Se la luminosità del display si attenua, toccare brevemente il display per impedirne il timeout.

Immissione di numeri e testo

Toccare i campi per immettere dati


I campi consentono all'utente di specificare i valori che devono essere utilizzati dal PDM. Toccando un campo modificabile (incorniciato da una casella o sottolineato), si apre una tastiera, un tastierino numerico o una rotella di scorrimento. Toccare le lettere o i numeri oppure far scorrere la rotella per immettere i dati da utilizzare in quel campo.

Toccare il testo blu sottolineato per visualizzare una schermata in cui è possibile vedere una spiegazione o immettere dati.

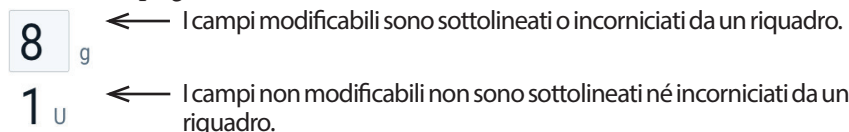


Utilizzo di una tastiera

Toccare all'interno di un campo modificabile per visualizzare la tastiera. Per visualizzare una tastiera diversa, toccare ?123, ABC o =< in basso a sinistra nella tastiera.

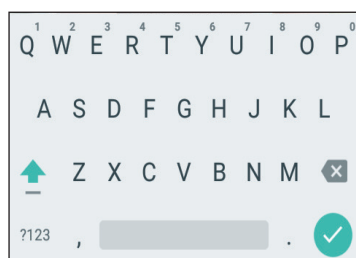


Toccare un carattere per aggiungerlo al campo di testo.

Toccare una lettera nella riga in alto per un secondo per visualizzare altre opzioni, ad esempio un numero o una lettera accentata come è.

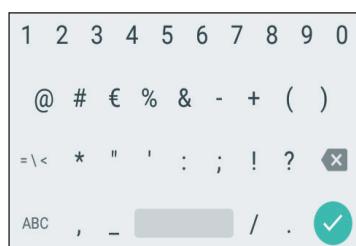

Toccare la freccia su (↑) per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa. Toccare la freccia su due volte in rapida successione per digitare in modalità TUTTE MAIUSCOLE. Toccare la freccia su ancora una volta per uscire dalla modalità TUTTE MAIUSCOLE.

Toccare l'icona della barra spaziatrice () per aggiungere uno spazio tra i caratteri.

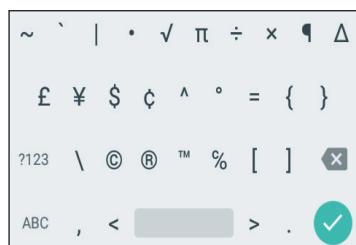

Toccare l'icona del backspace (↵) per eliminare la voce più recente dal campo di immissione.

Toccare il segno di spunta verde (✓) per chiudere la tastiera dopo aver inserito il testo.

Nota: il PDM non fa distinzione tra MAIUSCOLE e minuscole. In altre parole, per il PDM non c'è alcuna differenza tra "FineSettimana" e "finesettimana".

1 Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®

Utilizzo di un tastierino numerico

1	2	3	-
4	5	6	,
7	8	9	✕
.	0	—	✓

Toccare un numero per aggiungerlo al campo di immissione. Toccare la virgola (,) per aggiungere una virgola. Toccare l'icona del backspace (✕) per eliminare la voce più recente dal campo di immissione. Non vengono usati virgole (,), trattini (-) e trattini bassi (_).
Toccare il segno di spunta verde (✓) per accettare il numero immesso. È anche possibile toccare al di fuori del tastierino numerico per accettare il numero immesso.

Utilizzo di una rotella di scorrimento


0,85 U/h
0,80 U/h
0,75 U/h
0,70 U/h
0,65 U/h

Posizionare il dito sulla rotella di scorrimento. Spostare il dito verso l'alto per selezionare un numero più piccolo e verso il basso per selezionare un numero più grande. La velocità di scorrimento della rotella aumenta all'aumentare della velocità con cui si muove il dito.

Quando la selezione desiderata viene visualizzata al centro della rotella, selezionare il valore toccandolo o toccando all'esterno della rotella di scorrimento.

Utilizzo di un cursore

Utilizzare i cursori per selezionare un valore da una scala. Posizionare il dito sul piccolo cerchio aperto e muovere il dito finché non viene visualizzato il valore desiderato. A seconda della grafica del display, muovere il dito verticalmente o in circolo per spostare il cursore. Spostare il dito verso l'alto o in senso orario per un numero più grande e verso il basso o in senso antiorario per un numero più piccolo. Sollevare il dito quando viene visualizzato il valore desiderato.

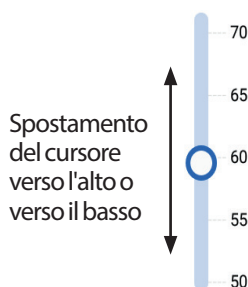



Spostamento del cursore intorno al cerchio




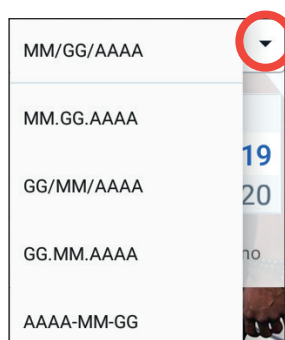
Selezione, aggiunta ed eliminazione di elementi

Interruttori

-  Toccare un interruttore per cambiare la selezione da un lato all'altro.
-  Gli interruttori consentono di scegliere tra due opzioni o di attivare o disattivare una funzione. L'interruttore è a destra e blu quando una funzione è attiva, mentre è a sinistra e grigio quando una funzione non è attiva.



Caselle di controllo, pulsanti di opzione ed elenchi a discesa

- ☒ Le caselle di controllo sono dei quadrati. Toccare una casella di controllo per selezionarla o deselectionarla. È possibile selezionare più di una casella di controllo in un elenco.
-  I pulsanti di opzione sono cerchi. Toccare un pulsante di opzione per selezionarlo. Viene visualizzato un punto all'interno del pulsante di opzione selezionato. È possibile selezionare solo un pulsante di opzione alla volta. Per deselectionare un pulsante di opzione, toccare il pulsante di opzione accanto a un'altra opzione.



Gli elenchi a discesa sono indicati da una freccia su o giù accanto a un elemento. L'impostazione attualmente selezionata viene visualizzata a sinistra della freccia a discesa. Per selezionare un'opzione diversa, toccare la freccia giù per visualizzare l'elenco a discesa delle opzioni. Per sostituire l'opzione attualmente selezionata nella parte superiore, toccare l'opzione desiderata nell'elenco a discesa.

Toccare la freccia su per nascondere l'elenco delle opzioni.

-  Un simbolo + in un cerchio indica che è possibile aggiungere un elemento a un elenco. Toccare il simbolo + per aggiungere l'elemento all'elenco.
-  Una x rossa in un cerchio indica che è possibile rimuovere un elemento da un elenco. Per rimuovere l'elemento, toccare la x rossa.

Icone di navigazione e notazione abbreviata per la navigazione

Il PDM comprende pulsanti sotto il display che possono essere utilizzati per la navigazione. Inoltre, alcune icone del display possono essere utilizzate per la navigazione.

1 Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®

Freccia indietro e pulsante indietro

Molte schermate hanno l'icona della freccia "indietro" nell'angolo in alto a sinistra. Toccare la freccia indietro per tornare alla schermata precedente.



Un altro modo per tornare alla schermata precedente è toccare il pulsante sinistro sotto il display del PDM.



Nota: i pulsanti al centro e a destra sotto il display del PDM non hanno alcuna funzione.

Icona delle opzioni



L'icona delle opzioni (⋮) viene visualizzata nella parte destra di determinati elenchi. Toccando l'icona delle opzioni viene visualizzato un elenco di opzioni relative all'elemento su quella riga.

Navigazione (notazione abbreviata)

Nel *Manuale d'uso tecnico* viene utilizzato il simbolo ">" per indicare lo spostamento da una schermata a un'altra. Ad esempio, la seguente notazione:

- Icona del menu (☰) > Pod > SOSTITUISCI POD

Indica all'utente di compiere le seguenti azioni:

1. Toccare l'icona del menu (☰) in alto a sinistra nella schermata Home.
2. Toccare Pod per aprire la schermata Pod.
3. Toccare SOSTITUISCI POD.

- Icona del menu (☰) > Cronologia: cronologia insulina e glicemia

Indica all'utente di compiere le seguenti azioni:

1. Toccare l'icona del menu (☰) in alto a sinistra nella schermata Home.
2. Espandere la voce Cronologia, se è compressa, toccando in qualsiasi punto della riga con la parola "Cronologia".

Una volta eseguita l'espansione, vengono visualizzate le selezioni per la schermata Cronologia allarmi e notifiche e la schermata Cronologia insulina e glicemia.

3. Toccare Cronologia insulina e glicemia.

- Icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria > Scadenza del Pod

Indica all'utente di compiere le seguenti azioni:


1. Toccare l'icona delle impostazioni (⚙️) in alto a destra nella schermata Home.
2. Toccare Promemoria.

3. Toccare Scadenza del Pod.

La barra di stato

La maggior parte delle schermate ha una barra di stato che mostra all'utente:

- Lo stato del Pod, inclusa la quantità di insulina rimasta in un Pod attivo
- Se una velocità basale temporanea è in esecuzione o meno
- Se il PDM vibrerà per determinate notifiche o meno
- L'icona di Bluetooth®
- Lo stato della batteria del PDM
- L'ora corrente

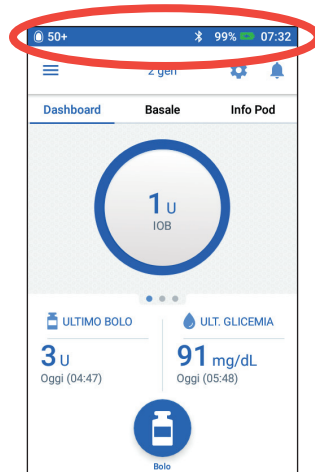

Definizioni delle icone della barra di stato:



Più di 50 unità nel Pod



Modalità aereo attivata



Tra 50 e 26 unità nel Pod



Modalità vibrazione attivata



Tra 25 e 5 unità nel Pod



Impostazione Bluetooth® attivata



Meno di 5 unità nel Pod



Velocità basale temporanea attiva



Il PDM non è in grado di comunicare con il Pod; le unità nel Pod vengono visualizzate come "- -" quando non è possibile comunicare



Nessun Pod attivo

Le icone della batteria del PDM, durante il normale funzionamento e la carica, sono:



Carica tra 100% e 31%



Carica tra 30% e 16%



Carica tra 15% e 0%

Per le istruzioni sulla ricarica, vedere "Carica della batteria" a pagina 21.

Blocco schermo e schermata PIN del PDM

Una volta configurato il PDM, il blocco schermo e la schermata PIN vengono visualizzati a ogni attivazione del PDM. Il blocco schermo e la schermata PIN aiutano a confermare che si sta utilizzando il PDM corretto.

Viene visualizzato il blocco schermo:

- L'immagine di sfondo selezionata
- Il messaggio personalizzato
- La quantità di insulina attiva, se il suggeritore di bolo è attivo
- Data corrente
- Eventuali messaggi di allarme o di notifica

Avvertenza: è importante identificare sempre il PDM come proprio prima di usarlo. L'utilizzo del PDM di qualcun altro può comportare un'erogazione di insulina non corretta per entrambi.



Sblocco del PDM

Nel resto di questo *Manuale d'uso tecnico*, le istruzioni che indicano di "attivare" o "sbloccare" il PDM sono da intendersi nel modo seguente:

1. Premere brevemente il pulsante di accensione. Vedere l'immagine del PDM a pagina 3 per la posizione del pulsante di accensione.
2. Sbloccare lo schermo facendo scorrere verso sinistra o verso destra o facendo scorrere dal basso verso l'alto. Viene visualizzata la schermata PIN.
3. Immettere il PIN a 4 cifre.
4. Toccare il segno di spunta. Viene visualizzata la schermata Home o la schermata più recente.

Nota: se si verifica un allarme di pericolo o un segnale di notifica, viene visualizzato il messaggio di allarme.

Blocco del PDM

Per bloccare il PDM quando non lo si utilizza più:

1. Premere brevemente il pulsante di accensione. Questa operazione blocca il PDM mettendolo in modalità di attesa.

2. Conservare il PDM in un luogo sicuro e accessibile.

Attenzione: premere solo brevemente il pulsante di accensione. Se il PDM chiede se si desidera "Spegnere", toccare fuori dal messaggio per annullare l'istruzione. Una volta iniziato a utilizzare il PDM, non spegnere lo strumento. Il PDM può emettere un allarme solo quando è acceso.

Il PIN è stato dimenticato?


È possibile utilizzare le ultime quattro cifre del numero di serie del PDM come PIN alternativo:

1. Il numero di serie si trova accanto all'icona **SN** sul retro del PDM.
2. Prendere nota delle ultime quattro cifre del numero di serie.
3. Immettere queste quattro cifre nella schermata PIN e toccare il segno di spunta.

In caso di problemi con il PIN, contattare l'Assistenza clienti.

La schermata Home del PDM

La schermata Home fornisce informazioni sui boli recenti, sui valori della glicemia, sulla velocità basale attiva e sul Pod attivo. Inoltre, fornisce l'accesso alle funzioni del PDM, alle informazioni sugli allarmi e alle impostazioni. La schermata Home ha anche un pulsante Bolo per accedere rapidamente alla schermata del bolo.

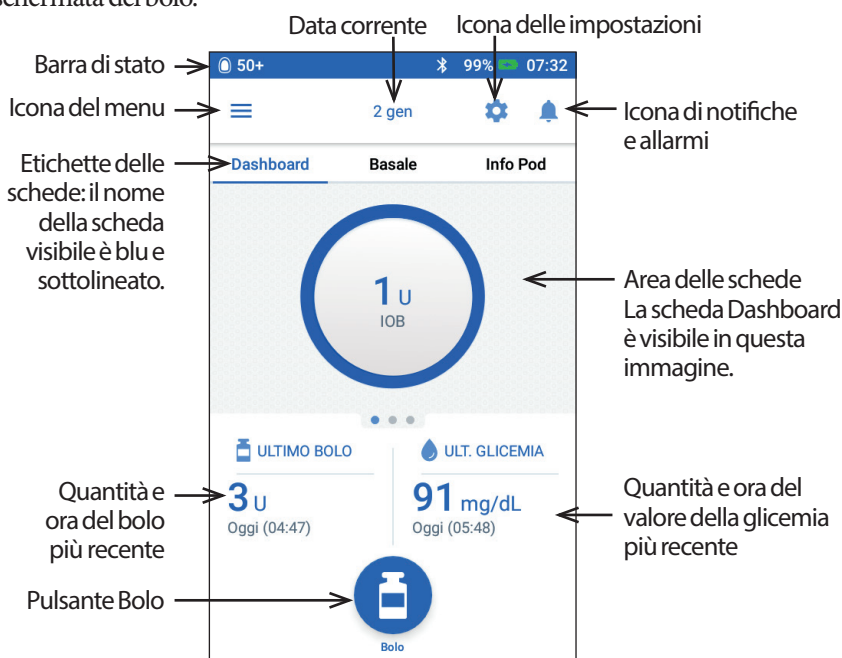

1 Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®

L'area delle schede della schermata Home consente di visualizzare informazioni sul bolo nella scheda Dashboard, informazioni sulla basale o informazioni sul Pod. Per modificare le informazioni che vengono visualizzate:

- Toccare Dashboard, Basale o Info Pod per visualizzare ciascuna scheda.
- Scorrere verso destra o verso sinistra nella sezione centrale per passare da una scheda all'altra.


Nota: se è in esecuzione un bolo immediato, nella schermata Home viene visualizzata una barra di avanzamento del bolo e il pulsante Bolo e le tre schede non sono visibili (vedere "Avanzamento del bolo immediato" a pagina 67). Viene visualizzato un pulsante per annullare il bolo.

Scheda Dashboard


La scheda Dashboard è disponibile se il suggeritore di bolo è attivato e di solito non è disponibile se il suggeritore di bolo è disattivato.

Quando il suggeritore di bolo è attivato

Quando il suggeritore di bolo è attivato, la scheda Dashboard visualizza:

- IOB (insulina attiva), quando IOB è disponibile.
- IOB non è disponibile, quando il suggeritore di bolo è disabilitato. Toccare l'icona  per un elenco dei motivi per cui il suggeritore di bolo è disabilitato.

Quando un bolo è attivo viene visualizzata una barra di avanzamento (vedere "Monitoraggio del progresso di un bolo" a pagina 67).

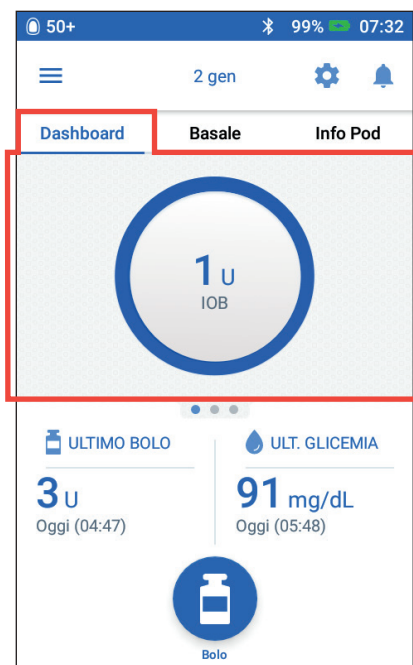

Quando il suggeritore di bolo è disattivato

Quando il suggeritore di bolo è disattivato, di solito ci sono solo due schede: basale e Info Pod. La scheda Dashboard viene visualizzata solo quando è in esecuzione un bolo prolungato (vedere "Monitoraggio del progresso di un bolo" a pagina 67).

Scheda Basale / Scheda Basale temporanea

Questa scheda ha l'etichetta Basale o Basale temporanea, a seconda che siano attivi un programma basale o una basale temporanea.

Programma basale

Per impostazione predefinita, la scheda Basale mostra il nome e il grafico del programma basale attivo.

Un'etichetta sotto il nome del programma basale indica se il programma basale elencato è:

- **Attivo:** questo programma è in esecuzione sul Pod attivo.
- **Sospeso:** questo programma verrà ripreso quando si riprende l'erogazione di insulina.
- **Corrente:** non c'è nessun Pod attivo. Questo programma verrà inviato al Pod successivo durante l'attivazione.

Quando c'è un programma basale attivo, una linea verde indica l'ora corrente. I numeri sopra il grafico indicano la velocità basale per ciascun segmento temporale.



La quantità totale giornaliera di insulina basale è mostrata sotto il grafico. Questo totale è la quantità di insulina che il programma basale attivo ha in programma di erogare in un periodo di 24 ore. Non tiene conto delle basali temporanee o dei boli. Per vedere la quantità totale di insulina che il Pod ha effettivamente erogato, incluse le basali temporanee e i boli, vedere "Panoramica della schermata Cronologia insulina e glicemia" a pagina 89.

Toccare VISUALIZZA per visualizzare i dettagli degli altri programmi basali (vedere pagina 79).

Basale temporanea

Se una basale temporanea è in esecuzione, la scheda Basale ha l'etichetta Basale temporanea ed è evidenziata in verde. Visualizza il grafico della basale temporanea e consente di annullare la basale temporanea.

1 Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®

Scheda Info Pod

La scheda Info Pod mostra se c'è un Pod attivo e, in tal caso, la quantità di insulina rimasta nel Pod e la data di scadenza del Pod.

Se il PDM non riesce a comunicare con un Pod attivo, la scheda Info Pod dice "Nessuna comunicazione da Pod". Toccare l'icona ⓘ per un elenco dei motivi per cui il PDM potrebbe non riuscire a comunicare con il Pod.

Nota: anche in assenza di comunicazione, il Pod continua a erogare insulina in base alle istruzioni fornite. Vedere "Azioni che il Pod può eseguire senza input dal PDM" a pagina 146 per i dettagli.

Consiglio: la comunicazione tra il PDM e il Pod attivo potrebbe venire ripristinata rapidamente portando il PDM e il Pod attivo a circa 1,5 m l'uno dall'altro.

In assenza di un Pod attivo, la scheda Info Pod dice "Nessun Pod attivo". Per configurare un nuovo Pod, vedere "Sostituzione del Pod" a pagina 37.

Se c'è un Pod attivo, toccare **VISUALIZZA DETTAGLI POD** per visualizzare una schermata che consente di disattivare o modificare il Pod.


Nella schermata **VISUALIZZA DETTAGLI POD** sono riportate le seguenti informazioni:

- Quantità di insulina nel Pod.
- Ora dell'ultima comunicazione riuscita tra il PDM e il Pod.
- Data e ora della scadenza del Pod.
- Eventuali promemoria attivi.
- Un pulsante **SOSTITUISCI POD**.

Consiglio: È anche possibile accedere a questa schermata toccando l'icona del menu (☰) > Pod.



Quando il Pod sta per scadere, un banner giallo Sostituire Pod presto viene visualizzato nella scheda Info Pod. Il banner giallo appare 12 ore prima della scadenza del Pod o al momento del promemoria relativo alla scadenza del Pod, a seconda di quale circostanza si verificherà per prima.

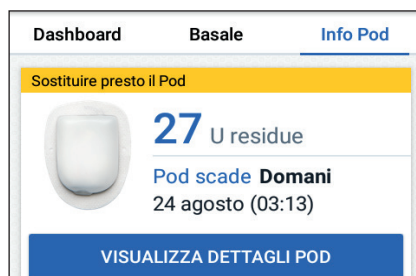

Sei ore prima della scadenza del Pod, un banner rosso Sostituisci Pod viene visualizzato nella scheda Info Pod.



Quando nel Pod sono rimaste meno di cinque unità di insulina, un banner rosso Serbatoio quasi vuoto viene visualizzato nella scheda Info Pod. Quando il Pod sta per scadere e nel Pod ci sono meno di cinque unità di insulina, il banner rosso Serbatoio quasi vuoto viene visualizzato nella scheda Info Pod.



Nota: se si modifica la data o l'ora, la data e l'ora di scadenza del Pod vengono regolate in modo che corrispondano alla nuova data e ora.

Sezione Ultima glicemia

Nella parte inferiore destra della schermata Home sono riportati il valore della glicemia più recente e l'ora di tale valore.



Sezione Ultimo bolo

Nel lato inferiore sinistro della schermata Home sono riportate le informazioni relative al bolo.

Tra più boli

Quando non c'è alcun bolo in erogazione, la sezione ha l'etichetta ULTIMO BOLO e mostra la quantità e l'ora del bolo più recente.

Durante un bolo quando il suggeritore di bolo è attivato

Quando un bolo è in erogazione e il suggeritore di bolo è attivato, le informazioni relative all'ultimo bolo vengono sostituite con una stima dell'insulina attiva (IOB):

- Durante un bolo immediato, la stima dell'insulina attiva (IOB) viene aggiornata ogni dieci secondi.
- Durante un bolo prolungato, la stima dell'insulina attiva (IOB) include l'insulina attiva (IOB) dai boli precedenti, una stima della quantità già erogata dal bolo attivo e la proiezione della quantità da erogare entro il periodo di tempo definito dall'impostazione "Durata dell'azione dell'insulina".



Durante un bolo quando il suggeritore di bolo è disattivato

Quando un bolo è in erogazione e il suggeritore di bolo è disattivato, nella parte in basso a sinistra del display è riportata la quantità del bolo precedente (non il bolo attivo).

Informazioni relative al bolo se il PDM non è in grado di comunicare con il Pod

Se il Pod non è entro la distanza di comunicazione del PDM e il PDM non può confermare la quantità di bolo recente, viene visualizzata una quantità di bolo stimata. Una volta che il Pod è di nuovo a distanza di comunicazione e l'erogazione del bolo è confermata, viene visualizzata la quantità di bolo confermata.

Quantità di bolo stimate e non confermate

Il PDM stima le quantità di bolo durante un bolo attivo e quando il Pod non è a distanza di comunicazione. Un'icona grigia (!) contrassegna le quantità di bolo stimate. Un'icona gialla (!) contrassegna le quantità di bolo non confermate (vedere "Quando il Pod non conferma l'erogazione del bolo" a pagina 96).

Pulsante Bolo

Il pulsante Bolo nella parte inferiore della schermata Home consente di accedere alla schermata del bolo. Il pulsante Bolo non viene visualizzato mentre viene erogato un bolo immediato o quando il suggeritore di bolo è disattivato e non c'è alcun Pod attivo.



Menu della Home Page

Il menu della Home Page consente di accedere alla maggior parte delle funzioni del PDM. Per visualizzare il menu:

- Toccare l'icona del menu (☰) nell'angolo in alto a sinistra della schermata Home.
- Posizionare il dito sull'estrema sinistra del PDM e scorrere verso l'estremità destra del display. Scorrere verso sinistra per nascondere il menu.

Toccare un'opzione nel menu per visualizzare la schermata associata.













Consiglio: il menu si estende oltre la parte inferiore dello schermo. Scorrere verso l'alto o verso il basso per vedere tutte le parti del menu.

Attività frequenti

La prima sezione del menu consente di accedere alle attività frequenti: attivazione di una basale temporanea, sostituzione del Pod, immissione di un valore della glicemia e sospensione o ripresa dell'erogazione di insulina.

Situazioni speciali:

- Imposta basale temporanea è disattivato se non è presente un Pod attivo, l'insulina è sospesa o una basale temporanea è già in esecuzione.
- Imposta basale temporanea non viene visualizzato se l'impostazione "Basale temporanea" è disattivata.
- Se l'erogazione dell'insulina viene sospesa, Sospendi insulina diventa Riprendi insulina.

	Imposta basale temp.
	Pod
	Immetti glicemia
	Sospendi insulina
GESTISCI PROGRAMMI E PREIMPOSTAZIONI	
	Programmi basali
	Basali temp. preimpostate
	Boli preimpostati
	Cronologia 
	Notifiche e allarmi
	Cronologia insulina e glicemia
	Impostazioni 
	Dispositivo PDM
	Promemoria
	Glicemia
	Basale e basale temp.
	Bolo
	Info

1 Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®

- Sospendi insulina è disattivato se non è presente un Pod attivo.

Gestisci programmi e preimpostazioni

La prossima sezione consente di creare o attivare programmi basali, basali temporanee preimpostate e boli preimpostati (vedere "Gestione di programmi e preimpostazioni" a pagina 79).

Situazioni speciali:

- Basali temporanee preimpostate è visibile soltanto se l'impostazione "Basale temporanea" è attivata.
- Boli preimpostati è visibile soltanto se l'impostazione "Suggeritore di bolo" è disattivata.

Menu Cronologia

Toccare la freccia giù (▼) accanto a Cronologia per visualizzare il sottomenu:


- Cronologia Notifiche e allarmi (vedere pagina 87)
- Cronologia insulina e glicemia (vedere pagina 89)

Consiglio: toccare l'icona a forma di campana ( o ) in alto a destra in molte schermate per aprire il campo Cronologia allarmi e notifiche.

Menu Impostazioni

Toccare la freccia giù (▼) accanto a Impostazioni per visualizzare il sottomenu:

- Dispositivo PDM
- Siti Pod
- Promemoria
- Glicemia
- Basale e basale temp.
- Bolo

Consiglio: toccare l'icona delle impostazioni () nella parte superiore della schermata Home per aprire la sezione Impostazioni del menu.

Queste impostazioni consentono di modificare l'ora e la data, creare o rimuovere promemoria, attivare o disattivare il suggeritore di bolo e molto altro. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione delle impostazioni" a pagina 99.

Schermata Informazioni su

La schermata Informazioni su visualizza i dettagli del PDM, come il numero di revisione del software, il numero di serie del PDM, il numero di versione del Pod, l'ora della comunicazione più recente PDM-Pod e altre note legali e sui dispositivi.

Nota: il numero di serie del PDM è disponibile anche accanto all'icona  sul retro del PDM.

Messaggi del PDM per l'utente

Il PDM può inviare messaggi di allarme, notifiche e messaggi di conferma.

Allarmi

Gli allarmi di pericolo e i segnali di notifica richiedono attenzione immediata da parte dell'utente (vedere "Allarmi, notifiche ed errori di comunicazione" a pagina 117). Se si ignora un allarme, si potrebbe andare incontro a ipoglicemia o iperglicemia.

Gli allarmi di pericolo (⚠) sono accompagnati da una vibrazione o un segnale acustico continui e interrompono qualsiasi altra cosa che il PDM stia facendo tranne l'emissione di un altro allarme di pericolo. Ad esempio, un allarme di pericolo viene emesso se il Pod esaurisce l'insulina.

I segnali di notifica (🔔) avvertono l'utente di alcuni aspetti del PDM o Pod che richiedono l'attenzione dell'utente nell'immediato. Ad esempio, se il livello di insulina nel Pod si sta esaurendo, il PDM emette un segnale di notifica.

Notifiche

Le notifiche (🕒) sono promemoria di operazioni che l'utente potrebbe voler svolgere (vedere "Elenco delle notifiche" a pagina 126). Ad esempio, è possibile impostare un promemoria per indicare di misurare la glicemia dopo un determinato periodo di tempo.

Messaggi di conferma

Il PDM conferma che un'istruzione ha avuto successo visualizzando un banner verde con un messaggio di conferma. Il messaggio di conferma scompare dopo alcuni secondi.

Consiglio: scorrere verso destra sul messaggio per eliminarlo subito.

Se un'istruzione non ha avuto successo, il PDM visualizza un messaggio di errore di comunicazione (vedere "Errori di comunicazione" a pagina 128).



Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 2

Configurazione iniziale del PDM

Questo capitolo fornisce informazioni su come configurare il PDM per la prima volta o un PDM sostitutivo.

Se si sta configurando un PDM sostitutivo, andare a "Carica della batteria" all'interno della sezione che segue.

Preparazione per le sezioni di training

Coloro che si accingono a usare il sistema Omnipod DASH® per la prima volta dovranno incontrarsi con l'infermiere/assistente per configurare il proprio Personal Diabetes Manager (PDM) e il Pod per il primo utilizzo.

Se in passato si è utilizzato un Sistema per la gestione insulinica Omnipod® e si sta eseguendo l'aggiornamento al sistema Omnipod DASH®, esaminare il modulo di formazione online prima di configurare il nuovo sistema.

Per sfruttare al massimo le sessioni di training sull'utilizzo del sistema Omnipod DASH®, leggere il presente *Manuale d'uso tecnico*, comprese le sezioni "Introduzione" a pagina xi, "Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®" a pagina 1 e "Cura e manutenzione del PDM e del Pod" a pagina 133.

Avvertenze:

NON utilizzare il sistema Omnipod DASH® senza avere prima ricevuto un'adeguata formazione. Una formazione insufficiente potrebbe mettere a rischio la salute e la sicurezza dell'utente.

Attenersi alle istruzioni del proprio referente medico per l'inizializzazione del PDM. Una configurazione inadeguata potrebbe mettere a rischio la salute e la sicurezza dell'utente.

Nota: tenere sempre pronto e a portata di mano un kit di emergenza per affrontare tempestivamente qualsiasi emergenza diabetica (vedere "Pronti per le emergenze" a pagina 175).

Carica della batteria

È importante caricare la batteria del PDM prima di configurare il sistema Omnipod DASH®:

2 Configurazione iniziale del PDM

1. Se necessario, installare la batteria ricaricabile nel PDM (vedere "Inserimento della batteria del PDM durante la configurazione iniziale" a pagina 141).
2. Montare il caricabatterie collegando la spina USB Tipo A del cavo del caricabatterie all'adattatore da parete del caricabatterie.

Attenzione: per caricare il PDM utilizzare ESCLUSIVAMENTE il caricabatterie micro-USB fornito da Insulet. L'utilizzo di caricabatterie non approvati può causare l'esplosione della batteria o danneggiare il PDM e potrebbe invalidare la garanzia.

3. Collegare il caricabatterie a una presa a muro. Scegliere una presa facilmente accessibile e dalla quale scollegare agevolmente il caricabatterie quando necessario.
4. Collegare la spina USB Micro-B del cavo del caricabatterie alla porta USB Micro-B del PDM.
5. Caricare il PDM finché l'icona del livello della batteria non mostra una carica del 100% (vedere "La barra di stato" a pagina 9).
6. Scollegare il caricabatterie dal PDM e dalla presa a muro.

Attenzione: utilizzare ESCLUSIVAMENTE la batteria ricaricabile fornita con il PDM. In caso di domande, contattare il servizio di Assistenza clienti.


Cosa occorre quando si incontra l'infermiere/referente

- Il PDM
- Due Pod
- *Istruzioni per l'uso di Omnipod DASH*
- Un glucometro
- Strisce reattive e un dispositivo a lancetta (acquistabile in farmacia)
- Fiala di insulina U-100 ad azione rapida
- Tamponi disinfettanti imbevuti di alcol
- Le istruzioni del referente medico con le impostazioni del PDM personalizzate in base alle proprie esigenze. Tali impostazioni comprendono il programma basale, il rapporto insulina/carboidrati (IC), il fattore di correzione, i valori del target glicemico e la durata dell'azione dell'insulina.

Impostazioni generali del PDM

La configurazione del PDM è semplice e intuitiva. Tuttavia, se si utilizza il sistema per la prima volta, dovrà essere l'infermiere/referente di zona a guidare l'utente durante l'intero processo di configurazione. In seguito sarà comunque possibile modificare queste impostazioni in base alle proprie esigenze.

Consiglio: utilizzare le apposite pagine alla fine di questo Manuale d'uso tecnico per prendere nota di tutte le impostazioni. Tale elenco risulterà utile nel caso dovesse risultare necessario resettare o sostituire il PDM.

Nota: toccando la freccia indietro () , l'utente può tornare alla schermata precedente. Tuttavia, toccando il pulsante ANNULLA in uno qualsiasi di questi passaggi di configurazione, si accede alla prima schermata di ogni sezione e si cancellano eventuali voci in quella sezione. Una schermata pop-up avverte che queste voci potrebbero andare perse.

Attivazione e personalizzazione del PDM

1. Attivare il PDM premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione sul lato destro finché non viene visualizzato il logo Omnipod®. Il PDM esegue una serie di controlli.

Attenzione: NON spegnere il PDM. Il PDM deve essere ATTIVATO affinché possa emettere un allarme. Se si preme il pulsante di accensione troppo a lungo, il PDM visualizza un menu con un'opzione di spegnimento. NON toccare Spegnimento. Toccare all'esterno del menu per rifiutare e mantenere il PDM attivato.

Nota: È possibile premere il pulsante di accensione per consentire al PDM di passare dalla modalità attiva alla modalità di attesa e viceversa. Anche gli allarmi del sistema Omnipod DASH® attivano il PDM dalla modalità di attesa.

2. Quando viene visualizzata una schermata con il logo Omnipod DASH®, utilizzare il dito per scorrere da sinistra a destra sul display.

Nota: se viene visualizzata una schermata inaspettata invece della schermata del logo Omnipod DASH®, vedere "Risoluzione dei problemi - Avvio del PDM" a pagina 189.


3. Toccare una lingua per selezionare la lingua desiderata per le schermate del PDM. Quindi toccare la freccia (>).
4. Toccare Seleziona uno per visualizzare l'elenco dei Paesi. Selezionare il Paese, quindi toccare CONTINUA.
5. Esaminare i termini e le condizioni, inclusi l'Accordo di Licenza con l'Utente Finale (EULA), la Garanzia e le Note legali, come segue:

2 Configurazione iniziale del PDM

- a. Toccare il link EULA, Garanzia e Note legali per leggere le note legali del sistema Omnipod DASH®. Quindi toccare **ACCONSENTO**.
- b. Toccare la casella per aggiungere un segno di spunta.
- c. Toccare **CONTINUA**.

Nota: se l'utente è minorenne, un genitore o un tutore deve accettare per suo conto.

6. Toccare **AVVIA CONFIGURAZIONE**.
7. Toccare le lettere sulla tastiera per immettere un messaggio personalizzato sullo schermo (vedere "Selezione, aggiunta ed eliminazione di elementi" a pagina 7). Quindi toccare il segno di spunta.

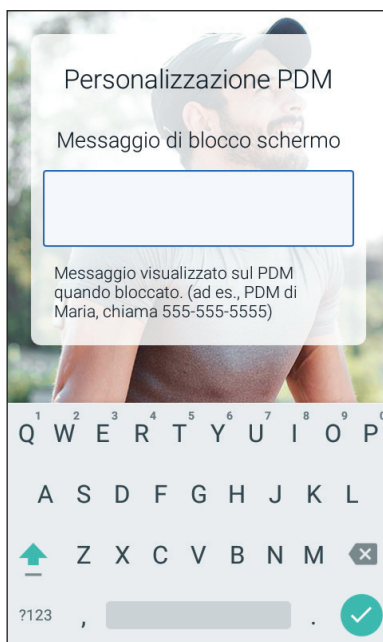

Nota: È necessario immettere almeno un carattere.

Consiglio: l'inclusione di un numero di telefono di contatto nel messaggio può aiutare a ritrovare il PDM in caso di smarrimento.

8. Toccare **CONTINUA**.

Viene visualizzata una schermata con varie immagini di sfondo.

9. Scorrere verso destra o verso sinistra per vedere più immagini. Toccare l'immagine desiderata, quindi toccare **CONTINUA**.

Nota: quando si attiva il PDM, vengono visualizzati il messaggio personalizzato e l'immagine di sfondo. Confermare sempre che si tratta del proprio PDM prima di usarlo.

Immissione di un PIN


Per evitare che lo schermo venga toccato in modo non intenzionale, è necessario creare un numero di identificazione personale o PIN di 4 cifre.

1. Scegliere quattro numeri per il PIN. Questo numero PIN verrà utilizzato ogni volta che si attiva il PDM. È consigliabile conservare il PIN in un luogo sicuro.

Consiglio: per mantenere visibile il PIN, toccare l'icona a forma di occhio situata a destra dei campi di immissione del PIN. Per nascondere il numero, toccare di nuovo l'icona a forma di occhio.

2. Sul tastierino alfanumerico, inserire tutti i numeri del PIN. Quindi toccare il segno di spunta.
3. Immettere di nuovo gli stessi quattro numeri per confermare il PIN. Toccare il segno di spunta.


Se il secondo PIN immesso non corrisponde al primo, è necessario ripetere i passaggi precedenti.

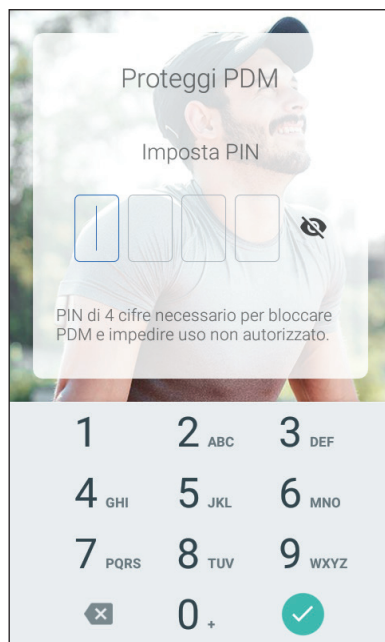

Impostazione dell'ora e del fuso orario

Per impostare l'ora e il fuso orario correnti:

1. Toccare **Seleziona uno** per visualizzare l'elenco dei fusi orari.
2. Toccare il fuso orario desiderato. Potrebbe essere necessario scorrere verso l'alto o verso il basso per trovare il proprio fuso orario.
3. Toccare **CONTINUA**.
4. Toccare l'interruttore 12 ore / 24 ore per scegliere il formato ora. Ad esempio, sei ore prima della mezzanotte sarà visualizzato come:
 - 18:00 nel formato a 24 ore
 - 6:00 PM nel formato 12 ore

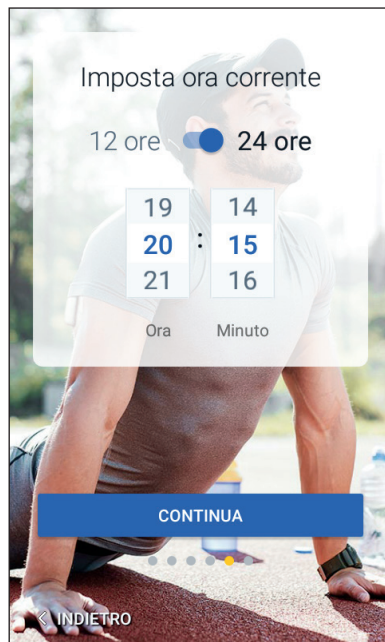

2 Configurazione iniziale del PDM

5. Posizionare il dito sulla rotella di scorrimento Ora. Far scorrere il dito verso l'alto o verso il basso per far scorrere la rotella verso l'alto o verso il basso. Smettere di scorrere quando l'ora corretta viene visualizzata al centro della rotella.
6. Far scorrere la rotella Minuto verso l'alto o verso il basso finché il minuto corretto non viene visualizzato al centro della rotella.
7. Se si usa il formato a 12 ore, scorrere il campo più a destra e selezionare AM o PM.
8. Controllare l'ora e toccare CONTINUA.

Attenzione: verificare di aver impostato l'ora correttamente. L'impostazione dell'ora influisce sul funzionamento di varie caratteristiche del sistema Omnipod DASH® e può influire sull'erogazione di insulina.

Impostazione della data

Nella schermata Imposta data corrente:

1. Toccare GG/MM/AAAA per visualizzare un elenco dei formati della data. Toccare il formato della data desiderato.
2. Impostare i campi Giorno, Mese e Anno facendo scorrere le rispettive rotelle una alla volta.
3. Controllare la data e il formato della data, quindi toccare CONTINUA.
4. Nella schermata Conferma ora e data, controllare il fuso orario, l'ora e la data. Se è tutto corretto, toccare CONTINUA.



Impostazioni dell'insulina basale

Velocità basale massima


La velocità basale massima imposta il limite superiore per qualsiasi velocità di insulina basale che si può utilizzare.

1. Toccare CONFIGURAZIONE PROFILO.
2. Esaminare la descrizione dell'insulina basale, quindi toccare la freccia (>).
3. Toccare il campo Velocità basale max.
4. Far scorrere la rotella fino alla velocità basale massima desiderata. Quando il numero corretto si trova al centro della rotella di scorrimento, toccare il numero per selezionarlo.

Consiglio: in alternativa, toccare all'esterno della rotella di scorrimento per selezionare il valore al centro della rotella.

5. Toccare AVANTI.

La basale massima può essere modificata in un secondo momento in base alle esigenze individuali.

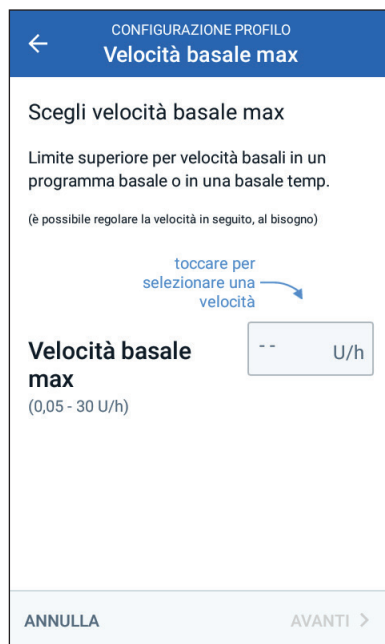

Creazione di un programma basale

Il passaggio successivo è quello di definire un programma basale. Per una descrizione delle velocità basali, dei segmenti di basale e dei programmi basali, vedere "Erogazione di insulina basale" a pagina 147.

Nome e tag del programma basale

1. Esaminare la descrizione dei programmi basali, quindi toccare AVANTI.
2. Il nome predefinito per il programma basale è Basale 1. Per modificare il nome, toccare il campo Nome programma e immettere il nuovo nome (vedere "Selezione, aggiunta ed eliminazione di elementi" a pagina 7), quindi toccare il segno di spunta.
3. Facoltativo: per aggiungere un'icona visiva al programma basale, toccare uno dei tag. Toccare il tag una seconda volta per deselezionarlo.
4. Toccare AVANTI.

2 Configurazione iniziale del PDM

Definizione del primo segmento

1. L'Ora avvio per il primo segmento è sempre mezzanotte. Toccare il campo Ora fine e scorrere per selezionare l'ora di fine desiderata.
2. Toccare il campo Velocità basale e scorrere per selezionare la velocità basale per il segmento.

CONFIGURAZIONE PROFILO
Programma basale

Basal 1: Segmento 1 Grafico: U/h

00:00 00:00

Ora avvio 00:00 - Ora fine --

Notte

Velocità basale -- U/h
(fino a 3 U/h)

ANNULLA AVANTI >

CONFIGURAZIONE PROFILO
Programma basale

Basal 1: Segmento 1 Grafico: U/h

0,75

00:00 05:00 00:00

Ora avvio 00:00 - Ora fine 05:00

Notte Notte

Velocità basale 0,75 U/h
(fino a 3 U/h)

ANNULLA AVANTI >

La velocità basale massima immessa in precedenza viene visualizzata sotto il testo Velocità basale. Non è possibile immettere una velocità basale superiore a questo numero.

Nota: le due linee blu verticali nel grafico vicino alla parte superiore del display mostrano l'ora di avvio e di fine del segmento di basale. La velocità basale per il segmento è indicata tra le due linee verticali.

3. Controllare i valori dell'ora di avvio e di fine e la velocità basale. Quindi toccare AVANTI.

Definizione di ulteriori segmenti

Se il programma basale non copre 24 ore, è necessario aggiungere ulteriori segmenti:

1. Toccare il campo Ora fine e selezionare la durata del segmento successivo.
2. Toccare il campo Velocità basale e selezionare la velocità basale per il segmento.
3. Esaminare i dettagli del segmento e il grafico.


4. Toccare **AVANTI** per passare al segmento successivo.
5. Ripetere i passaggi precedenti, se necessario, finché il segmento finale non termina a mezzanotte.

Una volta specificata una velocità basale per il segmento finale, il programma basale è completo.

Revisione del programma basale

La schermata successiva riepiloga l'ora di inizio, l'ora di fine, la durata e la velocità basale per ciascun segmento del Programma basale.

1. Toccare **CONTINUA** per esaminare il Programma basale.
2. Verificare che il grafico e i singoli valori dei segmenti siano corretti.
La quantità totale giornaliera di insulina basale erogata da questo programma basale è indicata sotto il grafico.
3. Per modificare l'ora di fine o la velocità basale per un segmento:

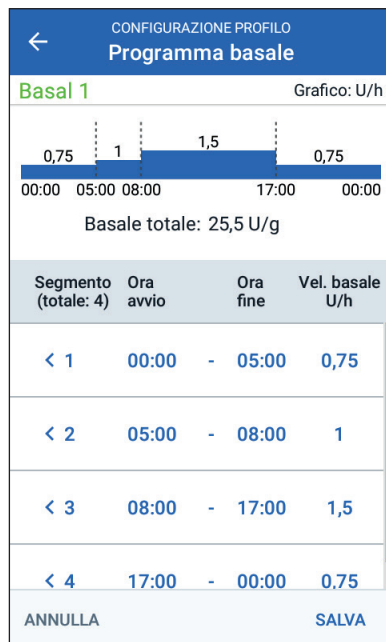

- a. Toccare la riga contenente il segmento da modificare.
- b. Toccare il campo **Ora fine** e immettere la nuova ora di fine per il segmento.
- c. Toccare il campo **Velocità basale** e immettere la velocità basale desiderata.
- d. Toccare **AVANTI**.
- e. Quindi definire l'ora di fine e la velocità basale per eventuali segmenti successivi, se necessario.
4. Per aggiungere un nuovo segmento:
 - a. Toccare la riga contenente l'ora di avvio del nuovo segmento.
 - b. Toccare il campo **Ora fine** e immettere l'ora di avvio del nuovo segmento come ora di fine di questo segmento.
 - c. Modificare la velocità basale, se necessario.
 - d. Toccare **AVANTI**.
 - e. Quindi definire l'ora di fine e la velocità basale per eventuali segmenti successivi, se necessario.

2 Configurazione iniziale del PDM

5. Per eliminare un segmento:
 - a. Controllare l'ora di fine del segmento da eliminare.
 - b. Toccare il segmento che precede il segmento da modificare.
 - c. Toccare il campo Ora fine e immettere l'ora di fine del segmento da eliminare. Questa operazione "sovrascrive" il segmento da eliminare.
 - d. Toccare AVANTI.
 - e. Quindi definire l'ora di fine e la velocità basale per eventuali segmenti successivi, se necessario.
6. Quando il programma basale è corretto, toccare SALVA.

Nota: se la velocità basale per un segmento è 0 U/ora, il PDM visualizza un messaggio per attirare l'attenzione dell'utente. Toccare OK se il valore 0 U/ora è corretto. Altrimenti, toccare ANNULLA e modificare il segmento con il valore 0 U/ora.

Nota: per creare ulteriori programmi basali una volta completata la configurazione, vedere pagina 79.

Configurazione delle basali temporanee

Per una descrizione delle velocità basali temporanee, chiamate anche basali temporanee, vedere pagina 148.

1. Per poter utilizzare le basali temporanee, toccare l'interruttore e portarlo sulla posizione "attivo". L'interruttore è nella posizione "attivo" quando è a destra ed è blu.

Se si attivano le basali temporanee, vengono utilizzate le percentuali per impostazione predefinita. Per specificare le basali temporanee in termini di unità orarie (U/ora), vedere "Basale temporanea" a pagina 111.
2. Toccare AVANTI.

Impostazioni della glicemia

Le impostazioni della glicemia definiscono quali valori della glicemia sono all'interno dell'intervallo.


Limiti superiore e inferiore dell'obiettivo glicemico

È possibile impostare il limite superiore e il limite inferiore dell'obiettivo glicemico utilizzando il tastierino glicemico o il cursore:

1. Esaminare la descrizione dei livelli glicemici, quindi toccare la freccia (>).
2. Per definire il limite inferiore, toccare il campo Limite inferiore e digitare il numero utilizzando il tastierino numerico.

Consiglio: in alternativa, è possibile toccare il cerchio inferiore (rosso) con il dito e farlo scorrere verso l'alto o verso il basso.

3. Per definire il limite superiore, toccare il campo Limite superiore oppure far scorrere il cerchio superiore (giallo).
4. Verificare il limite superiore e il limite inferiore e toccare AVANTI per salvarli.

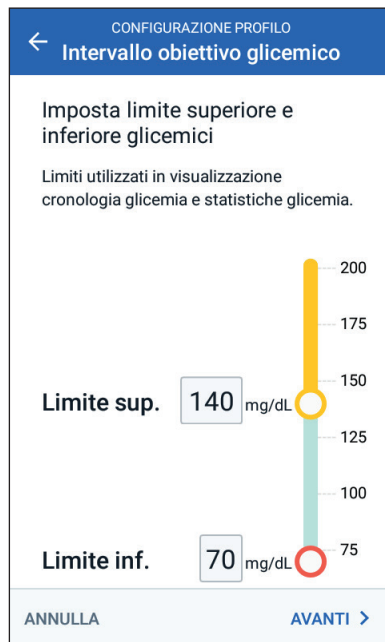

Impostazioni del suggeritore di bolo

Il suggeritore di bolo suggerisce le dosi di bolo in base al valore della glicemia corrente e agli alimenti che ci si accinge a mangiare (vedere "Il Suggeritore di bolo" a pagina 154).

Attivazione o disattivazione del suggeritore di bolo

1. Esaminare la descrizione dei boli di insulina, quindi toccare la freccia (>).
2. Per attivare o disattivare l'impostazione Suggeritore di bolo:
 - Selezionare Attivato (blu e a destra) per far sì che il suggeritore di bolo suggerisca le dosi dei boli.

2 Configurazione iniziale del PDM

- Selezionare Disattivato (grigio e a sinistra) per disattivare il suggeritore di bolo. È necessario calcolare le proprie quantità di bolo.
3. Toccare **AVANTI**.
 4. Se si è scelto di disattivare il suggeritore di bolo, passare a "Altre impostazioni dei boli" a pagina 36.

Target glicemico e valori "Correggere verso l'alto"

Il suggeritore di bolo cerca di riportare la glicemia al valore impostato per il target glicemico se il livello glicemico corrente è al di sopra del valore "Correggere verso l'alto". È possibile impostare fino a otto target glicemici diversi per i vari periodi della giornata.

Impostazione dei segmenti

L'impostazione dei valori per ogni segmento segue lo stesso schema utilizzato per creare il programma basale:

1. Verificare la descrizione dei valori Target glicemico e Correggere verso l'alto, quindi toccare: **AVANTI**.
2. Toccare il campo Ora fine e immettere l'ora di fine per il segmento.
3. Toccare il campo Target glicemico e specificare il target glicemico per quel segmento.
4. Toccare il campo Correggere verso l'alto e specificare il valore Correggere verso l'alto per quel segmento.
5. Toccare **AVANTI**.
6. Ripetere i passaggi precedenti, se necessario, finché non sono stati specificati i valori per il segmento che termina a mezzanotte.

CONFIGURAZIONE PROFILO

← Target glicemico e Corregge...

Segmento 1

Ora avvio 00:00

Ora fine --

Notte

Target glicemico (70-200 mg/dL) -- mg/dL

Corr. alto (Target glic. a 200 mg/dL) -- mg/dL

ANNULLA AVANTI >

Revisione dei valori Target glicemico e Correggere verso l'alto

1. Verificare i segmenti per il profilo completo di 24 ore.
2. Per modificare le voci:
 - a. Toccare la riga contenente il valore da modificare e immettere il valore corretto.
 - b. Laddove necessario, verificare e correggere eventuali segmenti rimanenti.
3. Quando i segmenti e i valori sono corretti, toccare SALVA.

←
CONFIGURAZIONE PROFILO
Target glicemico e Corregge...

Revisionare i valori immessi per ogni segmento temporale.

Ora avvio	Ora fine	Target glicemico mg/dL	Corr. alto mg/dL
< 00:00	- 18:00	100	110
< 18:00	- 00:00	105	115

ANNULLA
SALVA

Glicemia minima per suggeritore

Se il livello glicemico è al di sotto dell'impostazione Glicemia minima per suggeritore specificata, il suggeritore di bolo risulta disattivato (vedere "Il Suggeritore di bolo" a pagina 154).

1. Per immettere il proprio valore della glicemia minima per suggeritore, toccare il campo Glicemia min per suggeritore e immettere il numero utilizzando il tastierino numerico.

Consiglio: in alternativa, toccare il cerchio blu e farlo scorrere fino al numero desiderato.

2. Toccare AVANTI.

←
CONFIGURAZIONE PROFILO
Glic. min per sugg.

Imposta glicemia min per suggeritore

Il suggeritore di bolo è disabilitato e non suggerirà alcun bolo se il valore glicemico è inferiore alla glicemia min consentita per suggeritore (glicemia min per suggeritore).

Glic. min per sugg.
70 mg/dL
(50-70 mg/dL)

ANNULLA
AVANTI >

2 Configurazione iniziale del PDM

Rapporto insulina/carbo

Il rapporto insulina/carboidrati (IC) definisce la quantità di carboidrati coperti da un'unità di insulina. Il suggeritore di bolo utilizza il rapporto insulina/carboidrati (IC) per calcolare la porzione pasto di un bolo consigliato. È possibile creare fino a otto segmenti temporali al giorno per il rapporto insulina/carboidrati (IC).

1. Verificare la descrizione del rapporto insulina/carboidrati (IC), quindi toccare **AVANTI**.
2. Immettere l'ora di fine.
3. Immettere il valore Rapporto insulina/carboidrati (IC) nel campo 1 unità di insulina copre.
4. Toccare **AVANTI**.
5. Se necessario, aggiungere ulteriori segmenti finché l'ora di fine non è mezzanotte.
6. Esaminare i segmenti del rapporto insulina/carboidrati (IC) a 24 ore. Se necessario, toccare una voce per correggerla.
7. Quando i segmenti e i valori sono corretti, toccare **SALVA**.

Fattore di correzione

Il fattore di correzione definisce di quanto viene abbassato il livello glicemico da un'unità di insulina. Il Suggeritore di bolo utilizza il fattore di correzione per calcolare la porzione di correzione di un bolo consigliato. È possibile creare fino a otto segmenti temporali al giorno per il fattore di correzione.

1. Esaminare la descrizione del fattore di correzione, quindi toccare **AVANTI**.
2. Immettere l'ora di fine.

←

CONFIGURAZIONE PROFILO

Rapporto insulina/carbo

Segmento 1

Ora avvio00:00

Ora fine--

Notte

1 unità di insulina copre

(1-150 g di carbo)

-- g

ANNULLA

AVANTI >

←

CONFIGURAZIONE PROFILO

Fattore di correzione

Segmento 1

Ora avvio00:00

Ora fine--

Notte

1 unità di insulina riduce la glicemia di:

(1-400 mg/dL)

-- mg/dL

ANNULLA

AVANTI >

3. Immettere il fattore di correzione nel campo 1 unità di insulina riduce la glicemia di.
4. Toccare **AVANTI**.
5. Se necessario, aggiungere ulteriori segmenti finché l'ora di fine non è mezzanotte.
6. Esaminare i segmenti del fattore di correzione. Se necessario, toccare una voce per correggerla.
7. Quando i segmenti e i valori sono corretti, toccare **SALVA**.

Correzione inversa

Può capitare che prima di un pasto o di uno spuntino il livello glicemico risulti inferiore al target glicemico. In questi casi, se la correzione inversa è attivata, il suggeritore di bolo riduce la dose di un bolo pasto consigliato per aiutare a compensare la glicemia bassa.

1. Attivare o disattivare il pulsante Correzione inversa:
 - Selezionare Attivato se si desidera che il Suggeritore di bolo riduca il bolo pasto suggerito quando la glicemia è inferiore al target glicemico.
 - Selezionare Disattivato se non si desidera che il Suggeritore di bolo regoli il bolo pasto suggerito in base a un valore della glicemia basso.
2. Toccare **AVANTI**.

Durata dell'azione dell'insulina

La Durata dell'azione dell'insulina indica il periodo di tempo durante il quale l'insulina rimane attiva all'interno dell'organismo. Il suggeritore di bolo utilizza questa impostazione per determinare la quantità di insulina che rimane nel corpo dai boli precedenti (chiamata anche insulina attiva o IOB).

1. Toccare il campo Durata dell'azione dell'insulina e utilizzare la rotella di scorrimento per specificare la Durata dell'azione dell'insulina.
2. Toccare **AVANTI**.

2 Configurazione iniziale del PDM

Altre impostazioni dei boli

Le restanti impostazioni del bolo vengono utilizzate indipendentemente dal fatto che il suggeritore di bolo sia attivato o disattivato.

Bolo massimo

Il PDM non consente di richiedere un bolo al di sopra dell'impostazione "Bolo massimo". Se il suggeritore di bolo calcola un bolo superiore a questa quantità, viene visualizzato un messaggio.

1. Toccare il campo Bolo massimo e utilizzare il tastierino numerico per specificare il bolo massimo. Toccare la casella di controllo per chiudere il tastierino numerico.
2. Toccare AVANTI.

Impostazione Bolo prolungato

Prolungare un bolo significa che un bolo pasto può essere erogato per un periodo prolungato. Per una descrizione della funzione del bolo prolungato, vedere pagina 159.

1. Utilizzare il pulsante Bolo prolungato per attivare o disattivare la funzione del bolo prolungato.
2. Toccare COMPLETATO.
Il PDM si riavvia.

Configurazione PDM completa

Congratulazioni! Il PDM è pronto per essere utilizzato. Quando si è pronti per attivare il primo Pod, andare a "Prima volta che si attiva un Pod" a pagina 38.

Consiglio: *per regolare la luminosità e il timeout del display del PDM, vedere "Sul display appare" a pagina 100.*

Nota: i promemoria di assicurazione e i promemoria programma sono attivati con impostazioni predefinite. Questi promemoria fanno in modo che il PDM o il Pod emettano un bip all'inizio e alla fine dell'erogazione di boli e di basali temporanee, nonché una volta all'ora durante una basale temporanea o un bolo di lunga durata. Per ulteriori informazioni, vedere e "Promemoria programma" a pagina 108 "Promemoria di assicurazione" a pagina 108.

CAPITOLO 3

Sostituzione del Pod

Avvio del processo di sostituzione del Pod

La sostituzione del Pod consiste nella disattivazione del Pod corrente e nell'attivazione di un nuovo Pod.

Sostituire il Pod almeno una volta ogni 48-72 ore (2-3 giorni) o dopo un massimo di 200 unità di insulina erogate. Chiedere consiglio al proprio referente medico e fare riferimento all'etichetta sul flacone dell'insulina per verificare se è necessario sostituire il Pod più spesso.

Avvertenze:

NON usare un Pod in caso di ipersensibilità o allergia agli adesivi acrilici o se la pelle è fragile o delicata.

Il Pod utilizza solo insulina U-100 ad azione rapida che comporta un maggior rischio di sviluppare iperglicemia qualora si interrompa l'erogazione di insulina. Un'iperglicemia grave, se non trattata, può rapidamente condurre alla chetoacidosi diabetica (DKA). La DKA può causare sintomi come dolore addominale, nausea, vomito, difficoltà respiratoria, shock, coma e persino la morte. Se l'erogazione di insulina viene interrotta per qualsiasi motivo, potrà rendersi necessario compensare l'insulina mancante. Consultare il proprio referente medico per istruzioni su come gestire eventuali interruzioni nell'erogazione di insulina, il che potrebbe comprendere un'iniezione di insulina ad azione rapida.

Il Pod e i relativi accessori, compreso il cappuccio dell'ago, contengono parti piccole che potrebbero risultare pericolose se ingerite. Conservare queste parti piccole fuori dalla portata dei bambini.

La procedura per disattivare o attivare un Pod dipende dal fatto che si abbia un Pod attivo o meno:

- Se è la prima volta che si attiva un Pod, andare a "Prima volta che si attiva un Pod" a pagina 38.
- Se al momento si dispone di un Pod attivo, andare a "Disattivazione di un Pod attivo" a pagina 38.
- Se il Pod più recente è già stato disattivato, andare a "Nessun Pod attivo" a pagina 39.

3 Sostituzione del Pod

Prima volta che si attiva un Pod

L'infermiere/referente aiuterà l'utente ad attivare il primo Pod.

Al completamento della procedura di configurazione del PDM, la schermata Home visualizza "Nessun Pod attivo".

1. Toccare CONFIGURA NUOVO POD.
2. Andare a "Passaggi preliminari per la sostituzione del Pod" a pagina 40.

Disattivazione di un Pod attivo

Per disattivare e rimuovere un Pod attivo:

1. Accedere alla schermata di sostituzione del Pod:

Home > Scheda Info Pod >
VISUALIZZA DETTAGLI POD

o

Icona del menu (☰) > Pod

2. Toccare SOSTITUISCI POD, quindi toccare DISATTIVA POD.

Eventuali basali temporanee o boli prolungati in esecuzione vengono annullati.

Se viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione, vedere "Errore durante la disattivazione di un Pod" a pagina 131.


Avvertenza: NON applicare un nuovo Pod se non dopo avere disattivato e rimosso il Pod in uso. Un Pod disattivato in modo erraneo potrebbe continuare a erogare insulina come programmato, esponendo l'utente al rischio di sovrainfusione e possibile ipoglicemia.



3. Quando il banner verde dice di rimuovere il Pod, rimuovere il Pod disattivato dal corpo:

- a. Staccare delicatamente dalla pelle i bordi del nastro adesivo e rimuovere completamente il Pod.

Consiglio: *Rimuovere lentamente il Pod per evitare possibili irritazioni della pelle.*

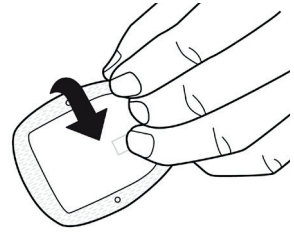

- b. Usare acqua e sapone o, se necessario, un solvente per adesivi per rimuovere i residui di adesivo rimasti sulla pelle.
 - c. Controllare che il sito di infusione non presenti segni di infezione (vedere "Evitare infezioni nel sito di infusione" a pagina 51).
 - d. Gettare il Pod usato attenendosi alle normative e ai regolamenti locali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
4. Per attivare un nuovo Pod, toccare CONFIGURA NUOVO POD.
 5. Andare a "Passaggi preliminari per la sostituzione del Pod" a pagina 40.

Nessun Pod attivo

Se non si è in possesso di un Pod attivo e si è pronti per attivare un nuovo Pod:

1. Accedere alla schermata di sostituzione del Pod:

Home > Scheda Info Pod >
CONFIGURA NUOVO POD

o

Icona del menu (☰) > Pod
>CONFIGURA NUOVO POD

2. Andare a "Passaggi preliminari per la sostituzione del Pod" a pagina 40.



Passaggi preliminari per la sostituzione del Pod

Avvertenze:

NON usare MAI insulina torbida, perché potrebbe essere vecchia o inattiva. Attenersi sempre alle istruzioni per l'uso del produttore dell'insulina. Il mancato utilizzo di insulina U-100 ad azione rapida o l'uso di insulina vecchia o inattiva potrebbero mettere a rischio la salute dell'utente.

NON applicare né usare un Pod la cui confezione sterile sia aperta o danneggiata, o se il Pod è stato lasciato cadere dopo averlo estratto dalla confezione, poiché ciò potrebbe aumentare il rischio di infezione. I Pod sono sterili purché la confezione non sia stata aperta o danneggiata.

NON applicare o usare un Pod se presenta danni di qualunque tipo. Un Pod danneggiato potrebbe non erogare insulina in modo accurato o potrebbe non funzionare correttamente.

NON utilizzare un Pod dopo la data di scadenza impressa sulla confezione.

Per ridurre al minimo la possibilità di infezione del sito di infusione, NON applicare un Pod senza avere prima utilizzato una tecnica asettica, consistente in:

- Lavarsi le mani.
- Pulire la fiala di insulina con un tampone disinfettante imbevuto di alcool.
- Pulire il sito di infusione con acqua e sapone o un tampone disinfettante imbevuto di alcool.
- Conservare i materiali sterili lontano da possibili germi.

1. Procurarsi quanto segue:

- Una fiala di insulina U-100 ad azione rapida approvata per l'uso nel sistema Omnipod DASH®
- Un Pod DASH® non aperto (individuare il logo Omnipod DASH® sulla confezione del Pod)
- Tamponi disinfettanti imbevuti di alcol
- PDM Omnipod DASH®

2. Lavarsi le mani prima di iniziare e assicurarsi che rimangano pulite durante tutto il processo di sostituzione del Pod.


3. Verificare che l'insulina non presenti segni di deterioramento secondo le istruzioni per l'uso del produttore.

4. Verificare che la confezione del Pod non sia danneggiata. Se non è danneggiata, aprirla e ispezionare il Pod per verificare che non presenti danni di alcun tipo.
5. Se la temperatura dell'insulina o del Pod è inferiore a 10 °C (50 °F), lasciare che l'insulina o il Pod torni a temperatura ambiente prima di procedere.

Riempimento della siringa con insulina

Il passaggio successivo consiste nel riempire con insulina la siringa fornita con il Pod o "siringa di riempimento":

1. Pulire la sommità della fiala di insulina con un tamponcino disinfettante imbevuto di alcol.
2. Avvitare saldamente l'ago sulla siringa di riempimento.
3. Tirare verso l'esterno il cappuccio protettivo per rimuoverlo dall'ago. Conservare il cappuccio, perché dovrà essere nuovamente utilizzato.
4. Calcolare la quantità di insulina da inserire nel Pod. Se, ad esempio, si dovrà utilizzare il Pod per 72 ore, caricare una quantità di insulina necessaria a coprire le 72 ore. Chiedere consiglio al proprio referente medico per determinare la quantità corretta di insulina.

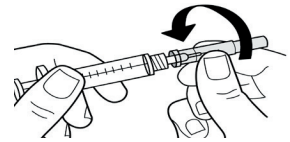


Tirare verso l'esterno



Nota: per poter iniziare a funzionare, il Pod necessita di almeno 85 unità di insulina U-100 ad azione rapida. Il Pod può erogare fino a 200 unità di insulina U-100 ad azione rapida.

5. Aspirare nella siringa di riempimento un volume di aria pari alla quantità di insulina da usare.
6. Inserire l'ago nella fiala di insulina e iniettare l'aria. Così facendo si facilita il prelievo dell'insulina dalla fiala.
7. Capovolgere la fiala di insulina U-100 ad azione rapida e la siringa. Tirare verso il basso il pistone della siringa per prelevare la quantità di insulina desiderata dalla fiala.
 - Riempire la siringa almeno fino al livello minimo (MIN).

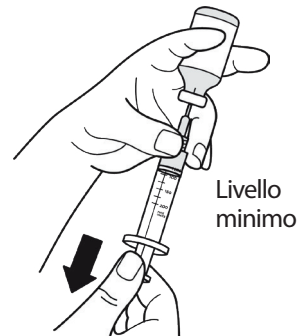

3 Sostituzione del Pod

- Per riempire il Pod con una quantità sufficiente di insulina per erogare 200 unità, tirare lo stantuffo verso il basso finché non si ferma. Questo succederà sotto il segno 200.
8. Con l'ago sempre inserito nella fiala, dare dei leggeri colpetti con la punta del dito lungo le pareti della siringa per far risalire eventuali bolle d'aria fino alla sommità della siringa. Quindi, spingere il pistone della siringa per trasferire l'aria dalla siringa all'interno della fiala di insulina. Se necessario, tirare nuovamente verso il basso il pistone per riempire nuovamente la siringa con la quantità di insulina desiderata.

Avvertenza: verificare che non siano presenti bolle o sacche d'aria nella siringa di riempimento prima di riempire un Pod con insulina. Eventuali bolle d'aria che dovessero essere trasferite dalla siringa di riempimento al Pod potrebbero causare l'interruzione dell'erogazione di insulina.

9. Estrarre l'ago dalla fiala.

Riempimento, abbinamento e applicazione del Pod

Avvertenza: prima di riempire un Pod, accertarsi che non sia in corso l'attivazione di altri Pod entro un raggio di 1,5 m (5 piedi) dal PDM in uso.

Attenzione: la siringa va inserita esclusivamente nel foro di riempimento e in nessun'altra parte del Pod. Non inserire la siringa più di una volta nel foro di riempimento. Utilizzare esclusivamente l'ago e la siringa di riempimento forniti con ciascun Pod. La siringa di riempimento è monouso e deve essere usata solo con il sistema Omnipod DASH®.

Riempimento del Pod con l'insulina

Per riempire il Pod con l'insulina (passaggio 1 sul display):

1. Sul lato inferiore del Pod individuare la freccia. La freccia indica il foro di riempimento dell'insulina.

Consiglio: lasciare il Pod nel suo vassoio durante la procedura di riempimento e di abbinamento.

2. Inserire la siringa nel foro di riempimento senza inclinarla.
3. Premere il pistone della siringa in modo da trasferire l'insulina nel Pod.
4. Il Pod emette due bip durante il processo di riempimento. Assicurarsi di svuotare completamente il contenuto della siringa (anche se tale operazione dovesse prolungarsi dopo l'emissione dei due bip).



Nota: per poter iniziare a funzionare, il Pod necessita di almeno 85 unità di insulina. Il Pod emette i due bip solo se è stato riempito con almeno 85 unità di insulina. Se il Pod è stato riempito con più di 85 unità di insulina e non si sentono i due bip, contattare il servizio di Assistenza clienti.

Nota: una volta riempito il Pod, procedere immediatamente al passaggio successivo. Se passano due ore prima dell'abbinamento del Pod riempito al PDM, il Pod diventa inutilizzabile.

Avvertenze:

NON usare MAI un Pod se si avverte resistenza quando si spinge il pistone della siringa di riempimento. Questa condizione può comportare l'interruzione dell'erogazione di insulina.

NON iniettare MAI aria nel foro di riempimento. Tale operazione potrebbe comportare un'erogazione accidentale o non completa dell'insulina.


5. Rimuovere l'ago dal foro di riempimento dell'insulina. Il foro è autosigillante, pertanto l'insulina non fuoriesce una volta estratto l'ago.
6. Riposizionare il cappuccio protettivo sull'ago della siringa e rimuovere l'ago dalla siringa.

3 Sostituzione del Pod

Abbinamento del PDM e del Pod

Per abbinare il PDM e il Pod (passaggio 2 sul display):

1. Avvicinare il PDM al Pod in modo che si tocchino. Il Pod deve essere lasciato nel proprio vassoio durante questa operazione.
2. Toccare **AVANTI**.
 - Se ci sono più Pod DASH a distanza di comunicazione, il PDM informa l'utente a riguardo. Allontanarsi di almeno 4,5 m (15 piedi) da qualsiasi altro Pod DASH e toccare **RIPROVA**.
 - Se è presente soltanto un Pod a distanza di comunicazione, il sistema Omnipod DASH® esegue una serie di controlli di sicurezza ed effettua il priming del Pod.
3. Attendere il segnale acustico del PDM che indica che il Pod è abbinato al PDM ed è pronto per essere applicato.

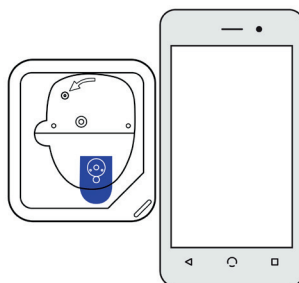

Nota: dopo l'abbinamento, il PDM deve essere sempre in grado di comunicare con un Pod distante fino a 1,5 m (5 piedi). A seconda della posizione, il PDM può essere in grado di comunicare con un Pod distante fino a 15 m (50 piedi).

Nota: dopo l'abbinamento, il Pod emette dei bip ogni 5 minuti fino a quando non viene applicato. Se non viene applicato entro 60 minuti dopo l'abbinamento, il Pod diventa inutilizzabile.

Se viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione quando si tenta di abbinare il Pod, vedere "Errori di comunicazione" a pagina 128.

Preparazione del sito del Pod

Selezionare il sito di infusione del Pod (passaggio 3 sul display):



Linee guida per la selezione del sito del Pod

La scelta del sito dove posizionare il Pod deve essere fatta dopo essersi consultati con il proprio referente medico e attenendosi alle seguenti linee guida:

- I siti ideali presentano uno strato di tessuto adiposo.
- I siti ideali offrono facilità di accesso e di visualizzazione.
- Il nuovo sito di infusione dovrebbe trovarsi ad almeno 2,5 cm (1 pollice) dal sito precedente per evitare irritazioni alla pelle.
- Il sito dovrebbe trovarsi ad almeno 5 cm (due pollici) dall'ombelico.
- Evitare le zone su cui possano far attrito cinture, fasce o capi di abbigliamento attillati, disturbando o spostando il Pod.
- Evitare le zone in cui la posizione del Pod potrebbe essere compromessa dalle pieghe cutanee.
- Non applicare il Pod sopra un neo, un tatuaggio o una cicatrice, poiché in queste zone l'assorbimento insulinico potrebbe essere ridotto.
- Evitare le aree della pelle che presentano un'infezione.


Mappa del sito del Pod (opzionale)

La mappa del sito del Pod è una funzione opzionale che aiuta a tenere traccia della posizione corrente e di quelle recenti del sito del Pod. Questa opzione viene visualizzata solo se l'impostazione Siti Pod è attivata (vedere "Impostazioni dei siti del Pod" a pagina 104).

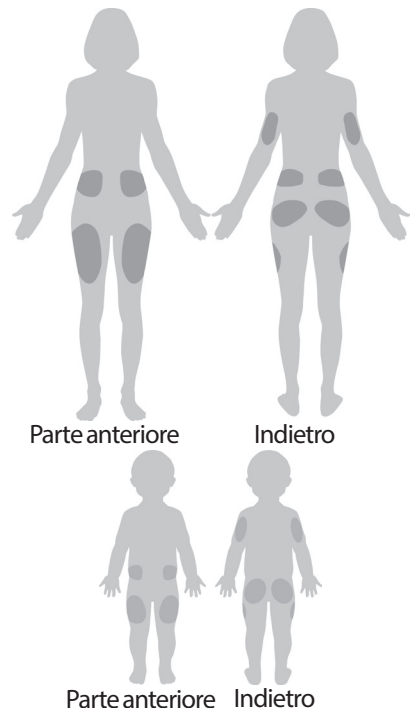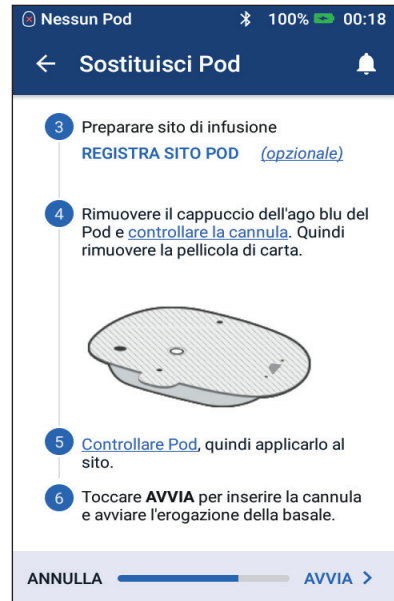


3 Sostituzione del Pod

1. Toccare REGISTRA SITO POD per visualizzare la schermata Registra sito Pod.
2. Toccare la scheda PARTE ANTERIORE o PARTE POSTERIORE per selezionare un'area del corpo per il Pod. Per aiutare l'utente a evitare i siti del Pod recenti, il display indica le due date più recenti in cui ogni sito è stato selezionato.
3. Toccare un cerchio per indicare la posizione del nuovo Pod sul corpo. Viene visualizzato un punto blu all'interno del cerchio. Toccare di nuovo per deselegionare la posizione.

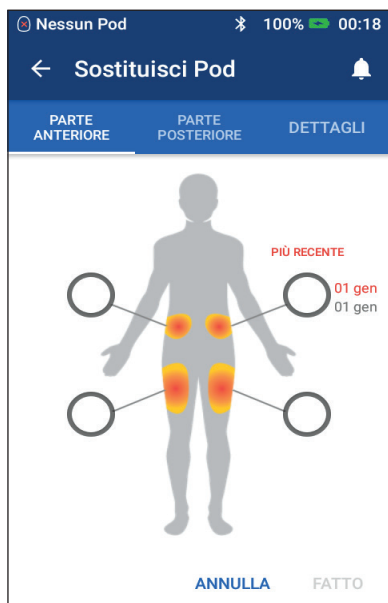

4. Toccare la scheda DETTAGLI per aggiungere un dettaglio sulla posizione di questo Pod. Ad esempio, è possibile aggiungere un dettaglio che dice "Rivolto verso l'alto" o "Rivolto verso il basso" per descrivere l'orientamento del Pod.
 - a. Per aggiungere un nuovo dettaglio, toccare AGGIUNGI NUOVO e aggiungere il nuovo dettaglio. Al termine, toccare AGGIUNGI. Il nuovo dettaglio viene aggiunto all'elenco.

Nota: il PDM non fa distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Ad esempio, è possibile utilizzare solo uno dei seguenti dettagli: "Rivolto verso l'alto", "RIVOLTO VERSO L'ALTO" o "rivolto verso l'Alto", perché per il PDM queste tre opzioni sono identiche.
 - b. Selezionare un dettaglio per il nuovo Pod toccando il cerchio accanto a quel dettaglio. È possibile aggiungere un solo dettaglio per ciascun Pod. Toccare di nuovo per deselegionare il dettaglio.

Nota: per eliminare un dettaglio del sito, toccare  accanto al dettaglio.
5. Al termine, toccare FATTO per tornare alla schermata Sostituisci Pod.

Preparazione del sito di infusione

Per ridurre il rischio di infezioni presso il sito di infusione:

1. Lavarsi le mani con acqua e sapone.
2. Lavare il sito di infusione selezionato con acqua e sapone.

Nota: il sapone antibatterico potrebbe irritare la pelle, specialmente in corrispondenza del sito di infusione. Chieda al referente medico consigli sul trattamento delle irritazioni della pelle.

3. Asciugare il sito di infusione con una salvietta pulita.
4. Disinfettare il sito di infusione con un tampone disinfettante imbevuto di alcol. Partendo dal centro del sito, strofina delicatamente verso l'esterno con un movimento circolare.
5. Lasciare asciugare completamente il sito di infusione all'aria. Non soffiare sul sito per asciugarlo.

Rimozione del cappuccio dell'ago del Pod

Rimuovere il cappuccio dell'ago del Pod (passaggio 4 nella schermata):

1. Ribaltare il Pod in modo che il cappuccio dell'ago sia rivolto verso l'alto e verso l'utente.
2. Appoggiare il pollice sulla parte inferiore (bordo piatto) del cappuccio dell'ago e tirare il cappuccio verso l'alto. Il cappuccio si staccherà. Gettare via il cappuccio.

Quando si rimuove il cappuccio dell'ago, si può notare una goccia di insulina all'estremità della cannula o nel pozzetto.

3. In presenza di una qualsiasi delle seguenti condizioni, toccare **ANNULLA** e ricominciare da capo con un nuovo Pod:
 - Il Pod è stato inavvertitamente lasciato cadere a terra, e la sua sterilità potrebbe essere compromessa.
 - Il Pod o il suo cerotto adesivo è bagnato, sporco o danneggiato.



3 Sostituzione del Pod

- La cannula sporge oltre la pellicola adesiva quando viene tolto il cappuccio dell'ago del Pod.

Avvertenza: verificare che la cannula non sporga oltre la pellicola adesiva una volta rimosso il cappuccio dell'ago del Pod.

4. Rimuovere la carta bianca che ricopre il cerotto adesivo tirandola per le linguette. Fare attenzione a non rimuovere il cerotto adesivo. Non lasciare che l'adesivo si ripieghi su se stesso.


Applicazione del Pod

Controllare e applicare il Pod (passaggio 5 sul display):

1. Esaminare il Pod. Toccare ANNULLA e gettare via il Pod se il cerotto adesivo è piegato, strappato o danneggiato e iniziare da capo con un nuovo Pod.
2. Quando si applica il Pod, orientarlo come segue:

- Orizzontalmente o con una leggera angolazione sull'addome, sul fianco, sulla zona lombare o sulle natiche.
- Rivolto verso l'alto o verso il basso o con una leggera angolazione sulla parte superiore del braccio o sulla coscia.

3. Applicare il Pod sul sito di infusione selezionato premendo con decisione per farlo aderire alla pelle.

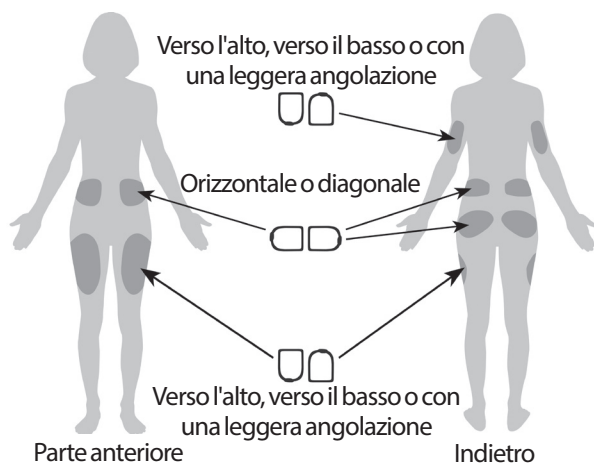

L'adesivo è progettato per essere usato una sola volta. Una volta applicato sul corpo, evitare di rimuovere e riapplicare il Pod su un sito di infusione diverso.

Nota: l'adesivo mantiene il Pod saldamente in posizione per un massimo di tre giorni. Tuttavia, in caso di bisogno, sono disponibili diversi prodotti per aumentare l'adesione. Per informazioni sui prodotti in questione, chiedere al referente medico. Evitare di usare lozioni, creme, oli o spray vicino al sito di infusione, in quanto tali prodotti potrebbero causare il distacco dell'adesivo.

Avvio dell'erogazione di insulina

Avviare l'erogazione di insulina (passaggio **6** sul display):

Avvertenza: se si applica il Pod in un sito con scarso tessuto adiposo, afferrare la pelle attorno al Pod e tenerla compressa durante tutto lo svolgimento del prossimo passaggio. Se non si utilizza questa tecnica, nelle aree con poco tessuto adiposo possono verificarsi delle occlusioni.



1. Se il Pod è stato applicato su un'area magra, pizzicare la pelle attorno al Pod.
2. Toccare **AVVIA**.
3. Confermare che il Pod è stato applicato saldamente sul corpo, quindi toccare **CONFERMA**.
4. Se si sta pizzicando la pelle, rilasciarla quando il PDM chiede se la cannula è stata inserita correttamente.

Una volta inserita la cannula, il Pod riempie automaticamente la cannula con insulina e inizia a erogare insulina a una velocità basale in base al programma basale attivo.

La cannula può essere inserita una sola volta per ogni Pod.


Attenzione: controllare la funzione di allarme a ogni sostituzione del Pod (vedere "Controllo degli allarmi" a pagina 103).

3 Sostituzione del Pod

Controllo del sito di infusione

Dopo l'inserimento della cannula, controllare il Pod e il sito di infusione:

1. Guardare attraverso la finestrella di visualizzazione sul bordo del Pod per verificare che la cannula sia inserita sotto pelle. La cannula è di colore azzurro chiaro.
2. Verificare che l'area indicata nella figura sia di colore rosa. Si tratta di un'ulteriore verifica che consente di essere sicuri che la cannula sia stata inserita.
3. Verificare che il sito di infusione non sia bagnato e che non vi sia odore di insulina, poiché ciò può indicare lo spostamento della cannula.

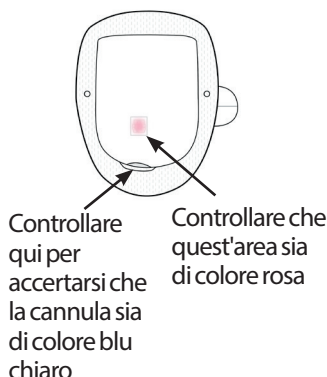

Avvertenza: controllare il sito di infusione dopo l'inserimento della cannula per verificare che quest'ultima sia inserita correttamente. Un inserimento erraneo della cannula può causare iperglicemia.

Se si nota del sangue nella cannula, controllare la glicemia con maggiore frequenza per accertarsi che l'insulina venga erogata correttamente. Qualora si rilevassero livelli glicemici inaspettatamente elevati, sostituire il Pod.

4. Se la cannula non è inserita correttamente, toccare **NO**. Quindi toccare **DISATTIVA POD**. Avviare nuovamente il processo con un nuovo Pod.
5. Se la cannula è inserita correttamente, toccare **SÌ**.
Un banner verde avvisa l'utente che l'installazione del Pod è completa. Il display visualizza i dettagli del Pod e l'elenco dei promemoria.
6. Esaminare l'elenco dei promemoria attivi, quindi toccare **CHIUDI**.

Avvertenza: non iniettare mai insulina (o qualunque altra sostanza) nel foro di riempimento mentre il Pod si trova sul corpo. Tale operazione potrebbe comportare un'erogazione accidentale o non completa dell'insulina.

Evitare infezioni nel sito di infusione

Controllare il sito di infusione almeno una volta al giorno:

- Individuare eventuali segni di infezione, tra cui dolore, gonfiore, rossore, essudazione o rialzo della temperatura nel sito di infusione. Se si sospetta un'infezione, rimuovere immediatamente il Pod e applicarne uno nuovo in un sito diverso. Quindi contattare il referente medico.
- Se si osserva qualsiasi problema con il Pod, sostituirlo con un nuovo Pod.

Avvertenze:

controllare spesso che il Pod e la cannula morbida siano ben applicati e nella corretta posizione. Una cannula allentata o mal posizionata potrebbe causare l'interruzione dell'erogazione di insulina. Verificare che l'area non sia bagnata e che non vi sia odore di insulina, poiché ciò potrebbe indicare lo spostamento della cannula.



Se il sito di infusione presenta segni di infezione:

- Rimuovere immediatamente il Pod e applicarne uno nuovo in un sito di infusione diverso.
- Contattare il referente medico. Curare l'infezione seguendo le indicazioni del referente medico.

Ulteriori informazioni sull'utilizzo del Pod

Consiglio: È utile adottare una propria routine, in modo da sostituire il Pod a un'ora del giorno comoda in base alle proprie abitudini. Se si sa in anticipo che un evento potrebbe interferire con l'operazione di sostituzione del Pod, è possibile cambiare il Pod prima della scadenza per evitare interruzioni nell'erogazione di insulina.

Per ulteriori informazioni su come ottimizzare l'utilizzo dei Pod, vedere le seguenti sezioni:

- Per la cura e la manutenzione del Pod, vedere "Cura e manutenzione del Pod e dell'insulina" a pagina 133.
- Per conoscere il significato dei vari allarmi del Pod, vedere "Allarmi, notifiche ed errori di comunicazione" a pagina 117.
- Se il Pod emette un allarme, la prima cosa da fare è provare a silenziarlo utilizzando il PDM. Se tale tentativo non dovesse funzionare, è possibile disattivare manualmente l'allarme del Pod (vedere "Silenziamento di un allarme non risolto" a pagina 132).
- Per comprendere il significato dei bip di notifica e informativi emessi dal Pod, compresi quelli opzionali, vedere "Elenco delle notifiche" a pagina 126 e "Elenco dei segnali informativi" a pagina 127.
- Per sapere come gestire quelle situazioni in cui il PDM non riesce a comunicare con il Pod, vedere "Errori di comunicazione" a pagina 128.
- Se la scheda Home: info Pod dice "Nessuna comunicazione da Pod":
 - Per trovare l'ultima volta che il PDM ha comunicato correttamente con il Pod, accedere a: icona del menu () > Pod.
 - Se non si è in grado di ripristinare la comunicazione con il Pod e si desidera passare a un nuovo Pod, accedere a: icona del menu () > Pod > SOSTITUISCI POD.
- Per una descrizione delle modalità di comunicazione del PDM comunica con il Pod, vedere "Interazioni tra PDM e Pod" a pagina 143.

CAPITOLO 4

Immissione dei valori della glicemia

Informazioni relative al controllo della glicemia

Avvertenza: seguire le indicazioni del proprio referente medico per un corretto monitoraggio della glicemia.

Si consiglia di controllare la glicemia:

- Quando si avvertono sintomi quali debolezza, sudorazione, nervosismo, mal di testa, irritabilità o confusione.
- Quando si ritarda un pasto dopo l'assunzione di insulina.
- Quando il referente medico lo consiglia.

Immissione del valore della glicemia

Nota: immettere esclusivamente i valori della glicemia, non immettere i valori della soluzione di controllo. Eventuali valori immessi vengono tenuti in considerazione nel calcolo della glicemia media all'interno dei registri cronologici della glicemia.

Per immettere il valore della glicemia:

1. Controllare la glicemia attenendosi alle istruzioni per l'uso del glucometro.
2. Andare alla schermata Immetti glicemia del PDM:
Icona del menu (≡) >
Immetti glicemia
3. Immettere o modificare manualmente un valore della glicemia come segue:
 - a. Toccare la casella all'interno del cerchio.



4 Valori della glicemia

- b. Utilizzare il tastierino numerico per immettere il valore della glicemia.
- c. Toccare la casella di controllo per chiudere il tastierino numerico.

Nota: in alternativa, è possibile immettere un valore della glicemia utilizzando il cursore circolare (vedere "Utilizzo di un cursore" a pagina 6). Quando si utilizza il cursore, vengono visualizzati brevemente i pulsanti "+" e "-". Toccare questi pulsanti per apportare piccole modifiche al valore della glicemia.

Nota: quando si inserisce una lettura della glicemia superiore a 600 mg/dL, il PDM la memorizza come "AL". Quando si inserisce una lettura della glicemia inferiore a 20 mg/dL, il PDM la memorizza come "BA".

Per il significato dei colori e dei messaggi sul display, vedere "Modalità di visualizzazione dei valori della glicemia" a pagina 56.

4. Facoltativo: per aggiungere uno o più tag informativi al valore della glicemia visualizzato nel cerchio, vedere "Aggiunta di tag ai valori della glicemia" a pagina 55.
5. Una volta immessi il valore della glicemia ed eventuali tag, eseguire una delle seguenti azioni:
 - Toccare AGGIUNGI A SUGGERITORE per salvare eventuali tag e immettere il valore della glicemia nel suggeritore di bolo. Quindi andare a "Erogazione di un bolo con il suggeritore di bolo" a pagina 59. Se il suggeritore di bolo è disattivato e disabilitato, o se l'erogazione di insulina è sospesa, AGGIUNGI A SUGGERITORE non viene visualizzato.
 - Toccare SALVA per salvare il valore della glicemia ed eventuali tag nei registri cronologici. Se si accede a questa schermata dal suggeritore di bolo, SALVA non viene visualizzato.
 - Toccare ANNULLA e poi SÌ per uscire dalla schermata senza salvare il valore della glicemia o dei tag.

Il PDM registra l'ora corrente come l'ora della lettura della glicemia.


Aggiunta di tag ai valori della glicemia

È possibile aggiungere tag informativi ai valori della glicemia, per farvi riferimento in seguito. Ad esempio, è possibile contrassegnare il valore della glicemia come pre-prandiale.

Per aggiungere un tag al valore corrente della glicemia:

1. Toccare **AGGIUNGI TAG**.
2. Per selezionare un tag, toccarlo.
È possibile aggiungere un massimo di quattro tag.
3. Per rimuovere un tag, toccare il tag di nuovo per deselectionarlo.

È possibile aggiungere o rimuovere i tag per i valori della glicemia AL e BA, esattamente come per qualsiasi altro valore della glicemia.

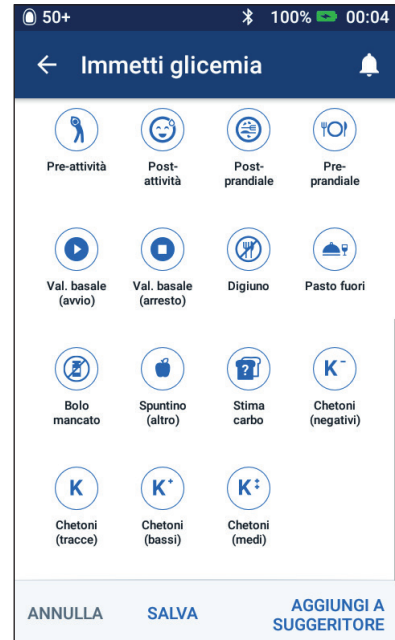

4 Valori della glicemia

Modalità di visualizzazione dei valori della glicemia

Il PDM visualizza il valore della glicemia all'interno di un cerchio colorato. Il cerchio è:

- Giallo se la glicemia è superiore all'obiettivo glicemico.
- Verde se la glicemia è entro l'obiettivo glicemico.
- Rosso se la glicemia è inferiore all'obiettivo glicemico.

Per modificare l'obiettivo glicemico, vedere "Impostazioni della glicemia - Intervallo obiettivo glicemico" a pagina 110.



Il PDM aggiunge un messaggio di avviso per valori della glicemia alti e bassi.

Valore della glicemia	Sul display appare	Messaggio di avviso
Superiore a 600 mg/dL o AL	AL	Trattare iperglicemia! Se l'iperglicemia persiste, consultare un medico.
251-600 mg/dL	<valore della glicemia>	Trattare iperglicemia! Se l'iperglicemia persiste, consultare un medico.
70-250 mg/dL	<valore della glicemia>	
20-69 mg/dL	<valore della glicemia>	Trattare ipoglicemia!
0-19 mg/dL o BA	BA	Trattare ipoglicemia!

Se la glicemia è AL o superiore a 600 mg/dL, il PDM registra "AL" nella cronologia. Ciò indica un'iperglicemia grave (glicemia alta). Se il valore della glicemia è BA o inferiore a 20 mg/dL, il PDM registra "BA" nella cronologia. Ciò indica un'ipoglicemia grave (glicemia bassa). I valori AL e BA vengono salvati nella cronologia glicemica, ma non vengono utilizzati nei calcoli della glicemia media.

Avvertenze:

valori della glicemia inferiori a 70 mg/dL possono essere indice di ipoglicemia (glicemia bassa). Valori della glicemia superiori a 250 mg/dL possono essere indice di iperglicemia (glicemia alta). Attenersi alle indicazioni del proprio referente medico per il trattamento.

Se viene visualizzato il messaggio "Trattare ipoglicemia!" e si avvertono sintomi quali debolezza, sudorazione, nervosismo, mal di testa, irritabilità o confusione, attenersi alle indicazioni del proprio referente medico per trattare l'ipoglicemia.

Se il risultato della lettura è "Trattare iperglicemia. Se l'iperglicemia persiste, consultare un medico." e si avvertono sintomi quali affaticamento, sete, diuresi eccessiva o visione offuscata, attenersi alle indicazioni del referente medico per trattare l'iperglicemia.

Valori della glicemia "BA" e "AL" possono indicare condizioni potenzialmente gravi che richiedono l'immediata attenzione di un medico. Se non trattate, queste condizioni possono rapidamente dar luogo a chetoacidosi diabetica (DKA), shock, coma o morte.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 5

Erogazione di un bolo di insulina

Un bolo di insulina viene utilizzato per abbassare un livello glicemico alto e per coprire i carboidrati assunti durante un pasto. Il bolo di insulina viene erogato in aggiunta all'insulina da un programma basale o una basale temporanea. Per ulteriori informazioni sui boli, vedere pagina 153.

Avvertenza: quando si usa la funzione di bolo prolungato, è necessario controllare i livelli glicemici con maggiore frequenza per evitare ipoglicemia o iperglicemia.

Attenzione: misurare sempre la glicemia prima di procedere all'erogazione di un bolo.

Se il suggeritore di bolo è disattivato o temporaneamente disabilitato, andare a "Bolo calcolato manualmente" a pagina 65.

Erogazione di un bolo con il suggeritore di bolo

Il suggeritore di bolo calcola una dose del bolo consigliato di insulina per correggere un livello glicemico elevato (bolo di correzione) e/o per coprire i carboidrati di un pasto (bolo pasto). Per informazioni dettagliate sulla modalità di funzionamento del suggeritore di bolo, vedere pagina 154.


Se si immette un valore della glicemia ma non si immettono i carboidrati, il suggeritore di bolo calcola soltanto un bolo di correzione. Se si immettono i carboidrati ma non si immette un valore della glicemia, il suggeritore di bolo calcola soltanto un bolo pasto. Se si immettono sia i carboidrati che un valore della glicemia, il suggeritore di bolo utilizza entrambi i fattori per calcolare un bolo consigliato.

Per modificare le impostazioni personali utilizzate dal suggeritore di bolo o per attivare o disattivare il suggeritore di bolo, vedere "Impostazioni del suggeritore di bolo" a pagina 113.

5 Erogazione di un bolo di insulina

Immissione dei dati del pasto

Per immettere i carboidrati del pasto:

1. Nella schermata Home, toccare il pulsante Bolo ().

Consiglio: se non si desidera utilizzare il suggeritore di bolo e si conosce già la quantità di bolo da erogare, toccare il campo Bolo totale per visualizzare il tastierino numerico. Immettere la quantità di bolo e toccare il segno di spunta. Quindi andare a "Erogazione di un bolo prolungato o immediato" a pagina 62.

2. Per immettere i carboidrati, toccare il campo Immetti carbo. Immettere i grammi di carboidrati e toccare il segno di spunta.

Nota: consultare il referente medico per istruzioni su come calcolare i grammi di carboidrati.


3. Esaminare il bolo pasto consigliato, che viene visualizzato accanto ai grammi di carboidrati.
4. In alternativa, toccare **CALCOLI** per visualizzare i dettagli dei calcoli del bolo.

Nota: se è stato immesso il valore della glicemia, il bolo pasto potrebbe essere stato regolato per:

- Insulina attiva (IOB) da un bolo di correzione precedente.
- Correzione inversa, se questa funzione è attivata e la glicemia è inferiore al target glicemico.

Per ulteriori informazioni, vedere "Regole del Suggeritore di bolo" a pagina 162.

Nota: se non è stato immesso il valore della glicemia, il suggeritore di bolo non regola il bolo pasto per l'insulina attiva (IOB).

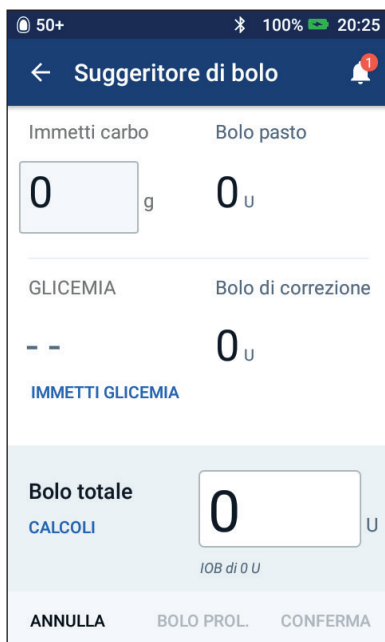

Immettere il valore della glicemia

Nota: anche se il suggeritore di bolo può generare una dose di bolo consigliato basata solo sui carboidrati in un pasto, si dovrebbe sempre immettere un valore recente della glicemia per maggiore sicurezza e precisione. Ciò consente al suggeritore di bolo di regolare il bolo consigliato in modo da tenere conto del livello glicemico corrente.

Per immettere un valore della glicemia:

1. Toccare **IMMETTI GLICEMIA**.

Se il PDM ha un valore della glicemia misurato negli ultimi 10 minuti, tale valore viene visualizzato automaticamente nel campo Glicemia. Se si desidera che il suggeritore di bolo utilizzi tale valore, procedere direttamente al passaggio successivo.

2. Toccare la casella nel cerchio e immettere il valore della glicemia. In alternativa, far scorrere l'indicatore lungo il cerchio per immettere il valore della glicemia.

Anche se il suggeritore di bolo utilizzerà qualsiasi valore della glicemia immesso manualmente dall'utente, immettere soltanto un valore della glicemia misurato negli ultimi 10 minuti.

Per il significato dei colori e dei messaggi visualizzati nella schermata sul display, vedere "Modalità di visualizzazione dei valori della glicemia" a pagina 56.

3. Facoltativo: per contrassegnare la lettura della glicemia, toccare **AGGIUNGI TAG** e toccare un tag. Per deselezionare un tag, toccarlo di nuovo. È possibile aggiungere un massimo di quattro tag.
4. Toccare **AGGIUNGI A SUGGERITORE**. Viene visualizzata di nuovo la schermata Suggeritore di bolo.
5. Esaminare il bolo di correzione consigliato, che viene visualizzato accanto al valore della glicemia. Il bolo di correzione è stato regolato per qualsiasi insulina attiva (IOB) (vedere "Regole del Suggeritore di bolo" a pagina 162).

5 Erogazione di un bolo di insulina

Erogazione di un bolo prolungato o immediato

Il campo Bolo totale mostra il bolo consigliato. La quantità di eventuali regolazioni dell'insulina attiva (IOB) viene visualizzata sotto il campo Bolo totale.

Per esaminare ed erogare il bolo:

1. Rivedere il bolo consigliato. Per regolare il valore, toccare il campo Bolo totale e immettere un nuovo bolo.

50+ 100% 20:25

← Suggeritore di bolo

Carbo totali Bolo pasto

60 g 4 U

GLICEMIA (20:25) Bolo di correzione

150 mg/dL 0,90 U

IMMETTI GLICEMIA

Bolo totale

CALCOLI 4,9 U

Regolato per IOB di 0 U

ANNULLA BOLO PROL. CONFERMA

2. Per esaminare i calcoli del suggeritore di bolo, toccare CALCOLI. Potrebbe essere necessario scorrere verso l'alto o verso il basso per vedere tutti i calcoli. Al termine, toccare CHIUDI (vedere "Equazioni del Suggeritore di bolo" a pagina 161 per informazioni dettagliate).

50+ 100% 20:25

← Calcolo bolo

Bolo di correzione 0,9 U

Glicemia = 150, Target glicemico = 105
Fattore di correzione = 50
 $(150 - 105) / 50 \approx 0,9 \text{ U}$

Regolazione IOB pasto

IOB pasto: 0 U
 $0,9 \text{ U} - 0 \text{ U} = 0,9 \text{ U}$

Regolazione IOB correzione

IOB correzione: 0 U
 $0,9 \text{ U} - 0 \text{ U} \approx 0,9 \text{ U}$

Bolo pasto 4 U

Carbo = 60 g, Rapporto insulina/carbo (IC) = 15 g/U
 $60 / 15 \approx 4 \text{ U}$

Regolazione IOB correzione

CHIUDI

3. Per erogare immediatamente l'intero bolo, toccare CONFERMA e procedere direttamente al passaggio 5.
4. Per prolungare l'intero bolo pasto o una parte di esso:

- a. Toccare BOLO PROLUNGATO.

Nota: l'opzione BOLO PROLUNGATO è disponibile quando c'è un bolo pasto e l'impostazione "Bolo prolungato" è attivata.

- b. Toccare il campo Adesso e digitare la percentuale del bolo da erogare immediatamente. In alternativa, toccare il campo Prolungato e immettere la percentuale da prolungare.

Il numero di unità da erogare subito e nel corso del periodo prolungato viene visualizzata sotto la percentuale (%).

Nota: È possibile prolungare soltanto la porzione del bolo pasto. L'eventuale porzione di correzione del bolo viene sempre erogata immediatamente.

- c. Toccare il campo Durata e immettere la durata per la porzione prolungata del bolo.
- d. Toccare CONFERMA.



Adesso	Prolungato
40 %	60 %
1,60 U	2,40 U

Durata
(da 0,5 a 8 ore)

0,5 ore

Bolo totale 4,9 U

Bolo pasto 4 U


Bolo di correzione 0,9 U

ANNULLA CONFERMA

5 Erogazione di un bolo di insulina

5. Esaminare i dettagli del bolo nella schermata Conferma bolo.

Bolo immediato: la schermata per un bolo immediato mostra i valori dei carboidrati e della glicemia utilizzati per il calcolo del bolo e il bolo totale.

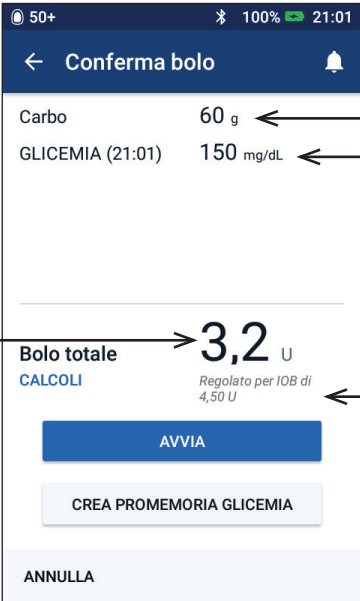

Carbo 60 g

GLICEMIA (21:01) 150 mg/dL

Bolo totale 3,2 U
CALCOLI
Regolato per IOB di 4,50 U

AVVIA

CREA PROMEMORIA GLICEMIA

ANNULLA

Grammi di carboidrati

Valore glicemia

Il bolo totale include eventuali regolazioni dell'insulina attiva (IOB) e le eventuali modifiche apportate al bolo calcolato.

Regolato per IOB di 4,50 U significa che il suggeritore di bolo ha tenuto conto dell'insulina attiva (IOB) (vedere pagina 143-pagina 169).

Bolo prolungato: oltre alle informazioni nella schermata Bolo immediato, la schermata Bolo prolungato mostra anche la quantità di bolo che verrà erogata immediatamente e la quantità che verrà prolungata.



Carbo 60 g

GLICEMIA (20:25) 150 mg/dL

Bolo ora 40 %
Pasto: 1,60 U
Correzione: 0,90 U

Bolo prolungato 60 % (0,5 ore)
Pasto: 2,40 U

Bolo totale 4,9 U
CALCOLI
Regolato per IOB di 0 U

AVVIA

CREA PROMEMORIA GLICEMIA

ANNULLA

L'intero bolo di correzione viene erogato immediatamente.

È possibile prolungare solo il bolo pasto.

% del bolo **pasto** da erogare immediatamente

% del bolo **pasto** da erogare durante il periodo prolungato

6. Facoltativo: impostare un promemoria per controllare la glicemia:
 - a. Toccare CREA PROMEMORIA GLICEMIA.
 - b. Toccare il campo Controlla glicemia tra e immettere un'ora per il promemoria.
 - c. Toccare SALVA.

Nota: il pulsante CREA PROMEMORIA GLICEMIA viene visualizzato solo se l'impostazione del promemoria "Controlla glicemia dopo bolo" è attivata. Per attivare o disattivare questa impostazione, vedere "Promemoria Controlla glicemia dopo bolo" a pagina 106.

7. Toccare AVVIA per avviare il bolo.

La schermata Home monitora l'erogazione di un bolo immediato o di un bolo prolungato (vedere "Monitoraggio del progresso di un bolo" a pagina 67).

Bolo calcolato manualmente

Un bolo calcolato manualmente è un bolo calcolato dall'utente. Se il suggeritore di bolo è disattivato o temporaneamente abilitato, è necessario immettere un bolo calcolato manualmente.

Un bolo non può essere superiore all'impostazione Bolo massimo (vedere "Bolo massimo" a pagina 112).

Per erogare un bolo calcolato manualmente:


1. Nella schermata Home, toccare il pulsante Bolo ().

Viene visualizzata la schermata Bolo.

Nota: se il suggeritore di bolo è attivo, viene visualizzata una schermata diversa (vedere pagina 60).

2. Immettere la quantità di bolo utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Toccare il campo Bolo totale e immettere la quantità di bolo. Quindi toccare il segno di spunta.
- Toccare SELEZIONA DA PREIMPOSTAZIONI e selezionare la preimpostazione desiderata dall'elenco. Questa opzione è disponibile solo se il suggeritore di bolo è disattivato. Per creare o modificare un bolo preimpostato, vedere "Boli preimpostati" a pagina 85.

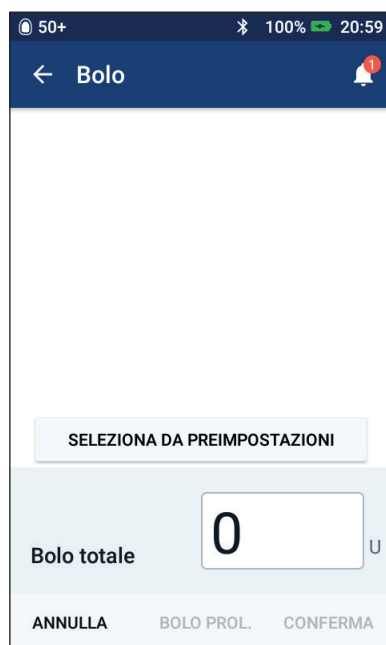

5 Erogazione di un bolo di insulina

3. Per erogare immediatamente l'intero bolo, toccare **CONFERMA**. Quindi procedere direttamente al passaggio 5.

4. Per prolungare il bolo:

a. Toccare **BOLO PROLUNGATO**.

Nota: l'opzione **BOLO PROLUNGATO** è disponibile solo se i boli prolungati sono abilitati (vedere pagina 113).

b. Toccare il campo **Adesso** e digitare la percentuale del bolo da erogare subito. In alternativa, toccare il campo **Prolungato** e immettere la percentuale da prolungare.

Il numero di unità da erogare subito e nel corso del periodo prolungato viene visualizzata sotto la percentuale (%).

Nota: È possibile prolungare l'intero bolo.

c. Toccare il campo **Durata** e immettere la durata per la porzione prolungata del bolo.

d. Toccare **CONFERMA**.

5. Esaminare i dettagli del bolo nella schermata **Conferma bolo**.

6. Facoltativo: impostare un promemoria per controllare la glicemia come segue:

a. Toccare **CREA PROMEMORIA GLICEMIA**.

b. Toccare il campo **Controlla glicemia tra e** immettere un'ora per il promemoria.

c. Toccare **SALVA**.

Nota: il pulsante **CREA PROMEMORIA GLICEMIA** viene visualizzato solo se l'impostazione del promemoria "Controlla glicemia dopo bolo" è attivata. Per attivare o disattivare questa impostazione, vedere "Promemoria Controlla glicemia dopo bolo" a pagina 106.

7. Esaminare i dettagli del bolo, quindi toccare **AVVIO** per avviare il bolo.

La quantità di bolo e i dettagli relativi al bolo preimpostato (laddove applicabile) vengono salvati nei registri cronologici. La schermata Home monitora l'erogazione di un bolo immediato o di un bolo prolungato (vedere "Monitoraggio del progresso di un bolo" a pagina 67).

50+ 100% 20:59

← Bolo prolungato

Adesso	Prolungato
40 %	60 %
2,40 U	3,60 U

Durata (da 0,5 a 8 ore) 0,5 ore

Bolo totale 6 U

ANNULLA CONFERMA

Monitoraggio del progresso di un bolo

Durante un bolo, la schermata Home visualizza una barra di avanzamento.

Avanzamento del bolo immediato

Durante un bolo immediato, la schermata Home visualizza il messaggio Erogazione bolo insieme a una barra di avanzamento e ai dettagli.

Se il suggeritore di bolo è attivato, nella parte in basso a sinistra del display viene visualizzata una stima dell'insulina attiva (IOB).

Se il suggeritore di bolo è disattivato (non visualizzato), nella parte in basso a sinistra del display viene visualizzata la quantità dell'ultimo bolo completato.

Non è possibile utilizzare il PDM durante un bolo immediato.

Per annullare o sostituire un bolo, vedere "Alterazione di un'erogazione bolo" a pagina 68.



Avanzamento del bolo prolungato

Durante un bolo prolungato, nella scheda Dashboard della schermata Home viene visualizzato il messaggio Erogazione bolo prolungato insieme a una barra di avanzamento e ad altri dettagli.

Nota: se il suggeritore di bolo è disattivato, la scheda Dashboard viene visualizzata quando un bolo prolungato è attivo.

Se il suggeritore di bolo è attivato, l'insulina attiva (IOB) visualizzata viene aggiornata con le quantità stimate dal bolo attivo.

Se il suggeritore di bolo è disattivato (non visualizzato), nella parte in basso a sinistra del display viene visualizzata la quantità dell'ultimo bolo completato.



5 Erogazione di un bolo di insulina

Durante un bolo prolungato, è possibile utilizzare il PDM per la maggior parte delle azioni.

A meno che il bolo non venga annullato, il Pod porta a termine l'erogazione di un bolo indipendentemente dalla distanza di comunicazione dal PDM. Per annullare o sostituire un bolo, vedere nella sezione "Alterazione di un'erogazione bolo" che segue.

Alterazione di un'erogazione bolo

Quando un bolo immediato è attivo, è necessario annullarlo prima di eseguire qualsiasi altra azione.

Durante un bolo prolungato, è possibile:

- Annullare il bolo.
- Erogare un nuovo bolo immediato e continuare l'erogazione bolo prolungato.
- Sostituire l'erogazione bolo con un altro bolo.

Se viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione quando si annulla un bolo, vedere "Errore durante l'annullamento di un bolo" a pagina 129.

Annullamento di un bolo

Per annullare un bolo immediato o un bolo prolungato:

1. Nella schermata Home (bolo immediato) o nella scheda Dashboard della schermata Home (bolo prolungato), toccare **ANNULLA**.
2. Toccare **Sì** per confermare l'annullamento del bolo. Il Pod emetterà una serie di bip a conferma che il bolo è stato annullato.

Erogazione di un nuovo bolo durante un bolo prolungato

Per erogare un bolo immediato quando un bolo prolungato è attivo:


1. Nella schermata Home, toccare il pulsante Bolo.
2. Immettere le informazioni relative ai carboidrati e alla glicemia. Quindi toccare **CONFERMA**.
3. Toccare **AVVIA**.

Il nuovo bolo viene erogato e il bolo prolungato continua.



Sostituzione di un bolo prolungato

Per sostituire un'erogazione bolo prolungato con un nuovo bolo prolungato, prima è necessario annullare il bolo attivo.

1. Nella schermata Home, toccare il pulsante Bolo ().
2. Immettere la quantità del nuovo bolo (vedere "Erogazione di un bolo con il suggeritore di bolo" a pagina 59 o "Bolo calcolato manualmente" a pagina 65).
3. Toccare BOLO PROLUNGATO. Verrà visualizzata una schermata che informa che è già attivo un bolo prolungato.
4. Toccare ANNULLA E CREA NUOVO per annullare il bolo attivo. Il PDM comunica la quantità di bolo che non è stata erogata.
5. Selezionare la modalità di gestione della quantità di bolo non erogata:
 - Se si desidera aggiungere la quantità di bolo non erogata al nuovo bolo prolungato, toccare AGGIUNGI A BOLO TOTALE. Verificare che il nuovo bolo totale sia corretto. Quindi toccare BOLO PROLUNGATO.

Nota: il suggeritore di bolo considera questa ulteriore quantità come una regolazione del nuovo bolo da parte dell'utente. Questa ulteriore quantità viene erogata contemporaneamente al nuovo bolo prolungato.

 - Se non si desidera aggiungere la quantità di bolo non erogata al nuovo bolo prolungato, toccare NO.
6. Tornare al flusso del bolo prolungato:
 - Se il suggeritore di bolo è attivato, andare al passaggio 4 a pagina 63.
 - Se il suggeritore di bolo è disattivato, andare al passaggio 4 a pagina 66.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 6

Modifica dell'erogazione di insulina basale

In questo capitolo viene descritto come modificare l'erogazione di insulina basale utilizzando velocità basali temporanee o passando a un programma basale differente (vedere "Velocità basali temporanee" a pagina 148).

Per creare un nuovo programma basale, vedere pagina 79. Per modificare un programma basale esistente, vedere pagina 81.

Utilizzo di basali temporanee

È possibile utilizzare un tasso basale temporaneo, detto anche "basale temporanea", per gestire un cambiamento temporaneo nella propria routine giornaliera. Ad esempio, è possibile ricorrere a una basale temporanea quando si pratica attività sportiva oppure quando si è malati. Al termine di una basale temporanea, il PDM ripristina automaticamente il programma basale impostato per il segmento temporale in corso.

Non è possibile attivare o annullare una basale temporanea durante un bolo immediato, ma è possibile attivare o annullare una basale temporanea mentre è in esecuzione un bolo prolungato.

Per creare una basale temporanea preimpostata per una basale temporanea utilizzata di frequente, vedere "Creazione di una nuova basale temporanea preimpostata" a pagina 83.

Per attivare una basale temporanea preimpostata, vedere "Attivare una basale temporanea preimpostata" a pagina 73.

Consiglio: *per impostazione predefinita, il PDM o il Pod emette un segnale acustico all'inizio e alla fine di una basale temporanea e ogni 60 minuti mentre è in esecuzione una basale temporanea. Per attivare o disattivare il segnale acustico, vedere "Elenco dei segnali informativi" a pagina 127.*

Attivazione di una basale temporanea

È possibile attivare una basale temporanea se l'impostazione "Basale temporanea" è attivata. Per attivare l'impostazione della basale temporanea, vedere "Basale temporanea" a pagina 111.

6 Modifica dell'erogazione di insulina basale

Per definire e attivare una basale temporanea:


1. Accedere a: icona del menu (☰) > Impostazione della basale temporanea.

Il display mostra un grafico del programma basale attivo.

Nota: per attivare una basale temporanea preimpostata, toccare SELEZIONA DA PREIMPOSTAZIONI e andare al passaggio di "Attivare una basale temporanea preimpostata" a pagina 73.

2. Toccare il campo Velocità basale e immettere la variazione desiderata nella velocità basale:

- Se le basali temporanee sono configurate in termini di variazione percentuale (%), far scorrere la rotella verso l'alto o verso il basso per definire la variazione percentuale per il programma basale attivo. Una freccia verso l'alto indica un aumento della velocità basale al di sopra di quella del programma basale attivo. Una freccia verso il basso indica una riduzione della velocità basale al di sotto di quella del programma basale attivo.
- Se le basali temporanee sono configurate in termini di unità orarie (U/ora), far scorrere la rotella per selezionare la velocità basale per l'intero periodo di basale temporanea.

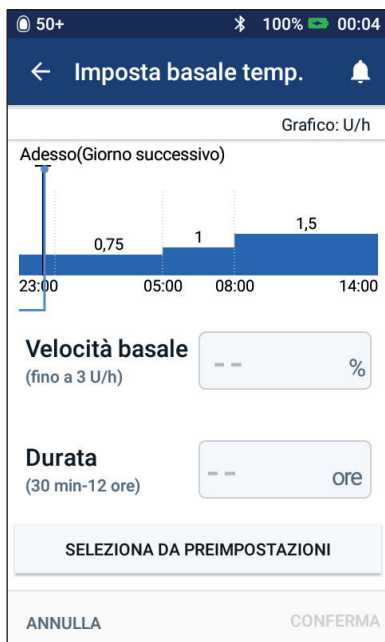

Per modificare la configurazione delle basali temporanee come percentuale (%) o U/ora, vedere "Basale temporanea" a pagina 111.

Nota: la rotella non scorre al di sopra della velocità basale massima. Per regolare la velocità basale massima, vedere "Velocità basale massima" a pagina 111.

Consiglio: È possibile disattivare l'erogazione di insulina per la durata della basale temporanea impostando una riduzione del 100% o impostando la basale temporanea su 0 U/ora. Per ulteriori informazioni, vedere "Limiti delle basali temporanee" a pagina 151 e "Metodi per interrompere temporaneamente l'erogazione di insulina" a pagina 152.

3. Toccare il campo **Durata** e immettere la durata della basale temporanea (tra 30 minuti e 12 ore).

Esaminare il grafico della basale temporanea nella parte superiore del display. La basale temporanea proposta viene sovrapposta al programma basale attivo.

- L'area ombreggiata di colore blu chiaro mostra la velocità basale temporanea proposta per ciascun segmento.
- Se si imposta una riduzione, il programma basale attivo viene visualizzato come una linea punteggiata.

4. Toccare **CONFERMA** per continuare.

5. Esaminare i dettagli della basale temporanea. Se sono necessarie correzioni, toccare la riga da modificare. Quindi immettere le correzioni e confermarle.

Nota: se necessario, il PDM limita la velocità basale di qualsiasi segmento che supera l'impostazione Velocità basale massima. Ciò viene indicato da una linea rossa nel grafico e dalla parola "Max".


6. Per attivare la basale temporanea, toccare **ATTIVA**. Quindi toccare di nuovo **ATTIVA**.

Dopo l'attivazione, la scheda Basale della schermata Home, ridenominata Basale temporanea, indica che è in corso l'erogazione della basale temporanea e il tempo restante. Al termine del periodo di tempo di basale temporanea, il Pod ripristina automaticamente il programma basale attivo.

Attivare una basale temporanea preimpostata

Una basale temporanea preimpostata serve per memorizzare i dati di una basale temporanea che si utilizza frequentemente. Per creare o modificare una basale temporanea preimpostata, vedere "Basali temporanee preimpostate" a pagina 83.

Per attivare una basale temporanea preimpostata:

1. Accedere a:
Icona del menu () > Basali temporanee preimpostate
2. Scorrere verso l'alto o verso il basso e toccare la basale temporanea preimpostata da attivare.
3. Per modificare la durata della basale temporanea, toccare **MODIFICA**.
4. Per attivare la basale temporanea, toccare **ATTIVA**, quindi toccare di nuovo **ATTIVA**.

6 Modifica dell'erogazione di insulina basale

Annullamento di una basale temporanea

Una basale temporanea si interrompe automaticamente al termine del relativo periodo di tempo e viene ripristinato l'ultimo programma basale attivo. Per annullare una basale temporanea prima della fine del relativo periodo di tempo:

1. Accedere alla scheda Basale temporanea della schermata Home.
2. Toccare **ANNULLA**.
3. Toccare **SÌ** per confermare l'annullamento. Il PDM annullerà la basale temporanea e ripristinerà il programma basale attivo.



Passaggio a un programma basale diverso

Giorni diversi possono avere routine diverse. Il PDM consente di creare programmi basali diversi per le varie routine. È possibile, ad esempio, impostare un programma basale per i giorni infrasettimanali e un programma basale diverso per i fine settimana.

Per creare, modificare o eliminare un programma basale, vedere "Programmi basali" a pagina 79.

Per passare a un programma basale diverso:

1. Accedere a: icona del menu (☰) > Programmi basali.
Viene visualizzato un elenco di programmi basali con il programma basale corrente in alto.
2. Selezionare un programma basale diverso in uno dei seguenti modi:
 - Per vedere un grafico di un programma basale inattivo prima di attivarlo, toccare il nome di quel programma basale. Quindi toccare **ATTIVA**.

Consiglio: toccare due volte il grafico per visualizzare una vista espansa del programma basale. Scorrere orizzontalmente per visualizzare le velocità basali per le ore successive o precedenti.

- Toccare l'icona delle opzioni (☰) a destra di un programma basale inattivo, quindi toccare Attiva.
3. Toccare di nuovo ATTIVA per sostituire il programma basale corrente con il nuovo programma selezionato.

Nota: È necessario annullare la basale temporanea corrente prima di passare a un programma basale diverso (vedere "Annullamento di una basale temporanea" a pagina 74). È invece possibile avviare o annullare una basale temporanea quando è in corso l'erogazione di un bolo prolungato.

Nota: se uno o più segmenti sono impostati per erogare 0 U/ora, il PDM notifica all'utente che l'erogazione di insulina si interromperà durante tali segmenti.

Sospensione e ripresa dell'erogazione di insulina basale

Talvolta può essere necessario sospendere temporaneamente l'erogazione di insulina, ad esempio, prima di modificare un programma basale attivo o di resettare l'ora o la data. Il sistema Omnipod DASH® consente di sospendere completamente l'erogazione di insulina per un massimo di due ore.

Per la differenza tra interrompere l'erogazione di insulina mediante la funzione di sospensione anziché attraverso l'impiego di basali temporanee, vedere "Metodi per interrompere temporaneamente l'erogazione di insulina" a pagina 152.


Sospendere l'erogazione di insulina

Per sospendere l'erogazione di insulina:

1. Accedere a: icona del menu (☰) > Sospendi insulina.
2. Toccare il campo Sospendi insulina per. Far scorrere la rotella per specificare la durata della sospensione dell'insulina. La sospensione può durare 30 minuti, 1 ora, 1,5 ore o 2 ore.
3. Toccare SOSPENDE INSULINA.
4. Toccare SI per confermare che si desidera interrompere completamente l'erogazione di insulina.

L'erogazione di insulina basale verrà sospesa.

La schermata Home visualizza un banner giallo con il messaggio "L'erogazione di insulina è sospesa".

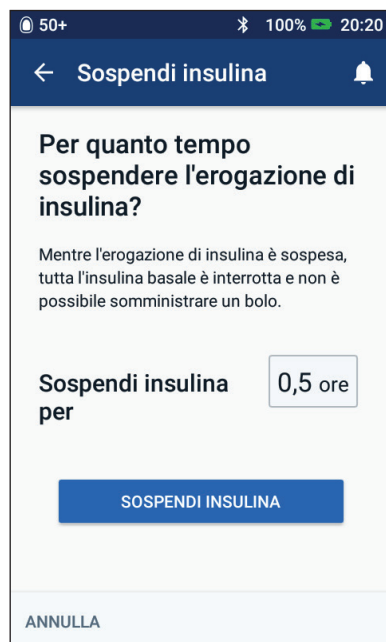

6 Modifica dell'erogazione di insulina basale


Nota: per tutta la durata del periodo di sospensione, il Pod emetterà dei bip a intervalli di 15 minuti. Alla fine del periodo di sospensione, l'erogazione di insulina non viene ripresa automaticamente. Il Pod e il PDM avvisano l'utente ogni minuto per tre minuti e ripetono questa notifica ogni 15 minuti fino a quando l'erogazione di insulina non viene ripresa.

Nota: eventuali basali temporanee o boli prolungati vengono annullati automaticamente quando si sospende l'erogazione di insulina.

Ripresa dell'erogazione di insulina prima del termine del periodo di sospensione

1. Accedere a:
icona del menu (☰) >
Riprendi insulina
o
se il suggeritore di bolo è attivato,
toccare il cerchio grande con l'insulina
attiva (IOB) nella scheda Dashboard
della schermata Home.
2. Toccare RIPRENDI INSULINA per
confermare il riavvio del programma
basale pianificato per il segmento
temporale corrente.

Il PDM emette una serie di bip per
confermare che l'erogazione di insulina è
stata ripresa.

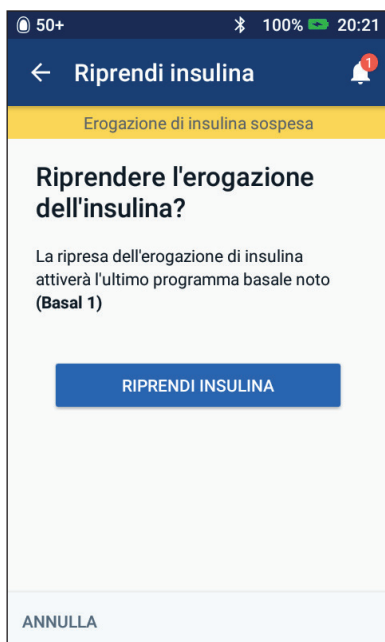

Ripresa dell'erogazione di insulina dopo il termine del periodo di sospensione

1. Attivare il PDM, se necessario.
2. Toccare RIPRENDI INSULINA per riprendere l'erogazione di insulina.

Il PDM attiva il programma basale pianificato per il segmento temporale corrente ed emette una serie di segnali acustici (bip) per avvisare che l'erogazione di insulina è stata ripresa.

Se l'erogazione di insulina non viene ripresa immediatamente, viene visualizzata di nuovo questa schermata e il PDM e il Pod emetteranno dei bip a intervalli di 15 minuti fino a quando l'erogazione non verrà ripresa.

Avvertenza: l'erogazione di insulina non viene ripresa automaticamente al termine del periodo di sospensione. È necessario toccare RIPRENDI INSULINA per riprendere l'erogazione di insulina. Se non viene ripresa l'erogazione di insulina, si potrebbe andare incontro a iperglicemia.



Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 7

Gestione di programmi e preimpostazioni

Questo capitolo descrive come creare, modificare ed eliminare i programmi basali, le basali temporanee preimpostate e i boli preimpostati. Una volta impostati, è possibile attivarli rapidamente in un secondo momento.


Programmi basali

È possibile creare fino a 12 programmi basali. Ogni programma basale può contenere da 1 a 24 basali.

Attenzione: rivolgersi al proprio referente medico prima di regolare queste impostazioni.

Creazione di un nuovo programma basale

Per creare un nuovo programma basale:


1. Accedere alla schermata Crea programma basale:
Icona del menu () > Programmi basali
2. Toccare CREA NUOVO.
Nota: se è già stato raggiunto il numero massimo di 12 programmi basali, l'opzione CREA NUOVO non è disponibile. Se necessario, è possibile eliminare un programma basale esistente.
3. Facoltativo: toccare il campo Nome programma e immettere un nome descrittivo per il nuovo programma basale. Toccare il segno di spunta per salvare il nome. Il nome predefinito per il programma basale è "Basale" seguito da un numero.
4. Facoltativo: toccare un tag per visualizzarlo accanto al nome del nuovo programma basale. Per deselezionare il tag, toccarlo una seconda volta. Se non si seleziona un tag, viene utilizzato un tag predefinito.
5. Toccare AVANTI.

7 Gestione di programmi e preimpostazioni

6. Definire un segmento di basale alla volta. Per ogni segmento:
 - a. Toccare il campo Ora fine e selezionare l'ora di fine per il segmento.
 - b. Toccare il campo Velocità basale e selezionare la velocità basale desiderata per il segmento.
 - c. Toccare AVANTI.
 - d. Ripeti questi passaggi finché il segmento finale non termina a mezzanotte.

7. Quando il programma basale copre 24 ore, toccare CONTINUA.

8. Viene visualizzata una schermata in cui il programma basale completo viene riportato sotto forma di un grafico e di un elenco. Esaminare il programma basale per accertarsi che tutti i valori siano corretti.

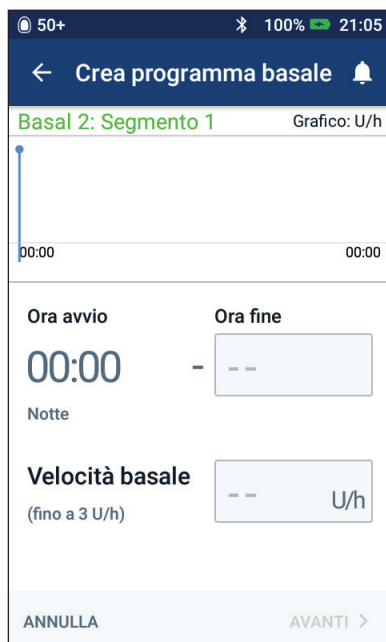

Consiglio: toccare due volte il grafico per visualizzare una vista espansa del programma basale. Scorrere orizzontalmente per visualizzare le velocità basali per le ore successive o precedenti.

Per modificare uno qualsiasi dei segmenti nel programma basale, vedere i passaggi 7-9 nella sezione "Modifica o rinomina di un programma basale" a pagina 81.

9. Toccare SALVA per memorizzare il nuovo programma basale.
10. Se si è in possesso di un Pod attivo e si desidera utilizzare subito il nuovo programma basale, toccare ATTIVA per iniziare a utilizzare il nuovo programma basale. Se non si desidera utilizzare il nuovo programma basale, toccare NON ADESSO.

Revisione di tutti i programmi basali

1. Accedere all'elenco dei programmi basali:
Icona del menu (☰) > Programmi basali
2. Nella parte superiore del display viene visualizzato un grafico del programma basale corrente (vedere "Scheda Basale / Scheda Basale temporanea" a pagina 13 per i dettagli relativi al grafico).
3. Scorrere verso l'alto o verso il basso se l'elenco dei programmi basali è lungo.

4. Toccare il nome di un programma basale non attivo per vedere il suo grafico e le sue velocità basali. Toccare fuori dal grafico per chiudere quel grafico.

Modifica o rinomina di un programma basale

Per modificare o rinominare un programma basale:


1. Scrivere un elenco di tutti i segmenti di basale rivisti per guidare l'utente a reinserire i valori per ogni segmento.

Consiglio: È possibile scrivere questo elenco sulle pagine alla fine del presente Manuale d'uso tecnico.

2. Accedere all'elenco dei programmi basali:

Icona del menu (☰) >
Programmi basali

3. Scorrere verso l'alto o verso il basso in base alle esigenze per selezionare il programma basale da modificare:
 - Per modificare il programma basale attivo, toccare **MODIFICA** sotto il grafico del programma attivo. Quindi toccare **SOSPENDEI INSULINA**.
 - Per modificare un programma basale inattivo, toccare l'icona delle opzioni (⋮) accanto al programma basale da modificare. Quindi toccare **Modifica**.
4. Per rinominare il programma basale, toccare il campo Nome programma e immettere il nuovo nome.
5. Per modificare il tag, toccare un tag diverso. Per deselezionare un tag, toccarlo di nuovo.
6. Toccare **AVANTI**.
7. Per modificare l'ora di fine o la velocità basale per un segmento:
 - a. Toccare la riga contenente il segmento da modificare.
 - b. Toccare il campo Ora fine e immettere la nuova ora di fine per il segmento.
 - c. Toccare il campo Velocità basale e immettere la velocità basale desiderata.
 - d. Toccare **AVANTI**.
 - e. Quindi definire l'ora di fine e la velocità basale per eventuali segmenti successivi, se necessario.

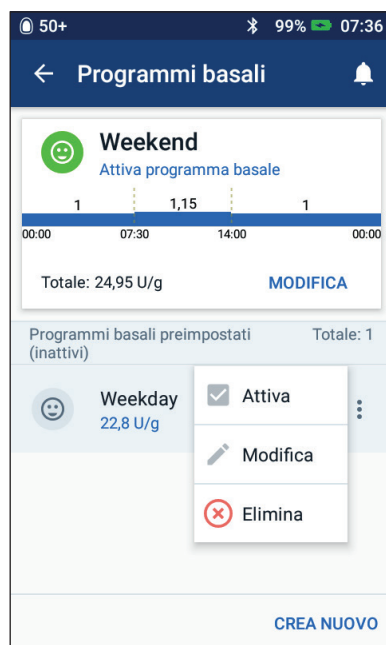



7 Gestione di programmi e preimpostazioni

8. Per aggiungere un nuovo segmento:
 - a. Toccare la riga contenente l'ora di avvio del nuovo segmento.
 - b. Toccare il campo Ora fine e immettere l'ora di avvio del nuovo segmento come ora di fine di questo segmento.
 - c. Modificare la velocità basale, se necessario.
 - d. Toccare AVANTI.
 - e. Quindi definire l'ora di fine e la velocità basale per eventuali segmenti successivi, se necessario.
9. Per eliminare un segmento:
 - a. Controllare l'ora di fine del segmento da eliminare.
 - b. Toccare il segmento che precede il segmento da modificare.
 - c. Toccare il campo Ora fine e immettere l'ora di fine del segmento da eliminare. Questa operazione "sovrascrive" il segmento da eliminare.
 - d. Toccare AVANTI.
 - e. Quindi definire l'ora di fine e la velocità basale per eventuali segmenti successivi, se necessario.
10. Quando il programma basale è corretto, toccare SALVA.
11. Per attivare il programma basale appena modificato:
 - Se il programma basale corrente è stato modificato, toccare RIPRENDI INSULINA.
 - Se è stato modificato un programma basale inattivo e si è in possesso di un Pod attivo, toccare ATTIVA.
12. Se non si desidera attivare questo programma basale, toccare NON ADESSO.

Eliminazione di un programma basale

È possibile eliminare solo un programma basale che non sia in corso di erogazione. Non è possibile eliminare un programma basale attivo o sospeso. Per eliminare un programma basale:

1. Accedere all'elenco dei Programmi basali (as in the next line to also match source capitalization):
icona del menu () > Programmi basali
2. Toccare l'icona delle opzioni () accanto al programma basale da eliminare.
3. Toccare Elimina.
4. Toccare ELIMINA per confermare l'eliminazione del Programma basale.

Basali temporanee preimpostate

Se si utilizza spesso una determinata basale temporanea, è possibile creare una "basale temporanea preimpostata", in modo da poterla attivare rapidamente all'occorrenza. Per attivare una basale temporanea preimpostata, vedere pagina 73. Per attivare o disattivare la possibilità di attivare le basali temporanee o di alternare fra basale temporanea espressa come percentuale o come U/ora, vedere pagina 111. È possibile creare fino a 12 basali temporanee preimpostate.

Creazione di una nuova basale temporanea preimpostata

Per creare una nuova basale temporanea preimpostata:

1. Accedere alla schermata Basali temporanee preimpostate:
Icona del menu (≡) > Basali temporanee preimpostate

2. Toccare CREA NUOVO.

Nota: se è già stato raggiunto il numero massimo di 12 basali temporanee preimpostate, l'opzione CREA NUOVA non è disponibile. Se necessario, è possibile eliminare una preimpostazione esistente.

3. Facoltativo: toccare il campo Nome preimpostazione e immettere un nome descrittivo per la preimpostazione. Il nome predefinito per la preimpostazione è "Basali temporanee preimpostate" seguito da un numero.

4. Facoltativo: toccare un tag per visualizzarlo accanto al nome della nuova preimpostazione. Per deselezionare il tag, toccarlo una seconda volta. Se non si seleziona un tag, viene utilizzato un tag predefinito.

5. Toccare AVANTI.

6. Toccare il campo Velocità basale e scorrere fino al valore desiderato.

7. Toccare il campo Durata e immettere una durata per la preimpostazione. La modifica temporanea al programma basale viene mostrata nel grafico.

Nota: È possibile modificare la durata di una basale temporanea preimpostata quando si attiva la basale.

8. Toccare CONFERMA.

9. Toccare SALVA per salvarla come basale temporanea preimpostata.





7 Gestione di programmi e preimpostazioni

10. Se si desidera avviare subito questa basale temporanea, toccare **ATTIVA**. Altrimenti, toccare **NON ADESSO**. Questa opzione non è disponibile se una basale temporanea è già in esecuzione.

Modifica o rinomina di una basale temporanea preimpostata



Nota: non è possibile modificare una basale temporanea preimpostata attualmente in esecuzione.

1. Accedere alla schermata Basali temporanee preimpostate:
Icona del menu () > Basali temporanee preimpostate
2. Scorrere verso l'alto o verso il basso in base alle esigenze per trovare la preimpostazione da modificare. Quindi toccare l'icona delle opzioni () e toccare **Modifica**.
3. Per rinominare la preimpostazione, toccare il campo **Nome preimpostazione** e immettere il nuovo nome.
4. Per modificare il tag, toccare un tag diverso. Per deselezionare un tag, toccarlo di nuovo.
5. Toccare **AVANTI**.
6. Modificare la velocità basale e la durata in base alle esigenze.
7. Toccare **CONFERMA**.
8. Toccare **SALVA** per salvare le modifiche.
9. Se si desidera avviare subito questa basale temporanea, toccare **ATTIVA**. Altrimenti, toccare **NON ADESSO**. Questa opzione non è disponibile se una basale temporanea è già in esecuzione.

Eliminazione di una basale temporanea preimpostata

Nota: non è possibile eliminare una basale temporanea preimpostata in esecuzione.

Per eliminare una basale temporanea preimpostata:

1. Accedere alla schermata Basali temporanee preimpostate:
Icona del menu () > Basali temporanee preimpostate
2. Toccare l'icona delle opzioni () accanto alla preimpostazione da eliminare.
3. Toccare **Elimina**.
4. Toccare **ELIMINA** per confermare l'eliminazione della preimpostazione.

Boli preimpostati

Utilizzare i boli preimpostati per memorizzare le quantità di bolo utilizzate più di frequente, in modo da poterle richiamare rapidamente in qualsiasi momento. I boli preimpostati sono disponibili solo se il suggeritore di bolo è disattivato.

Un bolo preimpostato memorizza le unità di insulina di un bolo. È possibile scegliere di prolungare alcuni o tutti i boli preimpostati quando lo si attiva.

È possibile impostare fino a sette boli preimpostati. Un bolo preimpostato non può superare il bolo massimo.

Creazione di un nuovo bolo preimpostato

Per creare un nuovo bolo preimpostato:

1. Accedere alla schermata Boli preimpostati:

Nella schermata Home, toccare il pulsante Bolo ()


o

Icona del menu () > Boli preimpostati

2. Toccare SELEZIONA DA PREIMPOSTAZIONI.
3. Toccare CREA NUOVO.

Nota: se è già stato raggiunto il numero massimo di sette boli preimpostati, l'opzione CREA NUOVO non è disponibile. Se necessario, è possibile eliminare una preimpostazione esistente.

4. Facoltativo: toccare il campo Nome preimpostazione e immettere un nome descrittivo per la preimpostazione. Il nome predefinito per la preimpostazione è "Bolo preimpostato" seguito da un numero.
5. Facoltativo: toccare un tag per visualizzarlo accanto al nome della nuova preimpostazione. Per deselectionare il tag, toccarlo una seconda volta. Se non si seleziona un tag, viene utilizzato un tag predefinito.
6. Toccare AVANTI.

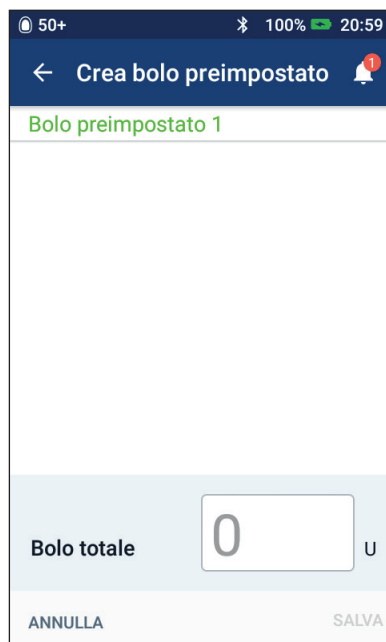



7 Gestione di programmi e preimpostazioni

7. Toccare il campo Bolo totale e immettere le unità di insulina per il bolo preimpostato.
8. Premere SALVA per salvare il nuovo bolo preimpostato.



Modifica o rinomina di un bolo preimpostato

Per modificare o rinominare un bolo preimpostato:

1. Accedere alla schermata Boli preimpostati:
Icona del menu () > Boli preimpostati
2. Toccare l'icona delle opzioni () accanto al nome della preimpostazione da modificare.
3. Toccare Modifica.
4. Per rinominare la preimpostazione, toccare il campo Nome preimpostazione e immettere il nuovo nome.
5. Per modificare il tag, toccare un tag diverso. Per deselezionare un tag, toccarlo di nuovo.
6. Toccare AVANTI.
7. Per modificare la quantità di bolo, toccare il campo Bolo totale e immettere le unità di insulina.
8. Toccare SALVA per salvare le modifiche.

Eliminazione di un bolo preimpostato

Per eliminare un bolo preimpostato:

1. Accedere alla schermata Boli preimpostati:
Icona del menu () > Boli preimpostati
2. Toccare l'icona delle opzioni () accanto al nome della preimpostazione da eliminare.
3. Toccare Elimina.
4. Toccare ELIMINA per confermare l'eliminazione della preimpostazione.

CAPITOLO 8

Visualizzazione dei registri del PDM

I registri del PDM vengono visualizzati nelle seguenti schermate:

- Schermate Notifiche e allarmi
- Schermate Cronologia insulina e glicemia, che mostrano l'insulina, la glicemia, i carboidrati e gli eventi del Pod

Il PDM può contenere oltre 90 giorni di registri cronologici. Una volta che la memoria è piena, i nuovi registri vanno a sostituire quelli più datati. È possibile visualizzare, ma non modificare, le informazioni presenti nei registri.

Nota: i dati contenuti nel PDM vengono preservati in caso di esaurimento della batteria del PDM. Potrebbe essere necessario resettare la data e l'ora, ma il contenuto dei registri del PDM non andrà perso.

Schermate Notifiche e allarmi


Per esaminare gli allarmi e le notifiche precedenti:

1. Toccare l'icona a forma di campana (🔔) in alto a destra in molte schermate.


Se ci sono nuove notifiche, il numero di nuove notifiche viene visualizzato in un cerchio rosso accanto all'icona a forma di campana (🔔⁴).




Nota: in alternativa, accedere a: icona del menu (☰) > Cronologia: notifiche e allarmi.

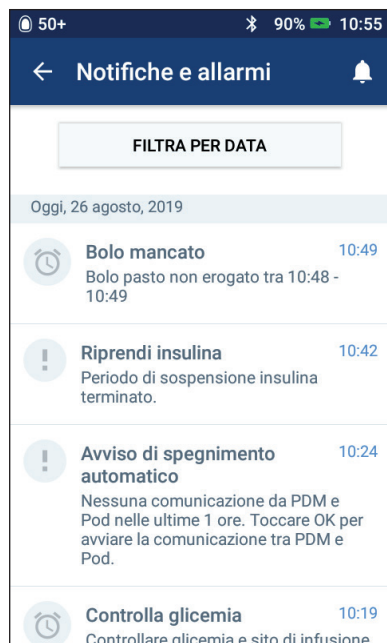I messaggi del giorno corrente vengono visualizzati per primi, seguiti dai messaggi dei giorni precedenti.
2. Scorrere verso l'alto per vedere ulteriori messaggi.
3. Per visualizzare uno specifico intervallo di date, toccare FILTRA PER DATA.



8 Visualizzazione dei registri del PDM

- a. Toccare la data di inizio nel calendario. Toccare la freccia "<" per visualizzare un mese precedente.
 - b. Toccare FINE nella parte superiore del display.
 - c. Toccare la data di fine per l'intervallo di tempo.
 - d. Toccare OK.
4. Al termine, toccare la freccia indietro () nella parte in alto a sinistra del display.

Le nuove notifiche hanno un'icona blu (). Quando una notifica è stata visualizzata in questa schermata e si è usciti toccando la freccia indietro (), l'icona diventerà grigia () la prossima volta che si visualizza questa schermata.

Per una descrizione degli allarmi e delle notifiche, vedere pagina 117.

Panoramica della schermate Cronologia insulina e glicemia

Per visualizzare i registri della glicemia e dell'insulina, accedere a:

Icona del menu (☰) > Cronologia: cronologia insulina e glicemia

È possibile visualizzare i registri per un giorno o per più giorni.

Un giorno

Più giorni

Selezione della data

Sezione di riepilogo


Riga 1

Riga 2

Riga 3

Sezione dei dettagli

Scorrere verso l'alto per vedere la sezione dei dettagli

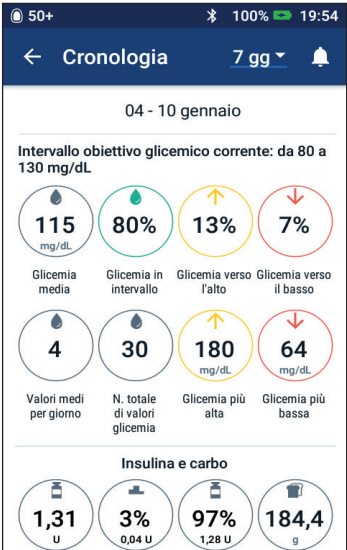


	GLICEMIA mg/dL	Bolo U	Carbo g	
21:01	150	2,4	60	▼
21:01	150			▼
21:00	118			▼
20:57	Bolo prolungato erogato: 2,4 U in 0,5 ore			
20:27	Bolo prolungato avviato:			

	Glicemie entro intervallo %	Insulina totale U	Carbo totali g
10 gen	100%	1,40	176
9 gen	91%	1,40	202
8 gen	100%	1,40	220
7 gen	100%	1,40	170
6 gen	83%	1,10	186

8 Visualizzazione dei registri del PDM

Selezione della data

La prima volta che si accede alle schermate Cronologia, vengono visualizzate le informazioni per la data corrente. È possibile visualizzare i registri di un altro giorno o di un intervallo di date.

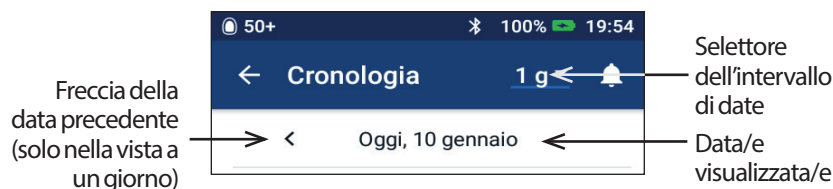

Un giorno

Per visualizzare i registri della data corrente o di un giorno recente:

1. Accedere a: icona del menu (☰) > Cronologia: cronologia insulina e glicemia.
Vengono visualizzati i registri cronologici del giorno corrente.
2. Per visualizzare una data recente, toccare la freccia della data precedente (<).
3. Per visualizzare una data futura, toccare la freccia della data successiva (>). Questa freccia non è visibile quando vengono visualizzati i registri cronologici del giorno corrente.

Intervallo di giorni

Per visualizzare i registri da un intervallo di date o per trovare rapidamente un giorno da settimane o mesi fa:

1. Accedere a: icona del menu (☰) > Cronologia: cronologia insulina e glicemia.
2. Toccare il selettore dell'intervallo di date.
3. Scegliere 1, 7, 14, 30, 60 o 90 giorni per selezionare il numero di giorni da visualizzare. Selezionare un numero più alto per visualizzare dati più vecchi.

Viene visualizzata la schermata per più giorni, in cui è riportato l'intervallo di date selezionato.

4. Per visualizzare i dettagli per un singolo giorno nell'intervallo di date:
 - a. Scorrere verso l'alto per vedere la sezione dei dettagli della schermata per più giorni.
 - b. Toccare la data desiderata per visualizzare la schermata della cronologia di un giorno.

Viene visualizzata la schermata della cronologia di un giorno per quella data.

Sezione di riepilogo

La parte superiore della schermata Cronologia riepiloga i registri durante la giornata o per l'intervallo di date.

Elemento di riepilogo	Descrizione
Riga 1 (vedere pagina 89)	
Obiettivo glicemico corrente	Limite inferiore e limite superiore dell'obiettivo glicemico.
Glicemia media	La media di tutti i valori della glicemia. Sono esclusi i valore della glicemia BA e AL.
Glicemia entro l'intervallo	Percentuale dei valori della glicemia che rientrano nell'obiettivo glicemico.
Glicemia verso l'alto	Percentuale dei valori della glicemia al di sopra del limite superiore dell'obiettivo glicemico.
Glicemia verso il basso	Percentuale dei valori della glicemia al di sotto del limite inferiore dell'obiettivo glicemico.
Riga 2 (vedere pagina 89)	
Valori medi per giorno	Numero medio di valori della glicemia per ciascun giorno. Nota: appare solo nella vista a più giorni.
Numero totale di valori della glicemia	Numero totale di valori della glicemia durante la giornata (o in un intervallo di date).
Glicemia più alta	Valore della glicemia più alto durante la giornata (o in un intervallo di date).
Glicemia più bassa	Valore della glicemia più basso durante la giornata (o in un intervallo di date).

8 Visualizzazione dei registri del PDM

Elemento di riepilogo	Descrizione
Riga 3 (vedere pagina 89)	
Insulina totale Insulina totale media	Insulina totale (basale + bolo) erogata durante la giornata o media dell'insulina totale erogata per l'intervallo di date.
Insulina basale Insulina basale media	Quantità di insulina basale erogata durante la giornata o media erogata per l'intervallo di date. Ciò include l'insulina erogata dal programma basale, regolato per le basali temporanee, i periodi di insulina sospesa e la disattivazione del Pod. Visualizzata come percentuale del totale (o insulina totale media). Visualizzata anche in unità.
Insulina di bolo Insulina di bolo media	Quantità di insulina erogata tramite boli durante la giornata o media per l'intervallo di date. Ciò include i boli calcolati dal suggeritore di bolo e tutti i boli calcolati manualmente. Visualizzata come percentuale del totale (o insulina totale media). Visualizzata anche in unità. Se si annulla un bolo prima del completamento, solo la quantità effettivamente erogata è inclusa nel calcolo.
Carboidrati totali Carboidrati totali medi	Somma di tutti i carboidrati del pasto (in grammi) immessi nel suggeritore di bolo durante la giornata o media per l'intervallo di date.

Nota: se il PDM non ha ricevuto conferma dal Pod che l'erogazione di basale, bolo o insulina totale è terminata, i cerchi di riepilogo includono un punto esclamativo grigio o giallo simile a quelli mostrati in "Quando il Pod non conferma l'erogazione del bolo" a pagina 96.

Nota: a causa degli arrotondamenti, la somma delle percentuali potrebbe non essere 100.

Per i calcoli del riepilogo, vedere pagina 170.

Sezione dei dettagli

Scorrere verso l'alto nelle schermate della cronologia per vedere la sezione dei dettagli.

Vista a un giorno

La sezione dei dettagli della schermata della Cronologia di un giorno mostra i singoli registri elencati in base all'ora del giorno.

Titoli delle colonne
Glicemia, Bolo e
Carboidrati →

< Oggi, 1 gennaio			
	GLICEMIA mg/dL	Bolo U	Carbo g
21:01	150	2,4	60
21:01	150		
21:00	118		
20:57	Bolo prolungato erogato: 2,4 U in 0,5 ore		
20:27	Bolo prolungato avviato: 2,4 U in 0,5 ore		
20:25	150	4,9	60
20:25	150		

I banner indicano gli eventi del PDM o del Pod che continuano fino a quando non viene segnalata una modifica su un nuovo banner. →

Toccare una freccia giù per visualizzare più dettagli. Toccarla di nuovo per nascondere i dettagli.

Scorrere per visualizzare più registri.

Vista a più giorni

La sezione dei dettagli delle schermate della Cronologia di più giorni elenca i singoli giorni nell'intervallo selezionato. Le colonne mostrano la percentuale (%) dei valori della glicemia entro l'obiettivo glicemico, l'insulina giornaliera totale erogata e i grammi giornalieri totali di carboidrati.

Toccare una riga per visualizzare la schermata della cronologia di un giorno. →




	Glicemie entro intervallo %	Insulina totale U	Carbo totali g
10 gen	100%	1,40	176
9 gen	91%	1,40	202
8 gen	100%	1,40	220

Scorrere per visualizzare più registri.

8 Visualizzazione dei registri del PDM

Dettagli relativi alla glicemia



L'icona visualizzata con un valore della glicemia indica se il valore della glicemia era entro l'intervallo.

Rispetto all'obiettivo glicemico	Icona del valore della glicemia
Al di sopra dell'obiettivo glicemico	
Entro l'obiettivo glicemico	
Al di sotto dell'obiettivo glicemico	

Toccare una riga con un valore della glicemia per espanderla al fine di visualizzare eventuali tag applicati.

Dettagli relativi al bolo

L'icona visualizzata con un valore del bolo indica se il Suggeritore di bolo è stato utilizzato:

- L'icona a forma di flacone di insulina () indica che il Suggeritore di bolo era abilitato.
- L'icona a forma di siringa () indica che il Suggeritore di bolo era disabilitato o disattivato.


Bolo immediato e bolo prolungato

La quantità di bolo indicata accanto all'icona del bolo è la somma di un bolo immediato e dell'eventuale porzione prolungata del bolo. Se si annulla un bolo immediato o un bolo prolungato, la quantità indicata è la quantità effettivamente erogata.

Toccando una riga con un valore del bolo, vengono visualizzati ulteriori dettagli sul bolo, tra cui:

- Se il bolo è stato calcolato dal Suggeritore di bolo o è un bolo calcolato manualmente.
- Il nome del bolo preimpostato (laddove applicabile).
- Il pulsante **VISUALIZZA CALCOLI BOLO** se è stato utilizzato il Suggeritore di bolo. Se si tocca questo pulsante, viene visualizzata una schermata indicante i dettagli dei calcoli e se il bolo calcolato è stato regolato manualmente.

Potrebbe essere necessario scorrere verso l'alto o verso il basso per vedere tutti i calcoli. Al termine, toccare **CHIUDI** (vedere "Equazioni del Suggeritore di bolo" a pagina 161 per informazioni dettagliate).

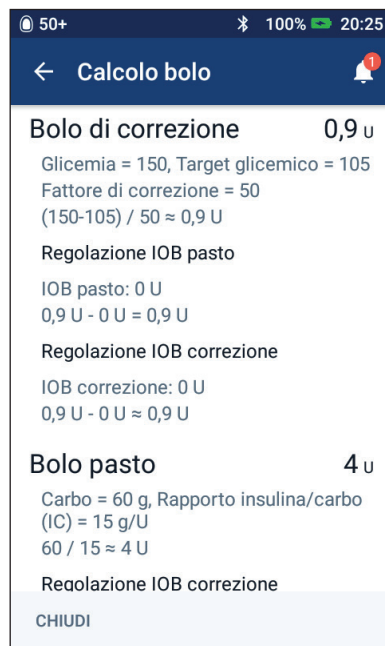


- Se è stato annullato un bolo immediato, la quantità originariamente programmata per l'erogazione.
- Per un bolo prolungato, la quantità erogata immediatamente e quella prolungata. Inoltre, la percentuale (%) del bolo pasto erogata immediatamente e quella prolungata.
- In presenza di un bolo attivo, non confermato o perso, la quantità di bolo che è stata confermata.

Eventi del bolo prolungato



L'icona e il banner di un bolo indicano un evento del bolo prolungato:

- Un banner **Bolo prolungato avviato** indica l'ora in cui è terminato il bolo immediato ed è iniziato il bolo prolungato. Oltre all'ora di avvio del bolo, il banner elenca il numero delle unità prolungate e la durata del prolungamento.
- Un banner **Bolo prolungato completato** indica la fine del bolo prolungato.
- Un banner **Bolo prolungato annullato** indica l'annullamento di un bolo prolungato e la quantità di bolo effettivamente erogata.

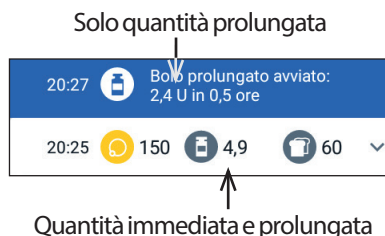

8 Visualizzazione dei registri del PDM

Quando il Pod non conferma l'erogazione del bolo

Una volta confermata la quantità di bolo da erogare, un'istruzione relativa al bolo viene inviata al Pod. Una volta completata l'erogazione, il Pod invia al PDM la conferma dell'erogazione del bolo.



Prima che il PDM riceva dal Pod la conferma dell'erogazione del bolo, il PDM stima la quantità erogata. Durante questo periodo, le schermate della cronologia utilizzano un'icona con un punto esclamativo grigio per indicare che il bolo è stimato.



Nella maggior parte dei casi, una volta che il PDM e il Pod sono di nuovo a distanza di comunicazione, il Pod conferma l'erogazione del bolo. Tuttavia, in rari casi, il Pod non è in grado di confermare l'erogazione del bolo a causa di un errore di comunicazione. Se si tocca l'opzione GETTA POD in questa situazione, la schermata della cronologia utilizza un'icona con un punto esclamativo giallo per contrassegnare il bolo come "non confermato".

Se un Pod viene gettato con un bolo non confermato, anche le quantità dell'insulina basale e dell'insulina totale per quel giorno vengono contrassegnate come non confermate tramite un'icona con un punto esclamativo giallo.

La quantità di bolo indicata include la quantità programmata per l'erogazione fino al momento in cui è stato gettato il Pod.

Dettagli relativi ai carboidrati

Un'icona dei carboidrati () viene visualizzata accanto ai valori dei carboidrati utilizzati dal Suggeritore di bolo.

Dettagli relativi alla velocità basale

Programmi basali



L'icona e il banner di un programma basale indicano l'attivazione di un Programma basale e la riattivazione di un Programma basale alla fine di una sospensione dell'insulina o della basale temporanea.

Basali temporanee



L'icona e il banner di una basale temporanea indicano l'inizio, la fine o l'annullamento di una basale temporanea.

Se una Basale temporanea è stata definita come percentuale (%) del Programma basale attivo, il banner visualizza l'aumento o la riduzione percentuale e la durata.

Se una basale temporanea è stata definita in termini di unità orarie (U/ora), il banner visualizza la velocità Basale temporanea e la durata.

Se è stata utilizzata una Basale temporanea preimpostata, il banner visualizza il nome della preimpostazione.

Se si tocca su un banner Basale temporanea avviata, vengono visualizzati un grafico e un elenco delle velocità basali associate a ogni segmento temporale.

Se una basale temporanea è stata annullata, il banner Basale temporanea avviata contiene la durata inizialmente programmata e il banner Basale temporanea annullata contiene la durata effettiva.

Velocità basale a mezzanotte

La prima voce per ogni giorno è un banner che mostra lo stato dell'erogazione di insulina basale a mezzanotte. Se un programma basale o una Basale temporanea continuano dal giorno precedente, il banner indica che si tratta della continuazione di un programma. Un'eventuale sospensione dell'insulina a mezzanotte viene indicata dal banner.

Dettagli relativi al Pod



L'icona e il banner di un Pod indicano l'attivazione e la disattivazione (o lo smaltimento) di ciascun Pod. Se si tocca il banner di un Pod, vengono visualizzati il numero di lotto e il numero di sequenza del Pod.

Dettagli relativi alla sospensione e alla ripresa dell'insulina



L'icona e il banner di un'erogazione di insulina sospesa indicano l'ora di inizio di una sospensione dell'insulina.



L'icona e il banner di un'erogazione di insulina ripresa indicano l'ora di ripristino dell'erogazione di insulina dopo una sospensione.

Dettagli relativi alla modifica dell'ora

Il banner di una modifica dell'ora viene visualizzato se si modifica l'impostazione dell'ora. Il banner di un fuso orario modificato viene visualizzato se si modifica il fuso orario.

I registri sotto il banner indicano la vecchia ora, mentre i registri sopra il banner indicano la nuova ora.

Dettagli relativi alla modifica della data

Il banner di una DATA MODIFICATA viene visualizzato se si modifica l'impostazione della data.

Quando si modifica la data, vengono create due schermate della Cronologia per la data corrente. Una schermata indica la vecchia data con i registri cronologici da mezzanotte fino all'ora della modifica della data. La seconda schermata indica la nuova data con i registri cronologici dall'ora della modifica della data fino alla mezzanotte successiva.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 9

Regolazione delle impostazioni

Man mano che cambiano le esigenze, può rendersi necessario regolare di conseguenza le varie impostazioni del PDM.

Molte impostazioni utilizzano interruttori per attivare o disattivare le impostazioni. Quando il pulsante è blu e a destra, l'impostazione è attivata. Quando il pulsante è grigio e a sinistra, l'impostazione è disattivata. Per spostare l'interruttore da destra a sinistra e viceversa, toccarlo in qualsiasi punto.



È possibile visualizzare una descrizione di alcune impostazioni sul display toccando il nome dell'impostazione. Se una descrizione è disponibile, il display si espande per mostrare l'informazione. Toccare il nome dell'impostazione di nuovo per nascondere la descrizione.

Nota: alcune impostazioni hanno valori predefiniti, ma tutte le impostazioni dell'utente possono essere modificate.

Impostazioni del dispositivo PDM

Le impostazioni del dispositivo PDM consentono di controllare la connettività di rete, le impostazioni di identificazione personale, la data e l'ora e altre impostazioni generali del dispositivo.

Connettività di rete

La tecnologia wireless Bluetooth® è sempre attiva indipendentemente dal fatto che il PDM sia attivo o in modalità di attesa. La modalità aereo non disattiva l'impostazione Bluetooth®.

Modalità aereo

L'attivazione o disattivazione della modalità aereo non influisce sull'impostazione Bluetooth®, che rimane attiva in ogni caso.

Per attivare o disattivare la modalità aereo:

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione fino a che non viene visualizzata una schermata con l'opzione Modalità aereo.
2. Toccare Modalità aereo per attivarla o disattivarla.

9 Regolazione delle impostazioni

Sul display appare

Utilizzare le impostazioni del display per controllare la luminosità e il timeout del display.

Timeout del display

Per risparmiare la carica delle batterie, il display del PDM si disattiva se non viene utilizzato per un certo intervallo di tempo. Per modificare l'intervallo di tempo:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Dispositivo PDM > Timeout schermo.

2. Toccare un intervallo di timeout del display per selezionarlo.

Consiglio: *un intervallo di timeout più breve prolunga la carica della batteria.*

3. Toccare SALVA.

Luminosità del display

Per regolare la luminosità del display del PDM:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Dispositivo PDM > Luminosità.
2. Posizionare il dito sul punto blu del cursore. Far scorrere il dito verso destra per aumentare la luminosità del display. Far scorrere il dito verso sinistra per diminuire la luminosità del display.

Consiglio: *una luminosità del display più bassa prolunga la carica della batteria.*

Blocco schermo

È possibile modificare il messaggio del blocco schermo, l'immagine di sfondo e il PIN. Il messaggio del blocco schermo, l'immagine e il PIN aiutano a garantire che si sta utilizzando il PDM corretto.

Messaggio del blocco schermo

Per modificare il messaggio del blocco schermo:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Dispositivo PDM > Messaggio.
2. Toccare il campo Messaggio del blocco schermo e immettere il messaggio che il PDM deve mostrare quando viene attivato.
3. Toccare SALVA.

Sfondo del blocco schermo

Per modificare l'immagine di sfondo del blocco schermo:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Dispositivo PDM > Sfondo.
2. Toccare l'immagine di sfondo da utilizzare.
3. Toccare SALVA.

PIN

Per modificare il numero di identificazione personale o PIN:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (🔧) > Dispositivo PDM > PIN.
2. Immettere il PIN corrente.
3. Immettere il nuovo PIN a quattro cifre.

Consiglio: *toccare l'icona a forma di occhio per visualizzare o nascondere i numeri del PIN.*

4. Toccare il segno di spunta per accettare il PIN.
5. Immettere di nuovo il PIN, quindi toccare il segno di spunta.

Data e ora e lingua

Talvolta può essere necessario modificare la data e l'ora, ad esempio quando si cambia fuso orario o quando entra in vigore l'ora legale o solare. Il PDM non regola automaticamente l'ora, la data o il fuso orario. Se si sta viaggiando verso un fuso orario diverso, vedere "Piano per il cambio di fuso orario" a pagina 177.

Se si modifica la data o l'ora, la modifica viene annotata nelle schermate Home e Cronologia. L'ora di scadenza del Pod nella scheda Info Pod viene regolata per riflettere la nuova data e la nuova ora.

È possibile cambiare anche la lingua utilizzata nelle schermate del PDM.

Data e formato data

Per modificare la data:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (🔧) > Dispositivo PDM > Data.
2. Per modificare il formato data, toccare la casella superiore con il formato data e selezionare il formato data desiderato.
3. Per modificare la data:
 - a. Se si indossa un Pod attivo, toccare SOSPENDE INSULINA e toccare SÌ.
 - b. Scorrere i campi Giorno, Mese o Anno fino ai valori desiderati.
4. Toccare SALVA, quindi toccare CONFERMA.
5. Se l'insulina è stata sospesa, toccare SÌ per riprendere l'erogazione di insulina.

Fuso orario

Per modificare il fuso orario:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (🔧) > Dispositivo PDM > Fuso orario.
2. Se si indossa un Pod attivo, toccare SOSPENDE INSULINA e toccare SÌ.


9 Regolazione delle impostazioni

3. Toccare il campo Fuso orario e selezionare il fuso orario desiderato dall'elenco a discesa.
4. Toccare SALVA, quindi toccare CONFERMA.
Il PDM modifica l'ora in base al nuovo fuso orario.
5. Se l'insulina è stata sospesa, toccare SÌ per riprendere l'erogazione di insulina.

Ora e formato ora


Attenzione: fare attenzione a impostare l'ora correttamente. L'impostazione dell'ora influisce sul funzionamento di varie caratteristiche del sistema Omnipod DASH®.

Per modificare l'ora:

1. Accedere a: icona delle impostazioni  > Dispositivo PDM > Ora.
2. Per cambiare il formato ora, toccare l'interruttore per scegliere tra il formato a 24 ore e il formato a 12 ore (AM/PM).
3. Per modificare l'ora:
 - a. Se si indossa un Pod attivo, toccare SOSPENDE INSULINA e toccare SÌ.
 - b. Scorrere i campi Ora e Minuto fino ai valori desiderati. Se si utilizza il formato a 12 ore, scegliere tra AM e PM.
4. Toccare SALVA, quindi toccare CONFERMA.
5. Se l'insulina è stata sospesa, toccare SÌ per riprendere l'erogazione di insulina.


Paese

Per modificare l'impostazione del Paese del PDM:

1. Accedere a: icona delle impostazioni  > Dispositivo PDM > Paese.
2. Toccare il nome del Paese per visualizzare l'elenco.
3. Selezionare il Paese desiderato.
4. Toccare SALVA.

Lingua

Per cambiare la lingua utilizzata nelle schermate del PDM:

1. Accedere a: icona delle impostazioni  > Dispositivo PDM > Lingua.
2. Toccare la lingua corrente e selezionare la lingua desiderata dall'elenco a discesa.
3. Toccare SALVA.
4. Toccare RIAVVIA PDM.

Nota: il riavvio del PDM non disattiva il Pod. Il Pod continuerà a erogare insulina in base al programma basale attivo ed erogherà eventuali boli prolungati attivi.

Diagnostica

Controllo degli allarmi

Per verificare che le funzioni di allarme e di vibrazione del PDM e del Pod funzionino correttamente, è possibile testarle attenendosi alla procedura seguente:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Dispositivo PDM > Controlla allarmi.
2. Se si indossa un Pod attivo, toccare SOSPENDE INSULINA e toccare SÌ.
3. Toccare CONTROLLA ALLARMI per avviare il controllo degli allarmi.
4. Il PDM emetterà dei bip e vibrerà tre volte. Successivamente, se si indossa un Pod, quest'ultimo emetterà una serie di bip e un segnale acustico di allarme per diversi secondi.
5. Se l'allarme del Pod non ha funzionato correttamente, toccare NO. Quindi toccare CONTROLLA DI NUOVO per riprovare a testare gli allarmi oppure toccare FATTO e attivare un nuovo Pod.
6. Se l'allarme del PDM non ha funzionato correttamente, toccare NO. Quindi toccare CONTROLLA DI NUOVO per riprovare a testare gli allarmi oppure chiamare il servizio di Assistenza clienti.
7. Se i bip e le vibrazioni hanno funzionato correttamente, toccare SÌ. Se l'insulina è stata sospesa per controllare gli allarmi, toccare SÌ per riprendere l'erogazione di insulina.

Avvertenza: se il PDM non dovesse emettere alcun bip, contattare immediatamente il servizio di Assistenza clienti. Se un Pod attivato non dovesse emettere alcun bip, cambiarlo immediatamente. Continuando a utilizzare il sistema Omnipod DASH® in queste situazioni si può mettere a rischio la propria salute e sicurezza.

Resettaggio del PDM

Il resettaggio del PDM è una funzione usata raramente che cancella molte delle impostazioni personali dell'utente.

Attenzione: il resettaggio del PDM comporta l'eliminazione di tutte le impostazioni relative ai programmi basali, alle basali temporanee preimpostate, ai boli preimpostati e al suggeritore di bolo. Prima di utilizzare questa funzione, consultarsi con il referente medico e prendere nota di tutte le informazioni correnti in modo da poter riprogrammare il PDM. Una volta eseguito il resettaggio del PDM, sarà inoltre necessario attivare un nuovo Pod.

Attenzione: il resettaggio del PDM resetta l'insulina attiva (IOB) a zero. Tuttavia, il suggeritore di bolo non viene disabilitato.


Nota: l'opzione Resetta PDM non elimina i registri cronologici.

9 Regolazione delle impostazioni

Per eseguire il resettaggio del PDM:

1. Stilare un elenco delle impostazioni personalizzate, in modo da poterle reinserire facilmente una volta eseguito il resettaggio del PDM. Consultare il proprio referente medico per assicurarsi che tali impostazioni siano adatte alla propria condizione.


Consiglio: *registrare le impostazioni correnti nelle pagine alla fine di questo Manuale d'uso tecnico.*

2. Accedere a: icona delle impostazioni () > Dispositivo PDM > Resetta PDM.
3. Se si indossa un Pod attivo, toccare DISATTIVA POD, quindi toccare di nuovo DISATTIVA POD.
4. Toccare RESETTA PDM, quindi toccare di nuovo RESETTA PDM.
Questa operazione elimina le impostazioni correnti dell'utente.
5. Attenersi alle istruzioni di configurazione del PDM fornite in "Configurazione iniziale del PDM" a pagina 21 per immettere nuovamente i propri dati personalizzati oppure chiamare il servizio di Assistenza clienti per supporto.

Impostazioni dei siti del Pod

L'impostazione Siti Pod controlla se un grafico del corpo è disponibile quando si attiva un nuovo Pod. È possibile utilizzare questo schema del corpo durante l'attivazione del Pod per verificare dove sono stati posizionati i Pod recenti e per contrassegnare il sito in cui è stato posizionato il nuovo Pod.

Per attivare o disattivare l'impostazione Siti Pod:

1. Accedere a: icona delle impostazioni () > Siti Pod.
2. Toccare l'interruttore per attivare o disattivare l'impostazione Siti Pod. Per poter registrare il sito del Pod sullo schema, attivare l'impostazione Siti Pod. Se non si desidera utilizzare questo diagramma, disattivarla.
3. Toccare SALVA.

Impostazioni dei promemoria

I promemoria e le notifiche portano all'attenzione dell'utente condizioni relative al funzionamento del PDM e del Pod (vedere "Elenco delle notifiche" a pagina 126 e "Elenco dei segnali informativi" a pagina 127).

Scadenza del Pod

La notifica di scadenza del Pod informa l'utente che si sta avvicinando la scadenza del Pod, in modo da consentirgli di pianificare il cambio del Pod nel momento più opportuno. È possibile impostare questa notifica in modo che venga visualizzata da 1 a 24 ore prima dell'emissione del segnale di notifica di scadenza del Pod. All'ora impostata, il Pod e il PDM vibrano o emettono una serie di bip e sul PDM verrà visualizzato un messaggio.

Per impostare l'orario di notifica della scadenza del Pod:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria > Scadenza del Pod.
2. Toccare il campo Scadenza del Pod e selezionare quanto tempo prima della scadenza del Pod si desidera che venga visualizzata la notifica.
3. Toccare SALVA.

Livello del serbatoio quasi vuoto

Il Pod e il PDM emettono un segnale di notifica quando il livello di insulina nel Pod raggiunge l'impostazione "Serbatoio quasi vuoto". Questa impostazione può essere compresa tra 10 e 50 unità.

Per impostare il livello di insulina per il segnale di notifica di serbatoio quasi vuoto:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria > Livello del serbatoio quasi vuoto.
2. Toccare il campo Livello del serbatoio quasi vuoto e selezionare il livello di insulina del Pod in corrispondenza del quale si desidera che venga visualizzata la notifica.
3. Toccare SALVA.

Spegnimento automatico del Pod

Consultare il proprio referente medico prima di modificare l'impostazione "Spegnimento automatico". Questa funzione richiede la partecipazione attiva dell'utente. Vedere "Spegnimento automatico" a pagina 146 per una descrizione del funzionamento di questa funzione.

Per abilitare o disabilitare lo spegnimento automatico:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria > Spegnimento automatico del Pod.
2. Toccare l'interruttore Spegnimento automatico del Pod per attivare o disattivare la funzione di Spegnimento automatico.

9 Regolazione delle impostazioni

3. Se lo Spegnimento automatico è attivo, toccare il campo Timer inattività e selezionare la durata del conto alla rovescia. Questa impostazione può essere compresa tra 1 e 24 ore.

Esempio: se si impostano 10 ore, sarà necessario attivare il PDM e sbloccarlo almeno una volta ogni 10 ore, sia di giorno sia di notte, per impedire che venga emesso l'allarme di Spegnimento automatico.

4. Toccare SALVA.

Avvertenza: il PDM deve essere utilizzato entro 15 minuti dall'emissione del segnale di notifica di Spegnimento automatico. In caso contrario, il PDM e il Pod emetteranno un allarme di pericolo e il Pod interromperà l'erogazione di insulina.

Promemoria Controlla glicemia dopo bolo

Attivare i promemoria "Controlla glicemia dopo bolo" se si desidera ricevere un promemoria per il controllo della glicemia dopo l'erogazione di un bolo. Se i promemoria glicemici sono attivi, è possibile definire i tempi del promemoria glicemico nel momento in cui si eroga un bolo.

Per abilitare i promemoria glicemici:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria.
2. Toccare l'interruttore Controlla glicemia dopo bolo per abilitare o disabilitare i promemoria "Controlla glicemia dopo bolo".

Promemoria bolo mancato

Se il sistema Omnipod DASH® non eroga un bolo pasto o un bolo calcolato manualmente durante il periodo di tempo del bolo mancato, il PDM vibra o emette dei bip e visualizza un promemoria. È possibile impostare intervalli di tempo di durata compresa tra 30 minuti e 4 ore. È possibile impostare fino a sei promemoria di bolo mancato al giorno.

Nota: per aggiungere, modificare o eliminare i promemoria di bolo mancato, è necessario attivare l'interruttore dei promemoria di bolo mancato.

Abilitazione o disabilitazione di tutti i promemoria di bolo mancato

Per abilitare o disabilitare la possibilità di utilizzare promemoria di bolo mancato:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria.
2. Toccare l'interruttore Bolo mancato per abilitare o disabilitare tutti i promemoria di bolo mancato.

Se si disattivano questi promemoria, il PDM salva tutti i promemoria precedentemente impostati in modo da poterli utilizzare all'occorrenza.

Abilitazione o disabilitazione di un singolo promemoria di bolo mancato

Per attivare o disattivare un singolo promemoria di bolo mancato:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria > Bolo mancato.
2. Toccare l'interruttore accanto a un singolo promemoria di bolo mancato per attivare o disattivare il promemoria.

Aggiunta di un nuovo promemoria di bolo mancato

Per aggiungere un nuovo promemoria di bolo mancato:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria > Bolo mancato.
2. Toccare **Aggiungi promemoria**.
Il pulsante **Aggiungi promemoria** non viene visualizzato se i promemoria di bolo mancato sono disabilitati.
3. Toccare l'interruttore per selezionare Promemoria unico o Promemoria ricorrente.
 - Per i promemoria unici, toccare il campo **Data promemoria** e selezionare la data per il promemoria.
 - Per i promemoria ricorrenti, specificare i giorni della settimana per il promemoria toccando le caselle accanto ai giorni desiderati. Una casella selezionata contiene un segno di spunta.
4. Toccare il campo **Nessun bolo tra** e selezionare l'inizio dell'intervallo di tempo del bolo mancato.
5. Toccare il campo successivo e selezionare la fine dell'intervallo di tempo.
6. Toccare **SALVA**.

Modifica di un promemoria di bolo mancato

Per modificare un promemoria di bolo mancato:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria > Bolo mancato.
2. Toccare il nome del promemoria da modificare.
3. Apportare le modifiche desiderate alla frequenza, al/i giorno/i o all'ora di inizio o di fine dell'intervallo.
4. Toccare **SALVA**.

9 Regolazione delle impostazioni

Eliminazione di un promemoria di bolo mancato

Per eliminare un promemoria di bolo mancato:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria > Bolo mancato.
2. Toccare il nome del promemoria da eliminare.
3. Toccare ELIMINA.
4. Toccare Sì per confermare l'eliminazione.

Promemoria di rassicurazione

Quando i promemoria di rassicurazione sono attivi, viene emesso un segnale acustico all'inizio e alla fine di un bolo, di un bolo prolungato o di una basale temporanea:

- Il PDM emette una serie di bip all'inizio.
- Il Pod emette una serie di bip alla fine.

I promemoria di rassicurazione sono molto utili per familiarizzare con l'utilizzo del PDM e del Pod. Per attivare o disattivare i promemoria di rassicurazione:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria.
2. Toccare l'interruttore Promemoria di rassicurazione per attivare o disattivare i promemoria di rassicurazione.

Nota: NON è possibile disattivare i bip che vengono emessi all'avvio di una basale temporanea impostata per l'erogazione di un quantitativo di insulina uguale a zero.

Promemoria programma

Quando i promemoria programma sono attivati, ogni 60 minuti il Pod emetterà una serie di bip mentre è in corso l'erogazione di una basale temporanea o di un bolo prolungato. Per attivare o disattivare i promemoria programma:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria.
2. Scorrere verso il basso e toccare l'interruttore Promemoria programma per attivare o disattivare i promemoria programma.

Nota: NON è possibile disattivare i bip che vengono emessi durante una basale temporanea impostata per l'erogazione di un quantitativo di insulina uguale a zero.

Promemoria personalizzati

Un promemoria personalizzato è composto da un nome e da un'ora del giorno. È possibile impostare un promemoria personalizzato affinché venga inviato una sola volta oppure ripetuto giornalmente. I promemoria personalizzati vengono ripetuti ogni 15 minuti fino all'intervento dell'utente. È possibile impostare fino a 4 promemoria personalizzati.

Abilitazione o disabilitazione di tutti i promemoria personalizzati

Per abilitare o disabilitare la possibilità di visualizzare promemoria personalizzati:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria.
2. Scorrere verso il basso e toccare l'interruttore Promemoria personalizzati per abilitare o disabilitare tutti i promemoria personalizzati.

Se si disattivano questi promemoria, il PDM salva tutti i promemoria precedentemente impostati in modo da poterli utilizzare all'occorrenza.

Nota: per aggiungere, modificare o eliminare i promemoria personalizzati, è necessario attivare l'interruttore dei promemoria personalizzati.

Modifica o attivazione/disattivazione di un promemoria personalizzato individuale

Se i promemoria personalizzati sono attivati, è possibile modificare, attivare o disattivare un promemoria personalizzato individuale:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria > Promemoria personalizzati.
2. Toccare il nome di un promemoria personalizzato.
3. Toccare l'interruttore accanto a Promemoria personalizzato per attivare o disattivare questo promemoria personalizzato.
4. Apportare le modifiche desiderate alla frequenza, al/i giorno/i, all'ora, al nome e al testo.
5. Toccare SALVA.

Aggiunta di un nuovo promemoria personalizzato

Per aggiungere un nuovo promemoria personalizzato:


1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Promemoria > Promemoria personalizzati.
2. Toccare Aggiungi promemoria.
3. Toccare l'interruttore per selezionare Promemoria unico o Promemoria ricorrente.
 - Per i promemoria unici, toccare il campo Data promemoria e selezionare la data per il promemoria.

9 Regolazione delle impostazioni

- Per i promemoria ricorrenti, specificare i giorni della settimana toccando le caselle accanto ai giorni desiderati. Una casella selezionata contiene un segno di spunta.
- 4. Toccare il campo Ora promemoria e selezionare l'ora per il promemoria. Il PDM vibra o emette un bip un minuto dopo l'ora del promemoria.
- 5. Toccare il campo Nome promemoria e immettere un nome descrittivo per il promemoria. Il nome può avere un massimo di 32 caratteri.
- 6. Toccare il campo Testo promemoria e immettere un messaggio da visualizzare sul display all'ora del promemoria. Il messaggio può avere un massimo di 64 caratteri.
- 7. Toccare SALVA.

Eliminazione di un promemoria personalizzato

Per eliminare un promemoria personalizzato:

1. Accedere a: icona delle impostazioni  > Promemoria > Promemoria personalizzati.
2. Toccare il nome del promemoria personalizzato da eliminare.
3. Toccare ELIMINA.
4. Toccare SÌ per confermare l'eliminazione.

Impostazioni della glicemia - Intervallo obiettivo glicemico

Le impostazioni relative alla glicemia consentono di modificare l'obiettivo glicemico.

L'obiettivo dell'utilizzo del sistema Omnipod DASH® è quello di mantenere la glicemia entro un determinato intervallo. Tale intervallo è chiamato "obiettivo glicemico". È possibile definire questo obiettivo impostando il limite superiore e il limite inferiore dell'obiettivo glicemico. I grafici cronologici e la schermata Immetti glicemia utilizzano l'obiettivo glicemico per determinare quali valori glicemici rientrano nell'obiettivo glicemico e quali invece sono al di sotto o al di sopra di tale soglia.

Nota: il Suggeritore di bolo non utilizza i valori dell'Obiettivo glicemico per calcolare un bolo.

Attenzione: rivolgersi al proprio referente medico prima di regolare queste impostazioni.

Per impostare il limite superiore e il limite inferiore dell'obiettivo glicemico:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Glicemia > Obiettivo glicemico.
2. Impostare i limiti dell'Obiettivo glicemico:
 - a. Toccare il campo Limite superiore e immettere il valore desiderato. Inoltre, è possibile toccare il cerchio superiore (giallo) e farlo scorrere verso l'alto o verso il basso per modificare il limite superiore.
 - b. Toccare il campo Limite inferiore e immettere il valore desiderato. Inoltre, è possibile toccare il cerchio inferiore (rosso) e farlo scorrere verso l'alto o verso il basso per modificare il limite inferiore.
3. Toccare SALVA.

Impostazioni della basale e delle basali temporanee

Nelle sezioni che seguono viene descritto come modificare le impostazioni che controllano l'erogazione di insulina basale, ovvero la velocità basale massima e le basali temporanee.

Velocità basale massima

La velocità basale massima definisce il limite superiore per qualsiasi velocità basale utilizzata e si applica sia ai programmi basali sia alle basali temporanee. Rivolgersi al proprio referente medico prima di modificare questa impostazione.

Per modificare la velocità basale massima:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Basale e basale temporanea > Velocità basale max.
2. Toccare il campo Velocità basale max e immettere il nuovo valore per la velocità basale massima.
3. Toccare SALVA.

Nota: NON è possibile impostare una velocità basale massima inferiore alla velocità basale più elevata utilizzata in un programma basale esistente, in una basale temporanea preimpostata o nella basale temporanea attualmente in esecuzione.

Basale temporanea

Per attivare o disattivare la possibilità di impostare le basali temporanee:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Basale e basale temporanea.

9 Regolazione delle impostazioni

2. Per abilitare o disabilitare la possibilità di impostare velocità basali temporanee (basali temporanee), toccare l'interruttore di attivazione/disattivazione.
3. Per passare da basali temporanee con percentuali (%) a basali temporanee con unità orarie (U/ora) e viceversa:
 - a. Toccare **Basale temporanea**.
 - b. Selezionare il metodo desiderato per l'impostazione di una basale temporanea:
 - Toccare **Percentuale (%)** per modificare il Programma basale attivo aumentando o diminuendo la percentuale.
 - Toccare **Unità orarie (U/ora)** per sostituire il Programma basale attivo con una velocità basale fissa per la durata specificata.
 - c. Toccare **SALVA**.

Impostazioni di erogazione dei boli


Queste impostazioni consentono di modificare le impostazioni relative al Bolo massimo, al Bolo prolungato e al Suggeritore di Bolo.

Bolo massimo

Il Bolo massimo definisce il limite superiore per un bolo. Se il Bolo consigliato calcolato dal suggeritore di bolo supera la quantità specificata per il Bolo massimo, viene visualizzato un avviso. Il valore massimo consentito per il Bolo massimo è 30 unità.

Attenzione: consultare il proprio referente medico prima di modificare questa impostazione.

Per modificare il Bolo massimo:

1. Accedere a: icona delle impostazioni () > Bolo > Bolo massimo.
2. Toccare il campo **Bolo massimo** e immettere il nuovo valore del Bolo massimo.
3. Toccare **SALVA**.

Bolo prolungato

Un bolo prolungato viene erogato nel corso di un periodo prolungato di tempo. È possibile prolungare solo la porzione del pasto di un bolo. Non è invece possibile prolungare un bolo di correzione. Per disattivare la funzione del bolo prolungato o per modificare la configurazione del bolo prolungato:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (🔧) > Bolo.
2. Toccare l'interruttore accanto a Bolo prolungato per attivare o disattivare la possibilità di prolungare un bolo.

Impostazioni del suggeritore di bolo

Questa sezione descrive come regolare le impostazioni utilizzate dal Suggeritore di bolo per calcolare il bolo pasto e il bolo di correzione.

Avvertenza: il Suggeritore di bolo mostra una dose di bolo consigliato calcolata in base alle impostazioni personalizzate programmate nel PDM. Rivolgersi al proprio referente medico prima di modificare le impostazioni del Suggeritore di bolo. La somministrazione di una quantità eccessiva di insulina può causare ipoglicemia.

Attivazione o disattivazione del Suggeritore di bolo

Per attivare o disattivare il Suggeritore di bolo:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (🔧) > Bolo.
2. Toccare l'interruttore nella riga Suggeritore di bolo per attivare o disattivare il suggeritore di bolo.
3. Se è la prima volta che si attiva il Suggeritore di bolo, seguire le istruzioni sul display o vedere "Target glicemico e valori "Correggere verso l'alto"" a pagina 32. Nelle sezioni che seguono viene descritto come modificare queste impostazioni.

Target glicemico e Correggere verso l'alto

Quando si calcola un bolo di correzione, il suggeritore di bolo cerca di riportare la glicemia al valore impostato per il target glicemico. Tuttavia, il bolo di correzione viene calcolato solo se la glicemia è superiore all'impostazione "Correggere verso l'alto". Per modificare i valori "Target glicemico" o "Correggere verso l'alto":

9 Regolazione delle impostazioni

1. Scrivere un elenco di tutti i segmenti "Target glicemico" e "Correggere verso l'alto" desiderati per guidare l'utente a reinserire i valori per ogni segmento.

Consiglio: È possibile scrivere questo elenco sulle pagine alla fine del presente Manuale d'uso tecnico.

2. Accedere a: icona delle impostazioni (🔧) > Bolo > Target glicemico e Correggere verso l'alto.
3. Toccare AVANTI.
4. Per modificare un segmento, toccare la riga contenente il segmento da modificare.
 - a. Toccare il campo Ora di fine per immettere una nuova ora di fine.
 - b. Toccare il campo Target glicemico per immettere un nuovo valore Target glicemico.
 - c. Toccare il campo Correggere verso l'alto per immettere un nuovo valore Correggere verso l'alto.
 - d. Toccare AVANTI.
5. Ripetere il passaggio precedente secondo necessità per i segmenti rimanenti.
6. Dopo aver confermato che tutti i segmenti sono corretti, toccare SALVA.

Nota: È possibile aggiungere ed eliminare segmenti modificando i segmenti esistenti.

Glicemia minima per suggeritore

L'impostazione "Glicemia minima per suggeritore" è un valore soglia che viene impostato dall'utente. Se il valore della glicemia è inferiore al valore "Glicemia minima per suggeritore", il suggeritore di bolo verrà disabilitato e non verrà calcolato alcun bolo. Per modificare questo valore:

1. Accedere a: icona delle impostazioni (🔧) > Bolo > Glicemia minima per suggeritore.
2. Toccare il campo Glicemia min per suggeritore e immettere il valore desiderato. In alternativa, toccare il cerchio blu e far scorrere il dito verso l'alto o verso il basso per selezionare il valore "Glicemia minima per suggeritore".
3. Toccare SALVA.

Rapporto insulina/carboidrati (IC)

Il rapporto insulina/carboidrati (IC) definisce i grammi di carboidrati coperti da un'unità di insulina. Il suggeritore di bolo utilizza il rapporto insulina/carboidrati (IC) per calcolare un bolo pasto quando si stanno per assumere degli alimenti. Per modificare questo valore:

1. Scrivere un elenco di tutti i segmenti del rapporto insulina/carboidrati (IC) desiderati per guidare l'utente a reinserire i valori per ogni segmento.

Consiglio: È possibile scrivere questo elenco sulle pagine alla fine del presente Manuale d'uso tecnico.

2. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Bolo > Rapporto insulina/carboidrati.
3. Toccare AVANTI.
4. Per modificare un segmento, toccare la riga contenente il segmento da modificare.
 - a. Toccare il campo Ora di fine per immettere una nuova ora di fine.
 - b. Toccare il campo 1 unità di insulina copre e immettere un nuovo rapporto insulina/carboidrati (IC).
 - c. Toccare AVANTI.
5. Ripetere il passaggio precedente secondo necessità per i segmenti rimanenti.
6. Dopo aver confermato che tutti i segmenti sono corretti, toccare SALVA.

Nota: È possibile aggiungere ed eliminare segmenti modificando i segmenti esistenti.

Fattore di correzione

Il suggeritore di bolo utilizza il Fattore di correzione per calcolare un bolo di correzione quando il valore della glicemia è superiore all'impostazione "Correggere verso l'alto" (vedere "Il Suggeritore di bolo" a pagina 154).

Per modificare questo valore:

1. Scrivere un elenco di tutti i segmenti del Fattore di correzione desiderati per guidare l'utente a reinserire i valori per ogni segmento.

Consiglio: È possibile scrivere questo elenco sulle pagine alla fine del presente Manuale d'uso tecnico.

2. Accedere a: icona delle impostazioni (⚙️) > Bolo > Fattore di correzione.
3. Toccare AVANTI.
4. Per modificare un segmento, toccare la riga contenente il segmento da modificare.
 - a. Toccare il campo Ora di fine per immettere una nuova ora di fine.
 - b. Toccare il campo 1 unità di insulina riduce la glicemia di e immettere un nuovo fattore di correzione.
 - c. Toccare AVANTI.
5. Ripetere il passaggio precedente secondo necessità per i segmenti rimanenti.
6. Dopo aver confermato che tutti i segmenti sono corretti, toccare SALVA.


Nota: È possibile aggiungere ed eliminare segmenti modificando i segmenti esistenti.

9 Regolazione delle impostazioni

Correzione inversa


L'impostazione Correzione inversa determina in che modo il Suggeritore di bolo gestisce i boli pasto quando il valore della glicemia è inferiore al target glicemico (vedere "Correzione inversa" a pagina 157 per maggiori informazioni).

Per attivare o disattivare la Correzione inversa:

1. Accedere a: icona delle impostazioni  > Bolo.
2. Toccare l'interruttore nella linea Correzione inversa per attivare o disattivare la correzione inversa.

Durata dell'azione dell'insulina

Il Suggeritore di bolo utilizza l'impostazione "Durata dell'azione dell'insulina" per calcolare la quantità di insulina attiva (IOB) nel corpo da un bolo precedente. Per modificare questo valore:

1. Accedere a: icona delle impostazioni  > Bolo > Durata dell'azione dell'insulina.
2. Toccare il campo Durata dell'azione dell'insulina e immettere il nuovo valore.
3. Toccare SALVA.

CAPITOLO 10

Allarmi, notifiche ed errori di comunicazione




Panoramica

Avvertenze:

risponda sempre agli allarmi di pericolo il prima possibile. Gli allarmi di pericolo emessi dal Pod segnalano un'interruzione nell'erogazione di insulina. Pertanto, non rispondendo a un allarme di pericolo, si può andare incontro a iperglicemia.

Nel caso fosse necessario restituire il PDM per chiederne la sostituzione, contatti il suo referente medico per istruzioni su come utilizzare le iniezioni per garantire un'erogazione adeguata di insulina.



Il sistema Omnipod DASH® genera i seguenti tipi di allarmi e di messaggi:

-  **allarmi di pericolo** sono allarmi di massima priorità che segnalano un problema serio e indicano che è necessario rimuovere il Pod.
-  **Segnali di notifica** sono allarmi a priorità ridotta che segnalano una situazione che richiede l'attenzione dell'utente.
-  **Notifiche**, chiamate anche promemoria, sono promemoria di operazioni che l'utente potrebbe voler svolgere.
- **Segnali informativi** informano l'utente che il Pod sta seguendo le istruzioni per l'erogazione di insulina. Non è richiesta alcuna azione.
- **Errori di comunicazione** si tratta di messaggi visualizzati sul display quando il PDM non è in grado di comunicare con il Pod.

Per istruzioni su come visualizzare la cronologia degli allarmi e delle notifiche, vedere pagina 87.

Risposta agli allarmi

Per rispondere a un allarme di pericolo o a un segnale di notifica:

1. Attivare il PDM. Il blocco schermo mostra un messaggio di allarme insieme all'icona dell'allarme di pericolo () o all'icona del segnale di notifica ()
2. Sbloccare il PDM. Dopo l'immissione del PIN, viene visualizzato un messaggio di allarme a schermo intero.

Nota: se si utilizza il PDM quando si verifica un allarme, il messaggio di allarme viene visualizzato come messaggio a schermo intero.

3. Attenersi alle istruzioni visualizzate sul display oppure vedere i dettagli dei singoli allarmi a partire da pagina 122.

Nota: È possibile utilizzare il PDM anche se non si affronta immediatamente la causa di un segnale di notifica. Tuttavia, è necessario confermare un allarme di pericolo prima di poter utilizzare il PDM per altre cose.

Consiglio: *se, pur attenendosi alle istruzioni del PDM, non è possibile silenziare un allarme di pericolo, vedere "Silenziamento di un allarme non risolto" a pagina 132.*

Nota: se è in esecuzione una basale temporanea o un bolo prolungato quando si verifica un allarme di pericolo del Pod, il PDM comunica all'utente che è stato annullato.


Risposta alle notifiche

Le notifiche sono promemoria di azioni che l'utente potrebbe voler svolgere.

Avviso di notifica

Per avvisare l'utente di una notifica, il Pod emette un segnale acustico e il PDM emette un segnale acustico o vibra (vedere "Segnali acustici e vibrazioni" a pagina 120). Quando si sente un segnale acustico o una vibrazione, controllare il PDM per vedere se c'è un messaggio.

Nota: i promemoria programma, i promemoria assicurazione e alcuni segnali informativi non hanno un messaggio di accompagnamento.

Se il PDM è in modalità di attesa quando si sente una notifica, attivare il PDM. Il blocco schermo mostra l'icona della notifica () e il messaggio di notifica.

- Se ci sono più messaggi, il messaggio più recente viene visualizzato in cima all'elenco.
- Se ci sono più messaggi di quelli che possono essere visualizzati nel Blocco schermo, un banner sotto i messaggi mostra il numero di messaggi aggiuntivi.

Se si utilizza il PDM quando viene emessa una notifica, il messaggio di notifica viene visualizzato nella parte superiore del display. Per rimuovere il messaggio dal display:





- Non fare niente. Il messaggio scompare dopo alcuni secondi e viene salvato come nuovo messaggio.
- Scorrere verso l'alto per rimuovere immediatamente il messaggio e salvarlo come nuovo messaggio.
- Scorrere verso destra per rimuovere immediatamente il messaggio e salvarlo come messaggio confermato.


Conferma delle notifiche

Nota: l'attivazione e l'utilizzo del PDM non conferma (o silenzia) automaticamente le notifiche.

Tutte le nuove notifiche sono incluse nel conteggio delle notifiche e degli allarmi () nel cerchio rosso in alto a destra nella maggior parte delle schermate.

Per confermare la notifica:

1. Attivare il PDM.
2. Toccare l'icona a forma di campana () per visualizzare la schermata Notifiche e allarmi.
3. Leggere eventuali messaggi con le icone di notifica blu (). Scorrere verso il basso nella schermata, se necessario, per visualizzare eventuali ulteriori notifiche con icone blu ().
4. Toccare la freccia indietro () nella parte in alto a sinistra del display per contrassegnare le notifiche come confermate.

Nota: la disattivazione del PDM premendo il pulsante di accensione non contrassegna le notifiche come "confermate". È necessario toccare la freccia indietro () per confermare la notifica.

Priorità e prevedibilità di allarmi e notifiche

Gli allarmi di pericolo hanno la priorità rispetto ai segnali di notifica. In generale, può verificarsi un solo allarme di pericolo alla volta. Nell'improbabile eventualità che un allarme di pericolo del Pod e un allarme di pericolo del PDM si verificino simultaneamente, viene visualizzato per primo l'allarme di pericolo del PDM.

I segnali di notifica hanno la priorità rispetto alle notifiche. Se si verificano più segnali di notifica, il PDM visualizza prima il messaggio più recente.

I seguenti segnali di notifica precedono sempre un allarme di pericolo:

Segnale di notifica

! Pod scaduto

! Serbatoio quasi vuoto

! Avviso di spegnimento automatico

Allarme di pericolo

→ ! Pod scaduto

→ ! Serbatoio vuoto

→ ! Spegnimento automatico

È possibile prevenire questi allarmi di pericolo rispondendo tempestivamente al relativo segnale di notifica.

Nota: come avviso supplementare, una notifica di scadenza del Pod (🕒) precede il segnale di notifica di Pod scaduto.

Segnali acustici e vibrazioni

Il sistema Omnipod DASH® utilizza segnali acustici e vibrazioni per attirare l'attenzione su un allarme o una notifica.

Consiglio: per testare i segnali acustici e le vibrazioni, vedere "Controllo degli allarmi" a pagina 103.

Allarmi del Pod

Il Pod emette un segnale acustico di allarme quando rileva un problema che può influire sull'erogazione di insulina.

- I segnali acustici degli allarmi di pericolo del Pod sono segnali acustici continui, intervallati periodicamente da una serie di bip.
- I segnali acustici dei segnali di notifica e delle notifiche del Pod sono bip intermittenti ripetuti periodicamente fino alla conferma da parte dell'utente.

Allarmi del PDM

Il PDM emette un segnale acustico di allarme in risposta a un problema interno o quando rileva un allarme del Pod in corso.

- Gli allarmi di pericolo del PDM iniziano con una vibrazione continua e, dopo circa 1,5 minuti, viene aggiunto un segnale acustico continuo.



Per motivi di sicurezza, gli allarmi del PDM prevedono sempre un allarme acustico anche se la modalità segnale acustico/vibrazione è impostata su Vibrazione.

- I segnali di notifica del PDM sono segnali acustici intermittenti ripetuti periodicamente fino alla conferma da parte dell'utente.
- Le notifiche del PDM hanno vibrazioni o segnali acustici intermittenti ripetuti periodicamente fino alla conferma da parte dell'utente.

Vedere "Intervallo di regolazione degli allarmi del Pod" a pagina 144 per ulteriori informazioni.

Il pulsante di segnale acustico/vibrazione

Il pulsante di segnale acustico/vibrazione del PDM, situato sul bordo superiore destro del PDM, controlla se i seguenti promemoria utilizzano vibrazioni o segnali acustici: controlla glicemia dopo bolo, Bolo mancato, Nessun Pod e Promemoria personalizzati.

- Per attivare le vibrazioni, premere e tenere premuta l'estremità inferiore del pulsante di segnale acustico/vibrazione fino a quando l'icona delle vibrazioni () non appare sull'indicatore.
- Per attivare il segnale acustico, premere e tenere premuta l'estremità superiore del pulsante di segnale acustico/vibrazione fino a quando l'icona a forma di campana () non appare sull'indicatore.
- Per alzare o abbassare il volume, premere l'estremità superiore o inferiore del pulsante di segnale acustico/vibrazione per spostare l'indicatore rotondo. Spostare l'indicatore rotondo a sinistra per abbassare il volume. Spostarlo a destra per alzare il volume.

Elenco degli allarmi di pericolo

Gli allarmi di pericolo segnalano all'utente una situazione grave. Rispondere sempre a un allarme di pericolo immediatamente. Alcuni messaggi di allarme riportano un numero univoco chiamato "numero di riferimento". Fornire tale numero al servizio di Assistenza clienti quando si chiama in merito a un allarme.

Gli allarmi di pericolo individuali sono riepilogati qui.

 **Pod scaduto:** il Pod ha raggiunto la fine della sua vita operativa e l'erogazione di insulina è stata interrotta. Il Pod e il PDM emettono entrambi un allarme.


Messaggio: pod scaduto. Erogazione insulina interrotta. Sostituisci immediatamente il Pod.

Azione: toccare OK, DISATTIVA POD ORA. Sostituire il Pod. Eseguire un controllo della glicemia.

 **Serbatoio vuoto:** il serbatoio di insulina del Pod è vuoto e l'erogazione di insulina è stata interrotta. Il Pod e il PDM emettono entrambi un allarme.

Messaggio: serbatoio vuoto. Erogazione insulina interrotta. Sostituisci immediatamente il Pod.

Azione: toccare OK, DISATTIVA POD ORA. Sostituire il Pod. Eseguire un controllo della glicemia.

 **Spegnimento automatico:** il Pod ha interrotto l'erogazione di insulina perché l'utente non ha risposto al segnale di notifica di spegnimento automatico. Il Pod e il PDM emettono entrambi un allarme. Per modificare l'impostazione Spegnimento automatico, vedere "Spegnimento automatico del Pod" a pagina 105. Per ulteriori informazioni sul funzionamento dello spegnimento automatico, vedere "Spegnimento automatico" a pagina 146.

Messaggio: spegnimento automatico. Erogazione insulina interrotta. Nessuna comunicazione da PDM e Pod nelle ultime <periodo di tempo> ore. Per riprendere l'erogazione dell'insulina, sostituire il Pod.

Azione: toccare OK, DISATTIVA POD ORA. Sostituire il Pod. Eseguire un controllo della glicemia.

 **Occlusione:** la cannula del Pod è bloccata, il che ha causato l'interruzione dell'erogazione di insulina. Il Pod e il PDM emettono entrambi un allarme.

Messaggio: occlusione rilevata. Erogazione insulina interrotta. Sostituisci immediatamente il Pod. Controlla glicemia.

Azione: toccare OK, DISATTIVA POD ORA. Sostituire il Pod. Eseguire un controllo della glicemia.

 **Errore del Pod:** il Pod ha rilevato un errore imprevisto. Il Pod e il PDM emettono entrambi un allarme.

Messaggio: errore del Pod. Erogazione insulina interrotta. Sostituisci immediatamente il Pod.


Azione: toccare OK, DISATTIVA POD ORA. Sostituire il Pod. Eseguire un controllo della glicemia.

 **Chiamare il servizio di Assistenza clienti:** è stato rilevato un errore imprevisto nel Pod o nel PDM. Il Pod, il PDM o entrambi potrebbero emettere un allarme.

Messaggio: chiamare il servizio di Assistenza clienti. Rimuovi il Pod adesso. Chiama l'assistenza clienti.

Rif: <numero di riferimento>.

Azione: toccare OK per silenziare l'allarme. Rimuovere il Pod. Chiamare immediatamente il servizio di Assistenza clienti. Eseguire un controllo della glicemia.

 **Errore di sistema:** è stato rilevato un errore imprevisto nel Pod o nel PDM. Il Pod, il PDM o entrambi potrebbero emettere un allarme.

Messaggio: errore di sistema. Rimuovi il Pod adesso. Chiama l'assistenza clienti.

Rif: <numero di riferimento>.

Azione: toccare OK per silenziare l'allarme. Rimuovere il Pod. Chiamare immediatamente il servizio di Assistenza clienti. Eseguire un controllo della glicemia.

 **Errore del PDM:** è stato rilevato un errore imprevisto nel PDM. Il PDM emette un allarme.

Messaggio: errore del PDM. Rimuovi il Pod adesso. Chiama l'assistenza clienti.

Rif: <numero di riferimento>.

Azione: toccare OK per silenziare l'allarme. Rimuovere il Pod. Chiamare immediatamente il servizio di Assistenza clienti. Eseguire un controllo della glicemia.

 **Errore del PDM**

Messaggio: errore del PDM. Toccare "OK" per resettare l'orologio.

Azione: toccare OK. Resettare l'orologio. Sostituire il Pod. Eseguire un controllo della glicemia.

 **Disattivazione Pod richiesta**

Messaggio: disattivazione Pod richiesta. Toccare "OK" per disattivare.

Azione: toccare OK, DISATTIVA POD ORA per disattivare il Pod. Rimuovere il Pod.

Memoria danneggiata del PDM

Messaggio: memoria danneggiata del PDM. Rimuovi il Pod adesso. Chiama l'assistenza clienti. Tocca OK per reimpostare il PDM ed eliminare tutte le impostazioni utente.

Azione: toccare OK per resettare il PDM. Questa azione elimina tutte le impostazioni dell'utente, ma non elimina i registri cronologici. Se necessario, il PDM fornisce istruzioni all'utente su come immettere di nuovo le impostazioni dell'utente, la data e l'ora. Consultare il proprio referente medico se non si conoscono le impostazioni dell'utente.


Elenco dei segnali di notifica

I segnali di notifica indicano una situazione che richiede l'attenzione dell'utente nell'immediato.

Avvertenze:

tre tipi di segnali di notifica (Pod scaduto, Serbatoio quasi vuoto e Spegnimento automatico), se ignorati, diventano allarmi di pericolo e generano un'interruzione nell'erogazione di insulina. Assicurarsi di rispondere a tutti i segnali di notifica non appena si verificano.


I singoli segnali di notifica sono riepilogati qui.

 **Pod scaduto:** il Pod interromperà presto l'erogazione di insulina. Se ignorata, questa situazione progredisce generando l'allarme di pericolo "Pod scaduto". Il Pod e il PDM potrebbero emettere entrambi l'allarme.

Vibrazione/segnale acustico: periodicamente, fino all'intervento dell'utente.

Messaggio: pod scaduto. Sostituisci immediatamente il Pod.

Azione: toccare OK. Sostituire il Pod.

 **Serbatoio quasi vuoto:** il volume dell'insulina nel serbatoio del Pod è inferiore al valore specificato. Se ignorata, questa situazione progredisce nell'allarme di pericolo "Serbatoio vuoto". Per modificare questo valore, vedere "Livello del serbatoio quasi vuoto" a pagina 105. Il Pod e il PDM potrebbero emettere entrambi l'allarme.

Vibrazione/segnale acustico: una volta al minuto per 3 minuti. Ripetuto ogni 60 minuti fino all'intervento dell'utente.

Messaggio: serbatoio quasi vuoto. <x> U max di insulina residua nel Pod. Sostituire presto il Pod.

Azione: toccare OK. Sostituire il Pod.

! Spegnimento automatico: il PDM non è stato utilizzato nel periodo del conto alla rovescia per lo spegnimento automatico specificato dall'utente. Il Pod interromperà presto l'erogazione di insulina se non si risponde a questo allarme. Per abilitare o disabilitare la funzione di spegnimento automatico o per modificare il periodo del conto alla rovescia, vedere "Spegnimento automatico del Pod" a pagina 105. Il Pod e il PDM emettono entrambi un allarme.

Vibrazione/segnale acustico: una volta al minuto per 15 minuti.

Messaggio: avviso di spegnimento automatico. Nessuna comunicazione da PDM e Pod nelle ultime <periodo di tempo specificato dall'utente> ore. Toccare OK per avviare la comunicazione fra PDM e Pod.

Azione: toccare OK per resettare il timer del conto alla rovescia per lo spegnimento automatico all'inizio del periodo del conto alla rovescia.

! Riprendi insulina: il periodo di tempo specificato per la sospensione dell'insulina è trascorso. Se non viene ripresa l'erogazione di insulina, si potrebbe andare incontro a iperglicemia. Il Pod e il PDM emettono entrambi un allarme.

Vibrazione/segnale acustico: una volta al minuto per 3 minuti. Ripetuto ogni 15 minuti fino alla ripresa dell'erogazione di insulina.

Messaggio del blocco schermo: ripresa dell'insulina. Il periodo di sospensione dell'insulina è terminato.

Messaggio a schermo intero: riprendere l'erogazione di insulina con il programma basale <nome>? Il periodo di sospensione dell'insulina è terminato.

Azione: toccare RIPRENDI INSULINA per riattivare il programma basale programmato oppure toccare RICORDAMI TRA 15 MIN per continuare con la sospensione dell'erogazione di insulina. Questo allarme viene ripetuto ogni 15 minuti fino alla ripresa dell'erogazione di insulina.

! Batteria del PDM quasi scarica: è rimasto il 15% o meno di carica della batteria del PDM.

Vibrazione/segnale acustico: nessuno. Per preservare la batteria, il PDM è in silenzio.

Messaggio: batteria del PDM quasi scarica. Batteria del PDM quasi scarica. Ricaricare la batteria presto.

Azione: toccare OK. Ricaricare la batteria del PDM il prima possibile.

Attenzione: non viene emesso alcun allarme di pericolo quando la batteria si esaurisce completamente. Collegare il caricatore il prima possibile dopo che viene visualizzato il messaggio di batteria quasi scarica.

Nota: l'icona della batteria nella barra di stato della maggior parte delle schermate visualizza la carica rimanente della batteria. Quando la carica è completamente esaurita, il PDM si spegne. È necessario ricaricare il PDM per poterlo utilizzare di nuovo. È possibile utilizzare il PDM durante la ricarica.

Elenco delle notifiche

Le notifiche, chiamate anche promemoria, ricordano all'utente varie azioni che potrebbe voler svolgere. Alcune vengono generate automaticamente, mentre altre hanno impostazioni controllate dall'utente (vedere "Regolazione delle impostazioni" a pagina 99).

Consiglio: utilizzare il pulsante di segnale acustico/vibrazione nella parte destra del PDM per controllare se la notifica del PDM emette un segnale acustico o vibra (vedere "Il pulsante di segnale acustico/vibrazione" a pagina 121).

Le notifiche sono:

 **Scadenza del Pod:** indica il tempo rimasto prima dell'emissione del segnale di notifica di scadenza del Pod. Per modificare l'orario di questa notifica, vedere "Scadenza del Pod" a pagina 105. Il Pod e il PDM emettono entrambi una notifica.

Vibrazione/segnale acustico: una serie di tre bip. Viene ripetuto periodicamente, fino all'intervento dell'utente.

Messaggio: scadenza del Pod. Il Pod scade alle <ora, data>.


Azione: confermare il messaggio (vedere "Conferma delle notifiche" a pagina 119). Sostituire il Pod.

 **Nessun Pod attivo:** il PDM ricorda all'utente di attivare un nuovo Pod per avviare l'erogazione di insulina basale.

Vibrazione/segnale acustico: ogni 15 minuti.

Messaggio: nessun Pod attivo. Attivare Pod per avviare erogazione insulina.


Azione: sbloccare il PDM. Attivare un nuovo Pod.

 **Controlla glicemia dopo bolo:** il PDM ricorda all'utente di controllare la glicemia dopo l'erogazione di un bolo. Per modificare questa promemoria, vedere "Promemoria Controlla glicemia dopo bolo" a pagina 106.

Vibrazione/segnale acustico: ogni 5 minuti fino all'intervento dell'utente.

Messaggio: promemoria: controllare la glicemia. Sono trascorse <x> ore dal bolo.


Azione: confermare il messaggio (vedere "Conferma delle notifiche" a pagina 119). Eseguire un controllo della glicemia.

 **Bolo mancato:** il PDM ricorda all'utente che non è stato erogato alcun bolo nel periodo di tempo specificato. Per modificare questa promemoria, vedere "Promemoria bolo mancato" a pagina 106.

Vibrazione/segnale acustico: ogni 15 min fino all'intervento dell'utente.

Messaggio: bolo mancato. Bolo pasto non erogato tra <ora di avvio> - <ora di fine>.

Azione: confermare il messaggio (vedere "Conferma delle notifiche" a pagina 119). Considerare il programma dei pasti.

 **Promemoria personalizzato:** il PDM visualizza un messaggio specificato dall'utente. Per creare o modificare questi promemoria, vedere "Promemoria personalizzati" a pagina 109.

Vibrazione/segnale acustico: ogni 15 min fino all'intervento dell'utente.

Messaggio: <testo del promemoria dell'utente>.

Azione: confermare il messaggio (vedere "Conferma delle notifiche" a pagina 119).

Elenco dei segnali informativi

Il Pod e il PDM possono fornire vibrazioni o messaggi acustici informativi che comunicano all'utente gli eventi del PDM e del Pod che si verificano normalmente come previsto. Non è necessario intervenire in alcun modo in risposta a questi segnali. Il PDM non visualizza alcun messaggio esplicativo.

Consiglio: *utilizzare il pulsante di segnale acustico/vibrazione nella parte destra del PDM per controllare se alcuni di questi segnali emettono un segnale acustico o vibrano (vedere "Il pulsante di segnale acustico/vibrazione" a pagina 121).*

Promemoria assicurazione: questi segnali acustici o vibrazioni comunicano all'utente che le basali temporanee e i boli funzionano come previsto. Questi promemoria sono attivati per impostazione predefinita. Per attivare o disattivare i promemoria di assicurazione vedere "Promemoria di assicurazione" a pagina 108.

Segnali acustici/vibrazioni del PDM: all'inizio di una basale temporanea, di un bolo o di un bolo prolungato.

Bip del Pod: una volta alla fine di una basale temporanea, di un bolo o di un bolo prolungato.

Promemoria programma: questi bip ricordano all'utente che c'è una basale temporanea o un bolo prolungato in esecuzione. Questi promemoria sono attivati per impostazione predefinita. Per attivare o disattivare i promemoria programma vedere "Promemoria programma" a pagina 108.

Bip del Pod: una volta ogni 60 minuti mentre una basale temporanea o un bolo prolungato è in esecuzione.

Attivazione del Pod: questi segnali acustici e vibrazioni si verificano in momenti diversi durante il processo di attivazione del Pod per indicare l'avanzamento. Non è possibile disattivarli.

10 Allarmi, notifiche, errori di comunicazione

Bip del Pod: due volte dopo essere stato riempito con la quantità minima di insulina necessaria per l'attivazione (vedere pagina 41).

Segnali acustici/vibrazioni del PDM: quando il Pod e il PDM vengono abbinati correttamente.

Bip del Pod: a partire da 10 minuti dopo il riempimento del Pod con insulina, il Pod emette dei bip ogni cinque minuti fino all'avvio dell'erogazione di insulina.

Disattivazione del Pod: il PDM emette un segnale acustico o vibra: due volte quando il Pod viene disattivato correttamente.

Modifiche del programma basale: questi segnali acustici o vibrazioni informano l'utente di modifiche al programma basale. Non è possibile disattivarli.

Segnali acustici/vibrazioni del PDM: quando un programma basale viene attivato, modificato, sospeso o ripreso.

Bip del Pod: ogni 15 minuti mentre l'erogazione di insulina è sospesa.

Annullamento di basali temporanee e boli: comunica all'utente che il bolo o la basale temporanea è stato/a annullato/a correttamente.

Bip del Pod: una volta quando si annulla una basale temporanea, un bolo o un bolo prolungato. Non è possibile disattivare questi bip.

Errori di comunicazione

Quando il PDM invia un'istruzione al Pod, di solito la comunicazione avviene rapidamente. Se si verifica un errore di comunicazione, il PDM visualizza l'icona della mancata comunicazione con il Pod nella barra di stato (vedere "La barra di stato" a pagina 9).

La comunicazione può fallire se:

- Il PDM è, o è stato temporaneamente, troppo lontano dal Pod: per una corretta comunicazione, il PDM e il Pod devono essere l'uno accanto all'altro durante l'attivazione e a non più di 1,5 metri (5 piedi) di distanza dopo l'attivazione. Qualsiasi comando di insulina avvia una connessione tra il PDM e il Pod.

- La comunicazione è disturbata da interferenze esterne (vedere "Avviso riguardante le interferenze relative al sistema Omnipod DASH®" a pagina 199).

Avvertenze:

se non è possibile disattivare un Pod, questo continuerà a erogare insulina. È necessario rimuovere il vecchio Pod prima di attivarne uno nuovo. La somministrazione di una quantità eccessiva di insulina può causare ipoglicemia.

Se il PDM è danneggiato o non funziona come previsto, contattare il servizio di Assistenza clienti. Ricordarsi di controllare frequentemente la glicemia. Rimuovere il Pod e rivolgersi al referente medico per le linee guida terapeutiche dopo la rimozione.

Errore durante l'annullamento di un bolo

Se si tenta di annullare un bolo quando si verifica un errore di comunicazione, il PDM offre queste opzioni:

- **ANNULLA:** selezionare questa opzione per interrompere il tentativo di annullare il bolo. Il Pod continua a erogare il bolo.

Nota: se l'istruzione "annulla bolo" è già stata inviata, l'opzione ANNULLA non è disponibile.

- **RIPROVA:** spostarsi in una nuova posizione, quindi selezionare questa opzione per dire al PDM di continuare a provare a comunicare con il Pod.
- **DISATTIVA POD:** selezionare questa opzione e seguire le istruzioni del PDM per la sostituzione del Pod.

Errore durante l'invio di istruzioni per l'insulina al Pod

Si può verificare un errore di comunicazione quando il PDM tenta di inviare le seguenti istruzioni relative all'erogazione di insulina al Pod: sospensione o ripresa dell'insulina, attivazione di un nuovo Programma basale, avvio o annullamento di una basale temporanea o avvio di un bolo.

Se si verifica un errore di comunicazione quando PDM tenta di inviare un'istruzione di erogazione di insulina, il PDM offre diverse opzioni. Le opzioni offerte cambiano se il PDM ha inviato al Pod l'istruzione e non ha ricevuto conferma dell'esecuzione, oppure se il PDM non ha inviato l'istruzione.

Se il PDM ha inviato il comando al Pod e non ha ricevuto conferma dell'esecuzione, il PDM offre queste opzioni:

- **RIPROVA:** spostarsi in una nuova posizione, quindi selezionare questa opzione per ricontrollare che il comando sia stato effettuato.

10 Allarmi, notifiche, errori di comunicazione

- **DISATTIVA POD:** selezionare questa opzione e seguire le istruzioni del PDM per la sostituzione del Pod.

Se il PDM *non* ha inviato al Pod il comando, il PDM chiede all'utente di spostarsi in una nuova posizione e di toccare **RIPROVA** per tentare di nuovo la comunicazione. Dopo aver toccato **RIPROVA**, se il successivo tentativo di comunicazione fallisce, il PDM offre queste opzioni:

- **ANNULLA:** selezionare questa opzione per annullare l'invio del comando. In questo caso, il Pod continua con la precedente modalità di erogazione di insulina. Si può provare a inviare il comando più tardi.
- **RIPROVA:** spostarsi in una nuova posizione, quindi selezionare questa opzione per indicare al PDM di riprovare a inviare l'istruzione al Pod.
- **DISATTIVA POD:** selezionare questa opzione e seguire le istruzioni del PDM per la sostituzione del Pod.

Nota: in qualsiasi momento, se il PDM riceve conferma dal Pod che il comando sia stato ricevuto correttamente, viene visualizzato un banner verde che informa l'utente che l'istruzione è stata eseguita.

Errore durante l'attivazione di un Pod

Se si verifica un errore di comunicazione durante l'attivazione del Pod, il PDM offre queste opzioni:

- **GETTA POD:** selezionare questa opzione per interrompere il tentativo di utilizzare questo Pod.
- **RIPROVA:** selezionare questa opzione per tentare di ristabilire la comunicazione.

Errore durante la disattivazione di un Pod

Se si verifica un errore di comunicazione durante la disattivazione del Pod, il PDM offre queste opzioni:

- **GETTA POD:** selezionare questa opzione per dire al PDM di annullare l'abbinamento con quel Pod. Il PDM chiede all'utente di rimuovere il Pod e di toccare CONTINUA.
- **RIPROVA:** selezionare questa opzione per tentare di ristabilire la comunicazione.

Nota: dopo aver selezionato l'opzione per gettare il Pod, è possibile prevenire futuri allarmi dal Pod eliminato seguendo le istruzioni fornite in "Silenziamiento di un allarme non risolto" a pagina 132.

Nota: se c'è un bolo non confermato quando si getta un Pod, il PDM non può sapere il quantitativo di bolo che è stato erogato. Pertanto, il PDM disabilita temporaneamente il suggeritore di bolo. Se si tocca il pulsante Bolo mentre il suggeritore di bolo è disabilitato, il PDM visualizza il messaggio "Suggeritore di bolo temporaneamente disabilitato". È possibile erogare un bolo calcolato manualmente quando il Suggeritore di bolo è disattivato.

Silenziamento di un allarme non risolto

Di norma è possibile silenziare gli allarmi del Pod o del PDM toccando un pulsante nella schermata dell'allarme. Se l'allarme continua, seguire le istruzioni in questa sezione.

Allarme del Pod

Per disattivare definitivamente un allarme del Pod:

1. Se il Pod è sul corpo, rimuoverlo.
2. Staccare l'adesivo partendo dalla parte inferiore del Pod in corrispondenza dell'estremità quadrata (vedere la figura).
3. Individua il foro per la disattivazione degli allarmi a destra del cerchio dorato. Si tratta di un punto di plastica morbida che è possibile individuare con un'unghia o l'estremità di una graffetta.
4. Premere con decisione la graffetta o un altro oggetto appuntito nel foro per la disattivazione manuale degli allarmi. Se sta suonando un allarme, l'allarme si interrompe. È necessario applicare una forza sufficiente per forare un sottile strato di plastica.



Allarme del PDM

Se un allarme del PDM non viene silenziato quando si tocca il pulsante nella schermata dell'allarme:

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione, quindi toccare Spegnimento.
2. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per riattivare il PDM.

Questa operazione consente di silenziare l'allarme del PDM. I registri cronologici e le impostazioni personali non verranno persi. Tuttavia, potrebbe essere necessario resettare l'ora e la data e sostituire il Pod. Una volta reimpostata l'ora, il suggeritore di bolo è temporaneamente disabilitato. Un messaggio del PDM comunica quando è possibile utilizzare di nuovo il suggeritore di bolo. È possibile erogare un bolo calcolato manualmente quando il suggeritore di bolo è disattivato.

CAPITOLO 11

Cura e manutenzione del PDM e del Pod

Il Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH® non presenta componenti riparabili dall'utente. Qualora si necessitasse di assistenza per l'utilizzo o la manutenzione del sistema Omnipod DASH®, contattare il servizio di Assistenza clienti.

Avvertenze:

conservare tutti i prodotti e i materiali di consumo del sistema Omnipod DASH®, compresi i Pod ancora confezionati, in un luogo fresco e asciutto. I prodotti o i materiali di consumo esposti a temperature estreme potrebbero non funzionare correttamente.

Attenzione: evitare di conservare i componenti e i materiali di consumo del sistema Omnipod DASH in un luogo accessibile a bambini, animali domestici o insetti o roditori. Un accesso accidentale può provocare danni a parti del sistema o comprometterne la sterilità.

Cura e manutenzione del Pod e dell'insulina

In questa sezione sono illustrate le procedure per la corretta cura e manutenzione del Pod. Per ordinare tutti i prodotti e i materiali di consumo del sistema Omnipod DASH®, rivolgersi al servizio di Assistenza clienti.

Conservazione del Pod e dell'insulina

Il freddo o il caldo eccessivi possono danneggiare i Pod, causando la perdita di accuratezza nell'erogazione dell'insulina o malfunzionamenti di altro tipo. Se i Pod sono stati esposti a temperature estreme, ispezionarli attentamente prima dell'uso.

È molto importante conservare l'insulina in un ambiente sicuro e ben controllato. Esaminare attentamente l'insulina prima di utilizzarla. Non usare mai insulina torbida o scolorita. L'insulina torbida o scolorita potrebbe essere vecchia, contaminata o inattiva. Controllare le modalità di utilizzo e la data di scadenza dell'insulina sul foglietto illustrativo del produttore dell'insulina.

Pod e ambiente esterno

Evitare le temperature estreme

La temperatura per un funzionamento sicuro del Pod, verificata mediante test, è compresa fra 5 °C e 40 °C (fra 41 °F e 104 °F). In circostanze normali, la temperatura corporea manterrà il Pod entro un intervallo compreso fra 23 °C e 37 °C (fra 73 °F e 98,6 °F).

Attenzione: non usare mai un asciugacapelli o aria calda per asciugare il Pod. Il calore eccessivo può danneggiare i componenti elettronici.

Avvertenza: non esporre il Pod alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo. Rimuovere il Pod prima di fare un bagno caldo, un idromassaggio o una sauna. Nelle suddette condizioni, è infatti possibile che il Pod venga esposto a temperature estreme che potrebbero alterare l'insulina contenuta al suo interno.

Se si rimuove il Pod per evitare di esporlo a temperature estreme, ricordarsi di controllare frequentemente i livelli glicemici. Chiedere indicazioni al referente medico se non si utilizza un Pod per periodi di tempo prolungati.

Il Pod e l'acqua

Il Pod è impermeabile fino a una profondità di 7,6 metri (25 piedi) e per un tempo massimo di 60 minuti (IP28). Se il Pod è stato indossato durante il nuoto o se è stato esposto all'acqua, risciacquarlo con acqua pulita e asciugarlo delicatamente con una salvietta.

Avvertenza: NON immergere il Pod in acqua a profondità superiori a 7,6 metri (25 piedi) o per più di 60 minuti.

Pulizia del Pod

I Pod sono impermeabili. Per pulire un Pod, lavarlo delicatamente con un panno umido e pulito. In alternativa, usare acqua e sapone neutro.

Attenzione: NON utilizzare spray, detergenti aggressivi o solventi sul Pod o nelle sue vicinanze. L'uso di creme solari spray, repellenti spray contenenti DEET, spray per l'igiene personale e altri aerosol, detergenti e sostanze chimiche aggressive sul Pod può irritare il sito di infusione o danneggiare il Pod, aumentando il rischio di rotture del suo involucro. Eventuali danni al Pod possono provocare l'ingresso di liquidi esterni che possono compromettere il suo corretto funzionamento, con conseguenti erogazione eccessiva o insufficiente di insulina e ipoglicemia o iperglicemia.

Attenzione: durante la pulizia, afferrare saldamente il Pod e fare attenzione che la cannula non si pieghi e il Pod non si stacchi dalla pelle.

Cura e manutenzione del PDM

In questa sezione sono illustrate le procedure per la corretta cura e manutenzione del PDM.

Avvertenza: se il PDM è danneggiato o non funziona come dovrebbe, contattare il servizio di Assistenza clienti. Ricordarsi di controllare frequentemente la glicemia. Rimuovere il Pod e rivolgersi al referente medico per le linee guida terapeutiche da seguire dopo la rimozione.

Conservazione del PDM

Quando il PDM non viene utilizzato attivamente, riporlo in un luogo vicino e facilmente raggiungibile, che sia fresco e asciutto.

Se il PDM è alla portata di bambini o di persone che potrebbero inavvertitamente premerne i pulsanti, non condividere il numero PIN con nessuno. Inoltre, conservare il PDM in un luogo sicuro.

Conservazione a lungo termine del PDM

Se non si utilizza il PDM per un periodo di tempo prolungato, lasciare che la batteria raggiunga circa il 50% di carica. Dopodiché, tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il PDM.

Attenzione: non tenere spento il PDM per più di sei mesi.

Il PDM e l'ambiente esterno

Evitare le temperature estreme

L'utilizzo del PDM a temperature estreme può danneggiare la batteria del dispositivo e interferire con il corretto funzionamento del sistema Omnipod DASH®. Evitare di usare il PDM a temperature inferiori a 5 °C (41 °F) o superiori a 40 °C (104 °F). Evitare di caricare il PDM a temperature inferiori a 5 °C (41 °F) o superiori a 40 °C (104 °F).

Attenzione: non conservare, caricare o lasciare il PDM in luoghi potenzialmente esposti a temperature estreme, ad esempio all'interno di un'automobile. Il freddo o il caldo eccessivi possono causare il malfunzionamento del PDM. Consultare le specifiche del PDM per conoscere gli intervalli della temperatura di funzionamento, di ricarica e di conservazione. Per le temperature di funzionamento specifiche, vedere le specifiche del PDM nelle presenti Istruzioni per l'uso.

Il PDM e l'acqua

Il PDM non è impermeabile. Non immergerlo né lasciarlo vicino all'acqua per evitare che vi cada dentro accidentalmente. Se si bagna, contattare il servizio di Assistenza clienti per ottenere un PDM sostitutivo.

Attenzione: non usare mai un asciugacapelli o aria calda per asciugare il PDM. Il calore eccessivo può danneggiare i componenti elettronici.

Attenzione: il PDM non è impermeabile. NON collocarlo vicino all'acqua e NON immergerlo mai in acqua.

Interferenze elettriche

Il PDM è progettato per tollerare interferenze radio e campi elettromagnetici normali, inclusi quelli generati nelle postazioni di controllo aeroportuali e dai telefoni cellulari. Come per qualsiasi tecnologia di comunicazione wireless, però, alcune condizioni operative possono causare l'interruzione delle comunicazioni. Ad esempio, elettrodomestici, quali i forni a microonde e le apparecchiature elettriche usate in ambienti di produzione, possono causare interferenze. Nella maggior parte dei casi, le interruzioni sono facilmente risolvibili spostandosi in un posto diverso.

Cavo USB

Quando si utilizza un cavo USB per scaricare i dati del PDM in un altro dispositivo o per caricare il PDM, disconnettere il cavo USB non appena terminata l'operazione.

Attenzione: collegare un cavo USB al PDM solo per caricare la batteria o per trasferire dati in un computer o un altro dispositivo. Non collegare mai un cavo USB al PDM per nessun'altra ragione.

Nota: è possibile utilizzare il PDM durante la ricarica o il trasferimento di dati.

Attenzione: quando si collega un cavo USB al PDM, usare esclusivamente un cavo avente una lunghezza massima di 1,2 metri (4 piedi).

Attenzione: per evitare il rischio di strangolamento, tenere i cavi lontano da bambini piccoli e animali domestici.

Pulizia del PDM

Mantenere la porta USB del PDM libera da residui e asciutta. Lo sporco, la polvere e i liquidi possono compromettere la funzionalità del PDM o danneggiarlo.

Attenzione: non utilizzare solventi per pulire il PDM. Non immergere il PDM in acqua.

Per pulire il PDM:

1. Premere brevemente il pulsante di accensione per mettere il PDM in modalità di sospensione.
2. Pulire la superficie esterna del PDM con un panno umido privo di lanugine.
3. Asciugare la superficie esterna con un panno asciutto privo di lanugine.

Attenzione: durante la pulizia, NON far penetrare residui o liquidi nella porta USB, nell'altoparlante, nella presa jack per auricolari, nel pulsante di segnale acustico/vibrazione o nel pulsante di accensione.

Ogni volta che il PDM viene pulito, esaminare l'intero PDM per verificare la presenza di crepe, parti scolorite o parti che non aderiscono più perfettamente. Verificare anche l'eventuale deterioramento delle prestazioni del dispositivo, ad esempio, messaggi illeggibili, malfunzionamento di pulsanti o ripetuti errori di comunicazione. Se si notano segni di deterioramento, interrompere l'uso del PDM. Chiamare il servizio di Assistenza clienti in caso di domande o per ottenere informazioni sulla sostituzione del PDM.

Se il PDM cade

Una scossa elettrica o un colpo violento possono danneggiare il PDM. Se il PDM viene lasciato cadere o è comunque sottoposto a colpi violenti, procedere nel modo seguente:

1. Controllare che l'esterno del PDM non presenti segni visibili di danni.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per verificare che il PDM si accenda e che venga visualizzato il blocco schermo.

Attenzione: non utilizzare il PDM in caso di danni visibili o di malfunzionamento. Non utilizzare il PDM se il display del PDM è rotto.

Cura e manutenzione della batteria del PDM

Il PDM utilizza una batteria ricaricabile agli ioni di litio. In caso di problemi con la batteria o il caricabatterie, contattare il servizio di Assistenza clienti per informazioni sulle sostituzioni.

Utilizzo sicuro della batteria del PDM

Avvertenze:

non esporre la batteria a fonti di calore elevato. Non forare o schiacciare la batteria, né esercitare pressione su di essa o sulla parte posteriore del PDM. Se si nota che la parte posteriore del PDM è curva o non rimane in posizione, contattare il servizio di Assistenza clienti. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare esplosioni, incendi, scosse elettriche, danni al PDM o alla batteria o perdite dalla batteria.

Non incenerire una batteria. Eliminare le vecchie batterie in conformità alle disposizioni locali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Non rimuovere la batteria dal PDM dopo il primo inserimento. Se si riscontrano problemi con le prestazioni della batteria, contattare il servizio di Assistenza clienti.

Per utilizzare la batteria ricaricabile in modo sicuro:

- Per prolungare la durata della batteria, conservarla e caricarla in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. Evitare di lasciare o caricare la batteria in luoghi in cui temperature estreme possono danneggiare la batteria in modo permanente, ad esempio all'interno di un'automobile.
- Il PDM potrebbe riscaldarsi dopo un uso prolungato o se esposto a temperature elevate. Se il PDM o la batteria diventano caldi al tatto, scollegare il cavo USB se collegato ed evitare il contatto prolungato con la pelle. Collocare il PDM su una superficie metallica e contattare il servizio di Assistenza clienti.
- Non collegare i poli della batteria con oggetti di metallo, come chiavi o gioielli. Ciò potrebbe mandare in cortocircuito la batteria e causare lesioni o ustioni.
- Non esporre la batteria o il caricabatterie a liquidi, incluse acqua, pioggia o neve, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti. Se la batteria o il caricabatterie vengono esposti a un liquido, contattare il servizio di Assistenza clienti.
- Non permettere a nessuno, inclusi bambini e animali domestici, di mettere la batteria in bocca. Ciò potrebbe causare danni o esplosioni.
- Non posizionare il PDM o la batteria sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. La batteria potrebbe esplodere se surriscaldata.
- Non far cadere la batteria. Se la batteria cade, contattare il servizio di Assistenza clienti.

- Per caricare il PDM, utilizzare esclusivamente una batteria, un caricatore e un cavo approvati da Insulet. L'utilizzo di batterie, caricabatterie o cavi non approvati può causare l'esplosione della batteria o danneggiare il PDM e potrebbe invalidare la garanzia.
- Se la batteria è danneggiata e del liquido fuoriesce dalla batteria, evitare che il liquido fuoriuscito entri in contatto diretto con la pelle o gli occhi. In tal caso, sciacquare immediatamente la pelle o gli occhi con acqua pulita e consultare un medico.
- Se la batteria è deformata o calda al tatto prima del primo inserimento nel PDM, non utilizzarla. L'uso di questa batteria potrebbe causare perdite, incendi o esplosioni. Collocare la batteria su una superficie metallica e lasciarla all'aperto, se possibile. Contattare il servizio di Assistenza clienti per ottenere una nuova batteria.
- Se la batteria si deforma, cambia colore o si surriscalda durante la ricarica, durante l'utilizzo o durante la conservazione, non maneggiarla e interromperne l'uso. L'uso continuato può causare perdite, incendi o esplosioni della batteria. Collocare il PDM su una superficie metallica e lasciarlo all'aperto, se possibile. Contattare il servizio di Assistenza clienti per ricevere ulteriori istruzioni.
- Ispezionare il caricabatterie del PDM prima di ogni utilizzo. Se l'adattatore per il caricabatterie cade in acqua o è rotto, non utilizzarlo.

Contattare il servizio di Assistenza clienti se si nota quanto segue:

- Durata eccessiva della ricarica
- Esaurimento eccessivamente rapido della batteria
- PDM troppo caldo al tatto
- Rigonfiamento del PDM e/o della batteria
- Odore di gas proveniente dal PDM e/o dalla batteria
- Surriscaldamento eccessivo del caricabatterie da parete

Messaggi del PDM relativi alla batteria che potrebbero essere visualizzati

Messaggio della batteria	Azioni da intraprendere
Caricabatterie incompatibile	Scollegare il caricabatterie. Collegare il caricabatterie e il cavo per PDM in dotazione.
Batteria troppo calda	Scollegare il caricabatterie se collegato. Lasciare raffreddare il PDM.
Batteria troppo fredda	Il PDM è troppo freddo per essere caricato. Lasciare che il PDM raggiunga la temperatura ambiente.
Errore di ricarica	Scollegare il caricabatterie. Lasciare che il PDM raggiunga la temperatura ambiente.

Carica della batteria del PDM

Attenzione: per caricare il PDM utilizzare ESCLUSIVAMENTE il caricabatterie micro-USB fornito da Insulet. L'utilizzo di caricabatterie non approvati può causare l'esplosione della batteria o danneggiare il PDM e potrebbe invalidare la garanzia.

Dopo una carica completa, la batteria dovrebbe avere una carica sufficiente per funzionare per almeno due giorni in condizioni di utilizzo normale.

Un messaggio del PDM avverte quando la carica della batteria si sta esaurendo. L'icona della batteria nella barra di stato tiene traccia della carica rimanente (vedere "La barra di stato" a pagina 9). Per caricare la batteria, vedere "Carica della batteria" a pagina 21.

È possibile caricare la batteria molte volte, ma tutte le batterie hanno una durata limitata. Se si nota un declino significativo della durata della carica della batteria del PDM, contattare il servizio di Assistenza clienti.

Nota: i tempi di ricarica possono variare in base alla temperatura circostante e al livello rimanente della batteria.

Consiglio: *sviluppare una routine per ricaricare la batteria del PDM alla stessa ora ogni giorno. Non aspettare il messaggio di batteria del PDM quasi scarica.*

Avvertenze:

se la carica della batteria diventa estremamente bassa, il PDM si spegne automaticamente per preservare i dati in memoria. A questo punto, non è possibile utilizzare il PDM finché il caricabatterie non è stato collegato.

Nota: se la batteria del PDM è quasi scarica e il PDM è disattivato, il Pod continua a erogare l'insulina basale in base al programma basale attivo o alla basale

temporanea. Se non si carica la batteria del PDM, l'erogazione di insulina continua fino alla scadenza del Pod.

Nota: i registri della cronologia rimangono in memoria per 60 giorni anche se la carica della batteria è estremamente bassa.



Inserimento della batteria del PDM durante la configurazione iniziale

Attenzione: utilizzare ESCLUSIVAMENTE la batteria ricaricabile fornita con il PDM. In caso di domande, contattare il servizio di Assistenza clienti.

Attenzione: non inserire la batteria del PDM mentre il PDM è collegato a una fonte di alimentazione esterna (ad esempio una presa di corrente tramite il cavo USB e il caricabatterie).

Per inserire la batteria del PDM:

1. Assicurarsi che il cavo USB sia scollegato dal PDM.
2. Se il PDM è attivato, disattivarlo premendo il pulsante di accensione, toccando Spegnimento e quindi toccando OK.
3. Se la linguetta bianca è ancora sul PDM, rimuovere il coperchio posteriore utilizzando la linguetta come segue:
 - a. Tenere il PDM con il coperchio posteriore rivolto verso l'alto.
 - b. Posizionare due o più dita di una mano tra la linguetta e il PDM.
 - c. Bloccare il pollice sul retro del PDM.
 - d. Tirare indietro la linguetta e sollevare il coperchio.
 - e. Procedere direttamente al passaggio .
4. Se la linguetta bianca non è più sul PDM, rimuovere il coperchio posteriore come segue:
 - a. Tenere il PDM lateralmente e individuare la fessura nella parte posteriore del PDM. La fessura si trova nell'angolo sotto il pulsante di accensione.
 - b. Tenendo saldamente il PDM, inserire un'unghia nella fessura e staccare la copertura anteriore dalla copertura posteriore.
 - c. Far scorrere il dito lungo l'apertura per separare completamente la parte anteriore dalla parte posteriore.
 - d. Sollevare il coperchio posteriore.

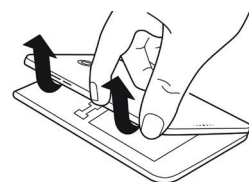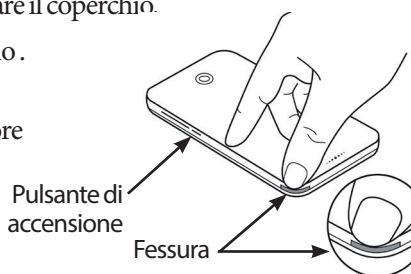


11 Cura e manutenzione del PDM e del Pod

5. Orientare la nuova batteria in modo che le tre linguette dorate sulla batteria si allineino con i tre pin dorati nel vano batterie. I segni "-" e "+" sull'etichetta della batteria devono essere rivolti verso l'utente.

Attenzione: non rimuovere l'etichetta dalla batteria.

Attenzione: fare attenzione a non danneggiare nessuna delle piccole parti metalliche all'interno del vano batterie.

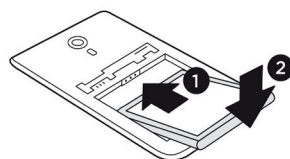

6. Far scorrere la batteria per inserirla correttamente. Spingere delicatamente la parte inferiore della batteria per inserirla.
7. Per sostituire il coperchio posteriore del PDM:
 - a. Allineare il bordo del coperchio lungo il lato con i pulsanti di segnale acustico/vibrazione e accensione. Premere prima su questo lato.
 - b. Premere verso il basso lungo il coperchio posteriore fino a quando il coperchio non si inserisce con uno scatto.

Il PDM è ora pronto per l'uso. Se si tratta di un nuovo PDM, vedere "Pulsante di accensione" a pagina 141 per istruzioni su come immettere le impostazioni.

Nota: NON tentare di sostituire la batteria dopo il primo inserimento. In caso di problemi con la batteria o la ricarica, contattare il servizio di Assistenza clienti.

CAPITOLO 12

Funzionamento del PDM e del Pod

Questo capitolo spiega le modalità di interazione tra il PDM e il Pod, funzioni come l'erogazione di insulina basale e di bolo e le modalità di funzionamento del Suggeritore di bolo.

Interazioni tra PDM e Pod

In questa sezione viene descritto in che modo il PDM controlla il Pod e quali azioni quest'ultimo è in grado di svolgere senza bisogno di ricevere input da parte del PDM.

Azioni del Pod controllate dal PDM

Il Pod deve ricevere un input dal PDM per poter svolgere le seguenti azioni:

- Attivarsi o disattivarsi
- Passare a un Programma basale diverso
- Avviare l'erogazione di un bolo o di una basale temporanea
- Annullare un bolo o una basale temporanea
- Sospendere o riprendere l'erogazione di insulina

Attivazione del Pod

I Pod rimangono inattivi fino a quando non vengono attivati da un PDM. Quando un PDM attiva un Pod, il PDM e il Pod vengono abbinati, il che significa che potranno comunicare esclusivamente tra loro, indipendentemente dal fatto che altri Pod o PDM possano trovarsi a distanza di comunicazione. Durante l'attivazione del Pod, il PDM invia a quest'ultimo i dettagli del programma basale attivo.

La distanza di comunicazione tra il Pod e il PDM è ridotta automaticamente durante l'attivazione. Durante questa fase, pertanto, il PDM e il Pod devono essere posizionati uno accanto all'altro e devono toccarsi (il Pod può essere lasciato indifferentemente dentro o fuori dal vassoio). Come ulteriore precauzione, è consigliabile non attivare mai il Pod mentre nello stesso luogo qualcun altro sta attivando un altro Pod.

Distanza di comunicazione tra il PDM e il Pod dopo l'attivazione.

Dopo l'attivazione, il PDM deve essere sempre in grado di comunicare con un Pod distante fino a 1,5 m (5 piedi). A seconda dell'area circostante, il PDM può essere in grado di comunicare con un Pod distante fino a 15 m (50 piedi). Per garantire di poter erogare un bolo, modificare la velocità basale o ricevere aggiornamenti di stato dal Pod, è importante accertarsi che il PDM si trovi a una distanza massima di 1,5 m (5 piedi) dal Pod.

Quando il PDM non viene utilizzato attivamente, va riposto in un luogo dove sia sempre a portata di mano, ad esempio nella tasca di una camicia, in un cassetto, in una borsa o in una ventiquattr'ore.

Controlli di stato: come il PDM controlla il funzionamento del Pod

Il PDM interroga periodicamente il Pod sullo stato ("controllo dello stato").

Il PDM esegue un controllo dello stato:

- Quando si attiva il PDM.
- Quando si accede alla scheda Info Pod.
- Periodicamente, indipendentemente dal fatto che il PDM sia attivo o in modalità di attesa. Questi "controlli di stato in modalità di attesa" si verificano ogni cinque minuti.

Nota: in seguito a un controllo di stato in modalità di attesa, il PDM si attiva ed emette un allarme acustico se il Pod ha un allarme di pericolo.

Se il Pod ha un segnale di notifica o una notifica, il PDM rimane in silenzio in modalità di attesa.

Durante un controllo dello stato, il PDM raccoglie dal Pod informazioni relative all'erogazione dei boli, alla quantità di insulina rimasta e a eventuali situazioni di allarme. Il PDM visualizza queste informazioni come segue:

- La schermata Home visualizza informazioni sul bolo più recente.
- L'icona del Pod nella barra di stato mostra la quantità di insulina rimasta nel serbatoio del Pod (vedere "La barra di stato" a pagina 9).
- Il Blocco schermo e un messaggio a schermo intero visualizzano le informazioni sugli allarmi del Pod.

Intervallo di regolazione degli allarmi del Pod

Se il Pod emette un allarme di pericolo, il Pod trasmette un segnale al PDM.

- Se il PDM è a distanza di comunicazione ed è attivo, entro 25 secondi dall'emissione dell'allarme iniziale del Pod, anche il PDM emette un allarme e visualizza il messaggio di allarme.
- Se il PDM è a distanza di comunicazione ma in modalità di attesa, il Pod non può attivarlo. Il PDM rileva l'allarme del Pod quando esegue un "controllo dello stato di attesa". In questo caso, potrebbe verificarsi un ritardo fino a

cinque minuti e 25 secondi tra il momento in cui il Pod emette l'allarme e il momento in cui il PDM emette l'allarme.

- Se il PDM non è a distanza di comunicazione dal Pod, il PDM non può ricevere comunicazioni dal Pod. Pertanto, quando si sente una notifica o un allarme del Pod, accertarsi che il PDM si trovi a distanza di comunicazione dal Pod e attivare il PDM. Entro 25 secondi, il PDM emette l'allarme e visualizza il messaggio di allarme.

Quando il PDM non può comunicare con il Pod

Quando il PDM tenta di comunicare con un Pod attivo a distanza di comunicazione, la comunicazione di solito si verifica rapidamente.

Il PDM non è in grado di comunicare con il Pod quando:

- Il PDM è o era temporaneamente troppo lontano dal Pod; ad esempio, quando si partecipa a una riunione e si lascia il PDM sulla scrivania.
- La batteria del PDM è scarica.
- Ci sono troppe interferenze esterne (vedere "Avviso riguardante le interferenze relative al sistema Omnipod DASH[®]" a pagina 199).

Per informazioni su come gestire i problemi di comunicazione fra PDM e Pod, vedere "Errori di comunicazione" a pagina 128.

Disattivazione del Pod

La disattivazione annulla l'abbinamento tra un Pod e il relativo PDM.

Disattivazione:

- Interrompe l'erogazione di insulina da parte del Pod in uso.
- Silenzia definitivamente qualsiasi allarme del Pod.
- Libera il PDM in modo che possa attivare un nuovo Pod.

Nota: la disattivazione non avviene automaticamente alla scadenza del Pod o una volta esaurita l'insulina. In queste situazioni è infatti necessario utilizzare il PDM per disattivare il Pod in uso prima di poter attivare un nuovo Pod.

Gettare un Pod

Quando il PDM non può risolvere un errore di comunicazione, il PDM non riesce a disattivare il Pod. In questa situazione, il PDM chiede se si desidera "gettare" il Pod. L'azione di "gettare" il Pod annulla l'abbinamento tra il PDM e il Pod, ma non interrompe l'erogazione di insulina del Pod. Pertanto, se si dice al PDM di "gettare" un Pod, sarà necessario rimuovere e quindi smaltire il Pod in uso prima di procedere all'attivazione di un nuovo Pod. Per impedire che, una volta "gettato", il Pod emetta ancora allarmi, seguire le istruzioni per silenziare un allarme del Pod riportate a pagina 132. Altrimenti, se un Pod gettato inizia a emettere un allarme, il segnale di allarme si interrompe dopo 15 ore.

Azioni che il Pod può eseguire senza input dal PDM

Una volta attivato, il Pod può svolgere le seguenti operazioni senza bisogno di ricevere input da parte del PDM:

- Erogare insulina in base al Programma basale attivo. Il Pod è dotato di un orologio interno che gli consente di tenere traccia dell'intervallo di regolazione dei segmenti del Programma basale.
- Arrestare l'erogazione di una basale temporanea all'orario programmato e riprendere l'erogazione del Programma basale attivo.
- Una volta avviato un bolo o un bolo prolungato, completare l'erogazione del bolo.
- Tenere traccia della quantità di insulina residua all'interno del Pod.
- Tenere traccia del tempo che rimane sino alla scadenza del Pod. Interrompere l'erogazione di insulina quando il Pod scade.
- Eseguire controlli automatici per verificare che l'erogazione di insulina avvenga come previsto. In caso contrario, emettere un segnale di allarme.
- Inviare messaggi di allarme e di notifica al PDM, se è nel raggio d'azione.
- Arrestare l'erogazione di insulina nel caso in cui la funzione di Spegnimento automatico sia abilitata e il PDM non sia stato utilizzato per il periodo di tempo specificato.

Spegnimento automatico

Lo Spegnimento automatico è una funzione opzionale particolarmente utile per gli utenti che non avvertono l'ipoglicemia. Quando si abilita la funzione di Spegnimento automatico, si definisce una durata per il conto alla rovescia dello Spegnimento automatico. Il Pod e il PDM emettono un allarme se non si utilizza il PDM entro tale periodo di tempo. Per modificare l'impostazione Spegnimento automatico, vedere "Spegnimento automatico del Pod" a pagina 105.

Ripristino del conto alla rovescia dello Spegnimento automatico

Il conto alla rovescia dello Spegnimento automatico viene fatto ripartire da qualsiasi azione che comporti una comunicazione tra il PDM e il Pod. Pertanto, se lo Spegnimento automatico è abilitato, assicurarsi che il PDM sia nel raggio d'azione del Pod, quindi attivare il PDM. Questo resetta il timer e impedisce l'emissione dell'allarme.

Allarmi di Spegnimento automatico

Se il PDM non viene utilizzato per il periodo di tempo impostato per il timer del conto alla rovescia dello spegnimento automatico, il Pod e il PDM emetteranno un segnale di notifica ogni minuto per 15 minuti. Accompagnato da un messaggio sul display del PDM.

Se il PDM non viene utilizzato entro 15 minuti dall'emissione del segnale di notifica di spegnimento automatico del Pod, il Pod interromperà l'erogazione di insulina e sia il PDM che il Pod emetteranno un allarme di pericolo. Toccare OK per silenziare l'allarme e disattivare il Pod.

Erogazione di insulina basale

Anche fuori dai pasti, il corpo necessita di un costante, per quanto esiguo, rifornimento di insulina per il normale svolgimento delle attività quotidiane, noto con il nome di insulina "basale". Nelle persone non affette da diabete, il pancreas eroga in continuazione questa quantità basale di insulina. Per chi utilizza il sistema Omnipod DASH®, il Pod simula il pancreas di una persona senza diabete erogando insulina basale alla velocità programmata dall'utente nel PDM.

Il 50% circa della dose totale giornaliera di insulina di una persona è di solito costituito dall'erogazione di insulina basale; il rimanente 50% è tipicamente costituito dalle dosi di bolo.


In questa sezione vengono descritte le due modalità attraverso cui il sistema Omnipod DASH® eroga insulina basale in maniera continuativa, ossia i programmi basali e le basali temporanee.

Programmi basali

Una basale indica il numero di unità di insulina erogate ogni ora.

Un segmento di basale definisce l'ora del giorno durante cui viene erogata una basale specifica.

Un programma basale è l'insieme dei segmenti di basale che coprono un periodo di tempo che va da mezzanotte a mezzanotte. In altre parole, un Programma basale definisce la velocità dell'erogazione di insulina nell'arco delle 24 ore.

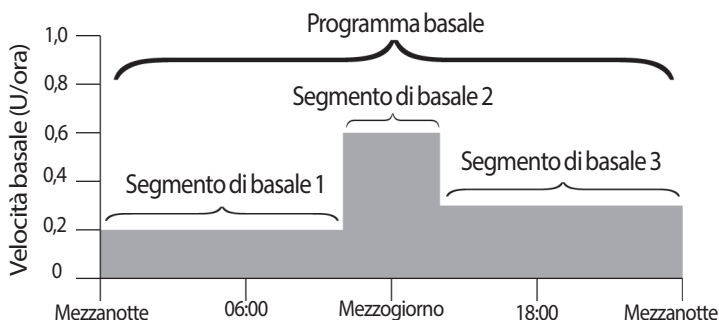


12 Funzionamento del PDM e del Pod

Il fabbisogno di insulina varia nel corso della giornata. Per questa ragione, molte persone impostano le proprie velocità basali in modo che venga erogata una quantità di insulina leggermente più alta o più bassa in determinati momenti della giornata. Ad esempio, si potrebbe avere bisogno di erogare insulina a una velocità inferiore durante la notte e a una velocità superiore durante il giorno. La figura seguente mostra un programma basale con tre segmenti di basale.

Per creare il programma basale illustrato nella figura precedente, è necessario programmare nel PDM i seguenti segmenti di basale:

Segmento	Velocità basale	
1: Mezzanotte–10:00	0,20 U/ora	Tra mezzanotte e le 10.00, il Pod eroga 0,20 unità di insulina ogni ora.
2: 10:00–14:00	0,60 U/ora	Tra le 10:00 e le 14:00, il Pod eroga 0,60 unità di insulina ogni ora.
3: 14:00–mezzanotte	0,30 U/ora	Tra le 14:00 e mezzanotte, il Pod eroga 0,30 unità di insulina ogni ora.

La routine dei giorni infrasettimanali può essere diversa da quella del fine settimana e ciò comporta variazioni anche nel fabbisogno insulinico. Per gestire queste variazioni prevedibili nella propria routine, è possibile creare fino a 12 diversi Programmi basali (vedere "Programmi basali" a pagina 79). Questa figura mostra due possibili Programmi basali, uno per i giorni infrasettimanali e l'altro per i fine settimana.

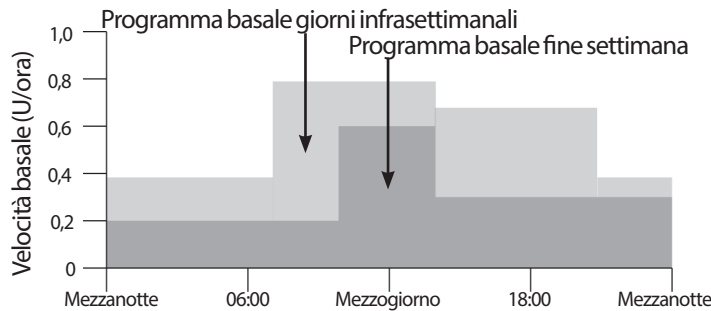

Velocità basali temporanee

La possibilità di impostare le velocità basali temporanee, chiamate anche "basali temporanee", è una funzione importante del sistema Omnipod DASH®.

Una basale temporanea consente di ignorare il programma basale attualmente in esecuzione impostando una velocità basale diversa per un determinato periodo di tempo.

Se, ad esempio, ci si accinge a praticare dello sci di fondo per alcune ore, sarà possibile impostare una basale temporanea per abbassare la velocità basale

durante e dopo la pratica sportiva (vedere "Utilizzo di basali temporanee" a pagina 71).


Le basali temporanee possono avere una durata compresa tra 30 minuti e 12 ore. Al termine del periodo di tempo specificato, il Pod ripristinerà automaticamente il Programma basale attivo.

Impostazioni delle basali temporanee: unità orarie (U/ora) o percentuale (%)

Le Basali temporanee possono essere impostate in termini di percentuale (%) oppure in termini di unità orarie (U/ora).

Impostando le Basali temporanee in termini di unità orarie (U/ora), il Pod erogherà l'insulina a una velocità fissa per tutta la durata della basale temporanea. In altre parole, i dettagli del Programma basale attivo verranno ignorati durante l'erogazione di queste basali temporanee.

Impostando le basali temporanee in termini di percentuale (%), l'erogazione di insulina seguirà lo schema definito nel Programma basale attivo, incrementando o riducendo l'erogazione di insulina della percentuale specificata. Ad esempio, la figura che segue mostra come un incremento del 50% aumenti l'erogazione di insulina del Programma basale del 50%, mentre una riduzione del 50% riduca l'erogazione di insulina del Programma basale del 50%.

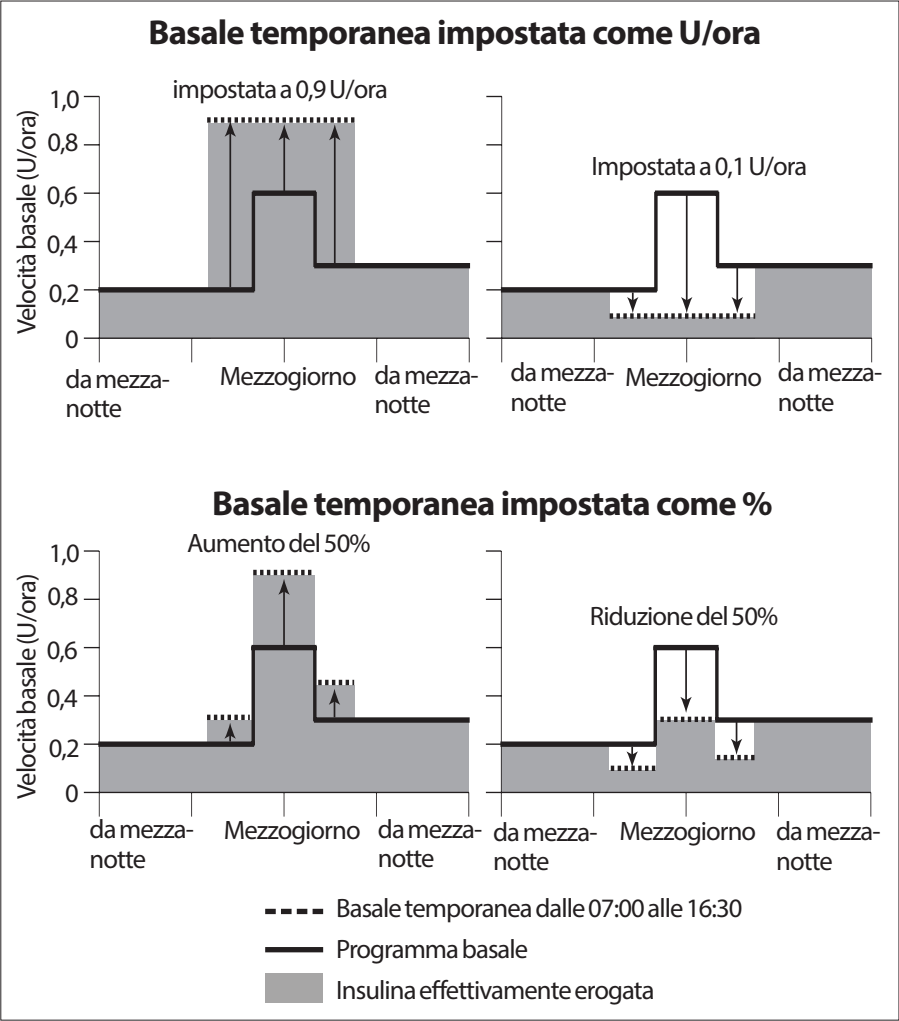

Di seguito sono riportati i calcoli relativi alla basale temporanea di incremento del 50% illustrata nella figura precedente:

Limiti del segmento*	Velocità basale del programma basale (U/ora)	Incremento del 50% (U/ora)	Velocità basale temporanea ottenuta: (U/ora)
Mezzanotte-7:00	0,20		
7:00-10:00	0,20	$0,20 \times 50\% = 0,10$	$0,20 + 0,10 = 0,30$
10:00-14:00	0,60	$0,60 \times 50\% = 0,30$	$0,60 + 0,30 = 0,90$
14:00-16:30	0,30	$0,30 \times 50\% = 0,15$	$0,30 + 0,15 = 0,45$
16:30-mezzanotte	0,30		

* I segmenti sono definiti dal Programma basale attualmente pianificato.

Limiti delle basali temporanee

Basali temporanee non consentite: non è possibile impostare una basale temporanea dello 0%, in quanto non comporterebbe alcuna modifica del programma basale attivo.

Basale temporanea massima:

- Quando si utilizza la percentuale (%), è possibile impostare la basale temporanea fino a +95% della velocità del programma basale attivo con la seguente eccezione: non è possibile impostare una basale temporanea che superi la basale massima durante qualsiasi segmento temporale coperto dalla durata della basale temporanea.
- Quando si utilizzano le unità orarie (U/ora), non è possibile impostare una basale temporanea superiore alla basale massima.

Basali temporanee che disattivano l'erogazione di insulina basale: quando si utilizza la percentuale (%), se si imposta una riduzione che determina un flusso inferiore a 0,05 U/ora per un segmento, il PDM informa che si riceverà 0 U/ora di insulina per uno o più segmenti.

Se la basale temporanea è sufficientemente lunga, alla fine si riceverà un po' di insulina. Ciò è dovuto al fatto che il Pod eroga insulina in impulsi di 0,05 U. Se, ad esempio, la portata di un segmento di basale è di 0,10 U/ora e si crea una basale temporanea con una riduzione del 60% per:

- Un'ora, la portata risultante di 0,04 U/ora comporta la mancata erogazione di insulina per la durata di un'ora della basale temporanea.
- Due ore, la portata risultante di 0,04 U/ora comporta l'erogazione di 0 U di insulina nella prima ora e di 0,05 U di insulina nella seconda ora.

Consiglio: *l'utilizzo di una basale temporanea per disattivare l'erogazione di insulina basale risulta utile se si desidera riprendere automaticamente il programma basale al termine dell'erogazione della basale temporanea (vedere "Metodi per interrompere temporaneamente l'erogazione di insulina" a pagina 152).*



Basali temporanee preimpostate

Alcune variazioni temporanee ricorrenti che possono intervenire nella propria routine giornaliera sono facili da prevedere e da pianificare. Pertanto, la persona può sapere, per esperienza, in che modo influenzano il proprio fabbisogno di insulina. Ad esempio, si potrebbe partecipare a un torneo estivo di calcio o a una lezione di ginnastica. Per quanto riguarda le donne, i cambiamenti ormonali mensili che influenzano la glicemia sono un esempio di variazione prevedibile.

Per gestire le variazioni prevedibili a breve termine, è possibile definire delle basali temporanee preimpostate (vedere "Basali temporanee preimpostate" a pagina 83). Una volta definita, una basale temporanea preimpostata potrà essere attivata rapidamente in un secondo tempo (vedere "Attivare una basale temporanea preimpostata" a pagina 73).

Metodi per interrompere temporaneamente l'erogazione di insulina

Si possono verificare situazioni in cui si desidera interrompere completamente l'erogazione di insulina, di ogni tipo o solo dell'insulina basale, per un dato periodo di tempo. Se non si desidera disattivare il Pod in uso, è possibile richiedere un'interruzione temporanea dell'erogazione di insulina come segue:

- Sospendendo l'erogazione di insulina:
Icona del menu () > Sospendi insulina.
- Impostando una basale temporanea per interrompere l'erogazione di insulina:
Icona del menu () > Imposta basale temporanea. Quindi selezionare una riduzione del 100% o 0 U/ora.

Nella tabella che segue vengono messe a confronto le opzioni per l'interruzione temporanea dell'erogazione di insulina.


	Sospendi insulina	Basale temporanea di 0 U/ora
Effetto sull'erogazione di insulina basale e di bolo	Nessuna erogazione basale Nessuna erogazione di bolo	Nessuna erogazione basale Boli consentiti
Durata minima dell'interruzione di insulina	30 min	30 min
Durata massima dell'interruzione di insulina	2 ore	12 ore
L'erogazione di insulina viene ripresa automaticamente	No	Sì
Schermata visualizzata alla fine del periodo specificato	"Riprendere l'insulina. Il periodo di sospensione dell'insulina è terminato".	Scheda centrale della schermata Home intitolata "Basale" (non "Basale temporanea")
Bip mentre l'erogazione di insulina è interrotta	Ogni 15 minuti	All'inizio e ogni 60 minuti

	Sospendi insulina	Basale temporanea di 0 U/ora
Bip alla fine del periodo specificato	Ogni 15 minuti fino a quando si tocca Riprendi	Un bip e poi l'erogazione di insulina viene ripresa automaticamente
Utilizzare necessariamente per	Modificare un Programma di basale attivo Cambiare la data e l'ora Verificare gli allarmi e la vibrazione	L'utilizzo di questo metodo non è mai indispensabile
Modalità di annullamento	Icona del menu (≡) > Riprendi insulina	Home: scheda Basale temporanea > ANNULLA

Bolo immediato e bolo prolungato

Un bolo è una dose extra di insulina che viene erogata in aggiunta alla basale che viene somministrata in maniera continuativa. Utilizzare i boli per abbassare i livelli glicemici quando sono troppo elevati e per coprire i carboidrati assunti durante un pasto.

Si ha la possibilità di erogare l'intero bolo in una sola volta. In questo caso si parla di "bolo immediato" o, semplicemente, "bolo". In alternativa, è possibile diluire l'erogazione dell'intero bolo pasto o di una porzione di esso in modo che sia erogato in maniera costante nel corso di un periodo di tempo prolungato. In questo caso si parla di "bolo prolungato".

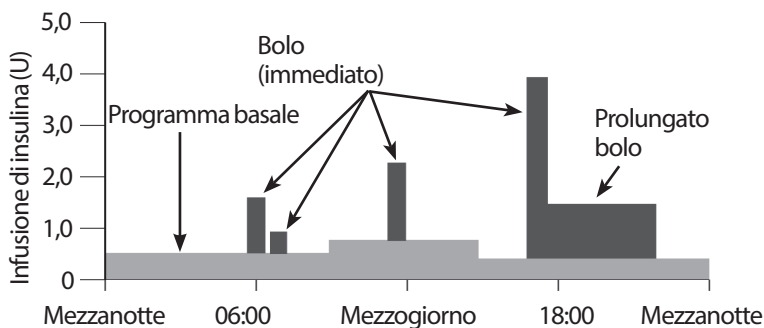

È consigliabile prolungare un bolo se si mangiano alimenti ricchi di lipidi o di proteine. Questi tipi di alimenti impiegano più tempo per essere digeriti e quindi rallentano l'aumento della glicemia post-prandiale.

Informazioni sui boli calcolati manualmente

Un bolo calcolato manualmente è un bolo calcolato dall'utente senza l'aiuto del suggeritore di bolo. È possibile utilizzare i boli calcolati manualmente quando il suggeritore di bolo è disattivato o disabilitato (vedere "Bolo massimo" a pagina 155). Consultare il referente medico per istruzioni su come calcolare un bolo.

È possibile prolungare solo una porzione o tutto il bolo calcolato manualmente.

Se si tende a erogare spesso una determinata quantità di bolo, è possibile creare dei boli preimpostati (vedere "Boli preimpostati" a pagina 85), in modo da poterli attivare prontamente al bisogno.

Nota: i boli preimpostati possono essere utilizzati solo se il suggeritore di bolo è disattivato.

Il Suggeritore di bolo

Il Suggeritore di bolo del PDM è in grado di svolgere gran parte del lavoro di calcolo di un bolo al posto dell'utente. Il Suggeritore di bolo utilizza le impostazioni personali dell'utente e tiene conto anche della quantità di insulina rimasta nel corpo dai boli precedenti (chiamata insulina attiva o IOB).

Boli del Suggeritore di bolo

Per il Suggeritore di bolo, un bolo è la somma di due componenti:

- **Bolo di correzione:** utilizzato per abbassare la glicemia quando diventa troppo elevata.
- **Bolo pasto:** utilizzato per coprire i carboidrati assunti durante un pasto.

Boli prolungati

Quando si utilizza il suggeritore di bolo, è possibile prolungare solo una porzione o tutto un bolo pasto, mentre non è possibile prolungare un bolo di correzione. Un bolo di correzione viene sempre erogato per primo. Nell'esempio che segue, vengono prolungate tre unità di insulina:

Bolo totale = 5 unità (1 unità di bolo di correzione + 4 unità di bolo pasto)

→ Erogazione immediata	= 2 unità (1 unità di bolo di correzione + 1 unità di bolo pasto)
→ Erogazione prolungata	= 3 unità (3 unità di bolo pasto)

Bolo massimo

Il PDM non consente di immettere un bolo al di sopra dell'impostazione Bolo massimo. Se il Suggeritore di bolo calcola una quantità di bolo superiore al Bolo massimo, sarà possibile erogare solo fino alla quantità massima di bolo. Per regolare il valore, toccare il campo Bolo totale e immettere un nuovo bolo.

Controllo della quantità di bolo

Il Suggeritore di bolo è uno strumento molto utile, ma è l'utente che esercita il controllo finale in merito alla quantità del bolo da erogare. Dopo che il Suggeritore di bolo ha consigliato una determinata quantità di bolo, l'utente può confermare il bolo consigliato oppure scegliere di aumentarlo o ridurlo.

Quando il Suggeritore di bolo non funziona

Il Suggeritore di bolo non funziona quando è disabilitato o disattivato.

Il Suggeritore di bolo viene attivato o disattivato dall'utente, mentre viene abilitato o disabilitato dal PDM.

Se il Suggeritore di bolo è disattivato, il PDM non è in grado di tenere traccia dell'insulina attiva (IOB) né di suggerire un bolo.

Se si attiva il Suggeritore di bolo, il PDM potrebbe disabilitarlo in determinate situazioni. Una volta disabilitato, il suggeritore di bolo non è temporaneamente in grado di calcolare un bolo consigliato.

Condizioni che disabilitano il Suggeritore di bolo:

Il Suggeritore di bolo è disabilitato:

Mentre il Suggeritore di bolo è disabilitato:

12 Funzionamento del PDM e del Pod

Il valore della glicemia è inferiore all'impostazione Glicemia minima per suggeritore.	Per dieci minuti. o Finché un nuovo valore della glicemia non è superiore all'impostazione Glicemia minima per suggeritore.	L'insulina attiva (IOB) è visualizzata nella schermata Home.
Il valore della glicemia è "AL".	Per dieci minuti. o Finché un nuovo valore della glicemia non è inferiore a "AL".	L'insulina attiva (IOB) è visualizzata nella schermata Home.
È presente un bolo non confermato quando si getta un Pod.	Per un periodo completo di durata dell'azione dell'insulina.	L'insulina attiva (IOB) non è visualizzata nella schermata Home.
Si verifica un resettaggio dell'orologio interno.	Per 8,5 ore.	L'insulina attiva (IOB) non è visualizzata nella schermata Home.

Fattori utilizzati nei calcoli del Suggeritore di bolo

Il Suggeritore di bolo tiene conto di quanto segue quando calcola il bolo:

- Livello glicemico corrente, Target glicemico, soglia di Correzione verso l'alto e Fattore di correzione
- Carboidrati che si intende assumere e rapporto insulina/carboidrati (IC)
- Durata dell'Azione dell'insulina e insulina attiva (IOB)
- Glicemia minima consentita per l'uso nel Suggeritore di bolo
- Correzione inversa, se abilitata

Target glicemico

Attraverso il calcolo di un bolo di correzione, il suggeritore di bolo cerca di abbassare la glicemia riportandola al valore impostato per il target glicemico.

Soglia di correzione verso l'alto

Il Suggeritore di bolo calcola un bolo di Correzione solo se il valore della glicemia è superiore all'impostazione "Correggere verso l'alto". Questa funzione impedisce che vengano apportate correzioni a valori della glicemia che superano di poco il target glicemico.

Insulina attiva

L'Insulina attiva (IOB) indica la quantità di insulina ancora attiva che rimane nel corpo da boli precedenti. L'Insulina attiva (IOB) erogata da precedenti boli di correzione è chiamata correzione Insulina attiva (IOB), mentre l'insulina attiva (IOB) erogata da precedenti boli pasto è chiamata insulina attiva (IOB) al pasto.

Durante il calcolo di un nuovo bolo, il Suggeritore di bolo potrebbe ridurre il bolo consigliato in base all'insulina attiva (IOB).

L'impostazione Durata dell'azione dell'insulina rappresenta la quantità di tempo in cui l'insulina rimane "attiva" nel corpo.

Nota: il Suggeritore di bolo sottrae l'insulina attiva (IOB) da un bolo consigliato solo nel caso in cui sia noto il valore della glicemia corrente. Misurare sempre la glicemia prima dell'erogazione di un bolo.

Durata dell'azione dell'insulina

Il Suggeritore di bolo utilizza l'impostazione Durata dell'azione dell'insulina per calcolare l'Insulina attiva da boli precedenti.

Glicemia minima per Suggeritore

Se il valore della glicemia è inferiore alla glicemia minima consentita per l'uso nel Suggeritore di bolo, il Suggeritore di bolo non calcolerà alcun bolo.


Correzione inversa

Se l'impostazione Correzione inversa è attivata e il livello glicemico è inferiore al target glicemico, il Suggeritore di bolo utilizza il bolo di correzione negativo calcolato per ridurre il bolo pasto. Ciò consente di utilizzare parte del pasto per innalzare il livello glicemico basso fin verso il Target glicemico.

Se l'impostazione Correzione inversa è disattivata, il suggeritore di Bolo calcolerà il bolo pasto completo anche nel caso in cui il livello glicemico fosse inferiore al Target glicemico.


Limiti dei suggerimenti del Suggeritore di bolo

Nella figura che segue sono riportati i limiti che contraddistinguono i diversi tipi di calcoli svolti dal Suggeritore di bolo. Ad esempio, il Suggeritore di bolo calcolerà un bolo pasto, ma non un bolo di correzione, se il valore della glicemia è compreso tra le impostazioni Target glicemico e Correggere verso l'alto. Se la glicemia è superiore all'intervallo del glucometro o a 600 mg/dL, il valore verrà visualizzato come "AL" e il suggeritore di bolo non sarà in grado di calcolare alcun bolo.

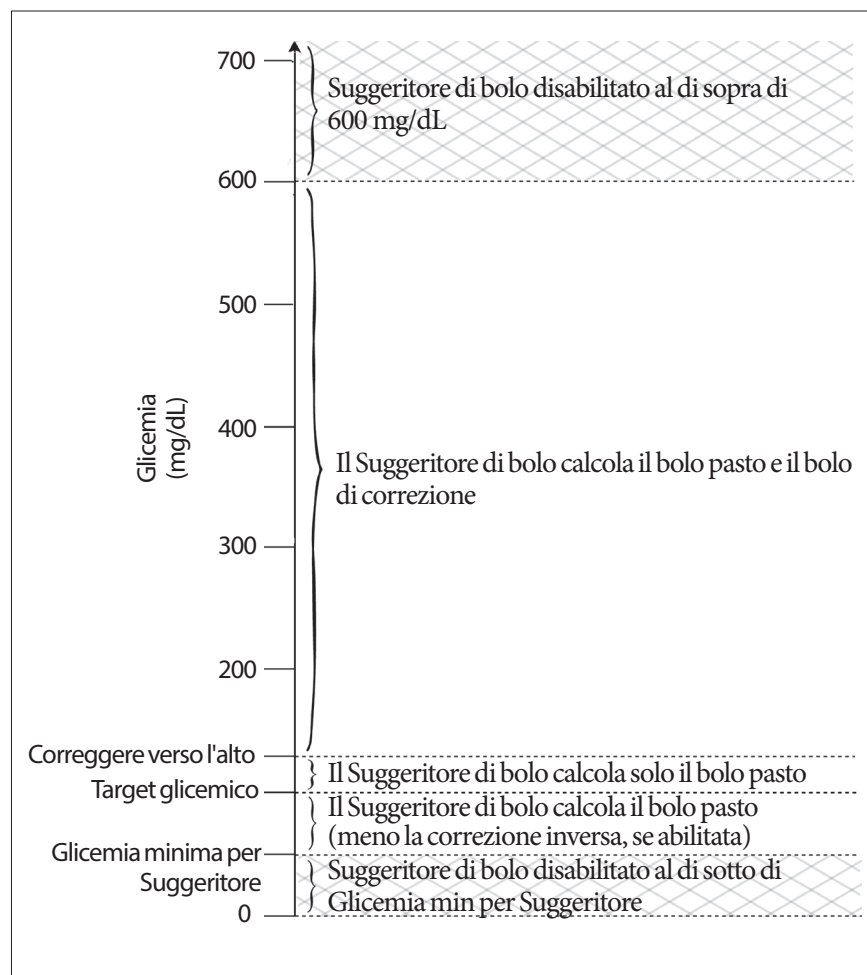

Insulina attiva (IOB)

Dopo l'erogazione di un bolo, la quantità di insulina attiva nel corpo diminuisce nel corso di alcune ore. Il suggeritore di bolo approssima questa diminuzione di insulina calcolando il valore "Insulina attiva (IOB)". Il valore IOB calcolato diminuisce nel tempo e raggiunge lo zero all'ora impostata dal valore "Durata dell'azione di insulina". Ad esempio, se la Durata dell'azione dell'insulina è pari a 4 ore e un bolo di 8 unità viene somministrato alle 18.00, la quantità di insulina attiva (IOB) diminuisce costantemente nel tempo, come mostrato in questo grafico.

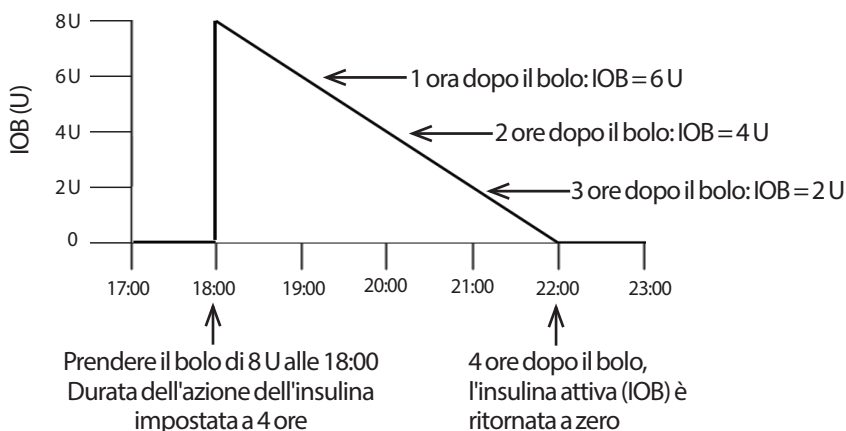


Tipi di insulina attiva (IOB): insulina attiva (IOB) al pasto, correzione insulina attiva (IOB) o entrambe

Un bolo e la sua insulina attiva (IOB) possono essere interamente "pasto", interamente "di correzione" o entrambi. I grafici riportati di seguito mostrano il modo in cui l'insulina attiva (IOB) da un bolo totale di 4 U diminuisce nel tempo con una durata dell'azione dell'insulina pari a 4 ore.


Interamente "pasto"

Un bolo pasto viene calcolato durante un pasto e la glicemia è inferiore al valore Correggere verso l'alto. L'insulina attiva (IOB) da questo bolo è interamente "al pasto".

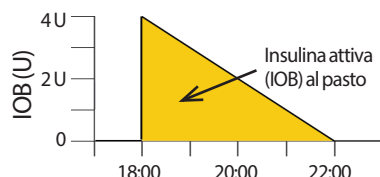

Interamente "di correzione"

Un bolo di correzione viene calcolato fuori dai pasti e la glicemia è superiore al valore Correggere verso l'alto. L'insulina attiva (IOB) da questo bolo è interamente "di correzione".

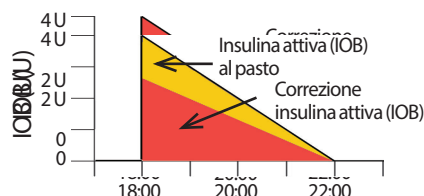

Sia "pasto" che "di correzione"

Quando la glicemia è superiore al valore Correggere verso l'alto durante un pasto, il bolo totale include sia un componente di bolo pasto che un componente di bolo di correzione. Analogamente, l'insulina attiva (IOB) da questo bolo ha sia un componente di insulina attiva (IOB) al pasto che un componente di correzione insulina attiva (IOB).

Calcoli dell'insulina attiva (IOB)

$$\frac{\text{Durata dell'azione dell'insulina} - \text{tempo trascorso dal bolo precedente}}{\text{Durata dell'azione dell'insulina}} \times \text{bolo precedente}$$

L'insulina attiva (IOB) erogata da un bolo di correzione precedente è chiamata "correzione insulina attiva (IOB)".

L'insulina attiva (IOB) erogata da un bolo pasto precedente è chiamata "insulina attiva (IOB) al pasto".

Esempio di correzione insulina attiva (IOB)

Durata dell'azione dell'insulina: 3 ore

Tempo trascorso dal precedente bolo di correzione: 1 ora

Bolo di correzione precedente: 3 unità

$$\frac{3 \text{ ore} - 1 \text{ ora}}{3 \text{ ore}} \times 3 \text{ U} = 2 \text{ U di correzione insulina attiva (IOB)}$$

In altre parole, un'ora dopo il bolo di correzione precedente il corpo avrà utilizzato solo 1 unità del bolo di correzione, mentre le 2 unità di insulina restanti saranno ancora in azione allo scopo di correggere il livello glicemico. La possibilità di tenere conto della correzione insulina attiva (IOB) nei calcoli dei boli impedisce che vengano erogate quantità eccessive di insulina durante la correzione di livelli glicemici elevati o durante un pasto.

Esempio di insulina attiva (IOB) al pasto

Durata dell'azione dell'insulina: 3 ore

Tempo trascorso dal precedente bolo pasto: 2 ore

Bolo pasto precedente: 4,5 unità

$$\frac{3 \text{ ore} - 2 \text{ ore}}{3 \text{ ore}} \times 4,5 \text{ unità} = 1,5 \text{ unità di insulina attiva (IOB) al pasto}$$

In altre parole, un'ora dopo il precedente bolo pasto il corpo avrà utilizzato 3 unità del bolo pasto, mentre 1,5 unità restanti di insulina saranno ancora in azione per coprire il pasto.

L'insulina attiva (IOB) al pasto viene usata al solo scopo di ridurre un bolo di correzione, mai per ridurre un nuovo bolo pasto. Il bolo di correzione viene ridotto solo fino a quando non sarà pari a 0 unità.

Equazioni del Suggeritore di bolo

Il Suggeritore di bolo calcola innanzitutto un bolo di correzione e un bolo pasto preliminare. In seguito, questi valori preliminari verranno regolati in base all'eventuale insulina attiva (IOB). La somma del bolo di correzione e del bolo pasto così ottenuti andrà a formare il bolo consigliato finale.

$$\text{Bolo di correzione preliminare} = \frac{\text{Glicemia corrente} - \text{Target glicemico}}{\text{Fattore di correzione}}$$

Esempio: Glicemia corrente: 200 mg/dL, Target glicemico: 100 mg/dL
Fattore di correzione (FC): 50

$$\frac{200 \text{ mg/dL} - 100 \text{ mg/dL}}{50} = 2 \text{ U di bolo di correzione preliminare}$$

$$\text{Bolo pasto preliminare} = \frac{\text{Assunzione di carboidrati}}{\text{Rapporto insulina/carboidrati (IC)}}$$

Esempio: Assunzione di carboidrati: 45 grammi di carboidrati, Rapporto insulina/carboidrati (IC): 15

$$\frac{45}{15} = 3 \text{ U di bolo pasto preliminare}$$

Bolo di correzione finale = (bolo di correzione preliminare - insulina attiva (IOB) al pasto) - correzione insulina attiva (IOB)

L'insulina attiva (IOB) al pasto viene sottratta per prima. Se il bolo di correzione preliminare è ancora superiore a zero, la correzione insulina attiva (IOB) viene sottratta

Nota: Un bolo di correzione non viene mai ridotto al di sotto di 0 U.

Bolo pasto finale = bolo pasto preliminare - correzione insulina attiva (IOB) rimanente

L'insulina attiva (IOB) al pasto non viene mai sottratta da un bolo pasto. Solo una correzione insulina attiva (IOB) rimanente viene sottratta da un bolo pasto (vedere "Correzione insulina attiva (IOB) residua" a pagina 163).

Nota: un bolo pasto non viene mai ridotto al di sotto di 0 U.

Bolo calcolato = bolo di correzione finale + bolo pasto finale

Calcolo del bolo di correzione inversa: se la funzione di correzione inversa è abilitata e il valore corrente della glicemia è inferiore al target glicemico, ma superiore alla glicemia minima consentita per l'uso nel suggeritore di bolo, il suggeritore di bolo sottrarrà una quantità correttiva dal bolo pasto preliminare.

Bolo pasto con correzione inversa = Correzione inversa + Bolo pasto preliminare

Esempio: glicemia corrente: 75 mg/dL, Target glicemico: 100 mg/dL
Fattore di correzione: 50, Bolo pasto preliminare: 1,5 unità

$$\frac{75 \text{ mg/dL} - 100 \text{ mg/dL}}{50} = -0,5 \text{ U di correzione inversa}$$

-0,5 unità (Correzione inversa) + 1,5 unità (bolo pasto preliminare) =
1,0 unità di bolo pasto

La Correzione inversa viene applicata solo al bolo pasto. In questo esempio, il bolo pasto viene ridotto di 0,5 unità.

Regole del Suggeritore di bolo

Il Suggeritore di bolo applica le seguenti regole durante il calcolo delle dosi del bolo consigliato:

- Le dosi del bolo consigliato vengono arrotondate per difetto ai cinque centesimi di unità più vicini (0,05 U).
- Se il risultato del calcolo del bolo consigliato (bolo di correzione + bolo pasto) è inferiore a zero, la dose del bolo consigliato sarà di 0,00 U.
- Il Suggeritore di bolo non indicherà alcuna dose se il valore corrente della glicemia è inferiore alla glicemia minima consentita per l'uso nel Suggeritore di bolo.
- Il Suggeritore di bolo calcola un bolo di correzione solo se il valore della glicemia è superiore alla soglia di Correzione verso l'alto.
- L'insulina attiva (IOB) al pasto, ovvero l'insulina attiva da un precedente bolo pasto, viene prima sottratta dal bolo di correzione corrente, se presente, fino a quando il bolo di correzione non raggiunge lo zero. In ogni caso, qualsiasi insulina attiva (IOB) al pasto rimanente non viene *mai* sottratta dal bolo pasto corrente.
- La correzione insulina attiva (IOB), ovvero l'insulina attiva da un precedente bolo di correzione, viene quindi sottratta dal bolo di correzione corrente, se presente, fino a quando il bolo di correzione non raggiunge lo zero. A questo punto, l'eventuale correzione insulina attiva (IOB) rimanente verrà sottratta dal bolo pasto corrente.
- L'insulina attiva risultante sarà arrotondata per eccesso ai cinque centesimi di unità più vicini (0,05 U).
- La correzione inversa ha luogo solo se il bolo pasto è superiore a 0,00 U.
- Se il valore della glicemia è inferiore al valore del Target glicemico e la Correzione inversa è abilitata, il Bolo di correzione inversa verrà sottratto dal bolo pasto consigliato. Se la Correzione inversa è disabilitata, il Suggeritore di bolo non sottrarrà l'insulina dalla dose del bolo pasto consigliato.

Se si regola manualmente il bolo consigliato, valgono le regole seguenti:

- Se si aumenta un bolo consigliato, l'aumento verrà applicato al bolo pasto a meno che questo sia assente, nel qual caso si applicherà al bolo di correzione.

- Se si riduce un bolo consigliato, la riduzione verrà applicata al bolo pasto fino a quando arriva a zero e solo successivamente al bolo di correzione. In assenza del bolo pasto, la riduzione verrà applicata al bolo di correzione.

Panoramica della schermata CALCOLI del Suggeritore di bolo

È possibile accedere alla schermata Suggeritore di bolo toccando VISUALIZZA CALCOLI BOLO nella schermata Cronologia insulina e glicemia o toccando CALCOLI nella schermata Suggeritore di bolo.

The screenshot shows the 'Calcolo bolo' screen with the following fields and annotations:

- Bolo di correzione 0,9 U**: The total correction bolus calculated.
- Glicemia = 150, Target glicemico = 105**: Current glucose and target glucose. Annotation: "Il valore della glicemia corrente e l'impostazione 'Target glicemico' sono indicati qui."
- Fattore di correzione = 50**: Correction factor. Annotation: "L'impostazione Fattore di correzione è indicata qui."
- (150-105) / 50 ≈ 0,9 U**: Calculation for the correction bolus.
- Regolazione IOB pasto**: Adjustment for active insulin from the meal bolus. Annotation: "Un bolo di correzione viene regolato prima per l'insulina attiva (IOB) al pasto..."
- IOB pasto: 0 U**: Active insulin from the meal bolus.
- 0,9 U - 0 U = 0,9 U**: Calculation for the remaining correction bolus.
- Regolazione IOB correzione**: Adjustment for active insulin from the correction bolus. Annotation: "...poi per la correzione insulina attiva (IOB)."
- IOB correzione: 0 U**: Active insulin from the correction bolus.
- 0,9 U - 0 U ≈ 0,9 U**: Calculation for the final correction bolus. Annotation: "La correzione insulina attiva (IOB) viene sottratta prima dal bolo di correzione..."
- Bolo pasto 4 U**: The meal bolus.
- Carbo = 60 g, Rapporto insulina/carbo (IC) = 15 g/U**: Meal carbohydrates and insulin-to-carbohydrate ratio. Annotation: "I carboidrati nel pasto e il rapporto insulina/carboidrati (IC) sono indicati qui."
- 60 / 15 ≈ 4 U**: Calculation for the meal bolus.
- Regolazione IOB correzione**: Adjustment for active insulin from the correction bolus. Annotation: "...e l'eventuale correzione insulina attiva (IOB) rimanente viene sottratta dal bolo pasto."
- CHIUDI**: Close button.

È necessario scorrere verso il basso per visualizzare il bolo totale e le eventuali modifiche apportate al bolo calcolato.

L'unità della glicemia nella schermata Calcoli è mg/dL.

Nota: l'insulina attiva (IOB) viene regolata solo se è stato immesso un valore della glicemia.

Correzione insulina attiva (IOB) residua

La quantità di bolo calcolato non può mai essere inferiore a zero. Se una correzione insulina attiva (IOB) è superiore al bolo di correzione preliminare, la sottrazione parziale della correzione insulina attiva (IOB) dal bolo preliminare fa sì che il bolo di correzione diventi pari a zero.

La "correzione insulina attiva (IOB) residua" è pari alla quantità di correzione insulina attiva (IOB) che non è necessaria per far sì che il bolo di correzione

12 Funzionamento del PDM e del Pod

preliminare diventi pari a zero. Questa quantità rimanente viene quindi utilizzata per ridurre il bolo pasto, se c'è un bolo pasto.

Bolo preliminare e finale nella schermata CALCOLI

La schermata Calcolo del bolo mostra prima i calcoli per un bolo preliminare (bolo di correzione e bolo pasto) e poi le regolazioni dell'insulina attiva (IOB) che producono il bolo di correzione finale e il bolo pasto finale. Vedere "Equazioni del Suggeritore di bolo" a pagina 161 per una descrizione dettagliata di questi calcoli.

I calcoli del bolo di correzione preliminare e il punto in cui i boli di correzione preliminari appaiono nella schermata Calcoli, nonché i numeri che rappresentano il bolo di correzione finale, sono identificati qui:

The screenshot shows the 'Calcolo bolo' screen with the following data and calculations:

- Bolo di correzione**: 0,9 u
- Glicemia = 150, Target glicemico = 105
- Fattore di correzione = 50
- $(150 - 105) / 50 \approx 0,9 \text{ U}$
- Regolazione IOB pasto**
- IOB pasto: 0 U
- $0,9 \text{ U} - 0 \text{ U} = 0,9 \text{ U}$
- Regolazione IOB correzione**
- IOB correzione: 0 U
- $0,9 \text{ U} - 0 \text{ U} \approx 0,9 \text{ U}$
- Bolo pasto**: 4 u
- Carbo = 60 g, Rapporto insulina/carbo (IC) = 15 g/U
- $60 / 15 \approx 4 \text{ U}$
- IOB correzione residua: 0 U
- $4 \text{ U} - 0 \text{ U} \approx 4 \text{ U}$
- Bolo calcolato**: 4,9 u
- Bolo totale**: = 4,9 u
- Correggere verso l'alto: 115 mg/dL
- CHIUDI

Bolo di correzione finale
(arrotondato per difetto ai cinque centesimi di unità più vicini, 0,05 U)

Bolo pasto finale

Le pagine seguenti mostrano esempi della schermata Calcoli con vari scenari di glicemia, pasto e insulina attiva (IOB).

Esempi del Suggeritore di bolo

Per una spiegazione dell'insulina attiva (IOB), vedere pagina 159. Per una spiegazione delle equazioni relative al bolo pasto e al bolo di correzione, vedere pagina 161.

Esempio 1: assunzione di 45 g di carboidrati, glicemia 150 mg/dL (al di sopra del target), nessuna insulina attiva (IOB)

Durata dell'azione dell'insulina = 4 ore. Non è stato erogato alcun bolo nelle ultime 4 ore, quindi non c'è alcuna insulina attiva (IOB) (né insulina attiva [IOB] al pasto, né correzione insulina attiva [IOB]).

Bolo di correzione	1 U	<p>← La glicemia è 50 mg/dL al di sopra del target. Con un fattore di correzione di 50 e nessuna regolazione IOB, è necessario un bolo di correzione di 1 U.</p> <p>Assenza di insulina attiva (IOB), quindi nessuna regolazione dell'insulina attiva (IOB).</p>
<p>Glicemia = 150, Target glicemico = 100</p> <p>Fattore di correzione = 50</p> <p>$(150-100) / 50 = 1 \text{ U}$</p>		
Regolazione IOB pasto		
<p>Insulina attiva (IOB) al pasto = 0 U</p> <p>$1 \text{ U} - 0 \text{ U} = 1 \text{ U}$</p>		
Regolazione della correzione insulina attiva (IOB)		
<p>Correzione insulina attiva (IOB): 0 U</p> <p>$1 \text{ U} - 0 \text{ U} = 1 \text{ U}$</p>		<p>← Assenza di insulina attiva (IOB), quindi nessuna regolazione dell'insulina attiva (IOB).</p>
Bolo pasto	3 U	<p>← Sono stati assunti 45 g di carboidrati. Con un rapporto insulina/carboidrati (IC) di 15 e nessuna regolazione IOB, è necessario un bolo pasto di 3 U.</p>
<p>Carboidrati = 45 g, Rapporto insulina/carboidrati (IC) = 15 g/U</p> <p>$45 / 15 = 3 \text{ U}$</p>		
Regolazione della correzione insulina attiva (IOB)		
<p>Correzione insulina attiva (IOB) residua = 0 U</p> <p>$3 \text{ U} - 0 \text{ U} = 3 \text{ U}$</p>		<p>← Assenza di insulina attiva (IOB), quindi nessuna regolazione dell'insulina attiva (IOB).</p>
Bolo calcolato	4 U	<p>← Il bolo calcolato è la somma del bolo di correzione e del bolo pasto.</p>
Regolazione utente	0 U	<p>← Eventuali regolazioni del bolo calcolato vengono visualizzate qui. Non sono state effettuate regolazioni.</p>
Bolo totale	4 U	<p>← Il bolo totale è la somma del bolo calcolato e di eventuali regolazioni effettuate dall'utente.</p>

12 Funzionamento del PDM e del Pod

Esempio 2: nessuna assunzione di alimenti, glicemia 150 mg/dL (al di sopra del target), 1 U di insulina attiva (IOB) al pasto, 1 U di correzione insulina attiva (IOB)

Durata dell'azione dell'insulina = 4 ore.

Tre ore fa è stato erogato un bolo di 8 U (bolo pasto di 4 U, bolo di correzione di 4 U) a causa di un elevato valore della glicemia durante un pasto.

Adesso, tre ore dopo il bolo di 8 U, sono rimaste 2 U di insulina attiva (IOB) (1 U di insulina attiva [IOB] al pasto, 1 U di correzione insulina attiva [IOB]).

Bolo di correzione	0 U	
Glicemia = 150, Target glicemico = 100 Fattore di correzione = 50 (150-100) / 50 = 1 U		La glicemia è 50 mg/dL al di sopra del target. Un fattore di correzione di 50 fornisce 1 U di bolo di correzione preliminare.
Regolazione IOB pasto Insulina attiva (IOB) = 1 U 1 U - 1 U = 0 U		Tuttavia, il bolo di correzione preliminare viene ridotto a zero dalla regolazione di 1 U di insulina attiva (IOB) al pasto.
Regolazione della correzione insulina attiva (IOB) Correzione insulina attiva (IOB): 1 U N.D.: bolo di correzione <= 0 U		Poiché il bolo di correzione preliminare è stato ridotto a zero, la correzione insulina attiva (IOB) non viene sottratta.
Bolo pasto	0 U	Poiché non si stanno assumendo alimenti, il bolo pasto è 0 U.
Carboidrati = 0 g, Rapporto insulina/carboidrati (IC) = 15 g/U 0 / 15 = 0 U		
Regolazione della correzione insulina attiva (IOB) Correzione insulina attiva (IOB) residua = 1 U 0 U - 1 U = 0 U		La correzione insulina attiva (IOB) non è stata sottratta dal bolo di correzione, quindi la correzione insulina attiva (IOB) residua è pari a 1 U. Tuttavia, il bolo pasto è già pari a zero.
Bolo calcolato	0 U	Anche se la glicemia è al di sopra del target, l'insulina attiva (IOB) al pasto riduce il bolo totale a 0 U.
Regolazione utente	0 U	
Bolo totale	0 U	

Esempio 3: assunzione di 45 g di carboidrati, glicemia 100 mg/dL (corrisponde al target), 1 U di insulina attiva (IOB) al pasto

Durata dell'azione dell'insulina = 4 ore.

Tre ore fa è stato erogato un bolo di 4 U (bolo pasto di 4 U) durante un pasto. Non c'era alcun bolo di correzione in quanto la glicemia era entro il target glicemico.

Adesso, tre ore dopo e appena prima del prossimo pasto, c'è 1 U di insulina attiva (IOB) dal pasto precedente, che è pari a 1 U di insulina attiva (IOB) al pasto. Non c'è alcuna correzione insulina attiva (IOB) poiché il bolo precedente non aveva un componente di correzione.

Bolo di correzione	0 U	← Poiché la glicemia corrisponde al target, il bolo di correzione è pari a zero.
Glicemia = 100, Target glicemico = 100		
Fattore di correzione = 50		
$(100 - 100) / 50 = 0 \text{ U}$		
Regolazione IOB pasto		
Insulina attiva (IOB) = 1 U		
N.D.: bolo di correzione $\leq 0 \text{ U}$		← Il bolo di correzione è pari a zero, quindi l'insulina attiva (IOB) al pasto non viene sottratta.
Regolazione della correzione insulina attiva (IOB)		
Correzione insulina attiva (IOB): 0 U		
N.D.: bolo di correzione $\leq 0 \text{ U}$		← Nessuna regolazione dell'insulina attiva (IOB).
Bolo pasto	3 U	
Carboidrati = 45 g, Rapporto insulina/carboidrati (IC) = 15 g/U		
$45 / 15 = 3 \text{ U}$		← Sono stati assunti 45 g di carboidrati. Con un rapporto insulina/carboidrati (IC) di 15 e nessuna regolazione della correzione insulina attiva (IOB), il bolo pasto è 3 U.
Regolazione della correzione insulina attiva (IOB)		
Correzione insulina attiva (IOB) residua = 0 U		
$3 \text{ U} - 0 \text{ U} = 3 \text{ U}$		← Non sono state effettuate regolazioni IOB. Non c'è alcuna correzione insulina attiva (IOB) e l'insulina attiva (IOB) al pasto non viene mai sottratta da un bolo pasto.
Bolo calcolato	3 U	← Anche se c'era 1 U di insulina attiva (IOB) al pasto, ciò non ha comportato una riduzione del bolo calcolato.
Regolazione utente	0 U	
Bolo totale	3 U	

12 Funzionamento del PDM e del Pod

Esempio 4: assunzione di 60 g di carboidrati, glicemia 150 mg/dL (al di sopra del target), 1 U di correzione insulina attiva (IOB)

Durata dell'azione dell'insulina = 2 ore.

Un'ora fa è stato erogato un bolo di 2 U per correggere un valore della glicemia alto. Poiché in quel momento non si stava consumando un pasto e non è stato immesso un valore dei carboidrati nel suggeritore di bolo, si è trattato di un bolo di correzione di 2 U.

Adesso, un'ora più tardi, si è in procinto di consumare un pasto. C'è 1 U di correzione insulina attiva (IOB) dal bolo precedente e non c'è insulina attiva (IOB) al pasto perché non si è consumato un pasto al momento dell'ultimo bolo.

Bolo di correzione	0 U	
Glicemia = 150, Target glicemico = 100 Fattore di correzione = 50 $(150-100) / 50 = 1 \text{ U}$		La glicemia è 50 mg/dL al di sopra del target. Un fattore di correzione di 50 fornisce 1 U di bolo di correzione preliminare.
Regolazione IOB pasto Insulina attiva (IOB) al pasto = 0 U $1 \text{ U} - 0 \text{ U} = 1 \text{ U}$		Assenza di insulina attiva (IOB) al pasto, quindi nessuna regolazione dell'insulina attiva (IOB) al pasto.
Regolazione della correzione insulina attiva (IOB) Correzione insulina attiva (IOB): 1 U $1 \text{ U} - 1 \text{ U} = 0 \text{ U}$		1 U di correzione insulina attiva (IOB) riduce il bolo di correzione a zero.
Bolo pasto	4 U	
Carboidrati = 60 g, Rapporto insulina/carboidrati (IC) = 15 g/U $60 / 15 = 4 \text{ U}$		Sono stati assunti 60 g di carboidrati. Un rapporto insulina/carboidrati (IC) di 15 dà un bolo pasto preliminare pari a 4 U.
Regolazione della correzione insulina attiva (IOB) Correzione insulina attiva (IOB) residua = 0 U $4 \text{ U} - 0 \text{ U} = 4 \text{ U}$		L'intera correzione insulina attiva (IOB) è stata utilizzata per ridurre il bolo di correzione a zero, quindi non rimane alcuna correzione insulina attiva (IOB). Il bolo pasto rimane a 4 U.
Bolo calcolato	4 U	
Regolazione utente	0 U	L'intero bolo calcolato è un bolo pasto. Anche se la glicemia è al di sopra del target, la correzione insulina attiva (IOB) ha ridotto il bolo di correzione a zero.
Bolo totale	4 U	

Esempio 5: correzione inversa attivata, assunzione di 45 g di carboidrati, glicemia 75 mg/dL (al di sotto del target), nessuna insulina attiva (IOB)

Durata dell'azione dell'insulina = 2 ore. Non è stato somministrato alcun bolo nelle ultime 2 ore, quindi non c'è alcuna insulina attiva (IOB) (né insulina attiva [IOB] al pasto, né correzione insulina attiva [IOB]).

Bolo di correzione	-0,5 U	← Poiché la glicemia è inferiore al target, viene calcolata una correzione inversa.
Glicemia = 75, Target glicemico = 100 Fattore di correzione = 50 $(75-100) / 50 = -0,5 \text{ U}$ (Correzione inversa ON)		
Regolazione IOB pasto		
Insulina attiva (IOB) al pasto = 0 U N.D.: bolo di correzione $\leq 0 \text{ U}$		← Nessun cambiamento nel bolo di correzione inversa per due motivi: l'insulina attiva (IOB) è pari zero e non viene mai sottratta da una correzione inversa.
Regolazione della correzione insulina attiva (IOB)		
Correzione insulina attiva (IOB): 0 U N.D.: bolo di correzione $\leq 0 \text{ U}$		← Nessun cambiamento nel bolo di correzione inversa per due motivi: l'insulina attiva (IOB) è pari zero e non viene mai sottratta da una correzione inversa.
Bolo pasto	3 U	← Sono stati assunti 45 g di carboidrati. Con un rapporto insulina/carboidrati (IC) di 15 e nessuna regolazione della correzione insulina attiva (IOB), il bolo pasto è 3 U.
Carboidrati = 45 g, Rapporto insulina/carboidrati (IC) = 15 g/U $45 / 15 = 3 \text{ U}$		
Regolazione della correzione insulina attiva (IOB)		
Correzione insulina attiva (IOB) residua = 0 U $3 \text{ U} - 0 \text{ U} = 3 \text{ U}$		← Assenza di insulina attiva (IOB), quindi nessuna regolazione dell'insulina attiva (IOB).
Bolo calcolato	2,50 U	← Il bolo di correzione inversa negativo riduce il bolo pasto.
Regolazione utente	0 U	Con la correzione inversa attivata e una glicemia inferiore al target, il bolo pasto viene ridotto per consentire ad alcuni dei carboidrati del pasto di aumentare la glicemia verso il target.
Bolo totale	2,50 U	

Calcoli per i riepiloghi della cronologia

Questa sezione elenca i calcoli per i dati di riepilogo visualizzati nelle schermate della cronologia di un giorno e di più giorni.

Riepiloghi della glicemia

I riepiloghi della glicemia vengono calcolati utilizzando tutti i valori immessi, inclusi eventuali valori AL e BA, se non diversamente specificato. I calcoli a più giorni includono tutti i giorni nel periodo di tempo.

Elemento di riepilogo	Calcolo
Riga 1 (vedere pagina 89)	
Glicemia media	$\text{Glicemia media} = \frac{\text{Somma di tutti i valori della glicemia}}{\text{Numero totale di valori della glicemia}}$ <p>Nota: la somma e il totale non includono valori della glicemia AL o BA.</p>
Glicemia entro l'intervallo	$\text{Glicemia entro l'intervallo} = \frac{\text{Numero di valori della glicemia entro l'obiettivo glicemico}}{\text{Numero totale di valori della glicemia}} \times 100$
Glicemia verso l'alto	$\text{Glicemia verso l'alto} = \frac{\text{Numero di valori della glicemia al di sopra del limite superiore dell'obiettivo glicemico}}{\text{Numero totale di valori della glicemia}} \times 100$
Glicemia verso il basso	$\text{Glicemia verso il basso} = \frac{\text{Numero di valori della glicemia al di sotto del limite inferiore dell'obiettivo glicemico}}{\text{Numero totale di valori della glicemia}} \times 100$
Riga 2 (vedere pagina 89)	
Valori medi per giorno	$\text{Valori medi per giorno} = \frac{\text{Numero di valori della glicemia}}{\text{Numero di giorni}}$ <p>questo appare solo nella vista a più giorni.</p>
Numero di valori della glicemia	$\text{Numero di valori della glicemia} = \frac{\text{Numero totale di valori della glicemia durante la giornata (o in un intervallo di date)}}{\text{Numero di giorni}}$
Glicemia più alta	$\text{Glicemia più alta} = \text{Valore della glicemia più alto durante la giornata (o in un intervallo di date)}$
Glicemia più bassa	$\text{Glicemia più bassa} = \text{Valore della glicemia più basso durante la giornata (o in un intervallo di date)}$

Riepiloghi dell'erogazione di insulina

I calcoli dell'insulina di bolo comprendono i boli del suggeritore di bolo e i boli calcolati manualmente. Se si annulla un bolo immediato o un bolo prolungato prima del completamento, solo la quantità effettivamente erogata è inclusa nel calcolo.

I calcoli dell'insulina basale comprendono l'insulina erogata secondo il programma basale attivo regolato per i periodi in cui una basale temporanea era in esecuzione, l'erogazione di insulina era sospesa o non vi era alcun Pod attivo.

Quando il PDM non riceve conferma dal Pod circa l'effettiva erogazione di insulina, i calcoli relativi all'erogazione di insulina sono stime basate sull'erogazione programmata di insulina (vedere pagina 96).

Per i calcoli dell'insulina erogata su più giorni, il numero di giorni nel periodo di tempo non include i giorni in cui non è stata erogata insulina (basale o di bolo).

Per i calcoli dei carboidrati totali su più giorni, il numero di giorni nel periodo di tempo non include i giorni in cui non sono stati immessi carboidrati nel suggeritore di bolo.

Elemento di riepilogo	Calcolo
Riga 3 (vedere pagina 89)	
Insulina totale	= Somma dell'insulina basale e di bolo erogata
Insulina totale media	= $\frac{\text{Somma dell'insulina basale e di bolo erogata}}{\text{Numero di giorni}}$
Insulina basale	= Quantità di insulina basale erogata
Insulina basale media	= $\frac{\text{Quantità di insulina basale erogata}}{\text{Numero di giorni}}$
Insulina di bolo	= Quantità di insulina di bolo erogata
Insulina di bolo media	= $\frac{\text{Quantità di insulina di bolo erogata}}{\text{Numero di giorni}}$
Carboidrati totali	= Grammi totali di carboidrati immessi nel suggeritore di bolo
Carboidrati totali med ⁱ	= $\frac{\text{Grammi totali di carboidrati immessi nel suggeritore di bolo}}{\text{Numero di giorni}}$

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

CAPITOLO 13

Vivere con il diabete

Avvertenza: l'uso del sistema Omnipod DASH® in modo diverso da quanto specificato nelle istruzioni può mettere a rischio la salute e la sicurezza dell'utente. In caso di domande o dubbi sull'utilizzo corretto del sistema Omnipod DASH®, contattare il proprio referente medico.

Prima di decidere di utilizzare il sistema Omnipod DASH®, l'utente e il referente medico hanno preso in esame i vantaggi derivanti dall'impiego di questo sistema, nonché le responsabilità correlate alla terapia insulinica mediante microinfusione. Ricordare: l'uso sicuro del sistema dipende esclusivamente dall'utente. In caso di dubbi sull'utilizzo sicuro del sistema Omnipod DASH®, non esitare a contattare il referente medico in qualsiasi momento.

Attività quotidiane

Per garantire il corretto funzionamento del sistema Omnipod DASH® e la buona salute dell'utente, controllare spesso il sito di infusione, i messaggi del PDM e la glicemia.

Controlli del sito di infusione

Controllare almeno una volta al giorno, attraverso la finestrella di visualizzazione del Pod, il sito di infusione. Verificare che non vi siano:

- Perdite oppure odore di insulina, condizione che potrebbe indicare lo spostamento della cannula
- Segni di un'infezione, tra cui dolore, gonfiore, rossore, essudazione o rialzo della temperatura

Avvertenze:

se il sito di infusione presenta segni di infezione:

- Rimuovere immediatamente il Pod e applicarne uno nuovo in un sito di infusione diverso.
- Contattare il referente medico. Curare l'infezione seguendo le indicazioni del referente medico.

Se si nota del sangue nella cannula, controllare più spesso la glicemia per accertarsi che l'insulina venga erogata correttamente. Qualora si rilevassero livelli glicemici inaspettatamente elevati, sostituire il Pod.

Consiglio: *i controlli del sito di infusione devono essere considerati parte integrante della routine quotidiana (come farsi la doccia o lavarsi i denti).*

Eseguire controlli frequenti della glicemia

Verificando regolarmente il livello glicemico, è possibile individuare e trattare le condizioni di glicemia alta o bassa prima che diventino un problema.

Eseguire un controllo della glicemia:

- Almeno da 4 a 6 volte al giorno: quando ci si sveglia, prima di ogni pasto e prima di coricarsi
- Qualora si avvertisse un senso di nausea o di malessere
- Prima di mettersi alla guida di un'automobile
- In caso di abbassamento o innalzamento insolito della glicemia o quando si sospetta che la glicemia sia alta o bassa
- Prima, durante e dopo l'attività fisica
- Per seguire le indicazioni del referente medico

Pronti per le emergenze

Consiglio: chiedere consiglio al proprio referente medico per determinare insieme come gestire le emergenze e come agire nel caso in cui il referente medico non sia raggiungibile.

Avvertenza: tenere SEMPRE pronto e a portata di mano un kit di emergenza per affrontare tempestivamente qualsiasi emergenza diabetica o nell'eventualità in cui il sistema Omnipod DASH smettesse di funzionare. Portare sempre con sé i materiali di consumo per la sostituzione del Pod, nel caso in cui si rendesse necessario effettuarla.

Preparare e tenere sempre a portata di mano un kit di emergenza. Il kit deve includere:

- Alcuni Pod nuovi, ancora sigillati
- Una fiala di insulina U-100 ad azione rapida (vedere "Avvertenze generali" a pagina xii per i tipi di insulina approvati per l'uso nel sistema Omnipod DASH®)
- Siringhe o penne per l'iniezione di insulina
- Strisce reattive per glicemia
- Glucometro
- Strisce reattive per chetoni
- Dispositivo a lancetta e lancette
- Compresse di glucosio o altra fonte di carboidrati ad azione rapida
- Tamponi disinfettanti imbevuti di alcol
- Istruzioni del referente medico riguardanti la quantità di insulina da iniettare in caso di interruzione dell'erogazione dal Pod
- Una copia della lettera redatta dal referente medico che attesti l'esigenza di portare con sé scorte di insulina e il sistema Omnipod DASH®
- Numeri di telefono del medico in caso di emergenza
- Kit di glucagone e istruzioni scritte per somministrare un'iniezione se il paziente non è cosciente (vedere "Come evitare valori bassi, alti e DKA" a pagina 178)

Viaggi e vacanze

È importante tenere la glicemia costantemente sotto controllo mentre si è in viaggio. Le variazioni di fusi orari, livelli di attività e orari dei pasti possono influire sui livelli glicemici.

Una corretta preparazione è importante quando si viaggia. Le seguenti sezioni aiutano l'utente a prepararsi per i viaggi.

Pronta accessibilità dei materiali di consumo

Su aerei, treni e autobus, è importante portare con sé i seguenti articoli piuttosto che tenerli nel bagaglio:

- Personal Diabetes Manager (PDM)
- Pod di scorta
- Un kit di emergenza
- Fiale di insulina (la temperatura della stiva può compromettere l'integrità dell'insulina)
- Una copia della lettera redatta dal referente medico che attesti l'esigenza di portare con sé scorte di insulina e il sistema Omnipod DASH®
- Ricette relative a tutti i farmaci
- Farmaci e materiali di consumo con le ricette originali e la documentazione

Nota: all'estero, i farmaci generici possono essere più facilmente reperibili rispetto a quelli di una marca specifica.

- Spuntini e trattamenti per l'ipoglicemia, nel caso in cui non ci sia cibo disponibile
- Acqua in bottiglia (soprattutto sugli aerei) per evitare la disidratazione
- Nome e numero di telefono del proprio medico e di un medico presso la propria destinazione finale

Nota: portare con sé il kit di emergenza durante i viaggi o le vacanze (vedere "Pronti per le emergenze" a pagina 175). Poiché potrebbe risultare difficile o addirittura impossibile procurarsi dell'insulina o dei materiali di consumo in un luogo sconosciuto, prenderne di più del necessario.

Consiglio: se ci si reca all'estero o si fanno viaggi lunghi, portare con sé materiali di consumo supplementari per il Pod. Prima di partire per un viaggio, contattare il servizio di Assistenza clienti per ordinare materiali di consumo di scorta per il sistema Omnipod DASH®.

Piano per il cambio di fuso orario

Se si sta programmando una vacanza o un viaggio di lavoro in un paese con un diverso fuso orario, è necessario modificare di conseguenza i programmi basali. Per una differenza di poche ore, le correzioni della basale sono minime e facili da calcolare. Per i viaggi lunghi, invece, può essere difficile prevedere il programma basale corretto. Il referente medico potrà essere di aiuto con queste regolazioni.

Aeroporti e voli

Prima di viaggiare in aereo, è bene familiarizzare con le procedure di sicurezza aeroportuali e organizzare tutto il necessario per il diabete in modo da evitare problemi durante i controlli di sicurezza e il volo.

Controlli aeroportuali

Preparazione del viaggio:

- Poiché le procedure di controllo e screening aeroportuali possono cambiare, visitare il sito web degli aeroporti per reperire informazioni di viaggio aggiornate prima della partenza.
- Arrivare all'aeroporto 2-3 ore prima della partenza del volo.
- Tenere i materiali di consumo per la gestione dell'insulina a portata di mano per evitare problemi durante i controlli aeroportuali.

Alcuni aeroporti offrono la possibilità di richiedere un'ispezione visiva dei materiali di consumo medici in alternativa all'esame ai raggi X. Tale richiesta deve essere fatta al personale addetto alla sicurezza prima dell'inizio dello screening. I materiali di consumo medici devono essere tenuti in una borsa a parte quando ci si avvicina al personale addetto alla sicurezza.

Per evitare di contaminare o danneggiare i materiali di consumo, il personale addetto alla sicurezza chiederà all'utente di mostrare, maneggiare e riporre tutti i materiali durante l'ispezione visiva. Eventuali farmaci e/o relativi materiali di consumo che non possono essere esaminati visivamente devono essere sottoposti allo screening ai raggi X.

Se non si è a proprio agio all'idea di dover passare sotto un metal detector, è possibile segnalare al personale addetto alla sicurezza che si indossa un microinfusore di insulina, informandolo che non può essere rimosso in quanto inserito con una cannula (ago) sotto la pelle.

In caso di domande o dubbi, visitare i siti web degli aeroporti.

Nota: i Pod e il PDM non vengono in alcun modo danneggiati dal passaggio attraverso i dispositivi a raggi X degli aeroporti (vedere "Avviso riguardante le interferenze relative al sistema Omnipod DASH" a pagina 199).

Voli e modalità aereo

Avvertenza: la pressione atmosferica nella cabina di un aereo può cambiare durante il volo, il che può influire sull'erogazione di insulina del Pod. Controllare frequentemente la glicemia durante il volo. Se necessario, attenersi alle indicazioni del proprio referente medico.

Il PDM controlla il Pod utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth®. Prima di volare, controllare la politica della compagnia aerea riguardo all'utilizzo di dispositivi elettronici medici personali che comunicano tramite la tecnologia Bluetooth®.

Se è consentito utilizzare un dispositivo elettronico personale con tecnologia Bluetooth®, impostare il PDM in modalità aereo mentre si è in aereo (vedere "Modalità aereo" a pagina 99). L'impostazione Bluetooth® rimane abilitata nella modalità aereo del PDM in modo da poter comunicare con il Pod.

Nota: il sistema Omnipod DASH® può essere utilizzato a pressioni atmosferiche tipiche delle cabine degli aerei durante il volo. Specificamente il sistema Omnipod DASH® può essere utilizzato a pressioni atmosferiche fino a un minimo di 700 hPa, ovvero un valore inferiore alla pressione tipica delle cabine degli aerei.

Come evitare valori bassi, alti e DKA

Intervenire prontamente ai primi segni di ipoglicemia, iperglicemia o chetoacidosi diabetica. Il modo più semplice e sicuro per evitare queste situazioni è controllare frequentemente la glicemia.

Precauzioni generali

- Registrare attentamente i valori e discutere con il proprio referente medico eventuali modifiche e aggiustamenti.
- Informare il proprio referente medico qualora si rilevino valori eccessivamente alti o bassi oppure se questi sbalzi si verificano più spesso del solito.
- In caso di problemi tecnici non risolvibili con il sistema Omnipod DASH®, contattare immediatamente il servizio di Assistenza clienti.

Ipoglicemia (livello basso di glicemia)

L'ipoglicemia si può verificare anche quando il Pod funziona correttamente. Non ignorare mai i segnali di una glicemia bassa, anche se lievi. Se non trattate, le

ipoglicemie gravi possono causare crisi o provocare perdita di conoscenza. Se si sospetta un basso livello glicemico, controllare il livello glicemico per confermare.

Sintomi di ipoglicemia (livello basso di glicemia)

Non ignorare mai i seguenti sintomi, in quanto possono segnalare una condizione di ipoglicemia:

- Tremito
- Affaticamento
- Sudorazione inspiegabile
- Pelle fredda e umida
- Debolezza
- Vista offuscata o cefalea
- Fame improvvisa
- Frequenza cardiaca accelerata
- Confusione
- Formicolio alle labbra o alla lingua
- Ansia
- Irritabilità

Consiglio: *l'ipoglicemia inconsapevole è una condizione in cui il paziente non realizza di avere un basso livello glicemico. Se si è predisposti all'ipoglicemia inconsapevole, è utile avvalersi del promemoria glicemico del PDM e verificare con maggiore frequenza la glicemia (vedere "Promemoria Controlla glicemia dopo bolo" a pagina 106).*

Consiglio: *verificare che il livello di glucosio nel sangue sia di almeno 100 mg/dL prima di mettersi alla guida di veicoli o di utilizzare macchinari o apparecchiature pericolose. L'ipoglicemia può causare perdita di controllo del veicolo o di apparecchiature pericolose. La concentrazione sullo svolgimento di un compito può inoltre impedire alla persona di avvertire i sintomi dell'ipoglicemia.*

Consiglio: *anche nel caso in cui non sia possibile controllare la glicemia, i sintomi dell'ipoglicemia vanno trattati SENZA INDUGIO, soprattutto se si è soli. Un intervento ritardato può causare un aggravamento dell'ipoglicemia, che a sua volta può rapidamente portare a shock, coma e persino al decesso.*

Consiglio: *insegnare a persone fidate (come parenti e amici) come praticare un'iniezione di glucagone. Sarà infatti necessario affidarsi a loro qualora si perdesse conoscenza a causa di una forte crisi ipoglicemica. Includere una copia delle istruzioni per il glucagone nel kit di emergenza e rivedere periodicamente la procedura con amici e parenti.*

Come evitare l'ipoglicemia (glicemia bassa)

- Consultarsi con il referente medico per stabilire insieme il target glicemico personalizzato e le linee guida.
- Portare sempre con sé dei carboidrati ad azione rapida per poter intervenire rapidamente in caso di glicemia bassa. Esempi di carboidrati ad azione rapida sono le compresse di glucosio, le caramelle o i succhi di frutta.
- Insegnare ad amici, familiari, parenti e colleghi a riconoscere i segni dell'ipoglicemia, in modo da intervenire in caso di ipoglicemia inconsapevole o di una grave reazione avversa.
- Includere nei materiali di emergenza un kit per iniezione di glucagone. Insegnare ad amici, familiari e parenti come iniettare il glucagone in caso di un attacco ipoglicemico grave con perdita di conoscenza.

Controllare periodicamente la data di scadenza del kit di glucagone.

Nota: portare sempre nel portafoglio una carta di identità diabetica, utile in caso di emergenza, e indossare una speciale collana o braccialetto identificativo come quelli di Medic Alert.

Anche in questo caso, **controlli frequenti della glicemia sono essenziali per evitare potenziali problemi**. La tempestiva rilevazione di un basso livello di glucosio nel sangue consente di trattarlo prima che diventi un problema.

Consultarsi con il referente medico riguardo gli argomenti trattati sopra.

Come trattare l'ipoglicemia (glicemia bassa)

Ogni volta che il livello di glucosio nel sangue si abbassa, intervenire immediatamente secondo le indicazioni del referente medico. Controllare il livello di glucosio nel sangue ogni 15 minuti durante il trattamento, per essere sicuri di non intervenire eccessivamente sulla condizione e causare un innalzamento eccessivo del livello glicemico. Contattare il referente medico in caso di dubbi o domande.

Possibili cause di ipoglicemia	Azione suggerita
Programma basale non corretto	Verificare che sia attivo il programma basale corretto.
	Verificare che l'ora del PDM sia impostata correttamente.
	Consultare il referente medico riguardo la regolazione dei programmi basali o l'uso di una basale temporanea.

Possibili cause di ipoglicemia	Azione suggerita
Sincronizzazione non corretta del bolo o bolo troppo grande	<p>Assumere il bolo insieme al cibo.</p> <p>Controllare la glicemia prima di somministrare un bolo pasto. Se necessario, regolare il bolo.</p> <p>Controllare la quantità e la sincronizzazione del bolo.</p> <p>Non correggere eccessivamente i livelli di glucosio post-prandiali.</p> <p>Controllare l'assunzione di carboidrati.</p> <p>Consultarsi con il referente medico in caso di dubbi o domande.</p>
<p>Livelli del target glicemico non corretti</p> <p>o fattore di correzione non corretto</p> <p>o rapporto insulina/carboidrati (IC) non corretto</p>	<p>Consultare il proprio referente medico per mettere a punto queste impostazioni in base alle proprie esigenze.</p>
<p>Predisposizione all'ipoglicemia grave</p> <p>o all'ipoglicemia inconsapevole</p>	<p>Consultare il referente medico per informazioni sull'ipoglicemia inconsapevole e sull'innalzamento del target glicemico.</p>
Attività fisica non programmata	<p>Consultare il referente medico in merito all'eventualità di utilizzare una basale temporanea.</p>

Possibili cause di ipoglicemia	Azione suggerita
Esercizio fisico prolungato o intenso	<p>Regolare l'erogazione di insulina in base alle istruzioni fornite dal referente medico.</p> <p>Controllare la glicemia prima, durante e dopo l'attività fisica e trattare secondo necessità.</p> <p>Nota: gli effetti dell'attività fisica possono protrarsi per svariate ore, persino per un intero giorno, dopo la fine dell'attività.</p> <p>Consultare il referente medico riguardo la regolazione dei programmi basali o l'uso di una basale temporanea.</p>
Assunzione di una quantità ridotta di carboidrati prima dell'attività fisica	<p>Controllare la glicemia prima di svolgere attività fisica.</p> <p>Consultarsi con il referente medico in caso di dubbi o domande.</p>
Consumo di alcolici	<p>Controllare frequentemente la glicemia, soprattutto prima di coricarsi.</p> <p>Consultarsi con il referente medico in caso di dubbi o domande.</p>

Iperglicemia (glicemia alta)

I Pod utilizzano insulina ad azione rapida, il che fa sì che nel corpo non sia più presente insulina ad azione prolungata. Se si verifica un'occlusione (interruzione dell'erogazione di insulina dal Pod), il livello glicemico può aumentare rapidamente.

Avvertenza: un'occlusione può essere causata da un blocco, dal malfunzionamento del Pod o dall'impiego di insulina vecchia o inattiva (vedere "Rilevamento di occlusione" a pagina 195). Se l'erogazione di insulina viene interrotta da un'occlusione, controllare il livello glicemico e attenersi alle indicazioni del referente medico. Azioni non adeguate possono portare all'iperglicemia.

Consiglio: i sintomi dell'iperglicemia possono essere fuorvianti. Controllare sempre la glicemia prima di trattare l'iperglicemia.

Sintomi di iperglicemia (glicemia alta)

Non ignorare mai i seguenti sintomi, in quanto possono segnalare una condizione di iperglicemia:

- Affaticamento
- Diuresi frequente, soprattutto durante la notte
- Sete o fame insolita
- Perdita di peso inspiegabile
- Vista offuscata
- Lenta cicatrizzazione di tagli o ferite

Come evitare l'iperglicemia (glicemia alta)

Eseguire un controllo della glicemia:

- Ameno 4-6 volte al giorno (al risveglio, prima dei pasti e prima di coricarsi)
- Se si avverte un senso di nausea o di malessere
- Prima di mettersi alla guida di un'automobile
- In caso di abbassamento o innalzamento insolito della glicemia
- Se si sospetta che il livello glicemico sia alto o basso
- Prima, durante e dopo l'attività fisica
- Per seguire le indicazioni del referente medico

Come trattare l'iperglicemia (livello elevato di glicemia)

Tenere i livelli glicemici costantemente sotto controllo durante il trattamento dell'iperglicemia. Questo impedirà di eccedere con il trattamento, causando un abbassamento eccessivo del livello glicemico.

1. Controllare il livello glicemico. Il risultato aiuterà a individuare la quantità di insulina necessaria a riportare la glicemia entro il target glicemico.
2. Se la glicemia è 250 mg/dL o superiore, controllare i chetoni. Se sono presenti chetoni, attenersi alle indicazioni del referente medico.
3. Se non sono presenti chetoni, assumere un bolo di correzione, come prescritto dal referente medico.
4. Controllare di nuovo la glicemia dopo 2 ore.
5. Se i livelli glicemici non sono diminuiti, eseguire le seguenti operazioni:
 - Assumere un secondo bolo mediante iniezione, usando una siringa sterile. Chiedere al referente medico se è necessario iniettare la stessa quantità di insulina di cui al punto 3.
 - Sostituire il Pod. Usare una nuova fiala di insulina per riempire il nuovo Pod. Consultarsi con il referente medico.
6. Se si avverte un senso di nausea, controllare i chetoni e contattare immediatamente il referente medico (vedere "Chetoacidosi diabetica (DKA)" a pagina 185).

Avvertenza: in caso di emergenza, chiamare un'ambulanza oppure farsi accompagnare da un amico o da un parente al pronto soccorso. **NON** mettersi alla guida.

7. Indagare sulla possibile causa dell'iperglicemia per evitare che il problema si verifichi di nuovo (vedere la tabella riportata di seguito).

Possibili cause di iperglicemia	Azione suggerita
Insulina scaduta o esposta a temperature estreme	Disattivare e rimuovere il Pod usato. Applicare un nuovo Pod riempito con una nuova fiala di insulina.
Sito di infusione vicino a o in corrispondenza di una cicatrice o di un neo	Disattivare e rimuovere il Pod usato. Applicare un nuovo Pod in una posizione diversa.
Sito di infusione infetto	Disattivare e rimuovere il Pod usato. Applicare un nuovo Pod in una posizione diversa e consultarsi con il referente medico.
Dislocamento della cannula	Disattivare e rimuovere il Pod usato. Applicare un nuovo Pod in una posizione diversa. Nota: evitare siti in prossimità di cinture o altre zone in cui lo sfregamento potrebbe causare il dislocamento della cannula.
Pod vuoto	Disattivare e rimuovere il Pod usato. Applicare un nuovo Pod in una posizione diversa.
Programma basale non corretto	Verificare che sia attivo il programma basale corretto. Verificare che l'ora del PDM sia impostata correttamente. Consultare il referente medico riguardo la regolazione dei programmi basali o l'uso di una basale temporanea.

Possibili cause di iperglicemia	Azione suggerita
Temporizzazione del bolo errata o bolo troppo piccolo	<p>Controllare l'assunzione di carboidrati.</p> <p>Assumere il bolo insieme al cibo.</p> <p>Controllare la glicemia prima di somministrare il bolo pasto. Se necessario, regolare il bolo.</p> <p>Consultarsi con il referente medico in caso di dubbi o domande.</p>
Pasto troppo ricco di proteine o lipidi	<p>Calcolare l'assunzione di proteine/lipidi e tenerne conto per la definizione del tipo di bolo e dell'intervallo di erogazione.</p> <p>Consultare il proprio referente medico in merito all'impiego dell'opzione bolo prolungato.</p>
Attività fisica inferiore alla norma	Consultare il referente medico riguardo la regolazione dei programmi basali o l'uso di una basale temporanea.
Valore della glicemia superiore a 250 mg/dL (con presenza di chetoni) prima dell'attività fisica	<p>Non svolgere attività fisica se sono presenti chetoni.</p> <p>Nota: la glicemia sale se si svolge attività fisica in presenza di chetoni.</p> <p>Consultarsi con il referente medico in caso di dubbi o domande.</p>
Infezione o malattia o modifica della terapia	<p>Vedere "Giorni di malattia" a pagina 187.</p> <p>Consultare il referente medico per indicazioni su come comportarsi nei giorni di malattia e come modificare la terapia.</p>
Perdita o aumento di peso, ciclo mestruale o gravidanza	Consultarsi con il referente medico in caso di dubbi o domande.

Chetoacidosi diabetica (DKA)

I Pod utilizzano insulina ad azione rapida, il che fa sì che nel corpo non sia più presente insulina ad azione prolungata. Se l'erogazione di insulina dal Pod viene interrotta (occlusione), il livello del glucosio nel sangue può aumentare rapidamente, provocando chetoacidosi diabetica (DKA). La DKA è una condizione seria, ma totalmente evitabile, che può verificarsi se si ignora la presenza di livelli glicemici elevati.

Avvertenze:

se non curata, la DKA può causare difficoltà respiratorie, shock, coma e persino decesso.

In caso di emergenza, chiamare un'ambulanza oppure farsi accompagnare da un amico o da un parente al pronto soccorso. Non mettersi alla guida.

Sintomi di DKA

- Nausea e vomito
- Dolore addominale
- Disidratazione
- Alito fruttato
- Pelle o bocca secca
- Sonnolenza
- Tachicardia
- Respiro affannoso

I sintomi della DKA sono molto simili a quelli di un'influenza. Prima di pensare di avere contratto un'influenza, controllare la glicemia e la presenza di chetoni per escludere la DKA.

Come evitare la DKA

Il modo più semplice e sicuro per evitare la DKA consiste nel controllare la glicemia almeno 4-6 volte al giorno. I controlli di routine consentono di identificare e trattare la glicemia alta prima che si sviluppi la DKA.

Come trattare la DKA

- Una volta iniziato il trattamento per glicemia alta, controllare i chetoni. Controllare i chetoni ogni volta che la glicemia è 250 mg/dL o superiore.
- Se i chetoni sono negativi o ve ne sono solo tracce, continuare il trattamento per la glicemia alta.
- Se i chetoni sono positivi e si avverte senso di nausea o di malessere, contattare immediatamente il referente medico.
- Se i chetoni sono positivi, ma non si avverte alcun senso di nausea o di malessere, sostituire il Pod e usare una nuova fiala di insulina.
- Controllare di nuovo la glicemia dopo 2 ore. Se il livello glicemico non è diminuito, contattare immediatamente il referente medico.

Gestione delle situazioni speciali

Giorni di malattia

Qualsiasi sforzo fisico può causare un aumento della glicemia, e una malattia è da considerare alla stregua di uno sforzo fisico. Il referente medico può essere di aiuto nella definizione di un piano per i giorni di malattia. Di seguito sono riportate solo delle linee guida generiche.

In caso di malattia, controllare con maggiore frequenza la glicemia per evitare la DKA. I sintomi della DKA sono molto simili a quelli di un'influenza. Prima di presumere di avere contratto un'influenza, controllare la glicemia per escludere la DKA (vedere "Chetoacidosi diabetica (DKA)" a pagina 185).

Per gestire i giorni di malattia:

- Curare la malattia per favorire una guarigione più veloce.
- Mangiare il più normalmente possibile.
- Regolare le dosi di bolo, se necessario, in modo che corrispondano alle modifiche apportate ai pasti principali e agli spuntini.
- Continuare ad assumere l'insulina basale, anche quando non si è in grado di mangiare. Contattare il referente medico per suggerimenti su come regolare la basale durante i giorni di malattia.
- Controllare la glicemia ogni 2 ore e registrare accuratamente i risultati.
- Controllare i chetoni quando la glicemia è 250 mg/dL o superiore.
- Attenersi alle indicazioni fornite dal referente medico riguardo alla possibilità di aumentare l'assunzione di insulina durante i giorni di malattia.
- Assumere abbondanti liquidi per prevenire la disidratazione.
- Se i sintomi persistono, contattare il referente medico.

Esercizio fisico, attività sportiva o lavoro intenso

Controllare il livello glicemico prima, durante e dopo l'esercizio fisico, l'attività sportiva o sforzi fisici insolitamente intensi.

L'adesivo mantiene il Pod saldamente in posizione per un massimo di 3 giorni. Tuttavia, in caso di bisogno, sono disponibili diversi prodotti per aumentare l'adesione. Per informazioni sui prodotti in questione, chiedere al referente medico.

Evitare di usare prodotti per la pelle, creme oppure oli vicino al sito di infusione, in quanto tali prodotti potrebbero causare il distacco dell'adesivo.

Per alcuni sport di contatto, se il Pod si trova in una posizione in cui è probabile che venga colpito, prendere in considerazione la rimozione del Pod e il posizionamento di uno nuovo in una posizione più protetta.

Controllare i livelli glicemici prima della rimozione del Pod e dopo l'applicazione di un nuovo Pod. I Pod sono monouso. Non tentare di riapplicare un Pod usato.

Consiglio: *se possibile, pianificare la rimozione del Pod in modo che coincida con una sostituzione programmata del Pod.*

Se è necessario rimuovere il Pod per più di un'ora, chiedere al proprio referente medico come procedere.

Raggi X, RM e scansioni TC

Il Pod e il PDM sono in grado di tollerare campi elettromagnetici ed elettrostatici normali, inclusi quelli generati nelle postazioni di controllo aeroportuali e dai telefoni cellulari.

Avvertenza: il Pod e il PDM possono essere disturbati da radiazioni o campi magnetici forti. Prima di sottoporsi a radiografie, RM o scansioni TC (o esami o procedure simili), rimuovere il Pod e lasciarlo all'esterno dell'area di trattamento insieme al PDM. Per indicazioni sulla rimozione del Pod, rivolgersi al proprio referente medico.

Intervento chirurgico o ricovero ospedaliero

Per interventi chirurgici o ricoveri ospedalieri programmati, informare il medico/chirurgo o il personale ospedaliero di essere portatori di un Pod a insulina. Potrebbe rendersi necessaria la rimozione del Pod per determinate procedure o trattamenti. Ricordarsi di erogare l'insulina basale non erogata durante il periodo in cui il Pod era stato rimosso. Il referente medico è in grado di aiutare il paziente a prepararsi per queste situazioni.

Appendice

Risoluzione dei problemi - Avvio del PDM

Anche se è improbabile che si verifichi durante il normale utilizzo, alcune combinazioni di tasti premuti durante l'avvio del PDM possono far sì che il PDM visualizzi "Modalità di avvio" o "Modalità provvisoria".

Anche quando il PDM è in "Modalità di avvio", il Pod continua a erogare insulina in base alle istruzioni fornite. La modalità provvisoria non influisce sul funzionamento del PDM o del Pod.

Ritornare al normale funzionamento del PDM come segue:

Modalità di avvio

Se il display del PDM visualizza "Seleziona Modalità di avvio", eseguire le seguenti operazioni:

1. Se necessario, premere il pulsante di segnale acustico/vibrazione SU (VOLUME_SU) per spostare la freccia (<<==) finché non punta su **[Modalità di recupero]**. Quindi, premere il pulsante di segnale acustico/vibrazione GIÙ (VOLUME_GIÙ) per selezionare **[Modalità di recupero]**.

Attenzione: non selezionare la [Modalità di avvio rapido] poiché impedirà al PDM di rispondere. Se il PDM smette di rispondere, contattare il servizio di Assistenza clienti.

2. Nella schermata Recupero in Android, premere il pulsante di segnale acustico/vibrazione (VOLUME_SU/VOLUME_GIÙ) per evidenziare **Riavvia il sistema ora**. Quindi, premere il pulsante di accensione per selezionarlo.

Il PDM si riavvia.

Modalità provvisoria

Se il display del PDM visualizza "Modalità provvisoria" nell'angolo in basso a sinistra, riavviare il PDM e rimuovere il testo "Modalità provvisoria" dal display come segue:

1. Premere e tenere premuto il pulsante di Accensione, quindi toccare Spegnimento.
2. Toccare OK per confermare.
3. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per riattivare il PDM.

Riepilogo delle impostazioni e delle opzioni

Di seguito sono indicate le opzioni relative alle varie impostazioni del sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH®:

Ora	12 o 24 ore.
Fusi orari	Da GMT-11.00 a GMT+13.00.
Data	MM.GG.AAAA GG/MM/AAAA GG.MM.AAAA AAAA-MM-GG
Timeout del display	30, 60, 120 secondi. L'impostazione predefinita è 30 secondi.
PIN	4 cifre da 0 a 9.
Velocità basale massima	0,05-30 U/ora. L'impostazione predefinita è 3,00 U/ora.
Velocità basale	Unità/ora. Intervallo: da 0 U/ora alla velocità basale massima con incrementi di 0,05 U/ora.
Programmi basali	Massimo 12.
Segmenti di velocità basale	24 per programma basale.
Basale temporanea	%, unità/ora o Disattivato. L'impostazione predefinita è Disattivato. Durata: da 30 minuti a 12 ore con incrementi di 30 minuti.
Basale temporanea (impostata come %)	Intervallo: da riduzione del 100% (0 U/ora) fino ad aumento del 95% dalla velocità basale corrente con incrementi del 5%. Non può superare la velocità basale massima.
Basale temporanea (impostata come U/ora)	Intervallo: da 0 U/ora alla velocità basale massima con incrementi di 0,05 U/ora.
Basali temporanee preimpostate	Massimo 12.
Intervallo di obiettivo glicemico per cronologia glicemica	Limiti superiore e inferiore: da 70 a 200 mg/dL con incrementi di 1 mg/dL.
Promemoria glicemia	Attivato o Disattivato. L'impostazione predefinita è Disattivato. Massimo di 4 attivi contemporaneamente. Il promemoria può essere impostato tra 30 minuti e 4 ore dopo l'inizio del bolo, con incrementi di 30 minuti.

Promemoria personalizzato	Massimo 4. Può essere impostato su Giornaliero, Solo una volta e Disattivato.
Suggeritore di bolo	Attivato o Disattivato. L'impostazione predefinita è Attivato.
Valore del target glicemico	Massimo 8 segmenti; da 70 a 200 mg/dL con incrementi di 1 mg/dL.
Soglia di correzione verso l'alto	Massimo 8 segmenti; da target glicemico a 200 mg/dL con incrementi di 1 mg/dL.
Glicemia minima per suggeritore	Da 50 a 70 mg/dL con incrementi di 1 mg/dL. L'impostazione predefinita è 70 mg/dL.
Rapporto insulina/carboidrati (IC)	Massimo 8 segmenti; da 1 a 150 g carb/U con incrementi di 0,1 g carb/U.
Fattore di correzione (di sensibilità)	Massimo 8 segmenti; da 1 a 400 mg/dL con incrementi di 1 mg/dL. L'impostazione predefinita è 50 mg/dL.
Correzione inversa	Attivato o Disattivato. L'impostazione predefinita è Attivato.
Durata dell'azione dell'insulina	Da 2 a 6 ore con incrementi di 30 minuti. L'impostazione predefinita è 4 ore.
Dimensione massima del bolo	0,05-30 U.
Bolo prolungato	%, Unità o Disattivato. L'impostazione predefinita è Disattivato. Da 30 minuti a 8 ore a incrementi di 30 minuti.
Bolo preimpostato	Massimo 7. Non può superare il bolo massimo.
Sospendi	Da 30 minuti a 2 ore.
Avviso di serbatoio quasi vuoto	Da 10 a 50 unità con incrementi di 1 unità. L'impostazione predefinita è 10,0 unità.
Notifica di scadenza del Pod	Da 1 a 24 ore con incrementi di 1 ora. L'impostazione predefinita è 4 ore.
Timer di spegnimento automatico	Disattivato oppure da 1 a 24 ore con incrementi di 1 ora. L'impostazione predefinita è Disattivato.
Display Cronologia	Periodo continuo di 90 giorni.
Lingua	Varie lingue. L'impostazione predefinita è Inglese.

Specifiche del Pod

Dimensioni: larghezza 3,9 cm x lunghezza 5,2 cm x altezza 1,45 cm
(1,53" x 2,05" x 0,57")

Peso (senza insulina): 26 g (0,92 oz)

Intervallo della temperatura di funzionamento: temperatura di esercizio del Pod: da 5 °C a 40 °C (da 41 °F a 104 °F).

Nota: la temperatura del Pod si assesta tra i 23 °C e i 37 °C (da 73 °F a 98,6 °F) quando è a contatto col corpo.

Temperatura di avviamento: superiore a 10 °C (50 °F)

Intervallo della temperatura di conservazione: da 0 °C a 30 °C (da 32 °F a 86 °F)

Tempo di riscaldamento (da 0 °C a 20 °C): 7 minuti

Tempo di raffreddamento: non è necessario il raffreddamento dalla temperatura di conservazione massima (30 °C) alla temperatura di funzionamento.

Volume del serbatoio (quantità erogabile): 200 unità

Profondità di inserimento della cannula: 4-7 mm (0,16-0,28 in)

Profondità dell'infusione di insulina: ≥ 4 mm (0,16 in)

Grado di impermeabilità: IP28 (7,6 metri [25 piedi] per massimo 60 minuti)

Concentrazione insulina: U-100

Tipo di allarme: segnale acustico. Uscita: ≥ 45 db(A) a 1 metro

Agente sterilizzante: ossido di etilene

Intervallo dell'umidità relativa di funzionamento: 20-85%, non condensante

Intervallo dell'umidità relativa di conservazione: 20-85%, non condensante

Pressione atmosferica di funzionamento: da 700 hPA a 1060 hPA

Pressione atmosferica di conservazione: da 700 hPA a 1060 hPA

Non pirogeno: solo percorso fluido

Dispositivo medico tipo BF: protezione da scosse elettriche

Pressione di infusione massima: 35 psi

Volume di infusione massimo in condizioni di guasto singolo: 0,5 U

Capacità di flusso:

Velocità di priming: 0,05 unità al secondo

Basale: programmabile dall'utente a incrementi di 0,05 U fino a 30,0 U all'ora

Velocità bolo: 1,5 unità al minuto. Intervallo dose: da 0,05 a 30,0 unità


Accuratezza erogazione (testata in conformità con la normativa IEC 60601-2-24):

Basale: $\pm 5\%$ a velocità $\geq 0,05$ U/ora

Bolo: $\pm 5\%$ per quantità $\geq 1,0$ unità

$\pm 0,05$ unità per quantità $< 1,0$ unità

Risultati dei test di accuratezza: il grafico seguente illustra l'accuratezza del flusso del Pod in relazione a determinati periodi di tempo. Le misurazioni sono state effettuate utilizzando un Pod con una velocità basale di $0,5 \mu\text{l/ora}$ (che eroga $0,05$ U/ora di insulina U-100) a una temperatura di funzionamento elevata. La percentuale media complessiva di errore del flusso è risultata pari a $1,40\%$.

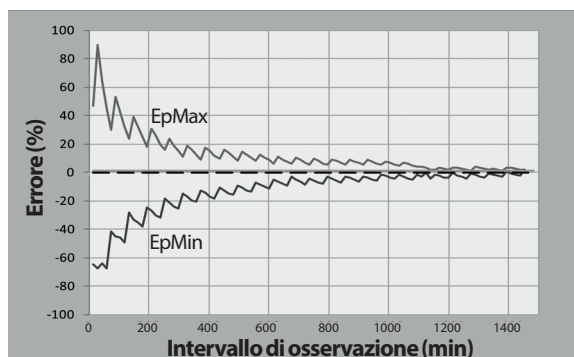

Specifiche del PDM

Dimensioni: larghezza 6,4 cm x lunghezza 12,2 cm x altezza 1,0 cm
(2,52" x 4,79" x 0,39")

Peso: 106 g (3,74 oz)

Area attiva del display: diagonale $10,2 \text{ cm} \pm 5\%$ ($4,0" \pm 5\%$)

Limiti della temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F)

Intervallo della temperatura di ricarica: da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F)

Intervallo della temperatura di conservazione: da 0°C a 30°C (da 32°F a 86°F)

Limiti dell'umidità relativa di funzionamento: dal 20% al 90%, non condensante

Limiti dell'umidità relativa di conservazione: dal 20% al 90%, non condensante

Pressione atmosferica di funzionamento: da 700 hPA a 1060 hPA

Pressione atmosferica di conservazione: da 700 hPA a 1060 hPA

Distanza di comunicazione: il PDM e il Pod devono trovarsi alla seguente distanza:

- All'avvio: uno accanto all'altro e devono toccarsi (possono trovarsi sia nella confezione che fuori dalla confezione) per garantire una corretta comunicazione durante il priming.
- Durante il normale funzionamento: entro un raggio di 1,5 m (5 piedi) l'uno dall'altro. A seconda della posizione, la distanza di comunicazione può arrivare fino a 15 metri (50 piedi).

Grado di impermeabilità: IP22 se utilizzato con custodia esterna (evitare il contatto con i liquidi)

Nota: il grado IP22 riguarda SOLO i casi in cui il PDM viene utilizzato con la custodia esterna fornita (cover in silicone). Il rischio che l'acqua penetri nel PDM è maggiore senza la custodia esterna. Per l'acquisto di custodie esterne supplementari, se necessario, contattare l'Assistenza clienti.

Tipo di allarme: segnale acustico. Uscita: ≥ 45 db(A) a 1 metro

Tipo di notifica: segnale acustico e vibrazione

Vita utile del PDM: 5 anni

Durata della batteria: la carica completa copre circa 1,5 giorni di utilizzo tipico dopo 2 anni di utilizzo tipico.

Tensione della linea di funzionamento del caricabatteria: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz

Per caricare il PDM utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito da Insulet. L'utilizzo di caricabatterie non approvati può causare l'esplosione della batteria o danneggiare il PDM e potrebbe invalidare la garanzia.

Vita utile del caricabatterie: 10.000 ore di funzionamento

Protezione da sovrainfusione o sottoinfusione

Il software del Pod controlla la velocità di infusione. Nel caso venga rilevato un errore che possa esporre l'utente al rischio di sovrainfusione o di sottoinfusione e non sia possibile correggerlo, l'erogazione di insulina viene interrotta e viene emesso un allarme acustico.

Rilevamento di occlusione

Si definisce occlusione l'interruzione o il blocco dell'erogazione di insulina dal Pod. Se il sistema Omnipod DASH® rileva un'occlusione, viene emesso un allarme di pericolo e viene chiesto all'utente di disattivare e sostituire il Pod.

Viene emesso un allarme di pericolo di occlusione quando mancano in media da 3 a 5 unità di insulina. La tabella che segue illustra il rilevamento dell'occlusione in tre diverse situazioni quando si usa insulina U-100. A titolo di esempio, se la cannula del Pod si occlude durante l'erogazione di un bolo di 5 unità, possono trascorrere 35 minuti prima che il Pod emetta un allarme di pericolo.

	Tempo tra l'occlusione e l'allarme del Pod	
	Tempo tipico	Tempo massimo
Bolo di 5,00 U	33 minuti	35 minuti
Basale di 1,00 U/ora	3,0 ore	5,5 ore
Basale di 0,05 U/ora	51 ore	80 ore (scadenza del Pod)














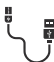







Se l'occlusione si risolve spontaneamente, il sistema eroga un volume di insulina che in nessun caso può superare il volume di insulina programmato previsto per l'erogazione.

Se viene rilevata un'occlusione durante l'erogazione di un bolo immediato, il Pod emette un allarme di pericolo al termine dell'erogazione del bolo immediato.

Avvertenza: a portate della basale molto contenute, controllando di frequente il livello della glicemia è possibile ottenere una prima indicazione della presenza di un'eventuale occlusione. Le occlusioni possono causare iperglicemia.

Simboli delle etichette del sistema Omnipod DASH®

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Esclusivamente monouso		Non sicuro in ambiente MRI
	Consultare i documenti di accompagnamento		Non utilizzare se la confezione è danneggiata
STERILE EO	Sterilizzato con ossido di etilene		Dispositivo medico di tipo BF
	Data di produzione		Produttore
LOT	Numero di lotto		Tenere asciutto
	Data di scadenza		Temperatura di conservazione, Temperatura di funzionamento
REF	Numero di riferimento	SN	Numero di serie
	Umidità relativa di conservazione, Umidità relativa di funzionamento		Pressione atmosferica di conservazione, Pressione atmosferica di funzionamento
IP28	Impermeabilità: impermeabile fino a 7,6 metri per max. 60 minuti		Via di infusione apirogena
IP22	Evitare il contatto con corpi liquidi	EC REP	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Non smaltire con i rifiuti domestici	RoHS	Conforme alla direttiva RoHS
	DASH® PDM	CE	Marchio di conformità
	Custodia per trasporto Omnipod®		Pellicola PDM

	Manuale d'uso/ Guida di avvio rapido		Adattatore di ricarica
	Cavo caricabatterie		Pod
	Batteria del PDM		Importatore
	Dispositivo medico		Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Valutazione di conformità del Regno Unito		Singolo paziente, uso multiplo
	Marchio di conformità normativa australiano		Sistema di barriera sterile singola
	(Francia) Il prodotto è destinato al riciclo e non deve essere smaltito nei rifiuti normali		(Francia) Il prodotto contiene oggetti taglienti
	Istruzioni per l'uso in formato elettronico		Compatibile solo con insulina U-100
	(Francia) I rifiuti devono essere collocati in un contenitore per lo smaltimento di aghi		(Francia) Il prodotto contiene oggetti taglienti elettronici
	(Francia) I rifiuti devono essere collocati in un contenitore per oggetti taglienti elettronici di colore viola		(Francia) Raccolta in farmacia disponibile
	(Francia) Imballaggio riciclabile		

Regolamento sui dispositivi medici

Questo dispositivo è conforme al Regolamento UE sui dispositivi medici 2017/745.

Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR)

Insulet è conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 dell'UE.

Reclami sui dispositivi

Se durante l'uso di questo dispositivo o in seguito al suo utilizzo si verifica un incidente grave, segnalarlo al produttore e/o al suo rappresentante autorizzato e all'autorità nazionale competente.

I recapiti del produttore sono disponibili sul retro della copertina del presente documento. I recapiti delle autorità nazionali competenti (Vigilance Contact Points [Punti di contatto per la vigilanza]) e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web della Commissione europea all'indirizzo: https://ec.europa.eu/health/md_sector/contact_en

In caso di problemi con il sistema, contattare l'Assistenza clienti ai recapiti forniti sulla scheda dei contatti in dotazione.

Dettagli del Rappresentante autorizzato nell'UE



Referente: complaints Officer

Indirizzo: insulet Netherlands B.V., WTC Utrecht Stadsplateau 7, Suite 7.06, 3521 AZ Utrecht, Paesi Bassi

TEL: +31 308 990 670

E-mail: ECRep@insulet.com

Avviso riguardante le interferenze relative al sistema Omnipod DASH®

Il Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH® (sia il Pod sia il PDM) è conforme alla Sezione 15 delle norme FCC. L'utilizzo del sistema è subordinato alle due condizioni seguenti:

1. I dispositivi in questione non devono causare interferenze nocive.
2. I dispositivi in questione devono tollerare eventuali interferenze esterne, comprese quelle che possono causare alterazioni nel funzionamento.

Attenzione: alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Insulet Corporation potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso del dispositivo.

Sia il Pod sia il PDM generano, utilizzano e possono irradiare energia a radiofrequenza, con conseguenti interferenze dannose alle comunicazioni radio di altri dispositivi. Non esiste alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in installazioni particolari. Nel caso in cui il sistema Omnipod DASH® dovesse causare interferenze alla ricezione radiofonica e televisiva, il problema potrà essere risolto adottando una delle seguenti contromisure:

- Spostare o riposizionare il sistema Omnipod DASH®.
- Aumentare la distanza tra il sistema Omnipod DASH® e il dispositivo che emette o riceve l'interferenza.

Insulet Corporation dichiara che il sistema Omnipod DASH® è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva RED (Radio Equipment Directive) (2014/53/EU). La versione completa della Dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo web: http://omnipod.com/Red_Doc. Questo dispositivo ISM è conforme alle specifiche canadesi ICES-003 e IC-RSS-210.

Compatibilità elettromagnetica

Le informazioni contenute in questa sezione (quali le distanze di separazione) riguardano, in linea di massima, specificatamente il sistema Omnipod DASH®. I dati forniti non assicurano un funzionamento impeccabile, ma dovrebbero fornire una ragionevole garanzia in proposito. Queste informazioni potrebbero non riguardare altre apparecchiature elettromedicali; le apparecchiature meno recenti potrebbero essere particolarmente soggette a interferenze.

Informazioni di carattere generale

Le apparecchiature elettromedicali richiedono particolari precauzioni riguardo alla compatibilità elettromagnetica (EMC) e devono essere installate e utilizzate in conformità con le relative informazioni fornite nel presente documento e nelle istruzioni per l'uso. In caso di malfunzionamento del sistema Omnipod DASH® imputabile a interferenze elettromagnetiche, potrebbe essere necessario sostituirlo.

Gli apparecchi di comunicazione in RF portatili e mobili possono interferire con il funzionamento delle apparecchiature elettromedicali.

Attenzione: non è consentito l'utilizzo di cavi e accessori non specificati nelle istruzioni per l'uso. L'impiego di cavi e/o accessori di altro tipo può compromettere la sicurezza, le prestazioni e la compatibilità elettromagnetica del dispositivo (aumento delle emissioni e minore immunità).

Prestare attenzione se il sistema Omnipod DASH® viene usato nei pressi di altre apparecchiature elettriche; se tale utilizzo è inevitabile (come negli ambienti di lavoro), osservare il sistema per controllare che funzioni come previsto.

Il sistema Omnipod DASH® comunica mediante l'emissione di energia a radiofrequenza di basso livello. Come per tutti i ricevitori RF, esiste comunque un potenziale di interferenza, anche per i dispositivi conformi ai requisiti FCC e CISPR in materia di emissioni radiate.

Il sistema Omnipod DASH® comunica sulla base delle caratteristiche seguenti:

Frequenza: 2,400-2,480 GHz, modulata digitalmente, con una potenza irradiata effettiva di 1,14 mW

Il sistema Omnipod DASH® supera ampiamente i requisiti di immunità degli standard generali per la compatibilità elettromagnetica IEC 60601-1-2.

Il sistema Omnipod DASH® ha dimostrato di essere immune sia ai sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) sia ai sistemi antitaccheggio (EAS). Sono stati eseguiti dei test in conformità ad AIM 7351731 per dimostrare questa immunità.

Attenzione: le apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese periferiche quali cavi di antenna e antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza non inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi componente del sistema Omnipod DASH®, o potrebbero causare un'alterazione delle prestazioni.

Emissioni elettromagnetiche

Questo apparecchio è progettato per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. L'utente di questo tipo di apparecchiatura dovrà assicurarsi che l'utilizzo avvenga in ambienti conformi alle specifiche.

Emissioni	Conformità in base a	Ambiente elettromagnetico
Emissioni RF (CISPR 11)	Gruppo 2	Per comunicare, il Pod e il PDM emettono energia a radiofrequenza (RF) di basso livello. Per quanto improbabile, le apparecchiature elettroniche circostanti possono subire interferenze.
Classificazione emissioni CISPR B	Classe B	Il sistema è idoneo all'uso in tutti gli ambienti, compresi quelli domestici.

Immunità elettromagnetica

L'apparecchio è progettato per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Attenersi ai requisiti indicati durante l'uso del sistema.

Immunità	Livello di test IEC 60601-1-2	Livello di conformità (del dispositivo)	Ambiente elettromagnetico
Scariche elettrostatiche, ESD (IEC 61000-4-2)	a contatto: ± 8 kV in aria: ± 15 kV	± 8 kV ± 15 kV	Se i pavimenti sono rivestiti in materiale sintetico, cercare di evitare le scariche elettrostatiche.
Campi magnetici con frequenza di 50/60 Hz (IEC 61000-4-8)	30 A/m	400 A/m	Compatibile con la maggior parte degli ambienti. I campi magnetici con intensità superiore a 400 A/m sono improbabili tranne che in caso di distanza ravvicinata da apparecchiature magnetiche industriali.
RF radiata (IEC 61000-4-3)	10 V/m a 80 MHz-2,7 GHz	10 V/m	Compatibile con la maggior parte degli ambienti. Tenere le apparecchiature di comunicazione RF portatili ad almeno 30 cm (12 pollici) di distanza dal sistema Omnipod DASH®.

Nota: queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

^a Non è possibile prevedere teoricamente con precisione l'intensità dei campi emessi da trasmettitori fissi, come le stazioni base per telefonia radio (cellulare/cordless) e i sistemi terrestri mobili di radiocomunicazione, le radio amatoriali, le emittenti radiofoniche in AM e FM e le emittenti televisive. Per valutare un ambiente elettromagnetico generato da trasmettitori RF fissi, si consiglia il ricorso a un'indagine. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui si utilizza l'apparecchio è superiore al corrispondente livello di conformità RF (vedi sopra), è necessario assicurarsi che il funzionamento dell'apparecchio sia comunque regolare. In caso di funzionamento anomalo, potrà risultare necessario ricorrere a misure ulteriori, come il riorientamento o lo spostamento dell'apparecchio.

Garanzia per il Personal Diabetes Manager del Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH® e i Pod (valida per tutti i Paesi ad eccezione di Canada e Stati Uniti)

COPERTURA DELLA GARANZIA

Copertura della garanzia per il Personal Diabetes Manager del sistema Omnipod DASH®

Nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui di seguito, Insulet Netherlands BV ("Insulet") garantisce all'utente, il destinatario originale del Sistema per la gestione insulinica Omnipod DASH® per l'utilizzo nel Paese in cui il Personal Diabetes Manager ("PDM") è stato acquistato o ricevuto, che qualora Insulet rilevasse che il PDM dell'utente presenta un difetto di materiale o di fabbricazione in condizioni di utilizzo normali per un periodo di quattro (4) anni dalla data di acquisto (o della ricevuta qualora sia stato acquistato per conto terzi), Insulet provvederà a riparare o sostituire, a sua esclusiva discrezionalità, il PDM.

Il suddetto periodo di garanzia di quattro (4) anni si applica solo ai PDM nuovi. Inoltre, l'eventuale riparazione o sostituzione del PDM non comporta estensione o ripristino del periodo di garanzia.

Copertura della garanzia per i Pod del sistema Omnipod®

Nel rispetto dei termini e delle condizioni riportate di seguito, Insulet garantisce all'utente, destinatario originale del sistema Omnipod®, che, qualora Insulet rilevi che un Pod del sistema Omnipod® ("Pod"), ricevuto dall'utente, presenta un difetto del materiale o di fabbricazione in condizioni di utilizzo normali nel periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di fabbricazione e di settantadue (72) ore dall'attivazione, Insulet provvederà a riparare o sostituire, a sua esclusiva discrezionalità, il Pod. Per avere diritto alla sostituzione, l'attivazione del Pod deve rientrare in entrambi i periodi di tempo (ossia, deve avvenire entro la data di scadenza stampata sull'etichetta, la quale deve riportare una data di fabbricazione non superiore a ventiquattro (24) mesi, ed entro le settantadue (72) ore precedenti alla notifica della richiesta di intervento a Insulet).

Il suddetto periodo di garanzia di ventiquattro (24) mesi e di settantadue (72) ore si applica esclusivamente ai Pod nuovi. Inoltre, l'eventuale riparazione o sostituzione di un Pod non comporta estensione o ripristino del periodo di garanzia.

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La presente Garanzia si applica esclusivamente a PDM e Pod originariamente venduti per l'utilizzo nel Paese in cui l'utente ha acquistato o ricevuto il prodotto in questione (il "Territorio"). Insulet spedisce PDM e Pod riparati o sostituiti e fornirà servizi di garanzia esclusivamente all'interno del Territorio.

Procedura di richiesta di intervento

Per usufruire della presente Garanzia è necessario notificare a Insulet il presunto difetto del PDM o del Pod entro il periodo di garanzia applicabile contattando il servizio di Assistenza clienti pertinente al numero indicato sul sito Web o sul Manuale d'uso tecnico del prodotto. Per richieste di intervento relative al PDM è necessario fornire il numero di serie del PDM e una descrizione del difetto lamentato. Per richieste di intervento relative a un Pod è necessario fornire il numero di lotto del Pod e una descrizione del difetto lamentato. Potrebbe essere richiesto, tra l'altro, di fornire prova della data di acquisto (o della ricevuta in caso di acquisto per conto terzi) del PDM e/o del Pod e della data di attivazione del Pod.

La mancata osservanza di uno dei passaggi sopra descritti può determinare il venir meno della copertura ai sensi della presente Garanzia.

A meno che Insulet non scelga di riparare il Pod o il PDM (il che può includere, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, un kit di riparazione o una o più parti di ricambio forniti da Insulet) o rimandi a un riparatore esterno, è necessario ottenere l'autorizzazione di Insulet prima di procedere alla restituzione del Pod o del PDM a Insulet. Il Pod o il PDM deve essere adeguatamente imballato e restituito a Insulet seguendo le istruzioni riportate nel kit di Autorizzazione alla restituzione merci (Return Merchandise Authorization, RMA) che sarà inviato all'utente da Insulet. Previa autorizzazione, Insulet provvederà a farsi carico di tutte le ragionevoli spese di imballaggio e spedizione, laddove applicabile, sostenute per la spedizione del Pod o del PDM a Insulet ai sensi della presente Garanzia. A scanso di equivoci, la presente Garanzia non copre le riparazioni eseguite o le sostituzioni effettuate da persone fisiche o giuridiche diverse da Insulet, a eccezione di quelle eseguite o fornite da terze parti esplicitamente indicate da Insulet.

Prova di acquisto, ricevuta o attivazione

Al fine di verificare la data di acquisto (o della ricevuta in caso di acquisto per conto terzi) oppure, nel caso di un Pod, la data di attivazione e determinare se la richiesta di intervento ai sensi della presente Garanzia rientra nel periodo di validità della garanzia, Insulet potrebbe richiedere una prova di acquisto, ricevuta o attivazione valida. La mancata produzione della prova idonea, secondo quanto stabilito da Insulet, può determinare il diniego della copertura ai sensi della presente Garanzia.

Esclusioni

La presente Garanzia copre solo il destinatario originale e non può essere da quest'ultimo ceduta o trasferita a seguito di vendita, noleggio o altro tipo di trasferimento del PDM o dei Pod ad altra persona fisica o giuridica.

La presente Garanzia si applica solo nel caso in cui il PDM o il Pod in oggetto sia stato utilizzato in conformità al *Manuale d'uso tecnico* del sistema Omnipod® e/o ad altre istruzioni scritte fornite da Insulet. La Garanzia viene meno se il PDM o i Pod sono stati:

- Alterati, cambiati o modificati da qualsiasi soggetto fisico o giuridico diverso da Insulet o da terze parti autorizzate da Insulet;
- Aperti, sottoposti a manutenzione o riparati da eventuali soggetti fisici o giuridici diversi da Insulet o da terze parti autorizzate da Insulet;
- Danneggiati da caso fortuito o altro evento di "forza maggiore";
- Danneggiati da uso improprio, abuso, negligenza, incidente, uso sconsigliato o manipolazione, cura o stoccaggio non adeguati;
- Danneggiati da usura e logorio, cause non correlate a materiali o fabbricazione difettosi (ivi comprese a titolo esemplificativo batterie difettose o inadatte) o altre circostanze al di fuori del ragionevole controllo di Insulet.

La presente Garanzia non si applica a strisce reattive, batterie e altri accessori o prodotti correlati forniti da terze parti (ad es., strumenti di gestione dei dati, dispositivi CGM).

La presente Garanzia non copre difetti di progettazione (ad es., reclami relativi al fatto che il PDM o i Pod avrebbero dovuto essere progettati diversamente).

Esclusione delle garanzie implicite e limitazione dei rimedi

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile nel Territorio:

- **La presente Garanzia e i rimedi dalla stessa contemplati costituiscono le uniche garanzie e gli unici rimedi offerti da Insulet all'utente in relazione al PDM e ai Pod e tutte le altre garanzie implicite o legali sono espressamente escluse nella massima misura consentita dalla normativa.**

- **Insulet, i suoi fornitori, distributori, fornitori di servizi e/o agenti non saranno responsabili di danni indiretti, incidentali, speciali o consequenziali risultanti da un difetto del PDM o di un Pod o da una violazione della presente Garanzia, indipendentemente dal fatto che tale rivendicazione si basi su garanzia, contratto, fatto illecito o altro.**

Nulla di quanto contenuto nella presente Garanzia potrà ritenersi idoneo a escludere la nostra responsabilità per morte o lesioni personali derivanti da negligenza, frode o dichiarazione fraudolenta o per violazione dei diritti legali dell'utente in relazione al PDM o ai Pod.

Ulteriori disposizioni importanti

La presente Garanzia conferisce all'utente specifici diritti giuridici. Potrebbero sussistere altri diritti che variano a seconda della giurisdizione.

La presente Garanzia non pregiudica i diritti dell'utente in base alla legge.

Insulet non garantisce l'idoneità del PDM o dei Pod o del sistema Omnipod® per nessun soggetto specifico, in quanto le cure e i trattamenti sanitari sono un ambito complesso che richiede i servizi di personale sanitario qualificato.

La presente Garanzia intercorre tra l'utente e Insulet. Nessun'altra parte ha alcun diritto di far valere alcuno dei suoi termini. Insulet può trasferire i propri diritti e obblighi previsti dalla presente Garanzia a un'altra parte senza previa autorizzazione dell'utente.

Nel caso in cui una disposizione della presente Garanzia dovesse essere giudicata non valida da un tribunale, tale disposizione sarà considerata eliminata dalla presente Garanzia senza influire sulla validità delle rimanenti disposizioni.

Esclusione di altre garanzie o accordi

Tranne in caso di modifica scritta e firmata da Insulet e l'utente, le condizioni stabilite nella presente Garanzia costituiscono l'accordo completo ed esclusivo tra Insulet e l'utente, sostituiscono eventuali precedenti garanzie o accordi, verbali o scritti, e tutte le altre comunicazioni relative a eventuali difetti, guasti o altro malfunzionamento del PDM, di un Pod o del Sistema Omnipod®. Nessun dipendente, agente o altro rappresentante di Insulet o eventuali altre parti sono autorizzati a stipulare alcun accordo o garanzia sul prodotto applicabili al PDM, a un Pod o al sistema Omnipod® in aggiunta a quelli descritti nel presente documento.

Consenso all'Esclusione delle garanzie implicite e alla Limitazione dei rimedi

Qualora l'utente non accettasse e desiderasse rifiutare l'Esclusione delle garanzie implicite e la Limitazione dei rimedi fornite con il sistema Omnipod®, è pregato di restituire eventuali prodotti del sistema Omnipod® (compresi il PDM e il Pod) a Insulet in cambio di un rimborso completo. La mancata restituzione dei suddetti prodotti costituirà conferma e consenso all'Esclusione delle garanzie implicite e alla Limitazione dei rimedi.

Normativa e competenza giurisdizionale

La presente Garanzia (ed eventuali obblighi extracontrattuali derivanti dalla Garanzia o in relazione a essa) è disciplinata dalla legge del Paese in cui l'utente ha acquistato o ricevuto il PDM o i Pod. Qualsiasi tribunale della giurisdizione competente in tale Paese avrà giurisdizione esclusiva e sarà la sede di decisione per tutte le controversie derivanti o in relazione alla presente Garanzia.

Glossario

A1c (vedere Emoglobina A1c)

Abbinamento: collegamento di due dispositivi in modo che possano comunicare tra loro in modalità wireless. Vedere anche *Sincronizzazione*.

Allarme di pericolo: segnale acustico continuo accompagnato da un messaggio del PDM o del Pod che segnala il verificarsi di un errore o l'arresto dell'erogazione di insulina. Gli allarmi richiedono attenzione immediata da parte dell'utente.

Attivazione: il processo per attivare un Pod e abbinarlo a un PDM in modo che il Pod risponda esclusivamente ai comandi di quel PDM.

Basale massima: limite superiore impostato per le basali; si applica sia a un programma basale che a una basale temporanea.

Basale temporanea: basale temporanea usata per coprire cambiamenti prevedibili e di breve termine nel fabbisogno di insulina basale. Le basali temporanee sono spesso usate durante l'attività fisica e per le regolazioni dell'insulina nei giorni di malattia.

Basale temporanea preimpostata: regolazione di una velocità basale, espressa in % o U/ora, a cui è possibile assegnare un nome personalizzato e che può essere preprogrammata nel PDM.

Bluetooth® (vedere Comunicazione wireless)

Bolo calcolato manualmente: dose del bolo di insulina scelta dall'utente (non calcolata dal suggeritore di bolo).

Bolo di carboidrati (vedere Bolo pasto)

Bolo di correzione: quantità di insulina assunta per compensare livelli glicemici elevati.

Bolo massimo: quantità massima di bolo che è possibile richiedere dal PDM. Se il bolo consigliato calcolato dal suggeritore di bolo supera la quantità specificata per il bolo massimo, viene visualizzato un avviso.

Bolo non confermato: si verifica quando si seleziona l'opzione GETTA POD in seguito a un errore di comunicazione durante un bolo. In questo caso, il Pod non è riuscito a inviare al PDM una conferma della quantità di bolo effettivamente erogata.

Bolo pasto (noto anche come bolo di carboidrati): quantità di insulina somministrata prima di un pasto o di uno spuntino per garantire che dopo un pasto i livelli glicemici rientrino nell'obiettivo glicemico desiderato.

Bolo preimpostato: dose del bolo di insulina a cui è possibile assegnare un nome personalizzato e che viene memorizzata nel PDM per essere riutilizzata in seguito.

Bolo prolungato: somministrazione della dose di un bolo pasto in maniera costante nel corso di un periodo prolungato di tempo.

Bolo stimato: una volta confermata la quantità di bolo da erogare, un'istruzione relativa al bolo viene inviata al Pod. Se il Pod non è in grado di inviare la conferma della quantità di bolo effettivamente erogata, il PDM stima la quantità erogata. Tale stima si basa sul programma di erogazione previsto. Non appena viene ricevuta una conferma dal Pod, il PDM visualizza la quantità di bolo effettiva (non stimata).

Caloria: unità di misura utilizzata per esprimere il valore energetico degli alimenti. Le calorie vengono fornite dai carboidrati, dalle proteine e dai lipidi che si assumono attraverso i cibi e le bevande.

Cannula: tubicino sottile inserito sotto pelle, che serve a introdurre un farmaco liquido nel corpo.

Carboidrati: uno dei tre principali elementi nutritivi di cui sono composti gli alimenti (gli altri due sono le proteine e i lipidi). Gli alimenti che contengono carboidrati sono gli amidi, gli zuccheri, la frutta, le verdure e i latticini.

Chetoacidosi (vedere Chetoacidosi diabetica)

Chetoacidosi diabetica (DKA): condizione molto grave in cui i livelli glicemici molto alti e una grave mancanza di insulina causano la degradazione dei lipidi e delle proteine da parte del corpo che li utilizza a fini energetici. La degradazione dei lipidi e delle proteine rilascia i chetoni nel sangue e nell'urina. La DKA impiega ore o anche giorni a svilupparsi, con sintomi che includono mal di stomaco, nausea, vomito, alito acetico (che odora di frutta matura) e respiro affannoso.

Chetoni: sottoprodotti acidi derivanti dalla degradazione dei lipidi per uso energetico. La presenza di chetoni indica che il corpo sta utilizzando i lipidi immagazzinati e i tessuti muscolari (invece del glucosio) per le sue esigenze energetiche.

Comunicazione wireless: trasferimento di informazioni senza una connessione fisica tra due dispositivi. Il PDM e il Pod comunicano su brevi distanze utilizzando le onde radio. Questo tipo di comunicazione viene definito "comunicazione wireless".

Correzione inversa (correzione negativa): quando il livello glicemico della persona è inferiore al suo target glicemico, il suggeritore di bolo utilizza il fattore di correzione per ridurre una porzione della dose di un bolo pasto. Si tratta di una funzione opzionale del sistema che va attivata o disattivata secondo la prescrizione del referente medico.

Diabete, diabete mellito: condizione caratterizzata da iperglicemia (glicemia alta) derivante dall'incapacità del corpo di utilizzare il glucosio nel sangue per produrre energia. Nel diabete di tipo 1, il pancreas non produce più insulina, impedendo al glucosio contenuto nel sangue di penetrare all'interno di numerosi tipi di cellule ed essere trasformato in energia. Nel diabete di tipo 2, il pancreas non produce insulina in quantità sufficiente oppure il corpo non è in grado di usare l'insulina correttamente.

Disattivazione: metodo preferenziale per annullare l'abbinamento tra il PDM e il Pod attivo. Il processo di disattivazione arresta l'erogazione di insulina nel Pod e annulla l'abbinamento tra il PDM e il Pod.

Dose del bolo: dose di insulina assunta per correggere un livello glicemico elevato (bolo di correzione) o per coprire i carboidrati di un pasto o di uno spuntino (bolo pasto).

Durata dell'azione dell'insulina: periodo di tempo durante il quale l'insulina rimane attiva e disponibile nel corpo dopo l'erogazione di un bolo. Questa durata può variare notevolmente a seconda del tipo di insulina assunta.

Emoglobina A1c (HbA1c): test che misura il livello glicemico medio di una persona nel corso degli ultimi due o tre mesi. Chiamato anche emoglobina glicosilata, questo test indica la quantità di glucosio che aderisce all'emoglobina nei globuli rossi. Tale quantità è proporzionale alla quantità media di glucosio nel sangue nel corso di un periodo prolungato di tempo.

Fattore di correzione (o fattore di sensibilità): valore che indica di quanto un'unità di insulina abbasserà la glicemia. Se, ad esempio, il fattore di correzione è 50, un'unità di insulina abbasserà la glicemia di 50 mg/dL.

Fattore di sensibilità (vedere Fattore di correzione)

Fibre: la componente non digeribile degli alimenti vegetali. Gli alimenti ricchi di fibre includono i broccoli, i fagioli, i lamponi, le zucche, il pane integrale, i cereali che contengono crusca. Le fibre sono un tipo di carboidrati ma non alzano i livelli glicemici come gli altri carboidrati.

Gettare il Pod: l'opzione GETTA POD viene offerta se il PDM non è in grado di ristabilire la comunicazione con il Pod dopo un errore di comunicazione. Questa opzione consente al PDM di abbandonare quel Pod e di attivare un nuovo Pod. Nota: un Pod "gettato" potrebbe continuare a erogare insulina. Rimuovere sempre un Pod "gettato" dal corpo.

Glicemia / Livello glicemico: quantità di glucosio, o zucchero, presente nel sangue.

Glicemia minima per suggeritore: il valore minimo della glicemia in corrispondenza del quale il suggeritore calcola un bolo pasto. Al di sotto di tale valore il suggeritore di bolo è disabilitato. La dicitura "per suggeritore" significa "consentita per l'uso nel suggeritore di bolo".

Glucometro: dispositivo utilizzato per controllare il livello glicemico.

Glucosio: uno zucchero semplice (chiamato anche destrosio) usato dal corpo a scopo energetico. Senza l'insulina, il corpo non riesce a utilizzare il glucosio come fonte di energia.

Infusione: introduzione sotto pelle di una sostanza liquida nel corpo.

Insulina attiva (IOB): quantità di insulina ancora "attiva" nel corpo da una dose precedente di bolo. Il suggeritore di bolo tiene traccia dell'insulina attiva (IOB) per conto dell'utente. La quantità di tempo in cui l'insulina rimane "attiva" dipende dall'impostazione Durata dell'azione dell'insulina.

Insulina: ormone che aiuta il corpo a utilizzare il glucosio a scopo energetico. L'insulina viene prodotta dalle cellule beta del pancreas.

Iperglicemia (glicemia alta): livello di glucosio nel sangue superiore alla norma, generalmente superiore a 250 mg/dL.

Ipoglicemia (glicemia bassa): livello di glucosio nel sangue inferiore alla norma, generalmente inferiore a 70 mg/dL.

Ipoglicemia inconsapevole: condizione nella quale una persona non si rende conto di essere in ipoglicemia o non ne riconosce i sintomi.

Lipidi: uno dei tre principali elementi nutritivi di cui sono composti gli alimenti (gli altri due sono carboidrati e proteine). I lipidi contengono 9 calorie per grammo. Gli alimenti ricchi di lipidi includono gli oli, la margarina, i condimenti, la carne rossa e i latticini prodotti con latte intero.

Notifiche: promemoria o messaggio informativo visualizzato sul display.

Obiettivo glicemico: intervallo di valori della glicemia desiderati definito dall'utente. È utilizzato nei registri cronologici per mostrare quali valori della glicemia rientrano in questo intervallo.

Occlusione: blocco o interruzione dell'erogazione di insulina.

Podder: persone affette da diabete o assistenti di persone affette da diabete che utilizzano il sistema Omnipod® per gestire le esigenze giornaliere di insulina.

Preimpostazione: una preimpostazione consente di immettere rapidamente un valore utilizzato frequentemente.

Programma basale: programma giornaliero per l'erogazione continua di insulina. Consiste in uno o più segmenti, ciascuno dei quali definisce una velocità basale e nell'insieme coprono un periodo di 24 ore da mezzanotte a mezzanotte.

Proteine: uno dei tre principali elementi nutritivi di cui sono composti gli alimenti (gli altri due sono carboidrati e lipidi). Le proteine contengono 4 calorie per grammo. Gli alimenti ricchi di proteine includono la carne, il pollame, il pesce, i legumi e i latticini.

Rapporto IC (rapporto insulina/carboidrati): numero di grammi di carboidrati coperti da un'unità di insulina. Se, ad esempio, il rapporto insulina/carboidrati (IC) è di 1:15, occorrerà erogare un'unità di insulina per coprire quindici grammi di carboidrati ingeriti.

Referente medico: professionista che pratica la professione medica o insegna ai pazienti come prendersi cura della loro salute.

Segmenti: periodi di tempo definiti nel corso di una giornata di 24 ore. I segmenti vengono utilizzati per definire i segmenti di basale di un programma basale e anche i segmenti del target glicemico, i segmenti del rapporto insulina/carboidrati (IC) e i segmenti del fattore di correzione.

Segmento di basale: periodo di tempo durante il quale viene erogata insulina a una velocità basale specifica.

Segmento temporale (vedere Segmento)

Segnale di notifica: vibrazioni intermittenti o bip accompagnati da un messaggio che avvisano della necessità di un intervento da parte dell'utente al fine di prevenire un problema serio.

Sincronizzazione: l'atto di trasferire informazioni tra due dispositivi abbinati.

Sito di infusione: area del corpo in cui viene introdotta la cannula di un Pod.

Soglia di correzione verso l'alto: livello glicemico al di sopra del quale l'utente desidera assumere insulina per abbassare la glicemia.

Suggeritore di bolo: funzione che suggerisce le dosi del bolo pasto e del bolo di correzione in base al valore corrente della glicemia, alla quantità di carboidrati assunta, all'insulina attiva e a tutta una serie di impostazioni specifiche dell'utente.

Target glicemico: livello glicemico ideale che il suggeritore di bolo cerca di raggiungere. È possibile definire target glicemici diversi per i diversi periodi di tempo. Ad esempio, è possibile avere un target glicemico prima dei pasti, un diverso target glicemico dopo i pasti e un target ancora diverso a mezzanotte.

Tecnica asettica: metodo per mantenere la sterilizzazione e prevenire la contaminazione.

Velocità basale: piccola quantità di insulina erogata continuativamente nell'arco di un determinato periodo di tempo. Le velocità basali vengono misurate in unità all'ora (U/ora).

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Indice

A

accuratezza della portata 189
acqua
 e il PDM 132
 e il Pod 130
adesivo 2, 37, 47
Allarme di spegnimento
 automatico 118, 121
 descrizione 142–143
 impostazione 101
allarmi
 di notifica 120–122
 Errore del PDM 119
 Errore del Pod 119
 errore di sistema 119
 intervallo di regolazione 140
 occlusione 118
 panoramica 113
 pericolo 118–120
 Pod scaduto 118, 120
 registri cronologici 85
 ripresa dell'insulina 121
 risposta a 114
 schema segnale acustico e
 vibrazione 116
 serbatoio quasi vuoto 120
 serbatoio vuoto 118
 Spegnimento automatico 118, 121
 test 99
allarmi di pericolo 118–120
allergia ad adesivi acrilici 37
annullamento
 basale temporanea 72
 bolo 66
Assistenza clienti, contatto i
Assistenza prodotto. *Vedere* Assistenza
 clienti
attivare

 basale temporanea 69
 basale temporanea preimpostata 71
 Pod 37–50
 Programma basale 72
attivare PDM 10
Avvio del PDM
 risoluzione dei problemi 185
azione dell'insulina. *Vedere* durata
 dell'azione dell'insulina

B

barra di stato 9
basale temporanea
 annullamento 72
 attivare 69
 comprensione 144–149
 creazione 69
 impostata a zero 70, 148
 impostazione 107
basale temporanea preimpostata
 attivare 71
 creazione 81
 eliminazione 82
 modificare 82
 ridenominazione 82
Batteria del PDM
 allarme 121
 carica 21
 inserimento 136
 modalità di carica 136
 quasi scarica 121
 sostituire 136
batteria, PDM
 carica 21, 136
 inserimento 136
 quasi scarica, allarme 121
 risparmiare 96
 tipo 133
batteria quasi scarica

- allarme 121
- indicatore 9
- ricarica 136
- BLE. *Vedere* Bluetooth
- blocco. *Vedere* occlusione
- Blocco schermo
 - messaggio 10, 96
 - sblocco 10
 - sfondo 96
- bolle d'aria 41
- bolo attivo, modifica 66
- bolo calcolato dall'utente. *Vedere* bolo calcolato manualmente
- bolo calcolato manualmente 63–64
- bolo di carboidrati. *Vedere* suggeritore di bolo
- bolo di cibo. *Vedere* suggeritore di bolo
- bolo di correzione. *Vedere* Suggeritore di bolo
- bolo immediato. *Vedere* bolo, immediato
- bolo, immediato
 - annullamento 66
 - avanzamento 65
 - calcolato manualmente 63–64
 - comprensione 149
 - immissione di unità di insulina 63–64
 - in base ai carboidrati 57–63
 - in base alla glicemia 57
 - portata 188
 - registri cronologici 86–94
 - utilizzo del suggeritore di bolo 57–63
- bolo mancato
 - impostazione 102
 - notifica 123
- bolo, mancato. *Vedere* bolo mancato, notifica
- Bolo massimo
 - comprensione 151
 - impostazione 108
- bolo non confermato 93
- bolo pasto. *Vedere* suggeritore di bolo
- bolo preimpostato

- crea nuovo 83
- eliminazione 84
- modificare 84
- ridenominazione 84
- utilizzo 63
- bolo prolungato
 - annullamento 66
 - avanzamento 65
 - calcolato manualmente 64
 - comprensione 149
 - impostazione 108, 109
 - sostituire 67
 - utilizzando il suggeritore di bolo 61
- bolo, prolungato
 - annullamento 66
 - avanzamento 65
 - calcolato manualmente 63–64
 - comprensione 149
 - immissione di unità di insulina 63–64
 - impostazione 109
 - in base ai carboidrati 57–63
 - in base alla glicemia 57
 - sostituire 67
 - utilizzo del suggeritore di bolo 57–63
- bolo stimato 93

C

- cambio del programma basale 72
- cannula 2, 48, 188
- carica, batteria del PDM 21, 136
- cavo USB 132
- chetoacidosi. *Vedere* suggeritore di bolo
- chetoacidosi diabetica 37, 181
- chetoni 182
- compatibilità elettromagnetica 194
- comunicazione
 - distanza 42, 139–141
 - errore 125
- configurazione del PDM, prima volta 21
- configurazione iniziale del

PDM 21–36
 conservazione PDM
 posizione 131
 specifiche 189
 conservazione Pod
 posizione 129
 specifiche 188
 controlla glicemia dopo bolo,
 impostazione 102
 controlli aeroportuali 173
 controllo dello stato, Pod 140
 correzione insulina attiva (IOB)
 153, 156
 Correzione inversa 112, 153, 157
 cura e manutenzione
 PDM 131
 Pod 129
 sito di infusione 49

D

data e ora 97–98
 data e ora, impostazioni 97–98
 disattivazione di un allarme 128
 disattivazione manuale degli
 allarmi 128
 disattivazione, Pod 38
 display
 luminosità 96
 protettore 4
 schermata Home 11
 sensibilità 4
 timeout 96
 distanza tra il Pod e il PDM 42
 DKA. *Vedere* suggeritore di bolo
 Durata dell'azione dell'insulina
 calcoli campione 156–157
 impostazione 112

E

errore del PDM, allarme 119
 errore del Pod, allarme 119
 Errore di sistema, allarme 119
 esercizio fisico 183

F

Fattore di correzione 111, 152
 fattore di sensibilità. *Vedere* fattore
 di correzione
 funzioni di diagnostica
 controlla allarmi 99
 resettaggio del PDM 99

G

gettare il Pod 127, 141
 giorni di malattia 182
 glicemia
 Limiti obiettivo glicemico 106
 registri cronologici 86–94
 risultati AL e BA 54
 Target glicemico 109, 152–168
 Glicemia minima per
 suggeritore 110, 153

I

ID utente. *Vedere* PIN
 immissione di numeri 5
 immissione di testo 5
 immissione manuale del valore della
 glicemia 51
 impostazione modalità aereo 95
 impostazioni
 basale temporanea 107
 basale temporanea preimpostata 81
 bolo mancato, notifica 102
 Bolo massimo 108
 bolo preimpostato 83
 configurazione del bolo
 prolungato 109
 controlla glicemia dopo bolo 102
 Correggere verso l'alto 109
 Correzione inversa 112
 data 97
 Durata dell'azione dell'insulina 112
 Fattore di correzione 111
 Glicemia minima per
 suggeritore 110, 153
 immagine di blocco schermo 96
 Limiti obiettivo glicemico 106

luminosità del display 96
mappa del sito del Pod 100
messaggio del blocco schermo 96
modalità aereo 95
ora 97–98
PDM, tutto 95–112
PIN 97
Programma basale 77
promemoria di assicurazione 104
promemoria personalizzati 105
promemoria programma 104
Rapporto insulina/carboidrati
(IC) 110
resettaggio del PDM 99
riepilogo 186
Scadenza del Pod 100
serbatoio quasi vuoto 101
Suggeritore di bolo 109–112
Target glicemico 109
timeout del display 96
Velocità basale massima 107
impostazioni predefinite 186
indicazioni per l'uso x
infezione, sito di infusione 49, 169
inserimento dati, modalità 4
insulina
ad azione rapida e ad azione
prolungata 181
approvato per l'utilizzo x
conservazione 129
programmazione.
Vedere programma basale
quantità residua nel Pod 9
registri cronologici 88–94
siringa di riempimento 41
sospendere e riprendere 73
insulina ad azione rapida x, 181
insulina attiva 153, 156–159
insulina attiva.. Vedere insulina attiva
insulina attiva (IOB) al pasto 150, 156
Insulina U-100 x
interazione, PDM e Pod 139–143
interferenze elettriche 132
intervallo, obiettivo glicemico 106
intervento chirurgico 184
IOB. Vedere insulina attiva

iperglicemia 178–181
evitare 178
sintomi 178
trattamento 179
ipoglicemia 174–178
evitare 175
inconsapevole 142
sintomi 174
trattamento 176

K

kit di emergenza 172
kit di glucagone 171, 176

L

limite inferiore, obiettivo
glicemico 106
limite superiore, obiettivo
glicemico 106
Limiti obiettivo glicemico 106
luminosità, display 96

M

malattia 182
mappa dei siti Pod
impostazione 100
utilizzo 44
mappa del sito del Pod 44, 100
Menu 17–18
messaggi di conferma 19
microonde, forni 132
Modalità di avvio 185
Modalità provvisoria 185
modifica
Pod 37–50
Programma basale 72

N

navigazione (notazione abbreviata) 8
notazione abbreviata per la
navigazione 8
notifiche 122–123
bolo mancato 123
Glicemia 122

Nessun Pod 122
 panoramica 113
 promemoria personalizzato 123
 registri cronologici 85
 risposta a 114
 Scadenza del Pod 122
 numeri, immissione 5
 numero del modello, PDM ix
 numero di serie, PDM 18
 nuotare 130
 nuovo
 basale temporanea preimpostata 81
 bolo preimpostato 83
 Programma basale 77

O

occlusione
 allarme 118
 prevenzione 48
 rilevamento 191
 odore di insulina 49
 orientamento, Pod 47
 orologio, formato 12 o 24 ore 26, 97

P

PDM

caduto o danneggiato 133
 configurare 21-36
 conservazione 131
 cura e manutenzione 131
 diagramma 3
 e acqua 132
 impostazioni 95, 95-112
 interferenze elettriche 132
 numero del modello ix
 numero di serie 18
 reset 99
 sbloccare 10
 sostituzione 133
 specifiche 189
 timeout del display 96
 PDM caduto 133
 PDM danneggiato 133
 percentuale, impostazione
 basale temporanea 145

modifica impostazione 109
 PIN
 dimenticato 11
 immettere 10
 reset 97
 PIN dimenticato 11
 Pod
 accuratezza del flusso 189
 attivazione 37-50, 139
 configurare 37-50
 conservazione 129
 controlli di sicurezza xiii
 controllo dello stato 140
 cura e manutenzione 129
 diagramma 2
 disattivazione 38
 gettare 141
 identificazione del Pod corretto 40
 modifica 37-50
 orientamento 47
 portata 188
 pulizia 130
 riempimento con insulina 42
 scadenza, impostazione 100
 scadenza, notifica 122
 selezione del sito 44, 47
 serbatoio quasi vuoto,
 impostazione 101
 sostituire 37-50
 specifiche 188
 Spagnimento automatico 101, 142
 Pod scaduto, allarme 118, 120
 pratica sportiva 183
 preimpostazione, basale temporanea
 creazione 81
 eliminazione 82
 modificare 82
 ridenominazione 82
 utilizzo 71
 preimpostazione, bolo
 creazione 83
 eliminazione 84
 modificare 84
 ridenominazione 84
 utilizzo 63
 preparazione sito di infusione 46

Programma basale
attivare 72
cambiare 72
creazione 77
eliminazione 80
ignorare. *Vedere* basale temporanea
informazioni su 143
modificare 79
revisione 78
ridenominazione 79
sospendere o riprendere 73
promemoria. *Vedere anche* notifiche
Personalizzati 105
Programma 104, 123
Rassicurazione 104
promemoria di assicurazione
bip 123
impostazione 104
promemoria personalizzato
impostazione 105
notifica 123
promemoria programma,
impostazione 104
pulizia
PDM 132
Pod 130

Q

quantità massima di insulina 41
quantità minima di insulina 41

R

raggi X 173, 184
rapporto carboidrati/insulina.
Vedere rapporto IC
rapporto insulina/carboidrati.
Vedere rapporto IC
Rapporto insulina/carboidrati
(IC) 110, 152
registri. *Vedere* registri cronologici
registri cronologici
allarmi 85
carboidrati 88–94
e modifica della data 94

e modifica dell'ora 94
glicemia 88–94
insulina, basale e di bolo 88–94
notifiche 85
registri cronologici del bolo 86–94
registri cronologici della basale 88–94
ricarica, batteria del PDM 133
ricovero ospedaliero 184
riprendere l'erogazione di
insulina 73, 121
Risoluzione dei problemi, avvio del
PDM 185
RM 184

S

sbloccare PDM 10
scadenza, Pod 100, 122
scansioni TC 184
Scheda basale 12
scheda Basale temporanea 13
Scheda Dashboard 12
Scheda Info Pod 12
schermata Home 11
Schermata Informazioni su 18
scorte
configurazione del Pod 40
ottenimento xii
PDM, configurazione 22
viaggio 172
segmento di basale 143
segnale acustico o vibrazione 116
segnali di notifica 120–122
Selezionare Modalità di avvio 185
selezione del sito, Pod 44
serbatoio, Pod
quasi vuoto, segnale di notifica,
impostazione 101
riempimento 42
serbatoio quasi vuoto
segnale di notifica 120
serbatoio quasi vuoto,
impostazione 101
serbatoio vuoto, allarme 118
sforzo fisico 183
sicurezza

controlli automatici xiii, 43
 elettrica 194
 sicurezza elettrica 195
 simboli sulle etichette 192
 sintomi
 DKA 181
 iperglicemia 178
 ipoglicemia 174
 siringa di riempimento, insulina 41
 siringa, riempimento 41
 sito di infusione
 evitare infezioni 49
 ispezione 48
 linee guida per la selezione 44
 preparazione 46
 sito web i
 Soglia di correzione verso l'alto 109, 153
 soluzione di controllo
 nei registri cronologici 167
 sospensione dell'erogazione di
 insulina 73, 148
 sostituzione, PDM
 configurare 21
 ordinare 133
 specifiche, tecniche
 PDM 189
 Pod 188
 sport 183
 Suggeritore di bolo
 calcoli campione 157
 comprensione 150–168
 disabilitato 63, 151
 erogazione di un bolo con 57
 impostazioni 109–111
 suggeritore di bolo consigliato.
 Vedere suggeritore di bolo

T

tag, glicemia 53
 Target glicemico 109, 152–168
 tecnica asettica 40
 telefoni cellulari 184
 temperatura

conservazione del PDM 131, 189
 insulina 40, 129
 Pod 40, 188
 temperatura di funzionamento 131, 188, 189
 testo, immissione 5
 timeout, display del PDM 96
 touchscreen 4
 luminosità 96
 sensibilità 4
 timeout 96

U

unità orarie (U/ora), impostazione
 basale temporanea 145
 modifica impostazione 108

V

vacanze 172
 valore della glicemia
 comprensione del display 54
 immissione manuale 51
 tag 53
 velocità basale 143
 accuratezza del flusso 188
 massima, impostazione 107
 temporanea. *Vedere* basale temporanea
 velocità basale massima, impostazione 107
 verifica del funzionamento dell'allarme 99
 viaggio 172–174
 vibrazione o segnale acustico
 allarmi di pericolo 116
 notifiche 117
 segnali di notifica 116

Impostazioni del mio PDM

Utilizzare queste pagine per annotare le principali impostazioni del PDM.
Ricordarsi di aggiornare le informazioni in caso di variazioni o aggiunte relative alle impostazioni del PDM.

Programma basale 1

[illegible]

Programma basale 2

[illegible]

Programma basale 3

[illegible]

Programma basale 4

[illegible]

Target glicemico

[illegible]

[illegible]

Durata dell'azione dell'insulina

Periodo durante il quale l'insulina rimane "attiva" nel corpo _____ ore
 dopo l'erogazione di un bolo

[illegible][illegible]

Annotazioni

[illegible]



Insulet Corporation
100 Nagog Park
Acton, MA 01720
1-800-591-3455 | 1-978-600-7850
omnipod.com



Pod mostrato senza l'adesivo necessario.

**UK
CA
0086**



CE
2797



PT-000002-ITA-ITA-MG