

Omnipod Discover™



Omnipod Discover

Guía del profesional sanitario y del administrador



Australia

 OmnipodAUS@insulet.com
 1800 954 074
 +61 272 084352

België / Belgique / Belgien

 Omnipod-BE@insulet.com
 0800 17 682
 +32 289 62 983

Canada

 Omnipod-CAN@insulet.com
 1-855-763-4636
 +1 513-562-6446

Danmark

 Omnipod-DK@insulet.com
 80 25 36 09
 +45 32726061

Deutschland

 Omnipod-DE@insulet.com
 0800 182 1629
 +49 8995 467389

Ellada / Ελλάδα

 Omnipod-GR@insulet.com
 +30 217 000 9999
 +30 217 000 9999

España

 Omnipod-ES@insulet.com
 900 989 075
 +34 913 186 807

France

 Omnipod-FR@insulet.com
 0800 91 84 42
 +33 1 85 65 37 47

Hrvatska

 Omnipod-HR@insulet.com
 0800 900 889
 +385 91 2358040

Ísland

 Omnipod-IS@insulet.com
 +354 580 3900
 +354 580 3900

Israel / إسرائيل / ישראל

 Omnipod-IL@insulet.com
 1 809 216 160
 +972 369 00300

Italia

 Omnipod-IT@insulet.com
 800 798 659
 +39 068 346 4390

Kingdom of Saudi Arabia /

المملكة العربية السعودية

 Omnipod-SA@insulet.com
 800 811 0504
 +966 558491266

Kuwait / الكويت

 Omnipod-KW@insulet.com

 +965 24610486

 +965 180 2722

**Lëtzebuerg / Luxembourg /
Luxembourg**

 Omnipod-LU@insulet.com

 800 24 368

 +352 278 71306

Nederland

 Omnipod-NL@insulet.com

 0800 0229512

 +31 20 798 9337

Norge / Noreg

 Omnipod-NO@insulet.com

 800 22 612

 +47 219 50 639

Österreich

 Omnipod-AT@insulet.com

 0800 281 248

 +43 72 088 3504

Qatar / قطر

 Omnipod-QA@insulet.com

 800 0704

 +974 44691122

Schweiz / Suisse / Svizzera

 Omnipod-CH@insulet.com

 0800 897 618

 +41 44 585 9019

Suomi / Finland

 Omnipod-FIN@insulet.com

 0800 91 2942

 +358 985 653 300

Sverige

 Omnipod-SE@insulet.com

 020 033 6809

 +46 853520886

Türkiye

 Omnipod-TR@insulet.com

 850 480 5300

 +90 216 573 4848

United Arab Emirates /

دولة الامارات العربية المتحدة

 Omnipod-AE@insulet.com

 800-0320-057

 +971-600-521-670

United Kingdom

 Omnipod-GB@insulet.com

 0800 011 6132

 +44 20 3887 1709

Índice

Primeros pasos con Omnipod Discover	5
Finalidad prevista	5
Indicaciones de uso	5
Información importante de seguridad	5
Beneficios clínicos	6
Acceso a Omnipod Discover a través de la cuenta de médico de Omnipod	6
Permisos de personal administrador y de personal estándar	7
Descripción de las opciones de inscripción del personal administrador	7
Inscripción en Omnipod Discover	7
Gestión del personal	8
Modificar permisos	8
Invitar a un miembro del personal	8
Reinvitar a un miembro del personal	9
Aprobar personal	9
Gestión de pacientes	10
Cómo se comparte la información del paciente con la clínica	10
Invitar a pacientes	10
Cargar datos	10
Acerca de los informes de pacientes	10
Visualización, impresión y descarga de informes	11
Resumen	12
Informe diario	14
Ajustes	16
Glosario	17
¿Qué significan los términos de los informes?	17
Glosario de símbolos de etiquetas de Omnipod Discover	20
Resolución de problemas	21
Preguntas más frecuentes	21
Cambiar idioma	21
Contacto con Atención al cliente de Omnipod	21
Contrato de licencia de usuario final	21
Interfaz de usuario	21
Reglamento sobre los productos sanitarios	22
Detalles del representante autorizado en la UE	22
Reclamaciones sobre el dispositivo	22

Primeros pasos con Omnipod Discover

Omnipod Discover le brinda a usted, los profesionales sanitarios (HCP, por sus siglas en inglés) y demás miembros del personal de la clínica, la capacidad de visualizar, imprimir y descargar informes sobre datos de glucosa, administración de insulina y ajustes del sistema de los pacientes que utilizan el sistema de Administración de Insulina Automatizado Omnipod® 5. Para comenzar a utilizar Omnipod Discover, un miembro del personal clínico responderá a una invitación por correo electrónico.

Omnipod Discover incluye una aplicación web que utilizará la persona con diabetes y otra aplicación web para el personal de la clínica. Con Omnipod Discover, la persona con diabetes puede consultar resúmenes de datos semanales, información sobre patrones y/o descargar el informe de consulta para su profesional sanitario.

Es posible que sea necesario realizar un mantenimiento periódico que requiera un periodo de inactividad de Omnipod Discover. Cuando se haya programado un mantenimiento periódico, los usuarios recibirán una notificación al respecto.

Finalidad prevista

Omnipod Discover es un sistema de informes y análisis de datos retrospectivos, diseñado para los usuarios del sistema Omnipod 5 o sus cuidadores y para sus profesionales sanitarios, para el análisis de los datos de glucosa y de administración de insulina en entornos domésticos y sanitarios. Su finalidad es proporcionar datos complementarios que resulten útiles a los usuarios para el control de la diabetes y que ayuden a los profesionales sanitarios en el cuidado del paciente.

Indicaciones de uso

Omnipod Discover no está diseñado para personas con diabetes en cuidados intensivos ni para la supervisión de pacientes en tiempo real. La plataforma de software Omnipod Discover no está diseñada para sustituir la visualización principal en tiempo real del sensor ni los datos de administración de insulina en el dispositivo. Tampoco controla ninguna función del sistema Omnipod.

No se debe tomar ninguna decisión sobre el tratamiento médico ni realizar ajustes basándose en esta plataforma de software; para tomar dichas decisiones, es necesario consultar con un médico.

Información importante de seguridad

Precaución: Omnipod Discover no muestra datos en tiempo real y es posible que no incluya información pertinente sobre la insulina y la glucosa necesaria para tomar decisiones de tratamiento en tiempo real. A la hora de tomar decisiones sobre el tratamiento, consulte la Aplicación Omnipod 5.

Precaución: Los profesionales sanitarios deben utilizar la información del software junto con otra información clínica de la que dispongan.

Beneficios clínicos

Omnipod Discover analiza los datos de glucosa y de administración de insulina para que los pacientes y los profesionales sanitarios los revisen y les ayuden en el control de la diabetes. Entre sus beneficios clínicos, permite a los usuarios comprender mejor lo que sucede con su diabetes, les hace sentir que tienen las riendas de su diabetes y les ayuda a no abandonar el cuidado de la diabetes.

Acceso a Omnipod Discover a través de la cuenta de médico de Omnipod

Cuando se haya inscrito en Omnipod Discover, verá la opción "Ir a Discover" cuando inicie sesión en su cuenta de médico de Omnipod.

Requisitos del sistema

Puede acceder a Omnipod Discover a través de Internet mediante Google Chrome versión 138 o posterior o Microsoft Edge versión 140 o posterior.

Por motivos de seguridad, no utilice un navegador que ya llegó al final de su vida útil, ya que este ya no recibe actualizaciones de seguridad y puede exponer sus datos a posibles amenazas.

Requisitos de contraseña

- 8 caracteres como mínimo.
- Una letra mayúscula.
- No debe incluir ninguna parte de su nombre de usuario
- Una letra minúscula.
- Un número.
- No puede utilizar ninguna de sus 4 contraseñas anteriores.

Registro del primer administrador de Omnipod Discover de la clínica

Una clínica necesita un miembro del personal administrador de Omnipod Discover para que sus profesionales sanitarios puedan utilizar Omnipod Discover.

Para registrarse y convertirse en el primer miembro del personal administrador de Omnipod Discover de su clínica, solicítelo a su representante de campo de Omnipod y, a continuación, siga las instrucciones del correo electrónico que reciba.

Si un miembro del personal desea utilizar Omnipod Discover, deberá tener una cuenta de médico de Omnipod.

Permisos de personal administrador y de personal estándar

Cada usuario de Omnipod Discover de la clínica recibe acceso a través de permisos. Pueden ser permisos de miembro del personal estándar o de miembro del personal administrador. En la siguiente tabla se muestra lo que puede hacer cada tipo de usuario.

Permisos	Miembro del personal estándar	Miembro del personal administrador
Ver/Imprimir/Descargar informes de pacientes	SÍ	SÍ
Ver directorio de pacientes	SÍ	SÍ
Ver directorio aprobado del personal	NO	SÍ
Aprobar o rechazar personal pendiente	NO	SÍ
Invitar a pacientes	SÍ	SÍ
Invitar a miembros del personal estándar	NO	SÍ
Cambiar permisos del personal	NO	SÍ
Eliminar acceso del personal	NO	SÍ

Descripción de las opciones de inscripción del personal administrador

Si un miembro del equipo de campo de Insulet le ha invitado como miembro del personal administrador, tendrá permisos de personal administrador.

Añadir más miembros del personal administrador

Si usted es miembro del personal administrador, puede cambiar el rol de un miembro del personal estándar a rol de miembro del personal administrador.

Se requiere una cuenta de médico de Omnipod

Para acceder a Omnipod Discover, todos los miembros del personal necesitan una cuenta de médico de Omnipod, tanto los estándar como los administradores.

Es posible que se le invite por correo electrónico a crear una cuenta de médico de Omnipod.

Inscripción en Omnipod Discover

Siga las instrucciones del correo electrónico que reciba para inscribirse en la cuenta de profesional sanitario y en Omnipod Discover.

Gestión del personal

Modificar permisos

Si usted es miembro del personal administrador, puede cambiar los permisos de otros miembros del personal a administrador o estándar. Para ello, siga este procedimiento:

1. Inicie sesión en Omnipod Discover con su cuenta de miembro del personal administrador.
2. En el Directorio del personal, haga clic en el menú desplegable **Permisos** del miembro del personal cuyos permisos desea modificar.
3. Seleccione **Administración** o **Estándar**.
4. Haga clic en **Modificar** para confirmar.

Inscripción o modificación del administrador de Omnipod Discover de la clínica

Para inscribir o cambiar el administrador de la clínica, siga este procedimiento:

- Póngase en contacto con el departamento de soporte de productos de Omnipod o con el representante de campo de Omnipod de su clínica para registrarse como administrador de Omnipod Discover de la clínica o para cambiar el administrador de la clínica. A continuación, consulte "Registro del primer administrador de Omnipod Discover de la clínica" en la página 6.

Invitar a un miembro del personal

Puede invitar a un miembro del personal de la clínica para que se incorpore como miembro del personal estándar de Omnipod Discover. Para ello, siga este procedimiento:

1. En Omnipod Discover, seleccione **Personal** en Directorio.
2. Haga clic en **Invitar miembro del personal**.
3. Introduzca la siguiente información del miembro del personal al que desea invitar:
 - Nombre
 - Apellidos
 - Dirección de correo electrónico profesional

4. Haga clic en **Invitar**.

El miembro del personal se añade al directorio.

Reinvitar a un miembro del personal

Si la invitación de un miembro del personal aún no ha caducado (las invitaciones caducan al cabo de 14 días), puede volver a invitarlo. Para ello, siga este procedimiento:

1. En el directorio del personal de Omnipod Discover, haga clic en **Reinvitar** en la columna Estado junto al miembro del personal al que desea volver a invitar.
2. Revise la información para asegurarse de que es correcta.
3. Seleccione **Reinvitar**.

Nota: El botón Reinvitar solo está disponible para las invitaciones que no han caducado.

Consejo: También puede hacer clic en **Eliminar invitación** y, a continuación, confirmar si ya no desea que esa persona se incorpore a la clínica.

Aprobar personal

Como administrador de Omnipod Discover de la clínica, puede añadir a un miembro del personal al directorio de personal aprobado de la siguiente manera:

1. Vaya a global.discover.omnipod.com/hcp.
A continuación, inicie sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de administrador de Omnipod Discover de la clínica.

Verá la lista de pacientes inscritos.

2. En el directorio Personal pendiente, seleccione los miembros del personal que desee y, a continuación, haga clic en **Aprobar**.

Nota: Si hay un profesional sanitario desconocido en la lista de pendientes, puede hacer clic en **Rechazar**. Si intenta invitar a un miembro del personal que fue rechazado con anterioridad, recibirá una notificación.

Gestión de pacientes

Cómo se comparte la información del paciente con la clínica

Los usuarios (pacientes) de Omnipod 5 pueden dar a una clínica acceso a sus datos de Omnipod Discover a través de la integración o de su cuenta Omnipod en línea. Cuando el paciente conceda permiso para compartir datos con la clínica, esta podrá ver sus datos de glucosa e insulina.

Invitar a pacientes

Puede dar a los pacientes su código clínico para que puedan compartir datos con usted. Puede enviar el código clínico a un máximo de 10 direcciones de correo electrónico de pacientes a la vez. Para ello, siga este procedimiento:

1. En Omnipod Discover, seleccione **Invitar paciente**.
2. Introduzca la información necesaria del paciente al que desea invitar. Compruebe que la información es correcta.
3. Seleccione **Enviar**.

Cargar datos

El sistema Omnipod 5 envía datos automáticamente a Omnipod Discover a través de una red Wi-Fi o la tarjeta SIM incorporada. No hay ninguna opción para cargar datos manualmente desde el sistema Omnipod 5.

Acerca de los informes de pacientes

Con los informes de Omnipod Discover, obtendrá una vista detallada de cómo se encuentra su paciente y dónde puede necesitar asistencia adicional.

Nota: Al visualizar gráficos en el informe, observe detenidamente las barras de bolo para ver dónde hay varios bolos próximos en el tiempo. Si visualiza las instancias de bolo sin un valor correspondiente asociado, significa que, para mejorar la legibilidad, en las áreas en las que los números estarían tan cerca como para superponerse, el sistema eliminó los números en los que se superponía el bolo.

El informe incluye las siguientes páginas: Resumen, Informe diario y Ajustes.

Visualización, impresión y descarga de informes

1. En Directorio, en el menú de la izquierda, haga clic en **Pacientes**.
2. Seleccione el paciente cuyo informe desea ver.
3. Haga clic en el menú desplegable **Seleccionar extensión del informe** para mostrar las opciones de intervalo de fechas y seleccione el que desee (7, 14, 30, 60 o 90 días).

Omnipod Discover mostrará las opciones de intervalo de fechas si hay datos válidos disponibles durante esos intervalos. Por ejemplo, si hay 14 días de datos de Omnipod, las opciones de Seleccionar extensión del informe ofrecerán informes de 7 o 14 días, pero no de 30 días o más.

Nota: Si no hay suficientes datos disponibles para generar un informe en concreto, no podrá seleccionar ese intervalo de fechas. Con un valor de datos inferior a 7 días, solo verá una opción de intervalo de fechas <7 y, al visualizar los informes, no se calcularán determinadas métricas de glucosa.

4. Elija una de estas opciones:
 - Haga clic en **Ver informe** para ver el informe en formato PDF.
 - Haga clic en **Imprimir informe** si desea imprimir el informe a través de la ventana de opciones de impresión y, a continuación, ver el informe en formato PDF.
 - Haga clic en **Descargar informe** para descargar el informe en su ordenador.

Nota: El archivo del informe se descarga en la carpeta de descarga pública de su navegador. El nombre de archivo se generará con la fecha de generación del informe, el apellido del paciente, la inicial del nombre del paciente y el año de nacimiento. Si le preocupa la posible pérdida de confidencialidad dentro de esa carpeta, saque el informe de ahí.

Las opciones **Ver informe** e **Imprimir informe** muestran el informe en formato PDF en una nueva pestaña del navegador.

Cerrar sesión

- Haga clic en su nombre para mostrar el menú desplegable y, a continuación, haga clic en **Cerrar sesión**.

Resumen

La sección Resumen incluye datos estadísticos de glucosa e insulina, integrados y visualizados para que pueda revisarlos.

Tiempo en intervalos

Indica la duración de cada intervalo, tanto en porcentaje como en minutos/horas.

Métricas de glucosa y uso del dispositivo

Glucosa promedio

Indicador de control de glucosa (GMI)

Variabilidad de la glucosa (coeficiente de variación)

Desviación estándar (DE)

Detalles del modo del sistema: % de tiempo en Modo Automatizado, Modo Automatizado: Limitado, función de Actividad iniciada por el usuario y Modo Manual

Tiempo de uso del Pod activo (%)

Tiempo de conexión del sensor (%)

Perfil ambulatorio de glucosa (PAG)

Muestra la variabilidad de la glucosa por hora a lo largo del periodo de informe.

Bolos

Consulte el número medio de bolos por día administrados por el usuario en bloques de 6 horas:

- **Madrugada:** medianoche - 05:59 h (medianoche - 05:59 a. m)
- **Mañana:** 06:00 h - 11:59 h (6:00 a. m. - 11:59 a. m)
- **Tarde:** mediodía - 17:59 h (mediodía - 5:59 p. m.)
- **Noche:** 18:00 h - 23:59 h (6:00 p. m. - 11:59 p. m.)

Ajustes del Omnipod 5

Se muestran los últimos datos de ajustes configurables disponibles en el sistema Omnipod 5 (Objetivo de Glucosa en Sangre, Corregir por Encima, Factor de Corrección y Ratio de Insulina-Carbohidratos [IC]) en la misma línea de tiempo junto a los datos de uso de insulina y de glucosa.

Resumen de insulina

- Promedio de Insulina Diaria Total
- Promedio de uso diario de insulina basal y en bolos
- Tipo de bolo, frecuencia y cantidades
- Dieta: promedio de carbohidratos/día, número promedio de entradas de carbohidratos/día

Jane Smith


FdN: 21/11/1988 (36 años)

Resumen de 14 días

06/03/2025 - 20/03/2025 | Informe generado: 20/03/2025

Tiempo en intervalos

Objetivo: <1%
<54 mg/dL 54-69 mg/dL
0% Muy baja 0,8% Baja

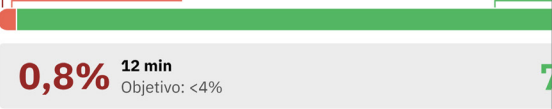


Métricas de glucosa

Glucosa promedio	Indicador de control de glucosa (GMI)
156 mg/dL	7,1% Objetivo: <7%
Variabilidad de la glucosa (CV*)	Desviación estándar (DE)
30,4% Objetivo: ≤36%	47,6 mg/dL
*Coeficiente de variación	

Perfil ambulatorio de glucosa (PAG)


PAG es un resumen de los valores de glucosa del periodo de informe.

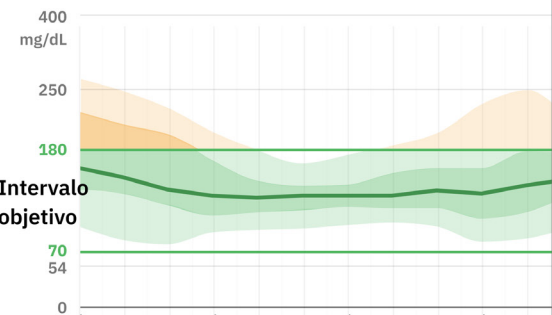

Bolo (Número promedio de bolos/día: 6,5)


Madrugada	Mañana
Número promedio de bolos/día: 0,1	Número promedio de bolos/día: 1,9

Omnipod 5 Ajustes

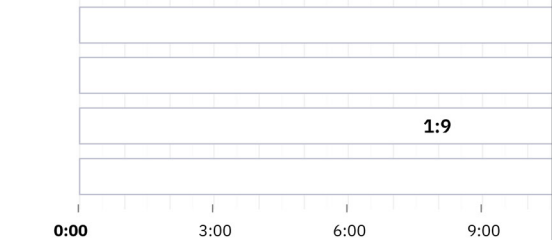

Resumen de insulina

Promedio de Insulina Diaria Total: 27,1 U

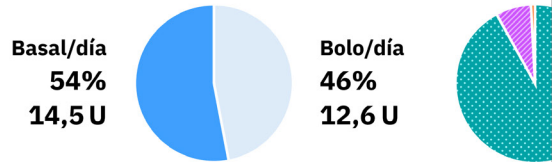

Solo con fines ilustrativos.



Jane Smith

FdN: 21/11/1988 (36 años)


Omnipod Discover™

Resumen de 14 días

06/03/2025 - 20/03/2025 | Informe generado: 20/03/2025

Informe PAG - Desarrollado por HealthPartners Institute d/b/a International Diabetes Center

Tiempo en intervalos

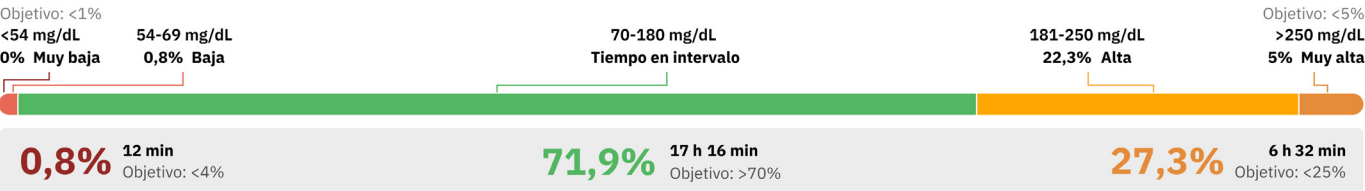

Métricas de glucosa

Glucosa promedio
156 mg/dL

Variabilidad de la glucosa (CV*)
30,4% Objetivo: ≤36%
*Coeficiente de variación

Indicador de control de glucosa (GMI)
7,1% Objetivo: <7%

Desviación estándar (DE)
47,6 mg/dL

Uso del dispositivo | Omnipod 5 y Dexcom G7

96% Modo Automatizado
Actividad 3%
Limitado 1%


4% Modo Manual

Tiempo de uso del Pod activo 99%

Tiempo de conexión del sensor 99%

Perfil ambulatorio de glucosa (PAG)

PAG es un resumen de los valores de glucosa del período de informe, muestra la mediana (50 %) y otros percentiles como si ocurrieran en un solo día.

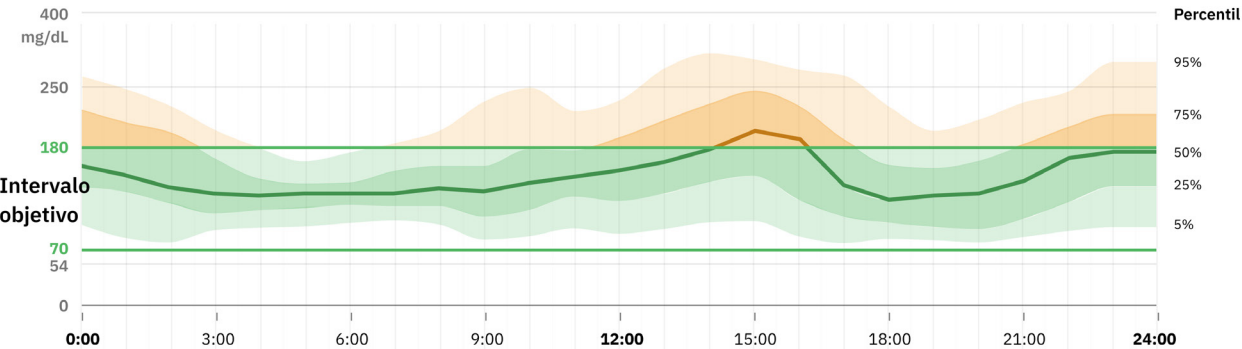


Bolo (Número promedio de bolos/día: 6,5)

Madrugada	Mañana	Tarde	Noche
Número promedio de bolos/día: 0,1	Número promedio de bolos/día: 1,9	Número promedio de bolos/día: 2,3	Número promedio de bolos/día: 2,2

Omnipod 5 Ajustes


Duración de la Acción de la Insulina 3 h

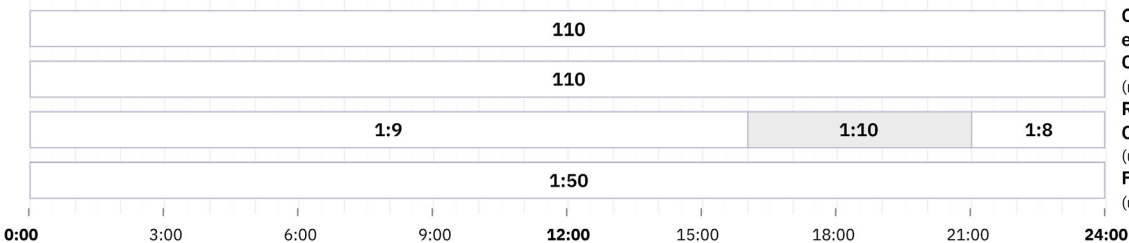

Objetivo de Glucosa en Sangre (mg/dL)
Corregir por Encima (mg/dL)
Ratio de Insulina-Carbohidratos (unidades:gramos)
Factor de Corrección (unidad:mg/dL)

Resumen de insulina


Promedio de Insulina Diaria Total: 27,1 U

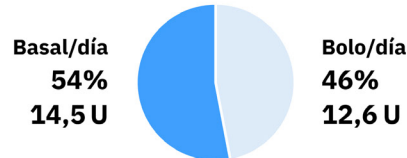

Número promedio de bolos/día: 6,5

Omisión del usuario: 4% del total de bolos (4 bolos durante 14 días)

Tipo de bolo

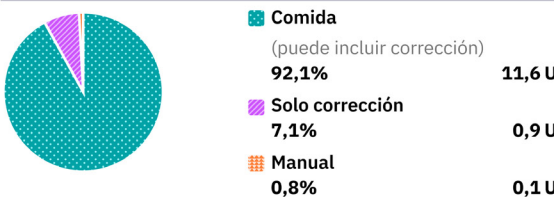

Dieta

Promedio de carbohidratos/día 107g

Número promedio de entradas de carbohidratos/día 5,4


Solo con fines ilustrativos.



Informe diario

El informe diario muestra las tendencias diarias de glucosa, los datos de administración de insulina, la ingesta de carbohidratos y los detalles del modo del sistema Omnipod 5.

Lunes, 17/03/2025

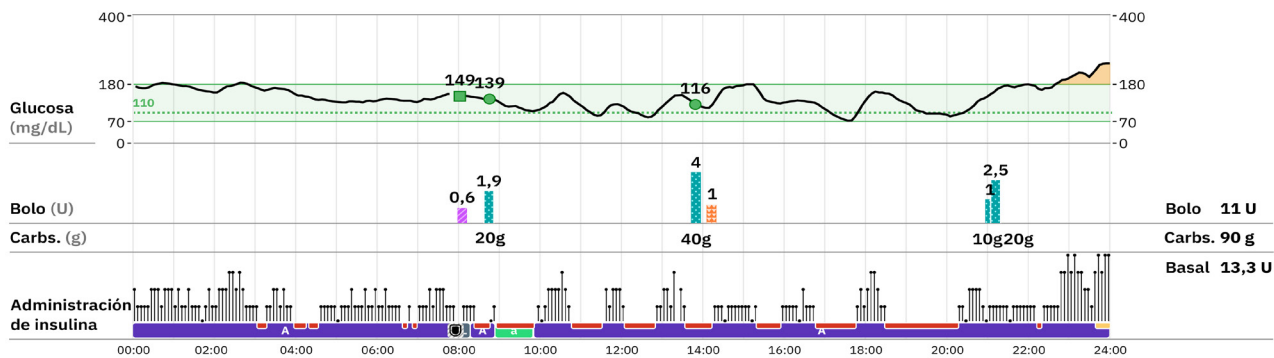

- Glucosa:** El seguimiento de 24 horas muestra los valores de glucosa y los vacíos (de haberlos) en los datos del sensor. Si aparece un vacío o una interrupción en la línea de glucosa que, por lo demás, es continua, significa que los datos del sensor no estaban disponibles, por ejemplo, durante un cambio de Pod, en el estado Modo Automatizado: Limitado o debido a cambios de zona horaria.
- Bolo:** Detalles y calendario de los bolos iniciados por el usuario para las comidas y para reducir la glucosa alta.
- Carbohidratos:** Detalles y calendario de los carbohidratos introducidos en la Aplicación Omnipod 5.
- Administración de insulina:** Muestra los microbolos administrados cada 5 minutos por el Pod durante el Modo Automatizado.

Modos del sistema Omnipod 5

Modo Automatizado A	Método de administración de insulina que utiliza el historial de administración de insulina, el valor de glucosa del sensor y la tendencia para aumentar, disminuir y pausar automáticamente la administración de insulina en función de los valores de glucosa actuales y previstos mediante un objetivo de glucosa personalizable.	
	Modo Automatizado: Limitado. L	La administración de insulina automatizada se utiliza cuando los valores de glucosa del sensor no están disponibles. La administración de insulina se basa en los ajustes y la administración de insulina reciente.
	Función de Actividad a	Función seleccionada por el usuario en el Modo Automatizado en momentos en que puede ser necesaria menos insulina, como durante el ejercicio. Cuando está activada, la administración de insulina se reduce y el Objetivo de Glucosa en Sangre se establece en 8,3 mmol/L (150 mg/dL).
Modo Manual M	Método de administración de insulina que administra las cantidades de insulina de acuerdo con las tasas basales del Programa Basal.	

Otros indicadores basales

- Se ha alcanzado la administración máxima (solo Modo Automatizado)
- Insulina pausada
- Basal Temporal (solo Modo Manual)

Cambios de Pod

- Se ha iniciado un nuevo Pod

Para obtener más información sobre los modos del sistema Omnipod 5, consulte las Instrucciones de uso de Omnipod 5.



Jane Smith

FdN: 21/11/1988 (36 años)


Informe diario de 14 días

06/03/2025 - 20/03/2025 | Informe generado: 20/03/2025


Leyenda

Glucosa	Bolo	Administración de insulina	Pod
Introducido manualmente	▲ Omisión del usuario por encima	A Automatizado	Cambio de Pod
Valor y tendencia del sensor	▼ Omisión del usuario por debajo	a Actividad	Administración máx.
Objetivo de Glucosa en Sangre	Detenido	L Limitado	Insulina pausada
	Bolo de comida	M Manual	Basal Temporal
	Extendido		
	Solo bolo de corrección		
	Bolo Manual		


Lunes, 17/03/2025

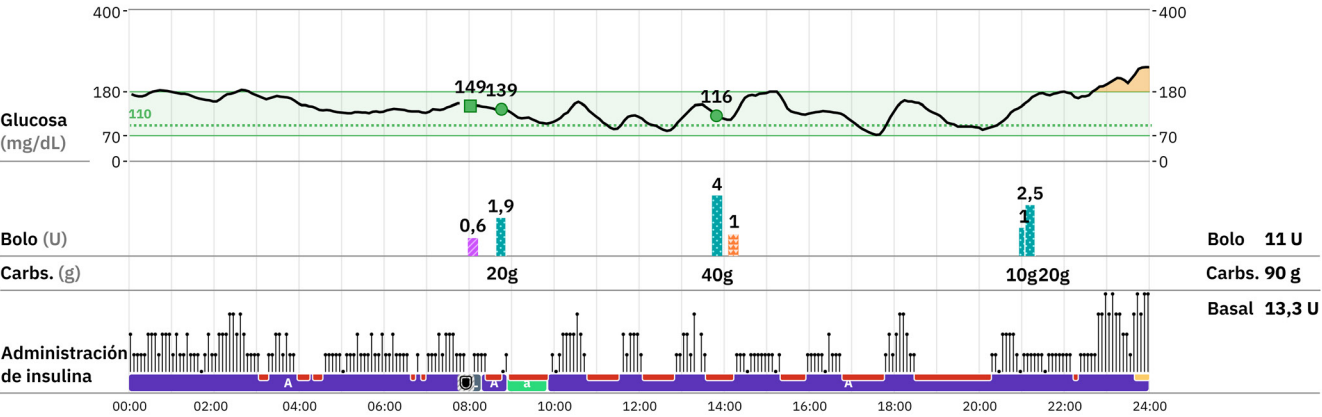

Domingo, 16/03/2025

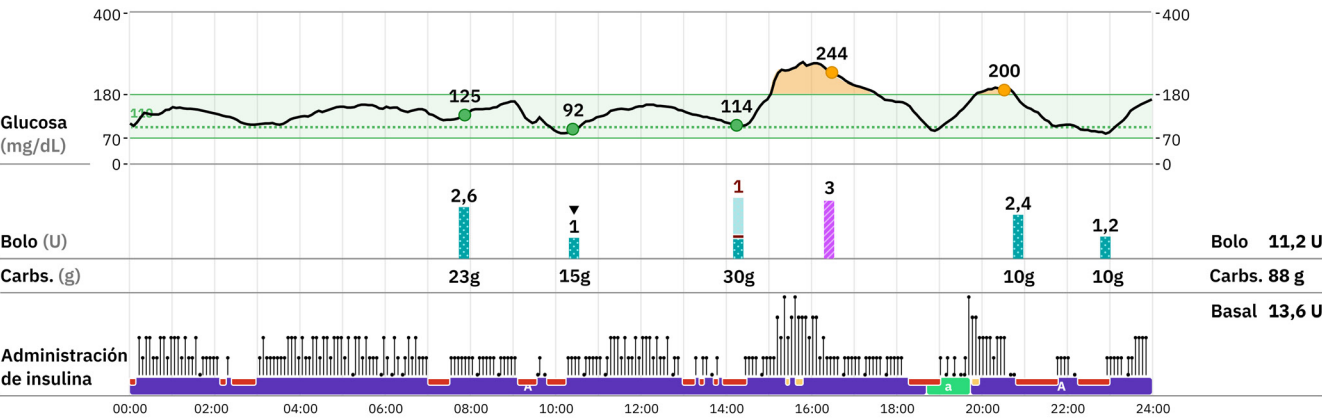

Sábado, 15/03/2025

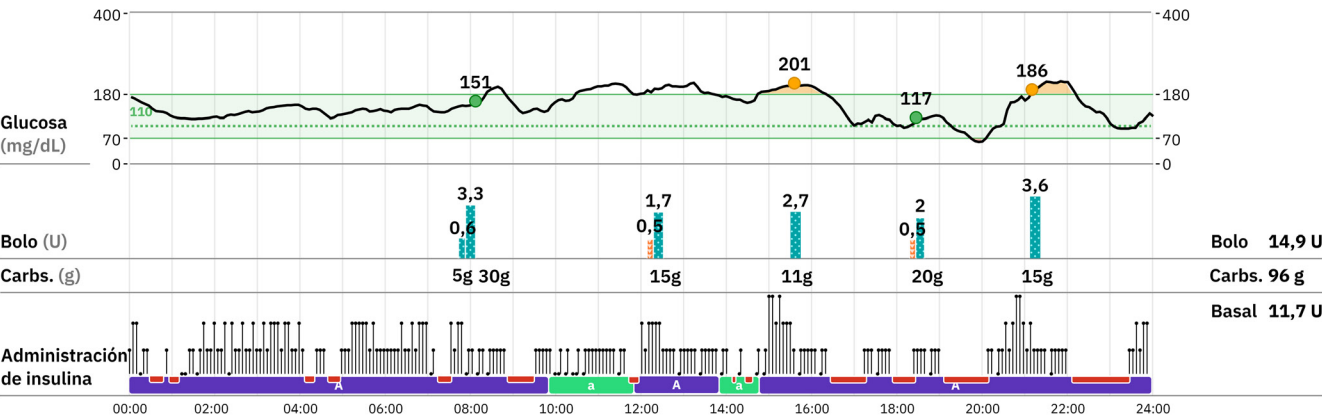

Solo con fines ilustrativos.



Ajustes

La página de Ajustes muestra los ajustes actuales de Basal y Bolo en la Aplicación Omnipod 5.

Jane Smith
FdN: 21/11/1988 (36 años)

Omnipod Discover™

Ajustes de Omnipod 5

Número de serie: 01040802-000015341 | Informe generado: 20/03/2025 | Esta página refleja los Ajustes de bomba más recientes

Ajustes basales

El cambio de los Programas Basales solo afecta a la administración basal en Modo Manual.

Tasa Basal Máxima 3 U/h			
Programas Basales			
	Hora de inicio	Hora de finalización	Tasa Basal
Basal 1 (activo)	00:00	19:00	0,6 U/h
	19:00	12:00	0,85 U/h
	Basal total 15,65 U/día		
Basal Temporal activado ACTIVADO			

Ajustes de bolo

Cuando se utiliza el Modo Automatizado, el ajuste configurable principal que afecta directamente a la administración automatizada de insulina es el Objetivo de Glucosa en Sangre. Los ajustes de la Calculadora SmartBolus a continuación afectan a las dosis de bolo sugerido tanto en Modo Automatizado como Modo Manual.

	Hora de inicio	Hora de finalización	Objetivo de Glucosa en Sangre	Corregir por Encima
Objetivo de Glucosa en Sangre y Corregir por Encima	00:00	00:00	110 mg/dL	110 mg/dL
	Hora de inicio	Hora de finalización	1 U de insulina cubre	
Ratio Insulina/ Carbohidratos (IC)	00:00	16:00	9 g de carbohidratos	
	16:00	21:00	10 g de carbohidratos	
	21:00	00:00	8 g de carbohidratos	
	Hora de inicio	Hora de finalización	1 U de insulina reduce la glucosa en	
Factor de Corrección	00:00	00:00	50 mg/dL	
Duración de la Acción de la Insulina	3 horas			
Bolo Máximo	8 U			
Bolo Extendido	ACTIVADO			
Glucosa Mín. para Cálculo	70 mg/dL			
Invertir Corrección	DESACTIVADO			

Solo con fines ilustrativos.



Glosario

¿Qué significan los términos de los informes?

Término	Descripción
Ajustes	Los ajustes configurables que se hayan cargado más recientemente programados en el Controlador Omnipod 5 en la misma línea de tiempo junto a los datos de uso de insulina y de glucosa.
Ajustes de bolo	Se utiliza para calcular un bolo iniciado por el usuario en la calculadora de bolo.
Basal Temporal	Tasa basal temporal utilizada para controlar un cambio en la rutina.
Basal Temporal activado	Permite al usuario omitir el Programa Basal en ejecución aumentándolo o reduciéndolo durante un periodo de tiempo predeterminado, disponible solo en el Modo Manual.
Basal a bolo (%)	Cantidad de Insulina Diaria Total que va a la administración de insulina basal y cantidad que va a los bolos iniciados por el usuario.
Bolo	Una dosis de insulina administrada para comidas con carbohidratos y/o para corregir una glucosa alta.
Bolo Extendido	Ajuste (activado/desactivado) que ofrece la posibilidad (solo durante el Modo Manual) de administrar una parte del bolo al principio de la comida y gotear el resto del bolo durante un periodo de tiempo determinado.
Bolo Manual	Cantidad de bolo de insulina que elige el usuario (es decir, no calculado con la calculadora de bolo).
Bolo Máximo	Define el límite superior de un bolo iniciado por el usuario. La calculadora de bolo evita que el usuario introduzca un bolo por encima de esta cantidad. También evita que el usuario introduzca una cantidad de carbohidratos que hará que el bolo calculado supere esta cantidad. El valor más alto que se permite para el Bolo Máximo es de 30 unidades.
Bolo de comida	Dosis de insulina que se toma para cubrir los carbohidratos de una comida o snack.
Bolo de corrección	Dosis de insulina iniciada por el usuario que se administra para reducir la glucosa cuando está por encima del objetivo.
Carbohidratos	Azúcares y almidones que se consumen y que el organismo descompone en glucosa.
Corregir por Encima	Ajuste del usuario, donde un nivel de glucosa superior a este permite que la calculadora de bolo calcule un bolo de corrección.
Detalles del modo del sistema	% de tiempo en Modo Automatizado, Modo Automatizado: Limitado, Modo Automatizado con función de Actividad y Modo Manual.
Duración de la Acción de la Insulina	Ajuste que representa la cantidad de tiempo que la insulina permanece activa en el organismo. La calculadora de bolo utiliza este valor para determinar la Insulina a Bordo (IOB).

Término	Descripción
Días en intervalo	La cantidad de días de una semana en que el tiempo en intervalo fue de al menos el 70 %.
Factor de Corrección	Ajuste que se utiliza para indicar cuánto bajará su nivel de glucosa en sangre con una unidad de insulina.
Función de Actividad	Función iniciada por el usuario en el Modo Automatizado en momentos en que es necesaria menos insulina, como durante el ejercicio. Cuando está activada, la administración de insulina se reduce y el Objetivo de Glucosa en Sangre se establece en 8,3 mmol/L (150 mg/dL).
Glucosa Mín. para Cálculo	Cuando la glucosa está por debajo de este valor, la Calculadora SmartBolus se desactiva y no calcula un bolo.
Glucosa promedio	Promedio de todas las mediciones de glucosa.
Indicador de control de glucosa (GMI)	Proporciona un nivel estimado de A1C, basado en el nivel de glucosa promedio de las lecturas del sensor para 14 días o más de datos.
Insulina pausada	Se detuvo la administración de insulina.
Invertir Corrección	Ajuste (activado/desactivado) que determina cómo gestiona la calculadora de bolo los bolos de comida cuando la glucosa está por debajo del Objetivo de Glucosa en Sangre.
Madrugada	Medianoche - 05:59 h (medianoche - 5:59 a. m.)
Mañana	06:00 h - 11:59 h (6:00 a. m - 11:59 a. m.)
Modo	El modo del sistema Omnipod 5 (Automatizado, Manual, Automatizado: Limitado y función de Actividad).
Modo Automatizado	Método de administración de insulina que utiliza el historial de administración de insulina, el valor de glucosa del sensor y la tendencia para aumentar, disminuir y pausar automáticamente la administración de insulina en función de los valores de glucosa actuales y previstos mediante un objetivo de glucosa personalizable.
Modo Automatizado: Limitado.	La administración de insulina automatizada se utiliza cuando los valores de glucosa del sensor no están disponibles. La administración de insulina se basa en los ajustes y la administración de insulina reciente.
Modo Manual	Método de administración de insulina que administra las cantidades de insulina de acuerdo con las tasas basales del Programa Basal.
Noche	18:00 h - 23:59 h (6:00 p. m. - 11:59 p. m.)
Objetivo de Glucosa en Sangre	El objetivo de glucosa personalizable por el usuario que se utiliza tanto por la tecnología SmartAdjust como por la Calculadora SmartBolus del sistema Omnipod 5, para calcular la cantidad de insulina necesaria en función de las lecturas de glucosa en sangre introducidas manualmente y los valores de glucosa del sensor. El Objetivo de Glucosa en Sangre se puede establecer entre 6,1-8,3 mmol/L (110-150 mg/dL) en incrementos de 0,55 mmol/L (10 mg/dL) y en hasta 8 segmentos por día de Objetivo de Glucosa en Sangre.

Término	Descripción
Omisión del usuario	Cuando un usuario cambia la cantidad de bolo sugerida por la calculadora de bolo para administrar más o menos insulina en bolo.
Perfil ambulatorio de glucosa (PAG)	Muestra la variabilidad de la glucosa por hora a lo largo del periodo de informe.
Promedio de Insulina Diaria Total	Historial de insulina que, junto con el Objetivo de Glucosa en Sangre, informa sobre la administración de insulina en el Modo Automatizado.
Ratio de Insulina-Carbohidratos (IC)	Cantidad de carbohidratos que cubre una unidad de insulina.
Sistema de supervisión de glucosa basado en el sensor	Sistema para realizar el seguimiento de la glucosa durante el día y la noche, suministrado por un fabricante de productos sanitarios externo. Suele denominarse SMCG o sensor.
Tarde	Mediodía - 17:59 h (mediodía - 5:59 p. m.)
Tasa Basal Máxima	Define un límite superior para cualquier tasa basal utilizada en los Programas Basales y los valores basales temporales solo durante el Modo Manual.
Tecnología SmartAdjust™ integrada	El software del Pod utilizado para calcular la administración automática de insulina cada 5 minutos para llevar la glucosa del usuario al objetivo de glucosa personalizado o al Objetivo de Glucosa en Sangre.
Tiempo de conexión del sensor	% de tiempo que el sensor está conectado al Pod Omnipod 5.
Tiempo de uso del Pod activo (%)	% de tiempo que estuvo activo el Pod durante el periodo del informe.
Tiempo en el modo	Tiempo transcurrido en uno de estos modos: Automatizado, Manual, Automatizado: Limitado y Automatizado con la función de Actividad iniciada por el usuario.
Tiempo en intervalo	Porcentaje de tiempo con glucosa en un intervalo objetivo de 3,9-10 mmol/L (70-180 mg/dL). Un aumento en el tiempo en intervalo reduce el tiempo transcurrido con glucosa alta y baja. Un aumento o una reducción del 4 % en el tiempo en intervalo equivale a aproximadamente 1 hora.
Valor de glucosa del sensor	Glucosa medida por un sensor. Los valores de glucosa del sensor incluyen la tendencia, que indica si la glucosa sube, baja o permanece estable.
Variabilidad de la glucosa (coeficiente de variación)	La medición de las fluctuaciones de la glucosa a lo largo del tiempo.

Glosario de símbolos de etiquetas de Omnipod Discover

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Fecha de fabricación		Fabricante
	Número de catálogo		Identificación única de producto
	Código del lote		Consulte las instrucciones de uso o las instrucciones de uso en formato electrónico
	Producto sanitario		Representante autorizado
	Evaluado de conformidad con el Reino Unido		Representante autorizado en Suiza
	Importador		Marca de conformidad
	Correo electrónico		Número de teléfono local
	Número de teléfono gratuito		Consultar el manual o el folleto de instrucciones

Resolución de problemas

Preguntas más frecuentes

Mensaje de error o problema	Qué puede hacer
No se puede iniciar sesión	Toque He olvidado mi nombre de usuario/contraseña en la pantalla "Iniciar sesión" para restablecer su contraseña. Si el problema persiste, contacte con Atención al cliente. Cuando se haya inscrito, espere al menos 1 día para iniciar sesión.
El paciente no está en la lista	Siga las instrucciones de esta guía para invitar al paciente. Si el paciente se ha inscrito en Omnipod Discover y sigue sin ver sus datos, póngase en contacto con Atención al cliente.
Faltan datos	Compruebe los ajustes de conectividad Wi-Fi o de datos móviles en el Controlador del paciente. Si el problema persiste, póngase en contacto con Atención al cliente.
Veo más de un intervalo de fechas en mi informe	Si tiene menos días de datos del sensor que la extensión del informe seleccionado, verá un mensaje de cabecera en la parte superior de la página de Resumen, para explicar que las métricas relacionadas con la glucosa se basan en la duración del sensor conectado. Las secciones afectadas son: Tiempo en intervalos, Métricas de glucosa y Perfil ambulatorio de glucosa (PAG).

Cambiar idioma

Seleccione el globo terráqueo en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, seleccione el idioma. No disponible en todas las ubicaciones.

Contacto con Atención al cliente de Omnipod

Si tiene algún problema al utilizar Omnipod Discover, consulte la página 2 para ponerse en contacto con la Atención al Cliente de Omnipod.

Contrato de licencia de usuario final

El uso de la plataforma Omnipod Discover, incluidos los informes generados por el sistema, así como cualquier información contenida en esta guía, están sujetos al Contrato de licencia de usuario final de Omnipod Discover.

Interfaz de usuario

Solución de interfaz de usuario	Para qué se utiliza
Soluciones de TI (una solución empresarial no médica)	Inscripción de pacientes y médicos.
Nube de productos	Recibir los datos sanitarios del paciente.

Reglamento sobre los productos sanitarios

Insulet cumple con el Reglamento sobre los productos sanitarios 2017/745.

Detalles del representante autorizado en la UE

Contacto: funcionario encargado de
quejas y reclamaciones

Dirección: Insulet Netherlands B.V.
WTC Utrecht • Stadsplateau 7,
Suite 7.06, 3521 AZ Utrecht,
The Netherlands



Tel.: +31 308 990 670

Correo electrónico: ECRRep@insulet.com

Reclamaciones sobre el dispositivo

Si, durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se ha producido un incidente grave, informe de ello al fabricante y/o a su representante autorizado, así como a la administración pública de su país.

Puede consultar los datos de contacto del fabricante en la página 2 de este documento. Puede consultar los contactos de las administraciones nacionales competentes (puntos de contacto de vigilancia) y más información en el sitio web de la Comisión Europea: https://ec.europa.eu/health/md_sector/contact_en

**Insulet Netherlands B.V.**

WTC Utrecht • Stadsplateau 7,
Suite 7.06, 3521 AZ Utrecht
The Netherlands
+31 308 990 670
ECRep@insulet.com

**Decomplix AG**

Freiburgstrasse 3
CH-3010 Berna
Switzerland
chrep@insulet.com

**UK Responsible Person:**

Insulet International Ltd.
245 Hammersmith Road,
6th Floor
London, W6 8PW,
United Kingdom
UKRP@insulet.com

Australian Sponsor:

Insulet Australia Pty. Ltd
Level 16 Tower 2 Darling Park
201 Sussex Street
Sydney, NSW, 2000, Australia
Contacto: 1800 954 075 / +61 272 084 353
<https://www.omnipod.com/en-au/about-insulet>

CH-IMPORTER

Insulet Switzerland GmbH
Zugerstrasse 74
6340 Baar, Switzerland
chrep@insulet.com
CH IMPORTEUR /
IMPORTATEUR / IMPORTATORE

Omnipod Discover™

**Insulet Corporation**

100 Nagog Park
Acton, MA 01720, USA
1-800-591-3455
omnipod.com



[omnipod.com/guides](https://www.omnipod.com/guides)

© 2026 Insulet Corporation. Insulet, Omnipod, el logotipo de Omnipod, Omnipod Discover y SmartAdjust son marcas comerciales o marcas registradas de Insulet Corporation. Todos los derechos reservados. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

El uso de marcas comerciales de terceros no constituye una recomendación ni implica una relación u otra afiliación.

Patent: www.insulet.com/patents

PT-002638-AW Rev. 01 2026-03-18

